

\ FX-30 /

導入事例のご紹介 1



導入事例① 自宅でも安心して排泄ができるようになりました



ご利用者様

85歳 男性

要介護 2

(身体状況)

下肢筋力の低下により車いすで移動している。

つかまるものがあれば、立ち上がりや歩行は可能。

導入のきっかけ 導入前の課題

オムツ内での排便に抵抗があった。
ベッドからトイレまでの歩行は不安定だが、
便器に座って排便促進させたいという家族の要望があった。

選定理由

トイレに座ると後ろにもたれてしまい姿勢が安定しないので、**耳（側方ガード）**があるのがよかったです。デイサービスで排便をしてきてくれることがほとんどで、毎日使用するわけではないので、機能は標準タイプを選定しました



設置写真

体を支える側方ガード



ひじ掛けが低い設定でも座位をサポート。片麻痺の方の身体を支えたり、おしりを拭くときのような不意な身体の傾きを防げます

※本チラシに掲載されている事例写真は許可を得た上で使用しております。



自宅でも安心して
排便させてあげられる
から助かったわ～

ご利用者さまのご家族

お客様に喜んでもらえて良かったです。
ポータブルトイレからの立ち上がりが難しそうなので、後脚は前脚より2センチアップし3度の傾斜を設けたことで、立ち上がりやすくなり、とても助かりました

選定された福祉用具専門相談員さま



TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

●お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
●個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

HP



公式ホームページ
アロン化成 [安寿]

Instagram



@aron_anjyu

YouTube



公式チャンネル
アロン化成 [安寿]

X (旧ツイッター)



@aron_anjyu

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…

\ FX-30 /

導入事例のご紹介 2



導入事例② 夜間の排泄が安心して行えるようになりました



ご利用者様

88歳 女性

要介護1

(身体状況)

変形性膝関節症・腰椎圧迫骨折

導入のきっかけ 導入前の課題

身体状況から歩行器を使つての屋内移動となるが、
寝室から自宅トイレまでが遠く、動線上に段差があり間に合わない。
また、腰に痛みがあるため起居動作に時間がかかる。

選定理由

片手ペーパーホルダー R は、腰をひねらずに片手でトイレトーパーを切れる
構造なので、身体への負担を軽減できるのが便利だと思いました。
また、予算内に収まる価格でした。

設置写真



※本チラシに掲載されている事例写真は許可を得た上で使用しております。

片手で紙が切れるペーパーホルダー



ペーパーの量が少なくなっても
最後までしっかりカット。



症状に合わせて、
手が届きやすい位
置や角度に調節で
きます。



ベッドの近くにトイレがあることで
精神的に安心できる様になりました。
夜間の排泄が安全かつ楽になって
嬉しいです

ご利用者さまのご家族

色も大変気に入っていただきました。
身体や環境、ニーズにあった選定が
できました

選定された福祉用具専門相談員さま



TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

●お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
●個人情報とは適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

HP



公式ホームページ
アロン化成【安寿】

Instagram



@aron_anjyu

YouTube



公式チャンネル
アロン化成【安寿】

X(旧ツイッター)



@aron_anjyu

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…

\ FX-30 /

導入事例のご紹介 3



導入事例③ 近くにトイレがあって安心して排泄できるようになりました



ご利用者様

81歳 女性

要介護 3

(身体状況)

車椅子は自走できる。車いす、ポータブルトイレへの移乗は
介助バーを使用すれば自立でできる。

導入のきっかけ 導入前の課題

腸骨骨折、パーキンソン病にて入院し、入院中にポータブルトイレを使用していた。
トイレまで自身で行くことが困難で、車椅子からトイレへの移乗も難しい。

選定理由

座面の高さ調整ができて、背もたれとひじ掛けが付いていること、
また同居しているご家族が排泄物の片付けをしやすいよう、
節水モデルでバケツが揺れないことが決め手になりました。



設置写真

※本チラシに掲載されている事例写真は許可を得た上で使用しております。

中身がこぼれにくい節水バケツ

① 節水で軽い



少ない水で運ぶのが楽々

② 柄がロック



柄がロックするのでトイレま
での運搬が安定します

③ 洗しやすい

バケツ底部が丸いので、
水を流しやすく洗しやすい

洗しやすい
丸い底部！



ポータブルトイレからの立ち座りが
しやすく、便利に使っています

ご利用者さまのご家族

機能だけでなく、色もおすすめできる
カラーリングなのがいいですね

選定された福祉用具専門相談員さま

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

●お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
●個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

HP



公式ホームページ
アロン化成 [安寿]

Instagram



@aron_anjyu

YouTube



公式チャンネル
アロン化成 [安寿]

X (旧ツイッター)



@aron_anjyu

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格が予告なく変更場合があります。

■お問い合わせは…

\ FX-30 /

導入事例のご紹介 4



導入事例④ ベッドからスムーズにトイレに移乗できました



ご利用者様

75 歳 女性

要介護 2

(身体状況)

癌の転移により在宅酸素療法を受けている。抗がん剤の副作用で手足に痺れがある。足底の感覚が鈍く立ち上がりや歩行が不安定。

導入のきっかけ 導入前の課題

現在入院しているが、トイレ移動とベッドの問題が解決すれば退院の許可が出た。在宅酸素を使用しており、少し動くだけで息苦しく、足底の感覚も鈍いためトイレ移動が負担になり転倒の危険がある。

選定理由

立位が不安定なので、ひじ掛けを 0 センチにして座位移乗が出来ること、さらに、肘掛けロックが付いており事故が予防できるのも決め手になりました。

設置写真



※本チラシに掲載されている事例写真は許可を得た上で使用しております。

ひじ掛け 0cm でベッドから座位移乗しやすい



ひじ掛けを 0 c m まで下げられるので、ベッドから座位移乗がスムーズに行えます！

ワンタッチ高さ調節で簡単！

●便座高さ



固定ナット

固定ナットをゆるめて

調節ボタン

調節ボタンを押すだけ

●ひじ掛け高さ



調節ボタン

ボタンを押すだけ

ロック解除ボタン

調節ボタンとロック解除ボタンを同時に押すだけで高さが調節できます

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

●お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
●個人情報とは適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

HP



公式ホームページ
アロン化成 [安寿]

Instagram



@aron_anjyu

YouTube



公式チャンネル
アロン化成 [安寿]

X (旧ツイッター)



@aron_anjyu

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…

\ FX-30 /

導入事例のご紹介 5



導入事例⑤ 介助の負担が軽減しました



ご利用者様

92歳 女性

要介護3

(身体状況)

仙骨骨折により20日程入院した。

退院後も痛みは続いている状態で筋力低下も見られる。

導入のきっかけ 導入前の課題

身体の痛みから歩行はゆっくりで時間がかかり、
自宅トイレに行くのも大変だった。

選定理由

ベッドからの移乗時にひじ掛けが無い方が楽なので、
ひじ掛けをすぐに無くせるようにひじ掛け昇降タイプがよかったです。
また、ご家族がポータブルトイレを移動させるときの負担が少ないように
キャスター付きをご希望されたため選定しました。

設置写真



※本チラシに掲載されている事例写真は許可を得た上で使用しております。
掲載写真はプライバシー保護の観点から加工を施しております。

移動に便利なキャスターが標準装備



ひじ掛け 0cm でベッドから座移乗しやすい



ひじ掛けを0cmまで下げられるので、
ベッドから座移乗がスムーズに行えます！

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

●お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
●個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

HP



公式ホームページ
アロン化成 [安寿]

Instagram



@aron_anjyu

YouTube



公式チャンネル
アロン化成 [安寿]

X (旧ツイッター)



@aron_anjyu

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…