

## 浴室での姿勢保持改善に！ シャワーベンチの選び方



身体を洗うときの姿勢が不安定な場合や風呂いすからの立ち座りが難しい場合、シャワーベンチを導入することで、姿勢を保持したり、立ち上がりを楽に行えるようになります。

### シャワーベンチが必要な状況と導入による効果

#### シャワーベンチ（入浴用いす）



##### 主な身体機能と困難な状況


- 廃用性の筋力低下・変形性膝関節症やリウマチ、半身麻痺・骨折など立ち座りが困難。
- ふらつきがあり常に転倒しやすい。
- パーキンソン病でつまずきやすく、方向転換が困難。
- 心臓疾患や高血圧で温度変化による心臓、血管系への負担がある。

##### 住環境のチェックポイント

- 出入り口の扉の状況
- 浴室の洗い場スペース


##### シャワーベンチ導入による効果

- 立ち座りや姿勢保持の改善により転倒の防止、安全の確保が可能
- 見守りが不要となり、一人入浴が可能
- 立ち座りや姿勢保持の改善により、介助者の負担軽減

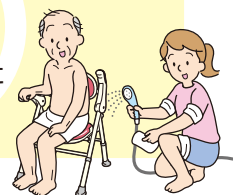

### シャワーベンチ選びのポイント

浴室にて入浴動作が安全にできるだけのスペースが残るように製品を選びましょう。

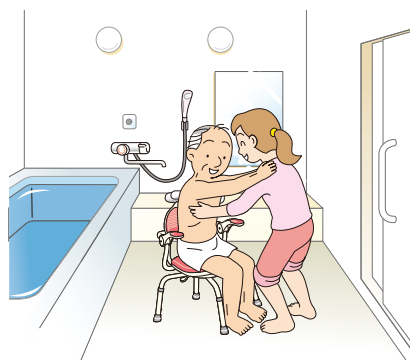

##### 環境

- ① 浴室の洗い場の大きさや出入り口の扉の状況確認が重要です。  
内開きの扉の場合、シャワーベンチが邪魔になり扉が開かないこともあります。
- ② 移動に十分なスペースが確保されるか確認しましょう。  
移動スペースが少ないと、転倒の原因になります。
- ③ 介助入浴の場合、利用者と介助者が移動できるスペースの確保も重要です。  
無理な姿勢による介助で、身体への負担や転倒の危険があります。

##### その他

- ④ 体格や身体の状態に合ったシャワーベンチを選びましょう。  
利用者の身体状況に合わせることで、身体への負担や転倒などの危険を未然に防ぐことができさらに自立を促進する上でも重要です。  
(ひじかけの有無、座面の形状、高さなど)
- ⑤ 浴室内では、できるだけ視認性の高い商品を選択しましょう。  
弱視や白内障の方など、湯気によって商品の場所が分かりづらくなります。
- ⑥ 身体の触れる部分はソフトで冷たくないソフトパッド付がおすすめです。  
身体はやせた方では、お尻や背中中の保護は重要です。



自然な姿勢で  
楽な動作で  
はさだめ

折りたたみシャワーベンチ

【楽しく開閉シリーズ】共通特長

楽しむ

こんな人におすすめ

- 関節疾患の方に
- 狭い浴室に

開く

押すだけ!



閉じる

引くだけ!



狭い浴室でも開閉しやすい

狭い浴室でもイスの状態にできる  
壁際にベンチを置いている場合でも  
ベンチを傾ける必要がなく、ベンチ  
を開くことができます。



持ち運びにも配慮

折りたたんだあとは、前からでも後ろ  
からでも、持ち運びに便利な持ち手で  
持ち運べます。



押して開く、引いてたたむ。開閉アシスト機能で「一人で入浴できる」をサポートします。

## 楽しく開閉シャワーベンチ ラインナップ

体の大きさ	大	 レッド <b>CN</b> <b>33,000円</b> (税込36,300円) 商品コード レッド:536-097 ブルー:536-098 グリーン:536-099	 グリーン <b>Sフィット</b> <b>38,000円</b> (税込41,800円) 商品コード レッド:536-090 ブルー:536-091 グリーン:536-092	 Uブルー <b>S/U</b> <b>38,000円</b> (税込41,800円) 商品コード レッド:[S]536-080 [U]536-085 ブルー:[S]536-081 [U]536-086 グリーン:[S]536-082 [U]536-087
	小			
			狭	中

浴槽環境の広さ

TOAGOSEI グループ

**Aron** アロン化成株式会社  
アロン化成

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)