

高齢者の尊厳を守る 排泄用品選びの考え方



排泄行為は個人の尊厳に関わる動作です。介護をするご家族には排泄物の処理などの負担がありますが、それ以上に高齢者にとっては、尊厳や羞恥心などに影響する非常にデリケートな問題です。それらを損なわないために、できるだけ今までに近い形で排泄ができるよう、排泄用品を選びましょう。

Point

高齢者の今の能力を見極めた上で、「できるだけ自分で行う」をポイントに排泄用品を選びましょう。



step.1

自宅のトイレで排泄できるようにしましょう

今まで通り、家のトイレで安全に排泄ができるように環境整備を行います。

トイレまでの移動



移動を補助する手すりの設置、段差解消を行う。

トイレでの立ち座りなどの動作



洋式便器の場合、手すりや補高便座などで立ち座りを補助します。



※和式便器の場合は…



簡易設置型洋式トイレで和式便器を洋式便器に変更できます。

step.2

自宅のトイレへの移動が難しい場合はポータブルトイレ

ポータブルトイレは持ち運びができ、部屋に設置できる簡易型のトイレです。また暖房便座、脱臭機能、温水シャワー機能などを有した高機能なポータブルトイレもあります。

こんな人におすすめ

- トイレに座って排泄できるが自宅のトイレまでの移動が不安定な人に。
- 自立しているが、頻尿などで夜間のみベッドの近くにトイレが欲しい人に。



夜間
だけ…

ポータブルトイレ

お手入れしやすい
樹脂製

部屋に置いて
違和感のない家具調



Point

尿意・便意があり座位がとれるのであれば、積極的にポータブルトイレを使いましょう！
寝た姿勢よりも座った姿勢が排泄しやすいので、ポータブルトイレを使うとスムーズに排泄できます。また、排泄のたびに必要運動を行うので廃用性の問題も回避できます。

座った状態 座って前傾が排泄しやすい



座って前傾姿勢をとると、直腸と肛門の角度が開くので、スムーズに排便できます。



step.3

座位が難しい場合はベッドの上での排泄を検討

尿意・便意のコントロールができる場合は、尿器、差し込み便器を使用します。

尿器



差し込み便器



Point

排泄物が直接肌に触れないので、不快感、スキントラブル、感染のリスクを軽減できます。また、自分で排泄できるという自尊心を保つことができます。



手すり

レンタル対象品
(介護保険)

住宅改修対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

洋式トイレ用フレーム S-はねあげ R-2 スチール製 55,000 円～ (税抜)
洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげ R-2 ステンレス製 65,000 円 (税抜)

ほとんどの洋式便器に対応します



トイレの立ち座りをサポート



詳しくは
WEB で



簡易設置型トイレ

購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

サニタリース OD 両用式 22,000 円～ (税抜)
サニタリース OD 据置式 25,500 円～ (税抜)

和式便器にかぶせるだけで洋式便器に早変わり

洋式トイレになることで、排泄時の立ち座りが楽に行えます。



段差のあるトイレには【両用式】

段差がないトイレには【据置式】

ポータブルトイレ

購入対象品
(介護保険)

組立完成品

最大使用者体重
100kg

ポータブルトイレ ジャスピタ 39,500 円～ (税抜)

ソフト便座、暖房便座、脱臭機能付きタイプも選べます。



独自の形状が排泄姿勢の崩れを防ぎ、理想的な排泄姿勢に導きます！(尿こぼれを防止)


左右がくぼんだ前面形状




脚が開きやすくなる山形状



「浅座り」を防ぐ！

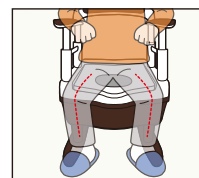

「ななめ座り」を防ぐ！

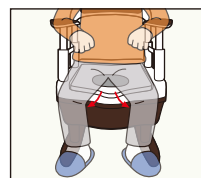

「股閉じ座り」を防ぐ！

家具調トイレ セレクト R 自動ラップ 156,000 円～ (税抜) ※消耗品(専用凝固剤、専用フィルムカセット)は本体に添付されていません。



排泄物をフィルムで密封！後処理が簡単になり、介護する人の負担も軽減します！

バケツの洗浄が
不要になります！
後処理の負担軽減！



排泄物の臭いを
密封します！
臭いの問題を解決！



専用凝固剤を入れる



排泄後、作動ボタンを押す



ラップ済み袋を取り出す

簡単！

尿器



ユリフィット
尿器女性用 自立 4,300 円 (税抜)
尿器女性用 3,700 円 (税抜)
尿器男性用 3,700 円 (税抜)

自分で持って使える、
フィットグリップ



女性用自立



女性用

男性用

差し込み便器

差し込み便器 3,300 円 (税抜)



TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)