

3つを支えるマルチサポートトイレ



移乗
サポート



排泄
サポート



片付け
サポート




ポータブルトイレ発売

50th
Anniversary

ARONKASEI CO., LTD.

移乗動作や姿勢保持、 できていますか？

ポータブルトイレを使うためには
ベッドや車いすからの移乗動作が必要になります。
しかし、介護が必要となった主な原因は、
関節疾患や脳血管疾患など
移乗動作や姿勢保持に影響がある症状が
多いことがわかっています。
また、徐々に症状が変化していきます。

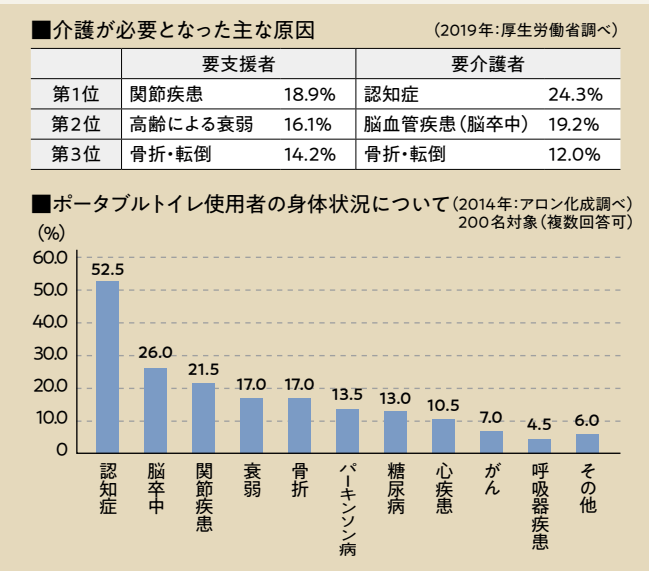

つまり利用者にとってポータブルトイレに重要な機能は、

- 1

移乗動作と排泄動作の
補助機能
- 2

認知症の方でも
理解しやすいシンプルで
簡単な使い勝手
- 3

症状が変わっても
使い続けられる汎用性

関節疾患・骨折
関節が痛く動かしにくいので、無理なくスムーズに立ち座りしたい。

解決
業界最高の便座高49cm。

片麻痺
立ち座りが困難で座位移乗したい。横方向の姿勢保持が困難で座位をサポートしてほしい。

解決
座位移乗時の身体を支える側方ガード。

衰弱
便秘の人が多いため排泄を促す前傾姿勢、お尻拭き時の腰を浮かせる前傾姿勢をサポートしてほしい。

解決
腹圧をかけ、排泄を促す姿勢保持グリップ。



移乗サポート

立位でも座位移乗でも「ひとりでできる」をサポートします。

NEW

身体の支えに

側方ガード(FX-30Sを除く)

ひじ掛けが低い設定でも座位をサポート。片麻痺の方の身体を支え、安心してひじ掛け昇降動作ができます。また、お尻を拭くなど、排泄の一連動作での不意な身体の傾きを防げます。



NEW

移乗動作にあわせて 2つの設定

0~30cmのひじ掛け高さ

ノーマルポジション 0cm、6~24cm(8段階)

0cmにすることで、座位移乗がスムーズ。



業界初! 6~15cmの間でも高さを設定できるので、小柄な方でもプッシュアップして立ち上がり動作をアシストできます。



ハイポジション 6cm、12~30cm(8段階)

30cmに設定すると立位移乗での立ち座りに有効。



高めに設定することで姿勢保持が難しい方の身体を支えます。



「安寿」史上、最も使いやすい マルチサポートトイレらくゾウくんが、なが〜くサポート



カラーについて

自然界とのつながりを感じさせるアースカラーを基調とした2カラー(ミストブルー、アースブラウン)をラインアップ。室内用品とも調和し、リラックスできる室内やジェンダーレスなコンセプトを表現しています。



排泄サポート

排泄姿勢や一連の動作を
しっかりサポート

基本機能がアップグレード。利用者と介助者をなが〜くサポート。

片付けサポート

排泄後の
後片付けにも配慮



片手で紙が切れる

片手ペーパーホルダー-R

ペーパーの量が少なくなっても「ピタス
パッカー」で最後までしっかりカット。



症状に合わせて、手が届きやすい位
置や角度に調節できます。



ベッド柵にも取り付けできます。
※別途、市販のS字フックをご用意ください。

NEW

スムーズな排泄を促す

姿勢保持グリップ

前傾姿勢を取ることで腹圧がかかり排
泄を促します。姿勢保持グリップを握る
と自然と前傾姿勢を取ることができます
。また、お尻を拭くときや、立ち上が
り時の前かがみ姿勢をサポートします。



立ち上がりや排泄がしやすい

便座角度3°前傾に簡単調節

立ち上がり動作や、前傾による排泄促進を優先される
方は便座角度を3°前傾に調節できます。後脚を前脚
よりも2cm高く設定するだけで自然と3°前傾になりま



NEW

分かりやすい簡単操作

ワンタッチ高さ調節

便座高さワンタッチ調節 + ガタツキ防止

便座高さ35~49cm(15段階)

脚部固定ナットをゆるめ、調節ボタンを押
すと脚が上下にスライドでき、短時間で調
節できます。



さらに

前脚のアジャスターで多
少の凹凸のある床でもガ
タツキなく設置できます。



ひじ掛け高さワンタッチ調節

ロック解除ボタンを押しながら調節ボタンを押すとひじ掛けが上下にスライドします。



ロック解除ボタンは誤操作に
よる不意なスライドを防ぎ、
転倒リスクを低減します。



NEW

様々な方向から開閉

トイレ蓋



トイレの蓋は様々な方向からつかめるので、正面やベッドからでも開け閉めが簡単です。

後始末や掃除がしやすくなった

節水バケツ

節水で軽い




少ない水で運ぶのが楽々

柄がロック



柄を持ち上げた
だけでロックするの
でトイレまでの運
搬が安定します。

洗しやすい
丸い底部!

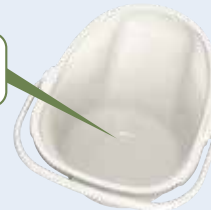

洗しやすい
バケツ底部が丸いので、水を流し
やすく洗しやすい

キャスター

キャスターは標準装備。
ちょっとした移動に便利。



バケツの柄を 受ける突起

受け板に触れずに、バケツ
の柄をつかめる衛生仕様。



バケツ蓋が 便座穴にもフィット

便座の上からも蓋ができ、
臭い対策にもなります。



排泄物をフィルムで密封

自動ラップ機能

※自動ラップタイプのみ

プラスチック製ポータブルト
イレで初の自動ラップを採
用。排泄物の後処理が簡単。




動画で解説

便座タイプ
標準
ソフト
暖房

脱臭機能
強力吸引
&
強力脱臭
臭い99%カット

New 自動ラップ 業界初
自動ラップと脱臭機能の
組み合わせは業界初!
排泄中の臭いもしっかり脱臭!

ポータブルトイレ FX-30

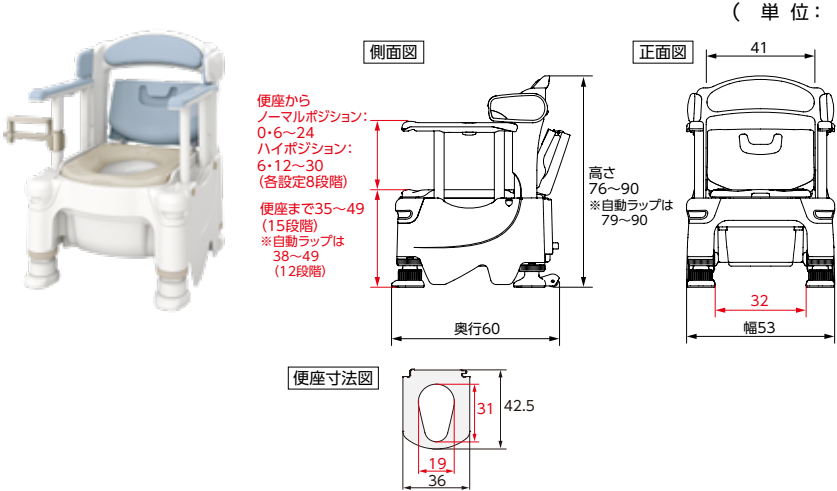

バケツ容量	約9L
材質	(本体・バケツ・ひじ掛け)PP (背もたれクッション)PE
梱包入数	1
[脱臭] 定格	(電源)交流 100V・50/60Hz ※DC12V専用アダプター (消費電力)5W
[暖房] 定格	(電源)交流 100V・50/60Hz (消費電力)53W
[暖房] 便座表面温度	約30～40℃ 5段階調節(暖房便座の場合)
付属品	防臭消耗品(試供品)、 KN吸着便座シート(標準便座のみ)

※組立て式

特定福祉用具
特定介護予防福祉用具
最大使用者体重 **100kg**

商品名		カラー	商品コード	JANコード	TAISコード	価格	重量(kg)	サイズ(cm)
FX-30 (側方ガード付)	標準便座	アースブラウン	532-956	057063	000689	36,500 円 (税込 40,150 円)	13.0	幅53 × 奥行60 × 高さ76～90
		ミストブルー	532-957	084793				
	ソフト便座	アースブラウン	532-958	096475	000690	42,500 円 (税込 46,750 円)	13.0	
		ミストブルー	532-959	096482				
	暖房便座	アースブラウン	532-960	096499	000691	52,500 円 (税込 57,750 円)	13.5	
		ミストブルー	532-961	096505				
	標準・快適脱臭	アースブラウン	532-962	096512	000692	60,000 円 (税込 66,000 円)	13.5	
		ミストブルー	532-963	096529				
FX-30S (側方ガードなし)	標準便座	アースブラウン	532-950	049068	000695	31,000 円 (税込 34,100 円)	12.5	幅53 × 奥行60 × 高さ76～90
		ミストブルー	532-951	049075				
	ソフト便座	アースブラウン	532-952	049129	000696	37,000 円 (税込 40,700 円)	12.5	
		ミストブルー	532-953	049600				
	暖房便座	アースブラウン	532-954	049624	000697	47,000 円 (税込 51,700 円)	13.0	
		ミストブルー	532-955	049631				
FX-30 自動ラップ (側方ガード付)	標準便座	アースブラウン	532-968	096574	000698	131,500 円 (税込 144,650 円)	17.5	幅53 × 奥行60 × 高さ79～90
		ミストブルー	532-969	096581				
	ソフト便座	アースブラウン	532-970	096598	000699	137,500 円 (税込 151,250 円)	17.5	
		ミストブルー	532-971	096604				
	暖房便座	アースブラウン	532-972	096611	000700	147,500 円 (税込 162,250 円)	18.5	
		ミストブルー	532-973	096628				
	標準・快適脱臭	アースブラウン	532-974	096635	000701	155,000 円 (税込 170,500 円)	18.0	
		ミストブルー	532-975	096642				
	ソフト・快適脱臭	アースブラウン	532-976	096659	000702	162,000 円 (税込 178,200 円)	18.0	
		ミストブルー	532-977	096666				
	暖房便座・快適脱臭	アースブラウン	532-978	096734	000703	170,000 円 (税込 187,000 円)	19.0	
		ミストブルー	532-979	096765				

※ JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

YouTube

X(旧Twitter)

Instagram



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。