

ポータブルトイレの導入効果と選び方



ポータブルトイレを利用すると、トイレまで移動しなくても排泄ができるので、転倒などの事故を予防することができます。また、自力での排泄が可能のため、介護者への気兼ねも少なくなり、生きる意欲や生活の質全体を高めること(QOLの向上)も期待できます。

排泄時の困りごと

- 夜間頻尿・切迫性尿失禁・便秘等による排泄障害で、トイレまで間に合わなかった。
- 腰痛・筋力低下・変形性膝関節症・リウマチ・骨折等により、トイレまでの歩行または一定高さの洋式便器での立ち座りが困難であった。
- 脳血管障害や脊椎損傷等の麻痺によりトイレまでの歩行が困難であった。



ポータブルトイレを導入するとこんな効果があります!

転倒による
ケガ・骨折を予防できる
(重度化の予防)

近いから安心♪

移動における
介助負担を軽減できる

夜中に起きなくてよくなって助かるわ

自立での排泄が可能になり、
介護者への気兼ねを軽減し、
生きる意欲の持続を推進できる

一人でできる♪

ポータブルトイレの選び方

1 樹脂製と家具調の選択

ポータブルトイレには樹脂製と家具調があります。

樹脂製

- 臭いがつきにくく、汚れても拭き取りが簡単。
- 軽くて持ち運びが簡単。
- 水洗い可能でメンテナンスしやすい。



家具調

- 室内に置いても違和感のない質感。
- 重量があり安定感がよい。



Point!

ポータブルトイレの導入にあたっては、尿意・便意の感知コントロールがある程度可能であり、自立排泄には衣服の着脱も可能であることが必要です。



2 設置状況や身体状況に応じて、サイズやひじ掛けのタイプを選択

本体幅

コンパクトタイプ

お部屋が狭い場合。

ワイドタイプ

大柄な方に。

ひじ掛け

固定式タイプ

立ち座り時の安定感があります。

はねあげ式タイプ

立位が難しい方に。座位で移乗できます。

3 便座のタイプ選択

標準便座


抗菌加工を施したプラスチック便座



ソフト便座

お尻のやせた方、長時間着座時に最適

- お手入れは取り外して丸洗いができます。(水が染み込まない。)

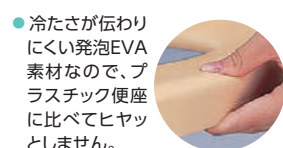

長時間座っても大丈夫!



暖房便座


心臓疾患の方、高血圧の方、腰痛の方に

- 着座時の冷たさによるショックを軽減します。



※写真はイメージです。

冬場など、瞬間的に体温が奪われて血圧が上昇

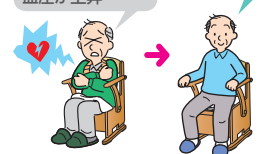

暖房便座ならあたたか!

4 機能で選択

快適脱臭

- お部屋にニオイが染みつきません
- ニオイを気にせず遠慮無く排泄できます

介助者の負担を減らすだけではなく、被介助者の精神的な負担も軽減します。

換気が困難な部屋に威力を発揮する脱臭機能。



温水洗浄便座

- おしりを座ったまま洗えて、清潔に保てます
- 拭き取る動作が困難な方、下痢や便秘の方に



自動ラップ

- ワンタッチ操作で排泄物をラップし、処理できるので、バケツを洗う必要がありません



「安寿」のポータブルトイレ

購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

ポータブルトイレ ジャスピタ 37,500円(税抜)～ 樹脂製 ひじ掛け 固定式タイプ




独自の形状が排泄姿勢の崩れを防ぎ、理想的な排泄姿勢に導きます！(尿こぼれを防止) ソフト便座、暖房便座、脱臭機能付きタイプも選べます。




左右がくぼんだ前面形状




脚が開きやすくなる山形状

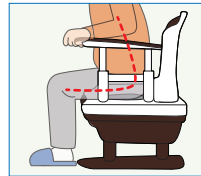

「浅座り」を防ぐ！

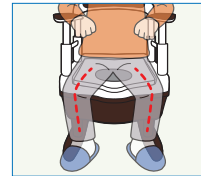

「ななめ座り」を防ぐ！

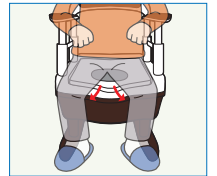

「股閉じ座り」を防ぐ！

家具調トイレ セレクトR 64,000円(税抜)～ 家具調



住環境・症状・体格、そして機能で選べるトイレ！



ノーマル



ノーマルワイド



はねあげ



はねあげワイド

幅が選択可能

標準

ワイド



ひじ掛けが選択可能

固定式

はねあげ式



脱臭機能付も選択可能

強力吸引&強力脱臭
臭い99%カット

便座が選択可能

標準

ソフト

暖房

家具調トイレ セレクトR自動ラップ 139,000円(税抜)～ 家具調 ひじ掛け 固定式/はねあげ式

※消耗品(専用凝固剤、専用フィルムカセット)は本体に添付されていません。

排泄物をフィルムで密封！後処理が簡単になり、介護する人の負担も軽減します！



バケツの洗浄が不要になります！
後処理の負担軽減！



排泄物の臭いを密封します！
臭いの問題を解決！



専用凝固剤を入れる



排泄後、作動ボタンを押す



ラップ済み袋を取り出す

簡単！