

構成部品	部品名	材質
	JP 吸着便座シート	表面：ポリエステル 80%・キュプラ 20% 裏面：アクリル樹脂



## 便座への取り付け方

### ① 便座のホコリなどを拭きとります


便座のホコリや水気、汚れなどをよく拭きとります。

※便座に除菌クリーナーを使用された場合は、一旦水拭きし、乾かしてからご使用ください。

(吸着力が弱くなります)

### ② 保護フィルムをはがします


吸着便座シート裏面の保護フィルムをはがします。

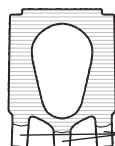

保護フィルムが残る場合があります。完全にはがしてください。


### ③ 便座に吸着便座シートを合わせます

便座後側の角部に吸着便座シートの角部を図のように合わせます。

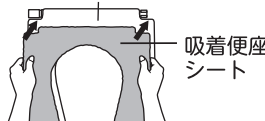

### ④ 吸着便座シートを便座に貼りつけます

便座上面に沿わせるようにして吸着便座シートを便座に貼りつけます。

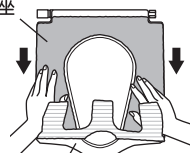

### ⑤ 吸着便座シートを便座の裏面に巻き込み、貼りつけます

① 便座を上げます。

② 吸着便座シートの突起を図のように便座の裏側に巻き込み、突起を便座の裏側に貼りつけます。

※便座を本体から外して、吸着便座シートを取り付けることもできます。



## お手入れの方法

40℃以下のぬるま湯に中性洗剤を使って洗い、日陰干しにしてください。

※洗剤を使ってポータブルトイレをお手入れするときは吸着便座シートを外してください。

※洗濯時に柔軟剤や漂白剤を使用しないでください。

※初めて洗濯するときは、繊維が多少抜けることがあります。品質上の問題はありません。

※乾燥機を使用しないでください。

※裏面の吸着面を合わせて干さないでください。

※繰り返し洗濯してご使用いただけますが、吸着力が弱くなりましたら

お買い上げになった販売店にて、新しい吸着便座シートをお求めください。



・洗濯ネットを使用

日本製

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製造・発売元

製品に関するご意見・お問い合わせは

TOAGOSEI グループ

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

・お客様から頂いたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。  
・個人情報適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

アロン化成株式会社

アロン化成

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/> 安寿

検索