

構成部品	部品名	材質
	KN 吸着便座シート	表面：ポリエステル 80%・キュプラ 20% 裏面：アクリル樹脂



便座への取り付け方

① 便座のホコリなどを拭きとります

便座のホコリや水気、汚れなどをよく拭きとります。

※便座に除菌クリーナーを使用された場合は、一旦水拭きし、乾かしてからご使用ください。

(吸着力が弱くなります)

② 保護フィルムをはがします

吸着便座シート裏面の保護フィルムをはがします。



保護フィルムが残る場合があります。完全にはがしてください。


③ 便座に吸着便座シートを合わせます

便座後側の角部に吸着便座シートの角部を図のように合わせます。



④ 吸着便座シートを便座に貼りつけます

便座上面に沿わせるようにして吸着便座シートを便座に貼りつけます。

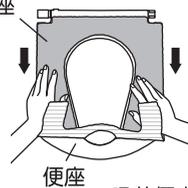

⑤ 吸着便座シートを便座の裏面に巻き込み、貼りつけます

① 便座を上げます。

② 吸着便座シートの突起を図のように便座の裏側に巻き込み、突起を便座の裏側に貼りつけます。

※便座を本体から外して、吸着便座シートを取り付けることもできます。



お手入れの方法

40℃以下のぬるま湯に中性洗剤を使って洗い、日陰干しにしてください。

※洗剤を使ってポータブルトイレをお手入れするときは吸着便座シートを外してください。

※洗濯時に柔軟剤や漂白剤を使用しないでください。

※初めて洗濯するときは、繊維が多少抜けることがありますが、品質上の問題はありません。

※乾燥機を使用しないでください。

※裏面の吸着面を合わせて干さないでください。

※繰り返し洗濯してご使用いただけますが、吸着力が弱くなりましたら

お買い上げになった販売店にて、新しい吸着便座シートをお求めください。



・洗濯ネットを使用

日本製

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製造・発売元

製品に関するご意見・お問い合わせは

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/> 安寿

検索

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)