

## 片手で切れるペーパーホルダー

- ・家具調トイレセレクトノーマル用
- ・家具調トイレセレクトはねあげ用
- ・ポータブルトイレ FX-CP、FX-CP はねあげ兼用






### 共通取扱説明書

このたびは「片手で切れるペーパーホルダー」をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずよくお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。


この製品は、当社ポータブルトイレ専用のものです。それ以外の目的での使用はおやめください。

## 各部のなまえ

### ■同梱品

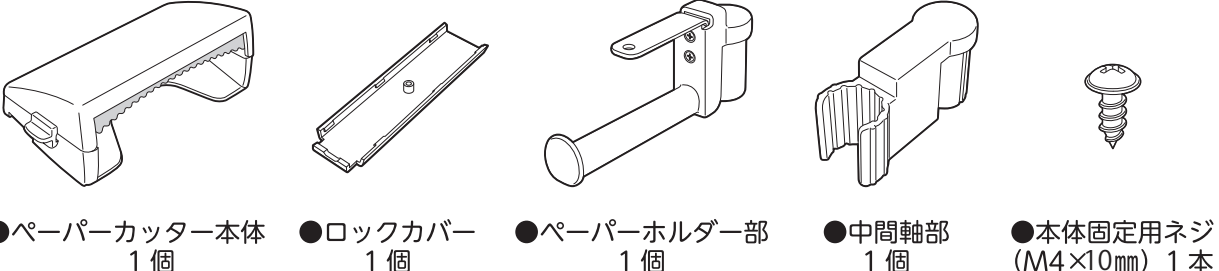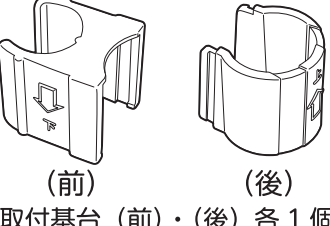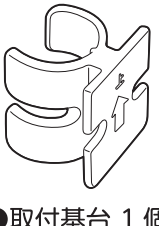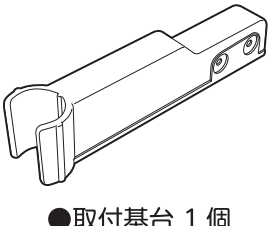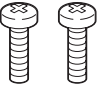種類別の部品	共通部品	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●ペーパーカッター本体 1個</li> <li>●ロックカバー 1個</li> <li>●ペーパーホルダー部 1個</li> <li>●中間軸部 1個</li> <li>●本体固定用ネジ (M4×10mm) 1本</li> </ul>		
	取付基台	FX-CP、FX-CP はねあげ兼用	家具調トイレセレクトはねあげ用	家具調トイレセレクトノーマル用
固定ボルト	取付基台	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●取付基台 (前)・(後) 各1個</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●取付基台 1個</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●取付基台 1個</li> </ul>
			<p>※『家具調トイレセレクトはねあげ』に同梱されているペーパーホルダー固定用ボルトをご使用ください。</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●取付基台固定用ボルト (M6×45 mm) 2本</li> </ul>

### ■各部のなまえ

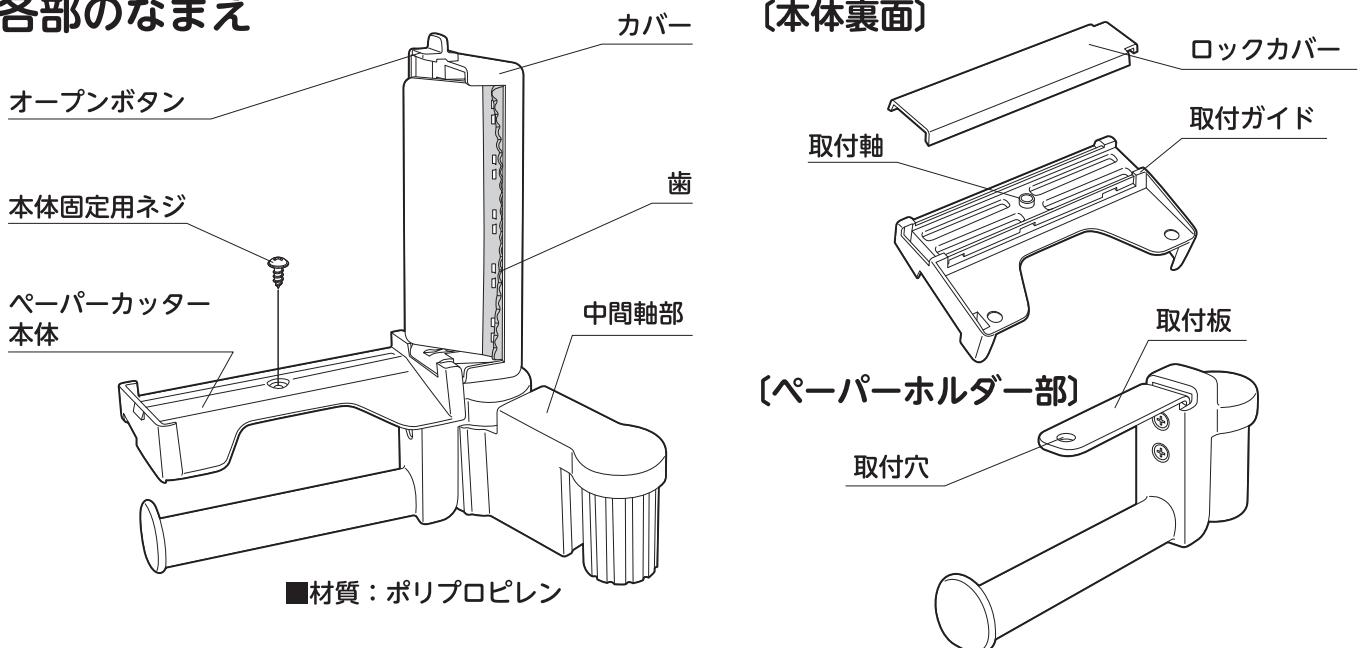
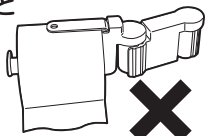







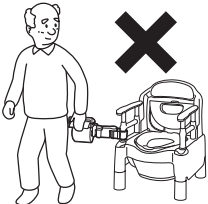




# 安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

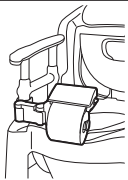■お守りいただきたい内容の種類を、下の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

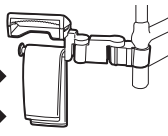❗ 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。   してはいけない「禁止」内容を説明しています。

⚠ <b>警告</b>	⚠ <b>注意</b>
<p>誤った使い方をすると「死亡または重傷」などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。</p>	<p>誤った使い方をすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。</p>
<p>❗ <b>警告</b></p> <p>ペーパーホルダーを手すりがあり、ひじ掛けがわりにしないこと 立ち座り時にペーパーホルダーに力を加えないこと</p> <p>❌ </p> <p>製品が破損したりバランスを崩したりし、転倒やけがの原因になります。</p> <p>※このペーパーホルダーは危険防止のため、手をつくなどある程度の力がかかると関節(接合部)から外れる構造となっています。</p>	<p>❗ <b>注意</b></p> <p>必ず全ての部品を正しく取り付けること</p> <p>❗ </p> <p>ペーパーカッター本体を取り付けずに使用したり中間軸を取付けずに使用するなどを行うと、けが、故障、製品の破損の原因になります。</p>
<p>❌ </p> <p>製品が破損したりバランスを崩したりし、転倒やけがの原因になります。</p> <p>※このペーパーホルダーは危険防止のため、手をつくなどある程度の力がかかると関節(接合部)から外れる構造となっています。</p>	<p>❌ </p> <p>立ち座りする際は、ペーパーホルダーをひじ掛けより内側に設置しないこと</p> <p>製品が破損したりバランスを崩したりし、転倒やけがの原因になります。</p> <p>❌ </p>
<p>❌ </p> <p>絶対に分解・修理・改造をしないこと 本体機能が正常にはたらかず、けがの原因になります。</p>	<p>❌ </p> <p>トイレトーパー以外のものを掛けないこと</p> <p>ペーパーホルダーが外れる原因になります。</p> <p>❌ </p>
<p style="text-align: center;">⚠ <b>注意</b></p>	<p>❌ </p> <p>ポータブルトイレを移動させるときはペーパーホルダーを持って移動させないこと</p> <p>製品の破損の原因になります。</p> <p>❌ </p>
<p>❌ </p> <p>直射日光の当たる場所、ストーブ等火気がある場所には設置しないこと</p> <p>火気・変形・変色などが起こり、場所によっては転倒してけがの原因になります。</p> <p>❌ </p>	

## 組み立てかた

### 1 組み立てる前に

この「片手で切れるペーパーホルダー」は

- ①左右どちらのひじ掛け支柱（アシストグリップ支柱）にも取り付けることができます。
- ②2カ所の関節（接合部）があり、それぞれ30度ずつ角度を変えられます。
- ③ペーパーカッター本体の向きを変えられます。


※ご利用者様の前方、側方などお好きな位置でご使用いただけます。

#### ■「設置位置の例」

(1)前方で使用する  
(まっすぐ取り付ける)

(2)前方で使用する  
(90度ずつ曲げて少し外側にずらす)

(3)側方で使用する

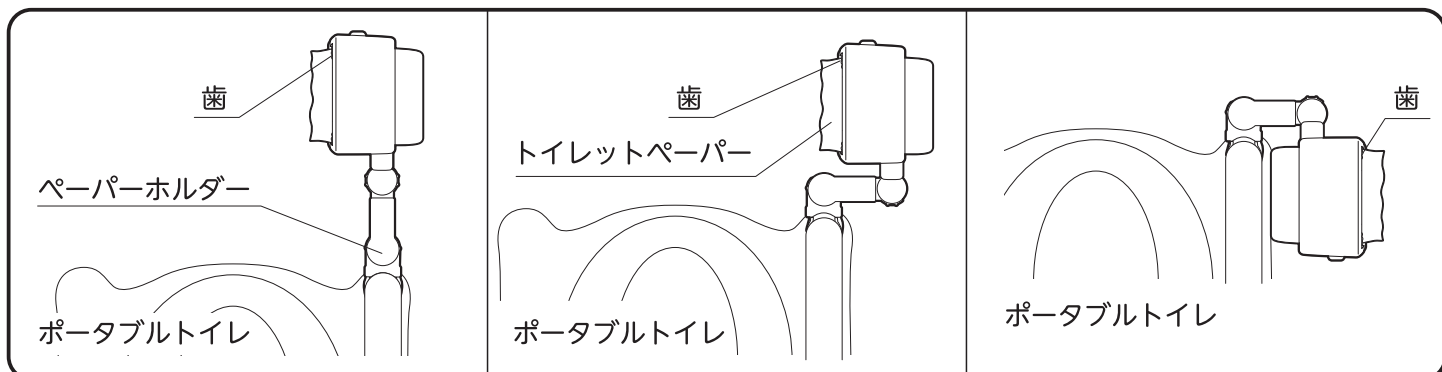


## 2 組み立てる

### 『全種類共通』

- ①まずは、歯の向きを決めてください。  
ペーパーホルダー部の取付板にペーパーカッター本体を取り付けるので、どちらの向きが使いやすいかをあらかじめ確認いただき、歯の向きを決めてください。


『1. 組み立てる前に「設置位置の例」のように、座って右側のひじ掛け支柱（アシストグリップ支柱）に取り付ける場合には、歯を左向きに（ご利用者様の方に向ける）組み立てることをお勧めします。

（逆に左側のひじ掛けに取り付ける場合には、右向きに組み立てる）

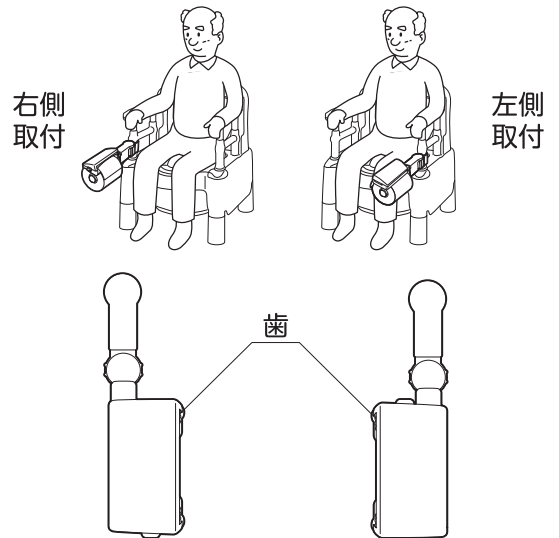


- ②ペーパーホルダー部とペーパーカッター本体をセットしてください。


ペーパーカッター本体裏面の取付軸を、取付板の取付穴に合わせてください。

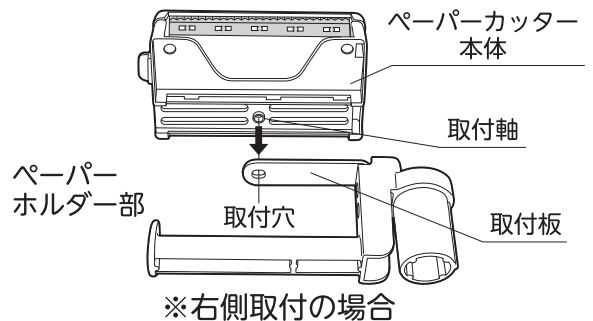


- ③ペーパーカッター本体にロックカバーをはめてください。

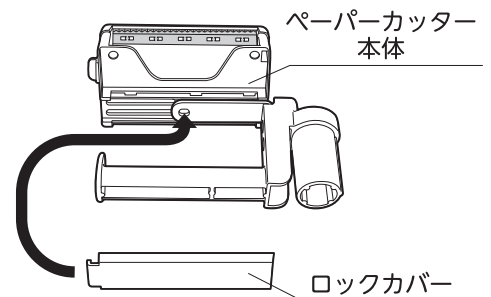

- ④カバーを支えながら、オープンボタンを押し上げカバーを開けてください。

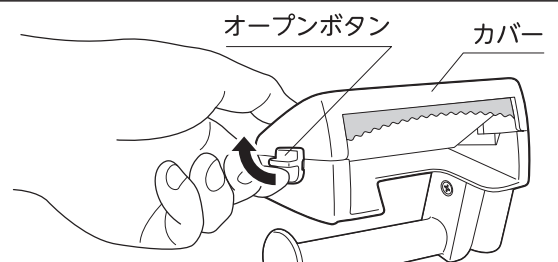

- ⑤本体固定用ネジをペーパーカッター本体の差し込み穴に入れ、プラスドライバーで締め付けペーパーカッター本体とペーパーホルダー部、ロックカバーを固定してください。

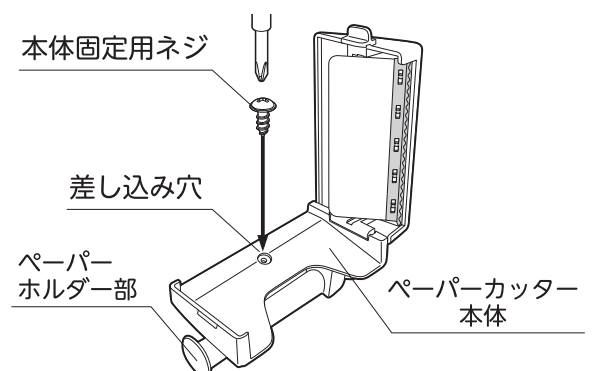


### 3 取り付ける

取り付け基台の取り付け方は機種ごとに違いますのでご注意ください。


#### 『種類別：FX-CP、FX-CP はねあげ兼用』

- ① 取付基台(後)をひじ掛け (FX-CP はねあげはアシストグリップ) 支柱に取り付けてください。その際「上」の矢印が向いている方を上に向けて取り付けてください。  
 ⚠ 指をはさむ可能性がありますので、取り付けの際は取付基台(後)の開いている部分に指をかけたり、取付基台(後)の内側に指を入れないでください。  
 ※取付基台(後)の開いている部分から手を離し、「上」の矢印があるところを押しながらはめてください。
- ② 取付基台(前)を取付基台(後)に取り付けてください。  
 取付基台(後)の溝に合わせて取付基台(前)を「下」の矢印にしたがって上から下へスライドさせて取り付けてください。

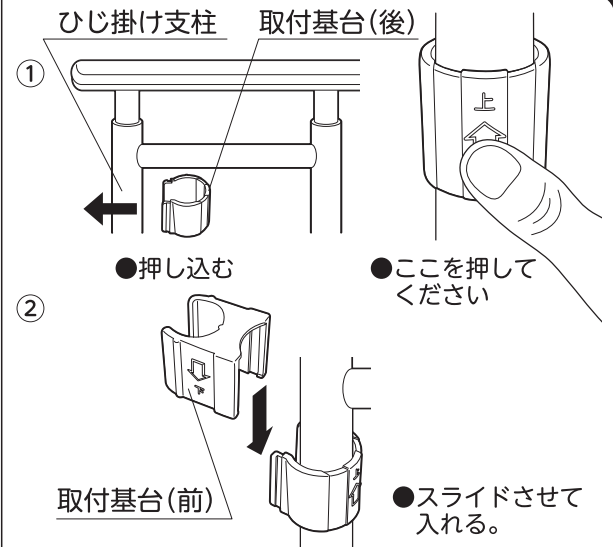


#### 『種類別：家具調トイレセレクトはねあげ用』

- ① 取付基台をアシストグリップ前面のペーパーホルダー取付用ナットに取り付けてください。その際、背面にある「上」の矢印が向いている方を上に向けて取り付けてください。  
 ※『家具調トイレセレクトはねあげ』本体に添付されているペーパーホルダー固定用ボルト(2本)で取り付けてください。

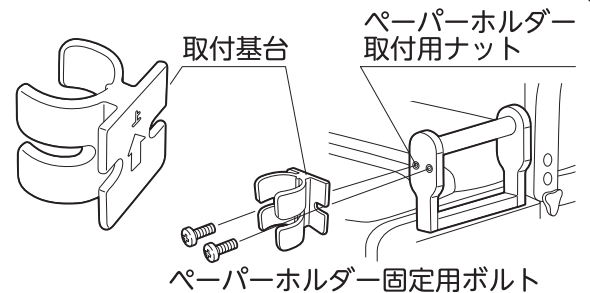


#### 『種類別：家具調トイレセレクトノーマル用』

- ① 取付基台をひじ掛け支柱側面のペーパーホルダー取付用ナットに取り付けてください。その際、背面にある「上」の矢印が向いている方を上に向けて取り付けてください。  
 ※取付には、本製品に同梱されている取付基台固定用ボルト(2本)で取付てください。

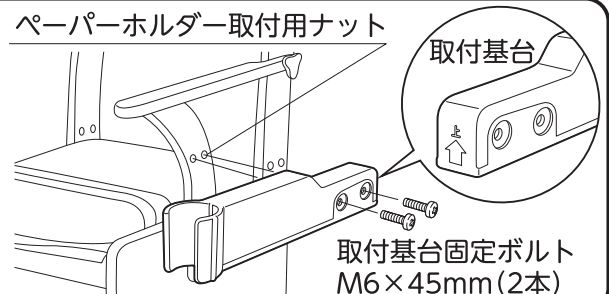


#### 『全種類共通』

- ③ 取付基台へ中間軸部、『2. 組み立てる』で組み立てたペーパーホルダー部を取り付けてください。各部材は順番に上から下へスライドさせて取り付けてください。  
 ⚠ 指をはさむ可能性がありますので、取り付けの際は開いている部分に指をかけたり、内側に指を入れないでください。


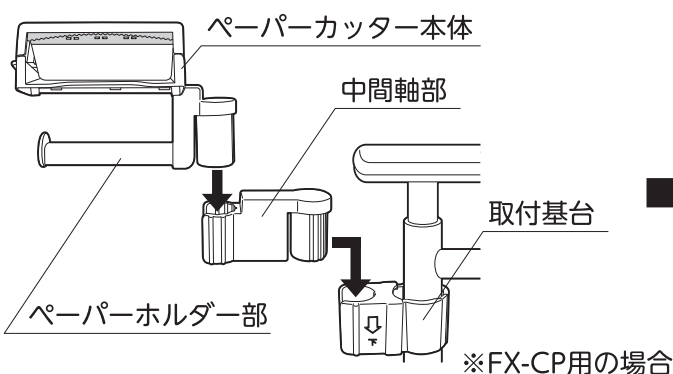


●これで取付完了です。

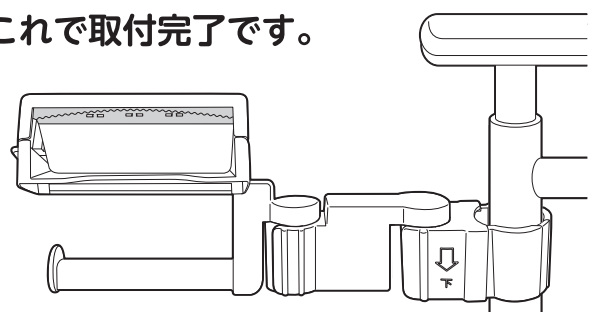

## 4 ペーパーカッター本体(歯)の向きを変更したい場合

- ①ペーパーホルダー部を中間軸部から外してください。
- ②ペーパーカッター本体とペーパーホルダー部を下記の手順に従って外してください。

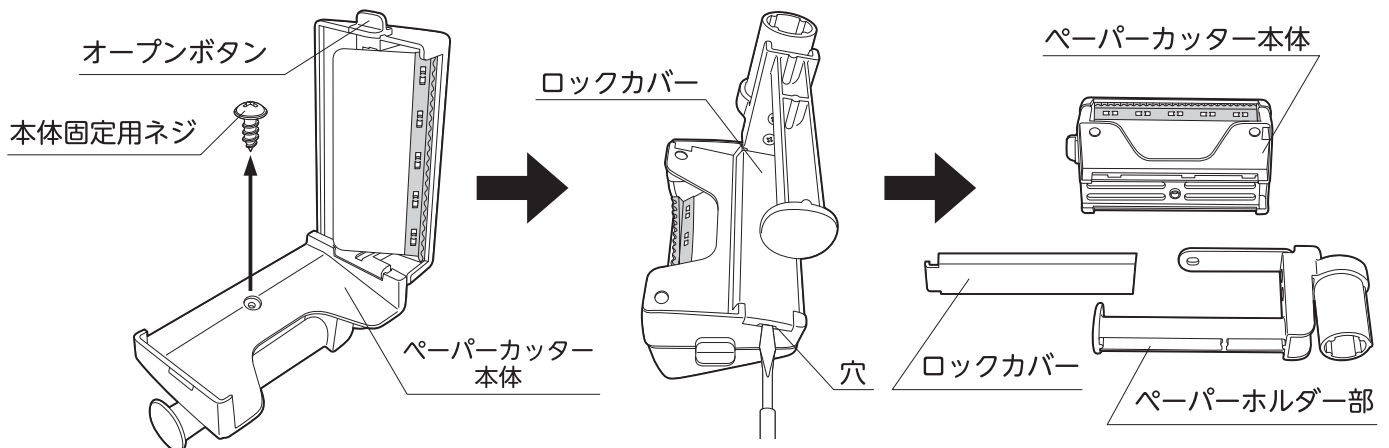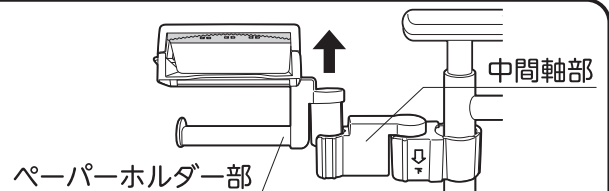

■オープンボタンを押し上げながらカバーを開け、本体固定用ネジをプラスドライバーでゆるめて抜いてください。

■ペーパーカッター本体裏面に取り付けられたロックカバーを取り外してください。ロックカバーの穴にマイナスドライバーなどを差し込むと外しやすくなります。

■取り外し完了です。

**⚠️ ネジを抜かないで無理矢理外すと破損します**

- ③ペーパーカッター本体の向きを変え、『組み立てかた』の『2.組み立てる』、『3.取り付ける』の手順に従って取り付けてください。


## 使いかた

### 1 トイレットペーパーをセットする

- ①ロールペーパーホルダーにトイレットペーパーを差し込んでください。
- ②オープンボタンを押し上げながらカバーを開けてください。
- ③トイレットペーパーをロックカバー側からペーパー受けを通して切欠き部に垂らしてください。
- ④カバーを閉じて、トイレットペーパーのセットは完了です。

※芯なしタイプのトイレットペーパーは使えませんのでご注意ください。

※業務用など極端に径が大きいもの・重いものは使えません。

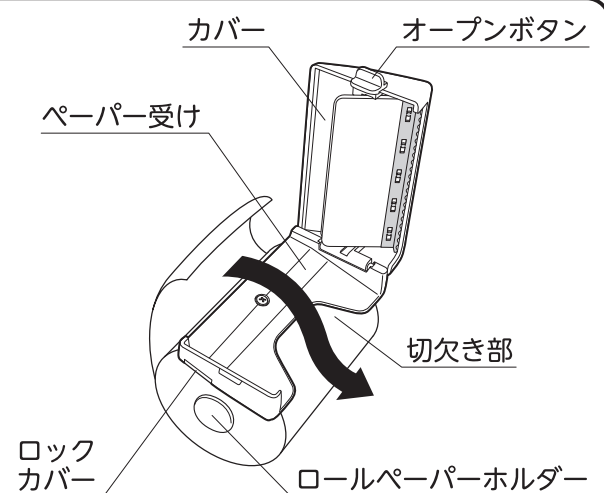


●カバーを閉じる際、手や指を挟まないようにご注意ください。

●カバーを開く際、無理に開きすぎないこと  
また、開いた状態で過度な力をかけないこと  
製品破損の原因になります。

## 2 トイレットペーパーを切る

トイレットペーパーを歯に押し当て、斜め上に引き上げるようにしながら端から切り取ってください。

※再生紙などの硬いもの、温水洗浄便座用の厚手のものなど、トイレットペーパーの材質によっては、うまく切れない場合もございます。その際は柔らかいものをご使用ください。

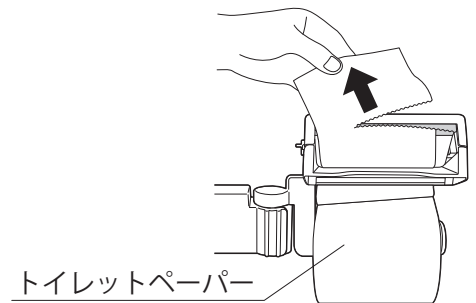


## 3 角度を調節する

①中間軸部、及びペーパーホルダー部は、それぞれ左右に90°まで、30°ずつ調節ができます。




ペーパーホルダーの角度調節時には関節(接合部)に手や指を巻き込まないようにご注意ください。


②調節したい部位を動かして調節してください。

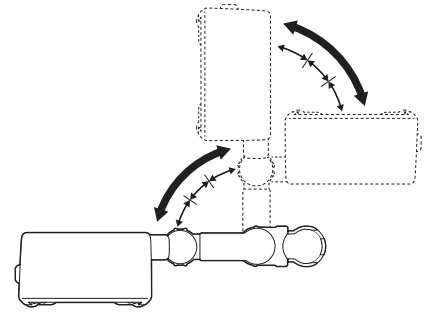

中間軸部を調節したい場合は、取付基台を支えながら、中間軸部を持って中間軸部を動かしてください。

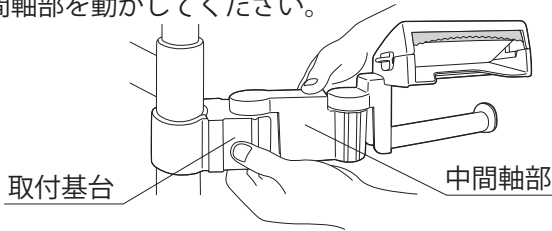

ペーパーホルダー部を調節したい場合は、ペーパーホルダー部中間軸部を支えながら、ペーパーホルダー部を持ってペーパーホルダー部を動かしてください。

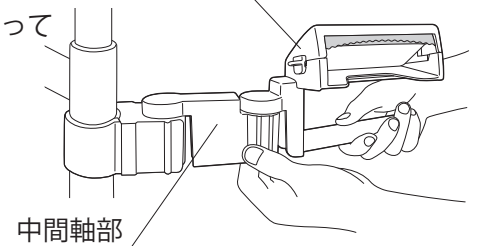


## お手入れ方法

いつまでも気持ちよくお使いいただくために、こまめに汚れを落としてください。汚れはスポンジか柔らかい布に、住宅用洗剤(弱アルカリ性・中性)をふくませてふきとってください。



- 次にあげるものではお手入れしないこと
    - ・塩素系洗剤
    - ・酸、アルカリ性洗剤
    - ・シンナー
    - ・クレゾール
    - ・熱湯(煮沸消毒等)
    - ・タワシ
    - ・研磨剤入りのスポンジ
    - ・磨き粉
    - ・塩素系薬剤をかけたの殺菌、消毒
    - ・その他製品を傷付けるもの
  - 直射日光による天日干しは行わないこと
- 製品が劣化し、けがの原因になります。

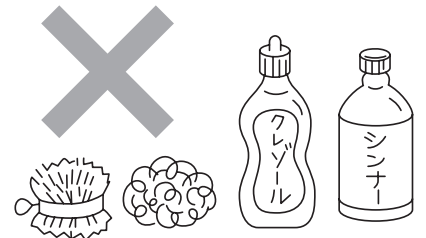

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

13.04

製品に関するご意見・お問い合わせは

### お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735  
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00  
(12:00～13:00はのぞく)



## アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番6号 住友不動産日比谷ビル8階 TEL (03) 3502-1448  
FAX (03) 3502-1452

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5477  
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100  
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011  
福岡支店 ☎(092)741-1411