


使用方法

1

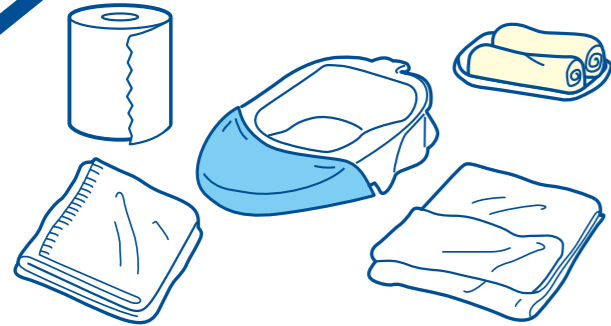

■用意するもの…
差し込み便器・トイレトペーパー・防水シート・腰回りをおおうタオルケット・おしぼり清拭剤など。

2




■排泄前に差し込み便器の中にトイレトペーパーを敷いておくと後始末が楽にできます。

3



■差し込み便器を使う方をあおむけの姿勢にして寝巻を腰の上までたくし上げてください。足はひざを曲げます。この時、腰の下に防水シートを敷くと安心して用が足せます。

4

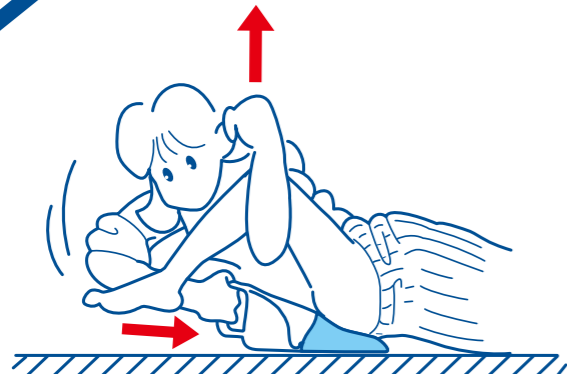


■ひざを持ち上げ、腰を浮かし差し込み、静かに腰をおろします。（女性が使用する時は股の間にティッシュをはさんで尿が飛散らないようにします）

5



■上半身を起こすと腹圧がかかり排泄しやすいので、クッションなどを使って排泄しやすい姿勢にしてあげます。排泄時はタオルケットなどを使って腰回りをかくしてあげます。

6

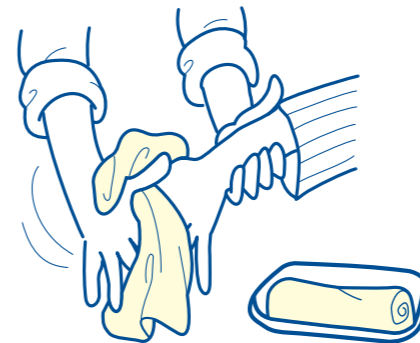


■排泄が終っても自分でふけない場合は、必ず前から後ろに向かってふいてあげ、尿路感染を防ぎます。温水洗浄が清拭剤できれいにし、お部屋の換気も忘れずにしましょう。手もおしぼりでふいてあげましょう。

洗浄の方法

- 使用後、尿を捨て中性洗剤できれいに洗いよくすすぎ日陰干しにするか、綿布などで水分を取ってください。
- 消毒を行う場合は、うすめの逆性石けん液などを使用してください。
- カバーのお洗濯は、ぬるま湯に中性洗剤を使い日陰干しにしてください。

カバー取り付け方法

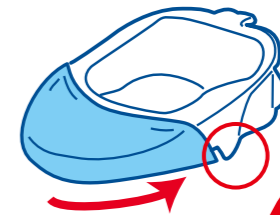

●差し込み便器の前面にカバーをかぶせ凹部にひっかけとめます。



カバーを凹部に引っかける



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>



4 970210 016756

ポリ袋:PE