



安^{あんじゅ}寿

大切にしたい。
自立への気持ちと思いやり。

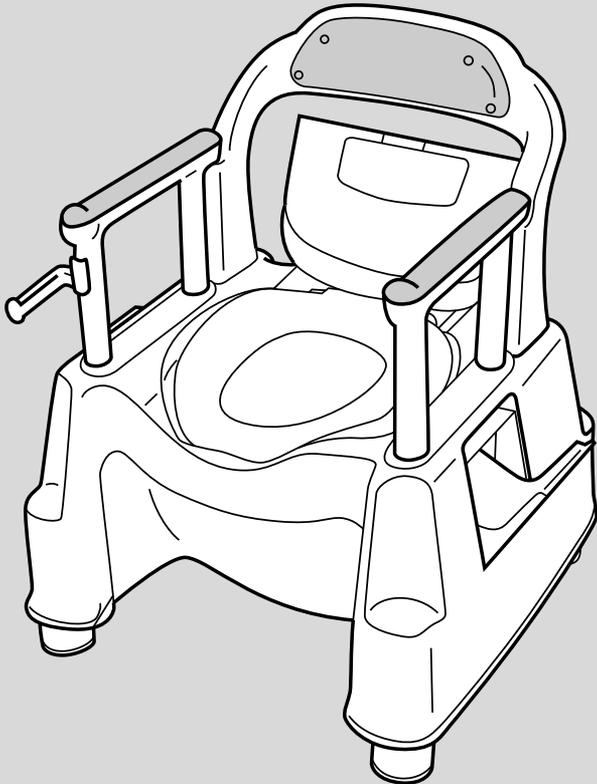

ポータブルトイレFX-1

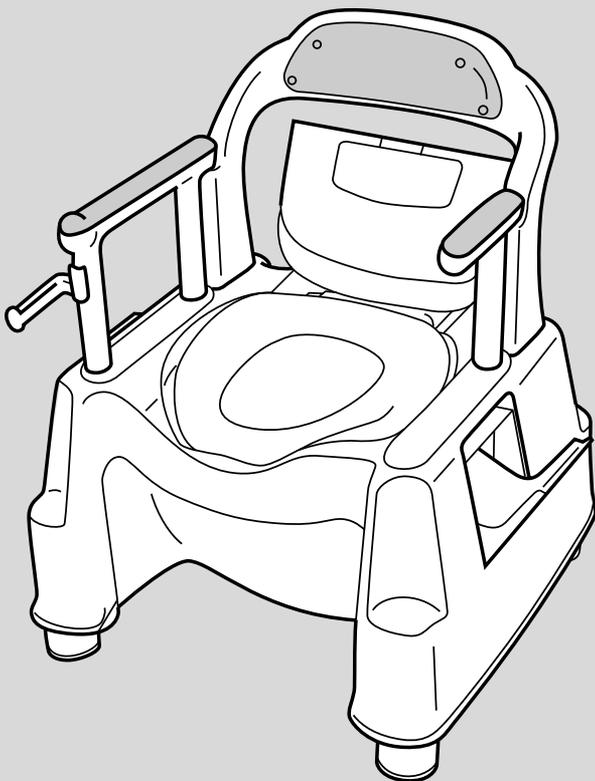

ポータブルトイレFX-2 短ひじタイプ

ポータブルトイレ FX-1/FX-2 取扱説明書

保証書付

最大使用者体重：100kg以下

このたびはポータブルトイレFXをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。なお、この取扱説明書（保証書）は大切に保管してください。

●保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ・特長	2
使いかた	3~4
お手入れの方法	5
保証とアフターサービス	6
保証書	7

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。


■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

- 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。**
してはいけない「禁止」内容を説明しています。

! 注意


<p> 改造や分解をしないこと 本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。</p>	<p>背もたれを手すりがわりに持たないこと 転倒し、けがの原因になります。</p>
<p>背もたれやひじ掛けがしっかり固定されているか確認すること 身体が不安定な状態となり、けがの原因になります。</p>	<p>直射日光が当たる場所や火気に近づけないこと 火災や変形の原因になります。</p>
<p>補高用脚が4本とも本体が安定するように高さ設定されているか確認すること 補高用脚を固定ナットでしっかり止めているか確認すること 転倒し、けがの原因になります。</p>	<p>本体と補高用脚のすきまに足を置いた状態で立ち上がらないこと 転倒し、けがの原因になります。</p>
<p> 使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店かケアマネジャーなど専門家に相談すること</p>	<p> 子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと</p>
<p>上蓋の開閉のときは、必ず持手部を持って行うこと 別の部分を持って行なうと指をはさむ原因になります。</p>	<p>体重が100kgを超える方は使用しないこと 本体が破損する恐れがあります。</p>
<p>必ず平坦な場所で使うこと</p>	<p>バケツの中に水や汚物を入れたまま、本体を移動させないこと 内容物がこぼれ、服や床などを汚す恐れがあります。</p>
<p> 上蓋の上に座ったり立ったりしないこと 蓋が割れたり、けがの原因になります。</p>	<p>お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと 塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。</p>

各部のなまえ

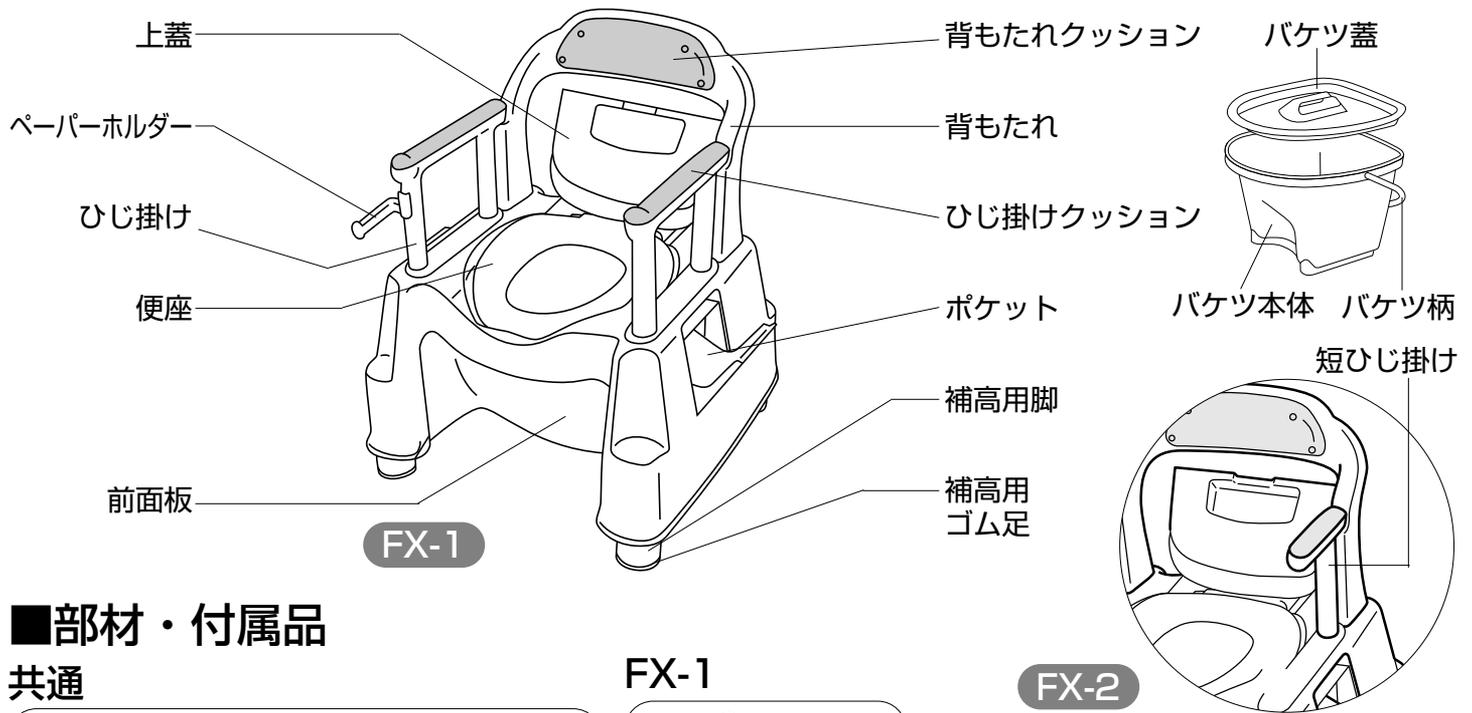

■部材・付属品


共通

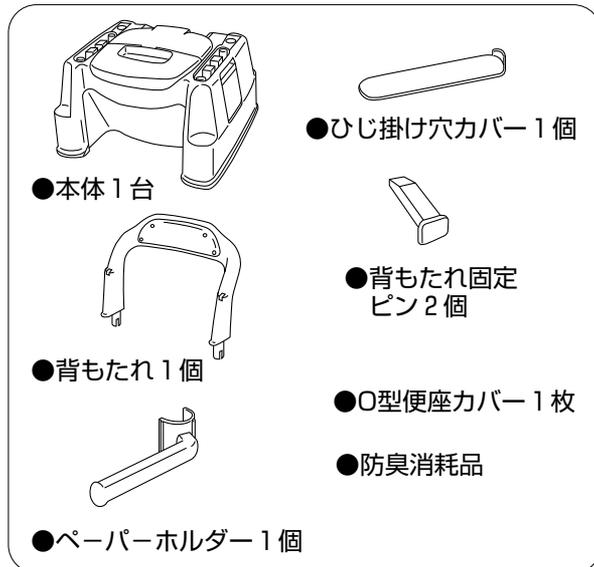

FX-1



FX-2

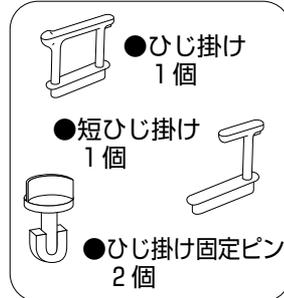

FX-2

■仕様

品名	ポータブルトイレFX-1、FX-2	
材質	本体・上蓋・便座 バケツ・ひじ掛け 背もたれ ペーパーホルダー	ポリプロピレン
	ひじ掛けクッション 背もたれクッション	EVA
補高用脚	ポリエチレン	
補高用ゴム足	スチレン系エラストマー	
寸法	67×64×高さ77～82cm (便座までの高さ：38～43cm)	
重量	約10.5kg	
バケツ容量	10ℓ	

廃棄上のご注意 おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

特長

- 便座までの高さを症状・体形に合わせ38～43cmに調節できます。
- バケツの下に汚水受けを設けた二重構造なので、飛散した小水を便器外に漏らしません。
- 本体前面に足を引けるスペースがあり、立ちやすくなっています。
- 広くて段差のない座面ですから、ひじ掛けを外せば横からの移乗も可能。ひじ掛けは上部からのネジ止め式で、着脱がとても簡単です。
- 背もたれは、脱着式なので収納時に便利です。
- 便座は尾てい骨があたりずお尻にかかる負担を軽減した形状です。
- 上蓋は、手首を返すことなく開閉できるユニバーサル構造の折りたたみ式。便座はゆっくり閉まるオイルダンパーを採用しています。
- 上蓋・便座は簡単に着脱ができ、お手入れの時も外して洗えるのでとても衛生的です。
- ペーパーホルダーはひじ掛けの支柱にお好みの角度で取り付けることができます。
- FX-2は短ひじタイプなので、ひじ掛けをつけたままで横からの移乗ができます。

使いかた

組立て方法


1 背もたれを固定する

- ①背もたれクッションのある方を前面にして取付穴にはめ込みます。
 - ②背もたれの両支柱の後側から背もたれ固定ピンで、左右2カ所しっかり固定します。
- ※背もたれを取りはずす場合は、逆の手順で行ってください。



注意

背もたれ固定ピンで背もたれを必ず固定すること
背もたれが外れ、不安定になり、けがの原因になります。

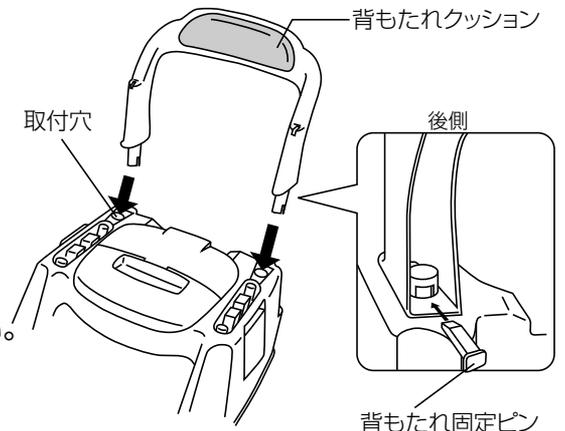

2 ひじ掛けを固定する

共通

ひじ掛けクッションのふくらみのある方を前面にして、本体と背もたれの溝にはめ込みます。ひじ掛けの穴にひじ掛け固定ピンを差し込み、90°回転させて固定します。


FX-2 短ひじ掛けの場合

短ひじ掛けの後側を右図のように背もたれ側にして、本体と背もたれにある溝にはめ込みます。ひじ掛けの穴にひじ掛け固定ピンを差し込み、90°回転させて固定します。(短ひじ掛けは、左右どちらでも取り付け出来ます。)



注意

ひじ掛けはひじ掛け固定ピンで必ず固定すること
ひじ掛けが外れ、不安定になり、けがの原因になります。

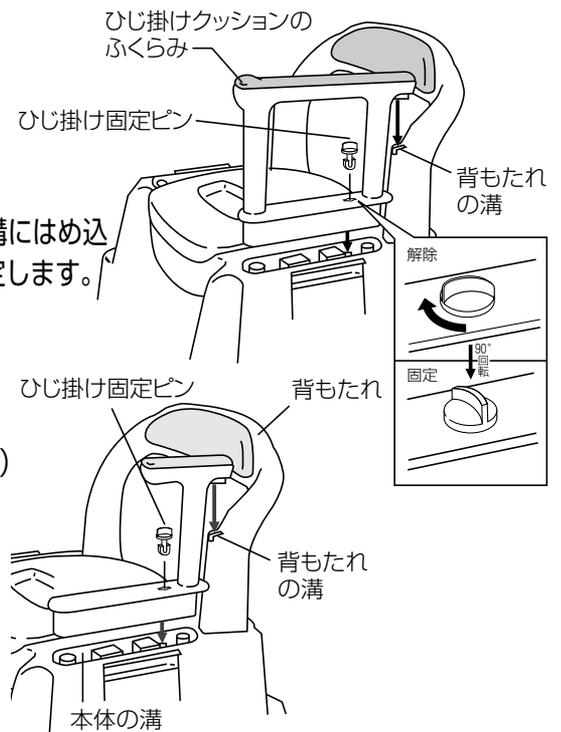

3 高さの調節をする


必要に応じて4本の補高用脚をそれぞれ左に回して高さを調節してください。まず本体裏側の固定ナットをゆるめ、3本の補高用脚を目盛りで調節し、残りの1本はトイレを使用する場所で安定感を確認しながら調節します。補高用脚は本体裏側から固定ナットでしっかり止めてください。(便座までの高さ：38cm～43cm)

※補高用脚には1cmごとに目盛りがついていますので、脚の高さをそろえる目安にしてください。




注意

補高用脚は本体が安定する高さに固定され、固定ナットでしっかり止められているか確認すること
転倒し、けがの原因になります。

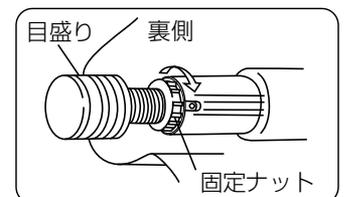

4 ペーパーホルダーをつける

ペーパーホルダーはひじ掛けの支柱にお好みの角度で取り付けることができます。使いやすい位置に取り付けて、トイレットペーパーをセットしてください。※ペーパーホルダーにはトイレットペーパー以外のものは掛けないでください。

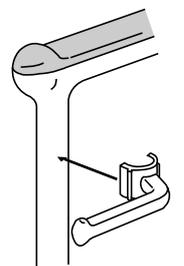

使いかた

前準備

- 付属の便座カバーをつける
(上蓋にはカバーをかけないでください)
- 防臭効果を高めるために
バケツに水を約2ℓ (バケツ内側の2と表示してある線まで) 入れ、付属の防臭消耗品を入れてください。ポータブルトイレ用防臭剤や防臭液、防臭錠、消臭剤フォームタイプもご使用いただけます。(別売品)

使用方法

上蓋を開け、バケツの蓋をはずして使用します。
※バケツ内へは、ティッシュペーパーなどトイレトペーパー以外のものは入れないこと。
トイレで処理する際、詰まる原因になります。

使用後の処理方法

- 汚物の処理について
ポータブルトイレからバケツを取りだして、汚物をトイレに流してください。




上蓋、便座の分解・組立て方法

- お手入れや便座の取りかえを行う時

1 上蓋・便座を本体からはずす

2 軸受裏の軸カバーのツメをつまみながら、軸カバーをはずす



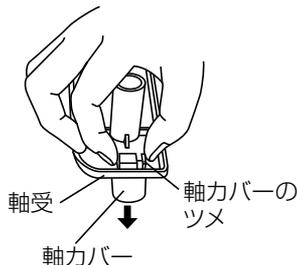


3 止めピンをぬき、上蓋・便座を軸受けからはずす

4 最後に上蓋の軸穴からオイルダンパーをぬき、上蓋と便座を分解する

(オイルダンパーが軸受に残った時は、4の作業はいりません)

※組立てる場合は、4から逆の手順で行って下さい。

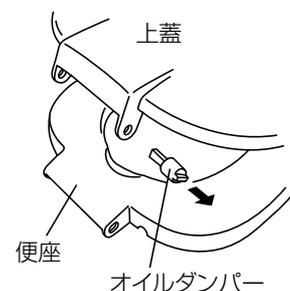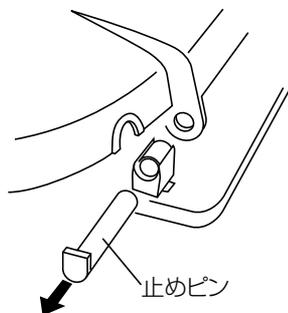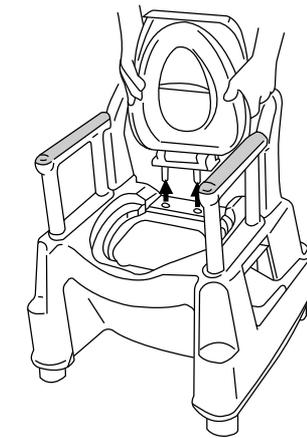


※便器に座る前に用便されてしまう場合もあります。

あらかじめポータブルトイレ用消臭・防水シート(別売品)を敷いておくと、よりお部屋の清潔さが保たれ安心です。

FX-1でベッド等から移乗する場合。

ベッド側のひじ掛けをはずし、その位置にひじ掛け穴カバーを取り付けてお使いください。尚、移乗後、上体の安定を保ちたい場合は、ひじ掛け穴カバーを外し組立て方法の2にしたがい、ひじ掛けを固定してください。


※ひじ掛けは、どちらか片方を必ず取り付けてお使いください。

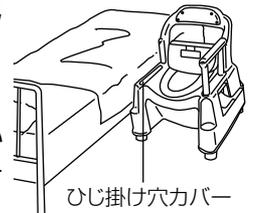

お手入れの方法


1 普段のお手入れは

いつまでも気持ちよくお使いいただくために、小まめに汚れを落としてください。汚れはスポンジかやわらかい布に、住居用洗剤（弱アルカリ性・中性）をふくませてふきとってください。

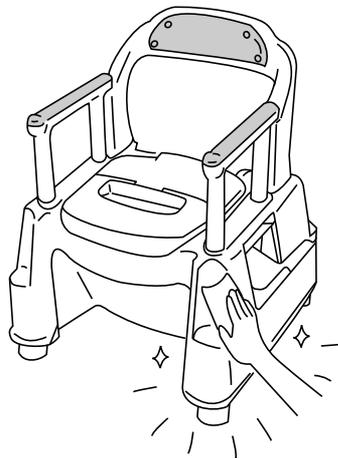


2 少しひどい汚れには

上蓋・便座は本体からはずせるので、すみずみまできれいにお手入れができます。ひどい汚れをふきとる場合は、布等に市販の消毒用アルコールをふくませてふきとってください。

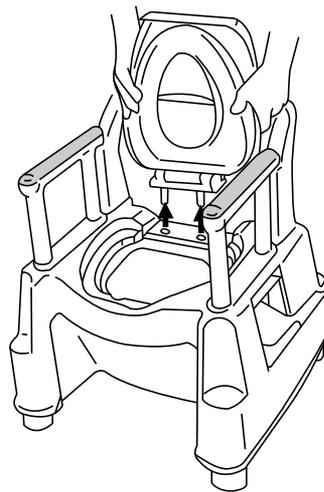

注意

※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

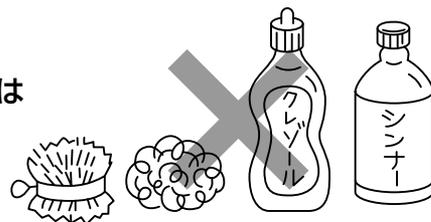

保証とアフターサービス **よくお読みください**

■保証書

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

保証期間：お買い上げ日から1年間

■修理を依頼される時

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書（取扱説明書）を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店にご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。