


# 安寿 あんじゅ

大切にしたい。  
自立への気持ちと思いやり。

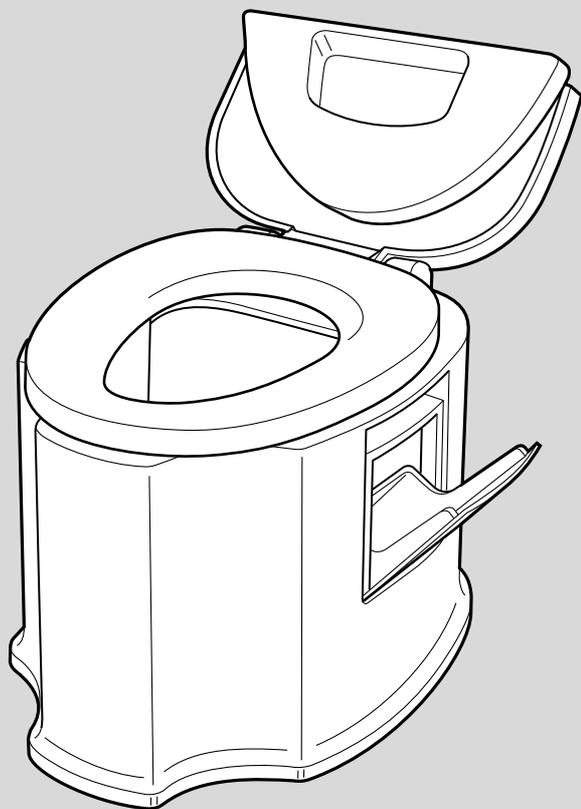

## ポータブルトイレGX 取扱説明書

最大使用者体重：100kg以下

このたびはポータブルトイレGXをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。  
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

### もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ・特長	2
使いかた	2~3
お手入れの方法	4

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



## 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。


■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）




必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。

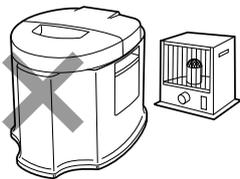 <b>注意</b>	
	<p>改造や分解をしないこと 本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。</p>
	<p>使用者が用便等の際、自分自身の身体を十分に安定させられない場合は、介助者が必ず付き添うこと</p> 
	<p>上蓋の開閉のときは、必ず持手部を持って行うこと 別の部分を持って行なうと指をはさむ原因になります。</p> 
	<p>必ず平坦な場所で使用すること</p>
	<p>ペーパーホルダーを支えにして、立ち座りを行わないこと 転倒し、けがの原因になります。</p>
	<p>直射日光が当たる場所や、火気に近づけないこと 火災や変形の原因になります。</p> 
	<p>上蓋の上に座ったり立ったりしないこと 蓋が割れたり、けがの原因になります。</p> 
	<p>使用中、蓋によりかからないこと 蓋が割れたり転倒し、けがの原因になります。</p>
	<p>子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと</p>
	<p>体重が100kgを超える方は使用しないこと 本体が破損する恐れがあります。</p>
	<p>お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと 塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。</p>

# 各部のなまえ

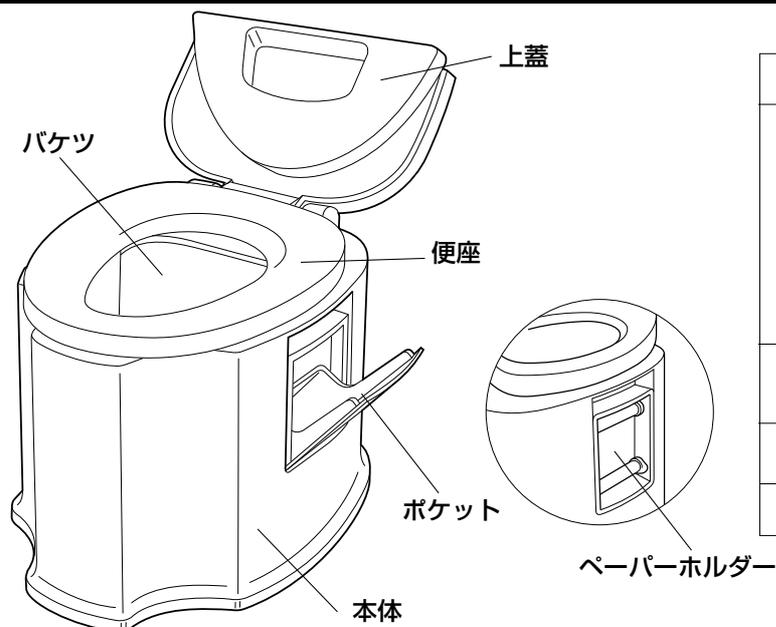

品名	ポータブルトイレGX
材質	本体・上蓋・便座
	バケツ
	ポケット
	ペーパーホルダー
	ポリプロピレン
寸法	44×53×高さ40cm (便座までの高さ:38cm)
重量	約3kg
バケツ容量	10ℓ

付属品  
O型便座カバー1枚・防臭消耗品

## 廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

## 特長

- 本体前面に足を引けるスペースがあり、立ち上がりやすくなっています。
- 上蓋・便座は簡単に着脱ができ、お手入れの時も外して洗えるので、とても衛生的です。
- 本体側面にポケットが付いているので排泄時に必要な備品を収納することができます。
- ペーパーホルダーは、使用時に取りやすい位置にスイングアップする構造です。  
※ポケットとペーパーホルダーは左右どちらにでも取り付けできます。
- 本体のバケツ受け周辺に溝を設けているので、尿が外へこぼれにくい構造になっています。
- 上蓋の開閉は折りたたみ式で、便座はゆっくりと閉まるオイルダンパーを採用。
- 便座は抗菌加工便座。
- バケツは音のしにくい形状で、バケツ蓋はつかみやすい取っ手になっています。

## 使いかた

寝たきりにならないようにできるだけ自立して排泄を行なえるようにしましょう。

### 前準備

- ① 付属の便座カバーをつける  
(上蓋にはカバーをかけないでください)
- ② 防臭効果を高めるために  
バケツに水を約2ℓ (バケツ内側の2と表示してある線まで) 入れ、防臭剤か防臭液、あるいは消臭剤フォームタイプを入れてください。

※トイレに座る前に用便されてしまう場合もあります。あらかじめポータブルトイレ用消臭・防水シート(別売品)を敷いておくと、よりお部屋の清潔さが保たれ安心です。

※別売(防臭剤・防臭液・消臭剤フォームタイプ)

### 使用方法

- ① 上蓋を開け、バケツの蓋をはずして使用する  
(トイレットペーパー・おしぼり等もご用意していただくと、大変便利です。)

### 使用後の処理方法

- ① 汚物の処理について  
ポータブルトイレからバケツを取りだして、汚物をトイレに流してください。






# 使いかた

## ペーパーホルダーの使いかた

①トイレットペーパーを使用する場合、本体側面にある、ペーパーホルダーを図①の状態から内側の軸を手前に引き出し、図②の状態となるように固定します。あとは図③のように軸にトイレットペーパーを通せばセット完了です。


ペーパーホルダーを収納するときは、軸を元にもどしてください。

※元にもどすときは、ストッパー部をのりこえる為、若干かたいですが破損等の心配はありません。

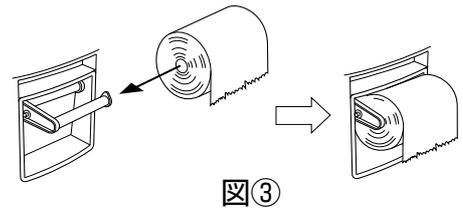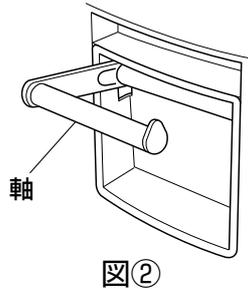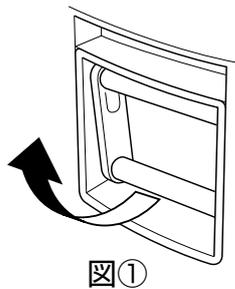


## ペーパーホルダーとポケットの左右の取りかえかた


図①

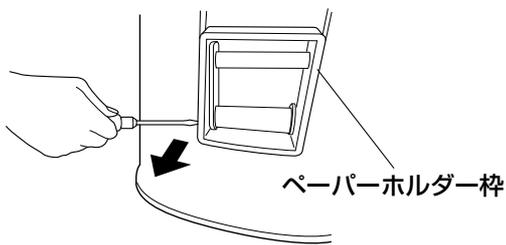


図②

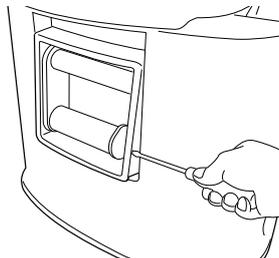


図③

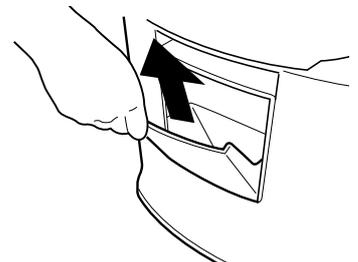

図④

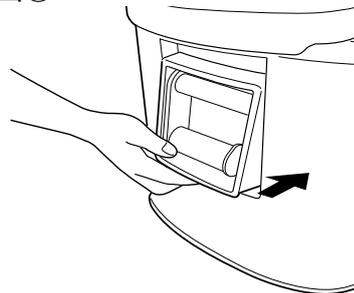

図⑤

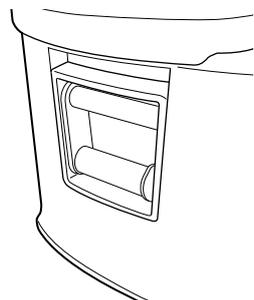

- ①ペーパーホルダー枠と本体(下方)のスキ間に⊖ドライバーを差し込み、枠を矢印方向にはずす。図①
- ②ペーパーホルダー枠の反対側も同じようにして、枠全体をはずす。図②
- ③もう一方の本体側面にあるポケットを開け、矢印の方向にポケットを引きぬく。図③
- ④ポケットをはずした本体側面の穴に、ペーパーホルダーをセットする場合、ペーパーホルダーの枠を本体側面の穴上側にあててから枠の下側を図④のように、矢印方向に押し込んでセットする。図⑤
- ⑤ポケットは③の逆の手順でセットする。

# お手入れの方法

## 1 普段のお手入れは


いつまでも気持ちよくお使いいただくために、小まめに汚れを落としてください。汚れはスポンジかやわらかい布に、住居用洗剤（弱アルカリ性・中性）をふくませてふきとってください。

## 2 少しひどい汚れには

上蓋・便座は本体からはずせるので、すみずみまできれいにお手入れができます。ひどい汚れをふきとる場合は、布等に市販の消毒用アルコールをふくませてふきとってください。



- ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- ※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと  
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

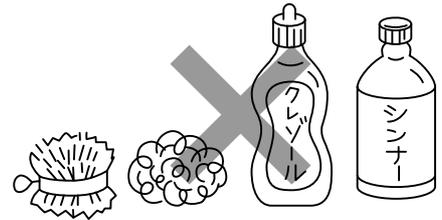

※長時間ご使用になり、バケツの汚れがとれなくなった場合には、販売店にてバケツ（別売品）をお求めください。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

10.06

製品に関するご意見・お問い合わせは

**お客様相談室**

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00  
(12:00～13:00はのぞく)



**アロン化成株式会社**