

背付ポータブルトイレ


らくたち 楽立AD 取扱説明書

保証書付

最大使用者体重：100kg以下

このたびは背付ポータブルトイレ
楽立ADをお求めいただきまして、
まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、
ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書（保証書）は
大切に保管してください。

- 保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

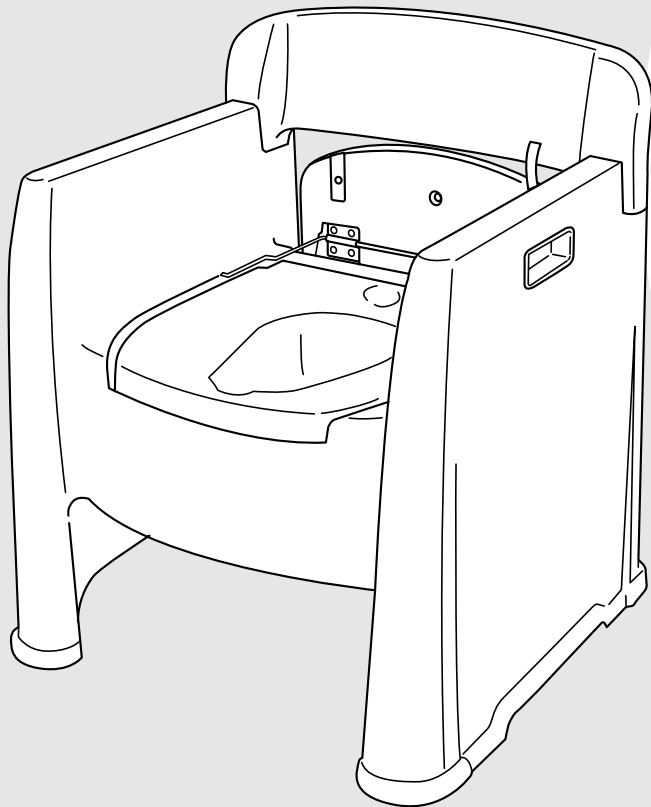



もくじ

| | |
|-------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1 |
| 各部のなまえ・特長 | 2 |
| 使いかた | 3~4 |
| お手入れの方法 | 4~5 |
| 保証とアフターサービス | 6 |
| 保証書 | 7 |


安全上のご注意 必ずお守りください


ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。


 **注意** 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。


■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

 **必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。**

 **してはいけない「禁止」内容を説明しています。**


注意


 **改造や分解をしないこと**
本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。

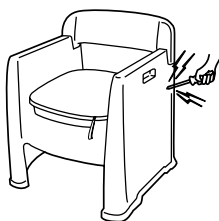

使用者が用便等の際、自分自身の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添うこと



 **スライド式座面の開閉は、必ず持ち手を持って行うこと**
別の部分を持って行うと指をはさむ原因になります。

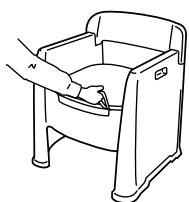

背もたれがしっかり固定されているか確認すること
身体が不安定な状態となり、けがの原因になります。

スライド式座面やひじ掛けの上に立ったりしないこと
転倒し、けがの原因になります。





必ず平坦な場所で使用すること


子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと

直射日光が当たる場所や、火気に近づけないこと

火災や変形の原因になります。

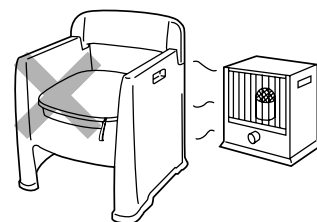



 **背もたれを手すり代わりに持たないこと**
転倒し、けがの原因になります。

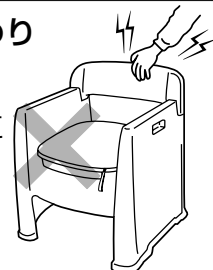


お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

体重が100kgを超える方は使用しないこと
本体が破損する恐れがあります。


各部のなまえ

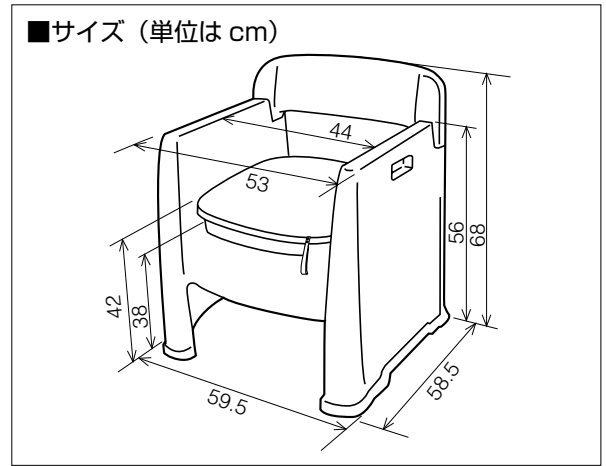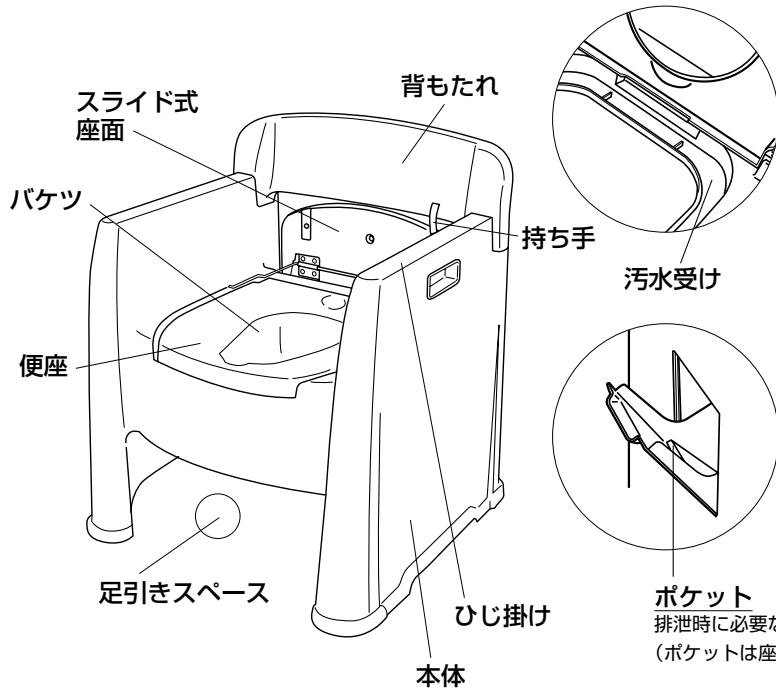

ポケット
排泄時に必要な備品を収納できます。
(ポケットは座って右側にあります。)

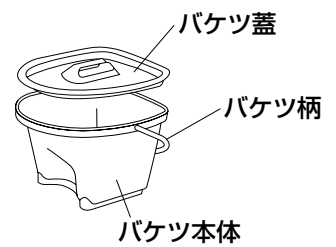

■部材・付属品

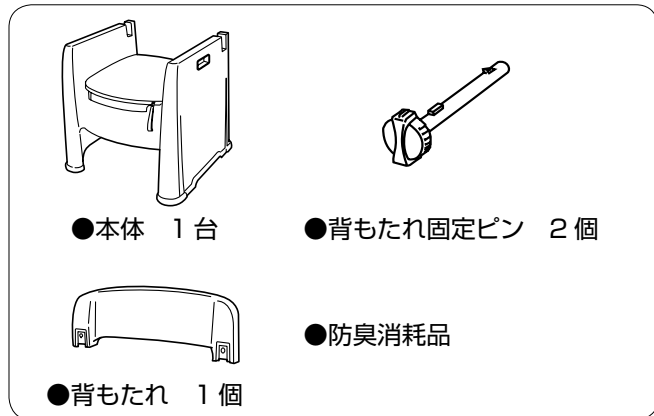

■仕様

| 品名 | 背付ポータブルトイレ楽立 AD |
|-------|--|
| 材質 | 本体・背もたれ・便座 } ポリプロピレン バケツ・ポケット } 座面張り材/合成皮革 (塩化ビニル) |
| 寸法 | 59.5 × 58.5 × 高さ 68cm (便座までの高さ 38cm) |
| 重量 | 約 6.9kg |
| バケツ容量 | 10 ℓ |

廃棄上のご注意 おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

特長


- トイレとして使用しない時は、椅子として使えるクッション性のある座面を採用。
スライド式座面は用便のときじゃまにならないよう、本体後部にスライドさせることが可能。背もたれを常に使用でき、座面の裏側が背中にあたらないため衛生的です。持ち手にはループしたヒモを採用。筋力の低下した方でもラクに開閉できます。また、持ち手は左右どちらでもつけ替え可能で、使いやすい設計をしています。
- 本体前面に足を引けるスペースがあり、立ち上がりやすくなっています。
- スライド式座面・便座は着脱可能。すみずみまでお手入れできるので、とても衛生的です。
- 排泄時に必要な備品を収納することができるポケット付。
- 本体のバケツ受け周辺に溝 (汚水受け) を設けているので、尿が床へこぼれにくい構造になっています。
- 便座は座り心地を考慮した形状で、抗菌仕様。
- 本体は積み重ねて保管することができます。(背もたれ・ポケット・バケツを取り外す必要があります)

使いかた



組立て方法

背もたれを固定する

- ①背もたれの平らな面が前側になるようにして、ひじ掛け後方にある凹部にはめ込みます。
- ②本体後部から背もたれ固定ピンで、左右2カ所しっかり固定します。
背もたれ固定ピンの取り付けは、背もたれ固定ピン取り付け穴につまみのマークを上にして差し込み、右に180°回転させ、背もたれを固定します。

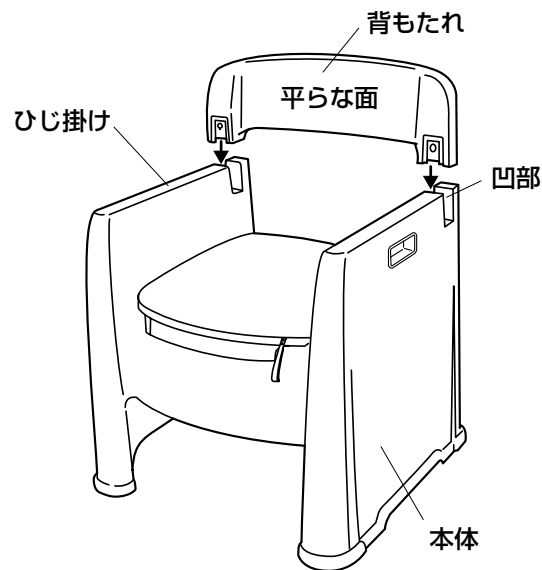



注意 背もたれ固定ピンで背もたれを必ず固定すること
背もたれが外れ、不安定になり、けがの原因になります。

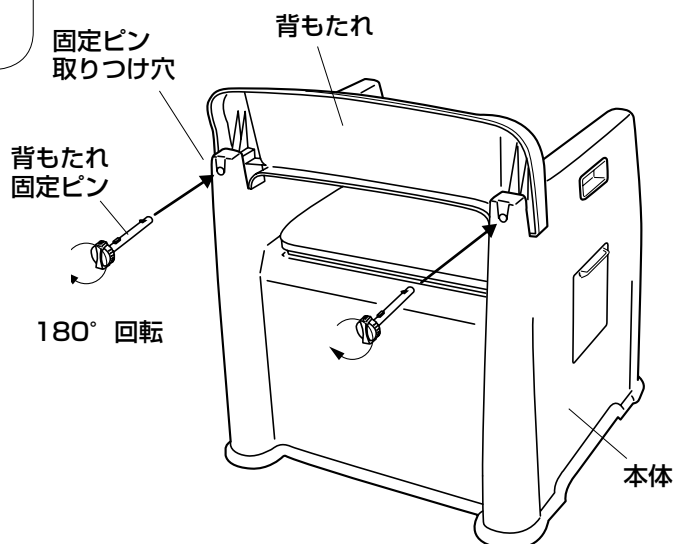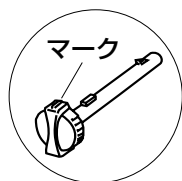

スライド式座面の持ち手のつけ替え方法

本体を箱から取り出した時、スライド式座面の持ち手は、本体に向かって右側にセットされていますが、ご使用される方の使い勝手に合わせて、持ち手を左右つけ替えることができます。

- ①本体からスライド式座面を取り外します。
(スライド式座面の取り外し方法は、お手入れの方法を参照してください。)
- ②スライド式座面の持ち手を固定しているビス2本をプラスドライバーで取り外します。
- ③持ち手を位置替えたい側に、スライド式座面の持ち手固定穴と持ち手の穴を合わせセットし、上で取り外したビス2本をプラスドライバーでしっかり取り付けます。

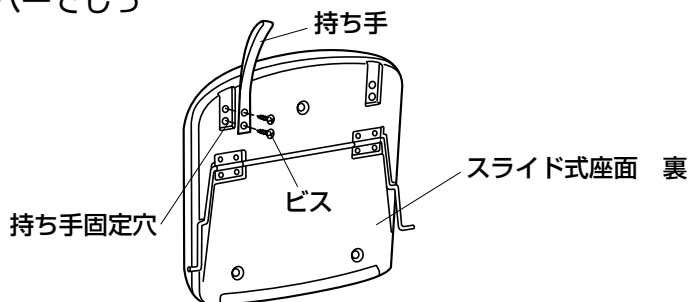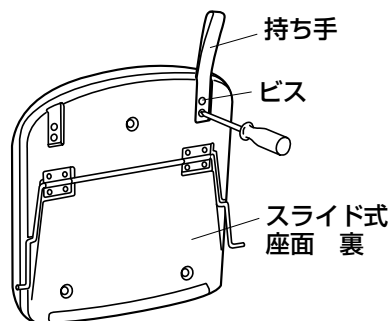

使いかた


前準備

●防臭効果を高めるために

バケツに水を約2ℓ（バケツ内側の2と表示してある線まで）と付属の防臭消耗品を入れ、バケツを本体にセットしてください。

※付属の防臭アイテムのほかにも、さまざまな防臭アイテムをご使用いただけます。（別売品）

詳しくは クリック

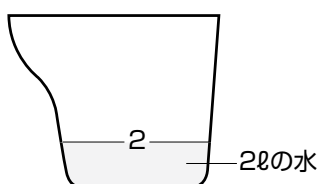

※この便座には市販のO型便座カバーを取りつけることができます。便座カバーは、本体から便座を取り外して取りつけてください。便座の裏側後部には左右に突起がついていますので、この突起に便座カバーの縁を引っかけて、それから便座全体にカバーをかぶせてください。

ただし、市販の便座カバーの中には、形状によって一部取り付けできないものもあります。

※便座に座る前に用便されてしまう場合もあります。あらかじめポータブルトイレ用防水マット（別売品）を敷いておくと、よりお部屋の清潔さが保たれ安心です。

使用方法

スライド式座面の持ち手を持ってスライド式座面を後部にスライドさせ、便座を上げ、バケツの蓋を外して使用します。スライド式座面を戻すときは、持ち手を手前に引くようにします。



使用後の処理方法

●汚物の処理について

ポータブルトイレからバケツを取りだして、汚物をトイレに流してください。



お手入れの方法

1 普段のお手入れは

いつまでも気持ちよくお使いいただくために、小まめに汚れを落としてください。

汚れはスポンジかやわらかい布に、住居用洗剤（弱アルカリ性・中性）をふくませてふきとってください。


お手入れの方法

2 少しひどい汚れには


便座・スライド式座面は本体から取り外すことができます。
汚れがひどくなった時は、下記の手順に従い取り外してください。

取り外しかた

- ①本体からバケツを取り出します。
- ②便座の取り外し
便座を上げ、本体を押さえながら、片側ずつ強く引っ張り取り外します。
- ③スライド式座面の取り外し
本体の左右にあるスライド式座面の金属製アームを片側ずつ内側に引っ張り取り外します。

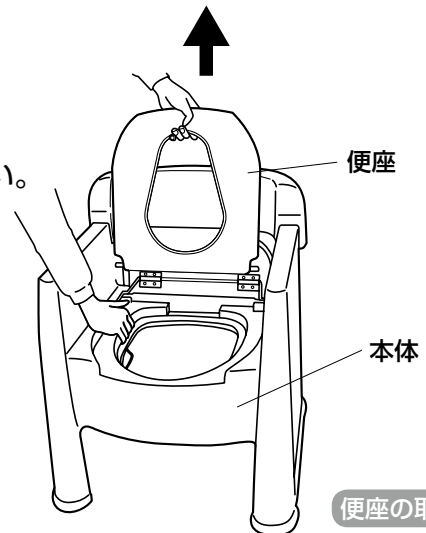

便座の取り外し

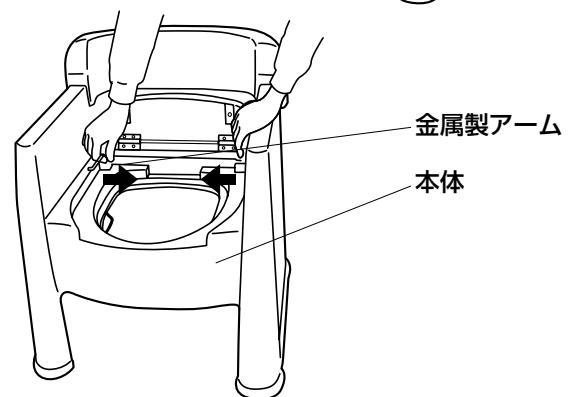


スライド式座面の金属製アームの取り外し

取り付けかた

- ①スライド式座面の取り付け
スライド式座面の金属製アームを片側ずつ本体左右の固定穴に取り付けます。
- ②便座の取り付け
便座を本体の便座固定部（凹部）に垂直になるようにして片側ずつ押し込んで取り付けます。
- ③バケツを本体にセットします。



※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

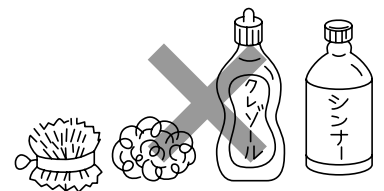

保証とアフターサービス よくお読みください

■保証書

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

■修理を依頼される時

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書（取扱説明書）を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店にご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

1. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
2. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様相談室にご相談ください。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 3) 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
 - 4) 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。
 - 6) 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障または損傷。
 - 7) クッションやすべり止めなど消耗品の損傷及び汚れ。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
7. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

<個人情報の取扱いについて>

- 1) 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 2) 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

| | |
|---------|------------|
| ★お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年 |
| お客様 | ご住所 〒 |
| | ご芳名 TEL |
| ★販売店 | 住所 〒 |
| | 店名 TEL |

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階 TEL (03) 3502-1448
FAX (03) 3502-1452

東京支店 ☎(03) 3502-1422 仙台支店 ☎(022) 291-5475
大阪支店 ☎(06) 6448-5127 広島支店 ☎(082) 245-7100
名古屋支店 ☎(052) 203-0396 札幌営業所 ☎(011) 709-6011
福岡支店 ☎(092) 741-1411