

ポータブルトイレSP/Y取扱説明書

このたびはポータブルトイレSP/Yをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

注意 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。


■お守りいただきたい内容の種類を、下の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

❗ 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。 ⚡ してはいけない「禁止」内容を説明しています。

注意

	改造や分解をしないこと 本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。		蓋の上に立ったり座ったり、よりかからないこと 転倒し、けがの原因になります。
	使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店やケアマネジャーなどの専門家に相談すること		直射日光が当たる場所や火気に近づけないこと 火災や変形の原因になります。
	使用者が用便等の際、自分自身の身体を十分に安定させられない場合は、介助者が必ず付き添うこと		バケツの中に水や汚物を入れたまま、本体を移動させないこと 内容物がこぼれ、服や床などを汚す恐れがあります。
	必ず平たんな場所で使うこと		お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと 塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、殺虫剤等は絶対に使用しないこと プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。
			体重が100kgを超える方は使用しないこと 本体が破損する恐れがあります。
			子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと

各部のなまえ

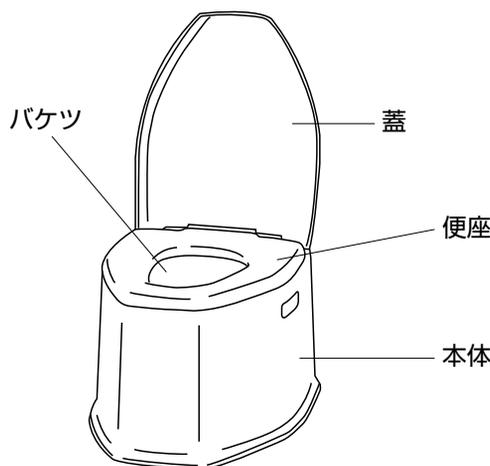

仕様

品名	ポータブルトイレSP/Y	
材質	本体・蓋・便座・バケツ蓋	ポリプロピレン
	バケツ	ポリエチレン
	バケツ柄	ステンレス
寸法	幅41×奥行50×高さ32cm (便座までの高さ30cm)	
重量	約3kg	
バケツ容量	約12L	

廃棄上のご注意 おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

使いかた

前準備

- 防臭効果を高めるために
バケツに水を約2ℓ（バケツ内側の2と表示してある線まで）
入れ、付属の防臭消耗品を入れてください。
ポータブルトイレ用防臭剤や防臭液、消臭剤フォーム
タイプもご使用いただけます。（別売品）

※便器に座る前に用便されてしまう場合もあります。
あらかじめポータブルトイレ用消臭・防水シート（別売品）を敷いておくと、よりお部屋の清潔さが保たれ安心です。

使用方法

- 蓋を開け、便座を上げバケツの蓋を外して使用します。
※バケツ内へは、ティッシュペーパーなどトイレットペーパー以外のものは入れないこと。
トイレで処理する際、詰まる原因になります。

使用後の処理方法

- 汚物の処理について
ポータブルトイレからバケツを取りだして、汚物をトイレに流してください。



お手入れの方法

1 普段のお手入れは


いつまでも気持ちよくお使いいただくために、小マメに汚れを落としてください。
汚れはスポンジかやわらかい布に、住居用洗剤（弱アルカリ性・中性）をふくませてふきとってください。

2 少しひどい汚れには

便座・受け板は、本体から取り外すことができます。汚れがひどくなった時は、取り外して、水洗いしてください。



※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、殺虫剤等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

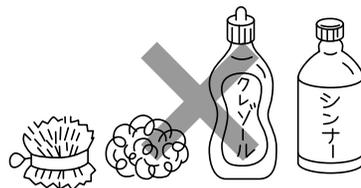

●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

10.08

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL (03) 5420-1556

FAX (03) 5420-7750

東京支店 ☎(03)5420-1562

仙台支店 ☎(022)291-5477

大阪支店 ☎(06)6448-5127

広島支店 ☎(082)245-7100

名古屋支店 ☎(052)203-0396

札幌営業所 ☎(011)709-6011

福岡支店 ☎(092)741-1411