

# ポータブルトイレSP取扱説明書

このたびはポータブルトイレSPをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。  
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告** 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

**注意** 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。


■お守りいただきたい内容の種類を、下の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

**!** 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。   してはいけない「禁止」内容を説明しています。

### 注意

	<b>改造や分解をしないこと</b> 本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。		蓋の上に立ったり座ったり、よりかからないこと 転倒し、けがの原因になります。
			直射日光が当たる場所や火気に近づけないこと 火災や変形の原因になります。
	使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店やケアマネジャーなどの専門家に相談すること		バケツの中に水や汚物を入れたまま、本体を移動させないこと 内容物がこぼれ、服や床などを汚す恐れがあります。
			お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと 塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、殺虫剤等は絶対に使用しないこと プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。
<b>!</b>	使用者が自分自身の身体を十分に安定させられない場合は、介助者が必ず付き添うこと		体重が100kgを超える方は使用しないこと 本体が破損する恐れがあります。
	必ず平坦な場所で使うこと		子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと

## 各部のなまえ

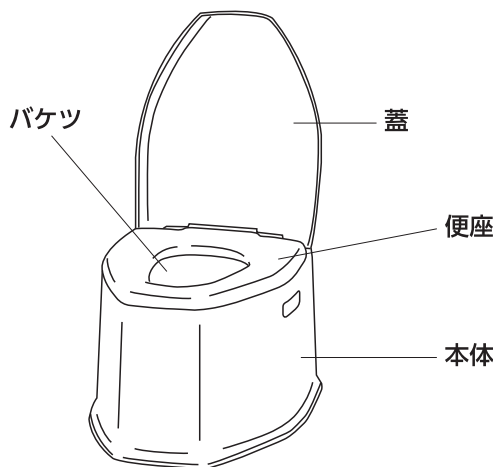

### 仕様

品名	ポータブルトイレSP	
材質	本体・蓋・便座・バケツ蓋・バケツ柄	ポリプロピレン
	バケツ	ポリエチレン
寸法	幅41×奥行50×高さ32cm (便座までの高さ30cm)	
重量	約3kg	
バケツ容量	約12L	

### 廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

# （ 使いかた ）

## 前準備

### ●防臭効果を高めるために

バケツに水を約2ℓ（バケツ内側の2と表示してある線まで）入れ、付属の防臭消耗品を入れてください。  
ポータブルトイレ用防臭剤や防臭液、消臭剤フォームタイプもご使用いただけます。（別売品）

※便器に座る前に用便されてしまう場合もあります。あらかじめ防水マットなど（別売品）を敷いておくと、よりお部屋の清潔さが保たれ安心です。

## 使用方法

蓋を開け、便座を上げバケツの蓋を外して使用します。

※バケツ内へは、ティッシュペーパーなどトイレットペーパー以外のものは入れないこと。  
トイレで処理する際、詰まる原因になります。

## 使用後の処理方法

### ●汚物の処理について

ポータブルトイレからバケツを取りだして、汚物をトイレに流してください。



# （ お手入れの方法 ）

## 1 普段のお手入れは

いつまでも気持ちよくお使いいただくために、小まめに汚れを落としてください。


汚れはスポンジかやわらかい布に、住居用洗剤（弱アルカリ性・中性）をふくませてふきとってください。

## 2 少しひどい汚れには

便座は、本体から取り外すことができます。汚れがひどくなった時は、取り外して、水洗いしてください。



※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと  
※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、殺虫剤等は絶対に使用しないこと  
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

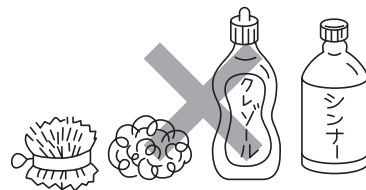

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見・お問い合わせは

**お客様相談室**

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00  
（12:00～13:00はのぞく）

製造・発売元



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索