

# 家具調トイレ セレクトR 自動ラップ

ノーマルタイプ / はねあげタイプ

共通簡易マニュアル

## 使用前準備のしかた

### 1. リモコンのランプとフィルムの状態を確認します

#### ①リモコン


**1**  
電源ランプが  
緑色に点灯



#### ②ラップユニット内のフィルム

**2**  
穴が空いて  
いない

**3**  
両側の  
ローラーに  
挟まっている  
フィルムの取り付けた  
→取扱説明書 p20

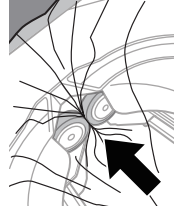

**4**  
「STOP」マーク  
が出ていない  
フィルム交換のしかた  
→取扱説明書 p27



### 2. 折れ座面を開いて凝固剤を計量カップ1杯分入れて用を足します



#### 注意

**凝固剤は計量カップ1杯を超える量を投入しないこと**  
大量に投入すると凝固剤がローラーに巻き込まれ、動かなくなるなど製品故障の原因になります。

**凝固剤を入れずに使用しないこと**  
汚物がもれ、製品故障の原因になります。

※その他、凝固剤の注意は、凝固剤の袋に記載の内容をよくお読みください。

こんなときには…

- リモコンの作動ボタンを押してもラップしない →取扱説明書 p47
- うまくラップできない →取扱説明書 p47、48
- 床やラップ受けトレイへ汚物がもれた →取扱説明書 p47、48
- リモコンのエラーランプが赤く点滅している →取扱説明書 p46 をご確認ください。

TOAGOSEI グループ

**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部  
〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**  
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

#### ■販売店


# 汚物処理のしかた

## 1. ラップユニットを作動させます

1

トイレットペーパーを  
便器内中央部へ  
収まるように捨てる

※点線の範囲内を目安に  
入れてください。

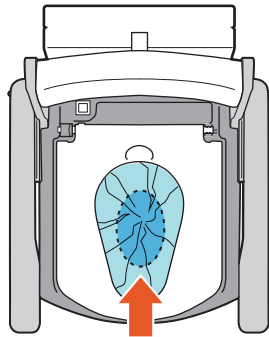

2

人が座っていない  
状態で、リモコンの  
作動ボタンを  
約1秒押す



3



作動中ランプが緑色に点灯し、ラップ終了までの  
目安時間が表示されます。(通常約90秒)  
リモコンの作動中ランプが消灯し、ラップされた  
汚物が自動的に切り離されて動作終了です。

**便座に腰かけた状態でラップユニットを  
作動させないこと**

フィルムが破れたり、ラップユニットが作動せず、  
ラップ不良の原因になります。

**注意**

**ラップ動作が終了するまでフィルムに  
触れないこと**

正しく動作せず、ラップされないために汚物がもれて  
製品故障の原因になります。

**ラップが切り離されるまで続けて使用  
しないこと**

汚物がもれて製品故障の原因になります。

## 2. ラップされた汚物を捨てます

1

作業中ランプの  
消灯を確認



2

ラップ受けトレイ  
を引き出して  
汚物を処分する



3

ラップ受けトレイ  
を元の位置に戻す



・ラップした汚物はオムツの分類を参考にするなど、お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

**注意**

**ラップ受けトレイに  
ラップされた汚物を  
ためないこと**  
製品故障の原因になります。

### ●大便の処理について

大便はラップされたフィルムから取り出し、トイレに流してください。

※トイレの配管が詰まる原因になりますので、凝固剤をトイレに流さないでください。

※大便をトイレに流した後は、大便に付着した凝固剤が詰まりの原因にならないよう、必ず水だけで2回以上流し、完全に流れたことを確認してください。