



安^{あんじゅ}寿

シャワーベンチMini/Mini S 背付シャワーベンチMini/Mini S

共通取扱説明書

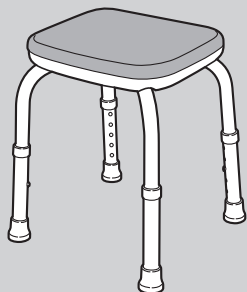

シャワーベンチ Mini / Mini S

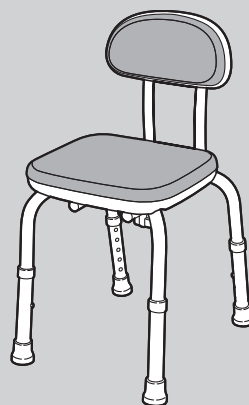

背付シャワーベンチ Mini / Mini S

最大使用者体重：100kg

ご使用前にこの取扱説明書と保証書をお読みください。

このたびは本製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
快適な入浴をお楽しみください。

- 正しくお使いいただくため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書を読んだあとは必ず保管してください。

もくじ

必 ず お 読 み く だ さ い	安全上のご注意	1・2
	各部のなまえ ■仕様/付属品/寸法図	3
組 立 て か た	組み立てかた	4
使 い か た	使いかた ■ご使用前に(点検) / 使いかた	5
	お手入れの方法	5・6
困 っ た と き	交換部品	6
	保証とアフターサービス	6
	保証書	7

SIAA
防カビ加工




保存版
(保証書付)

ARONKASEI CO.,LTD.

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■お守りいただきたい内容の種類を、下の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

- 
必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。
- 

してはいけない「禁止」内容を説明しています。

警告 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

使用前にネジのゆるみなど、各部に異常がないか点検し使用すること


本体が不安定となり、けがの原因になります。



詳しくは… 5ページへ 


必ず強く平坦で安定した場所で使用すること

やわらかいマットやすのこ等の段差がある不安定な場所で使用すると転倒やけがの原因になります。

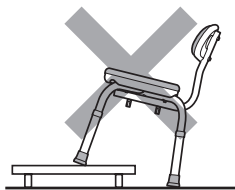


**4本の脚部は全て同じ高さに設定すること
高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び出して固定されているか必ず確認すること**

本体が不安定となり、転倒やけがの原因になります。

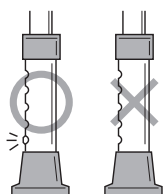

分解や改造をしないこと

本体機能が正常にはたらかず、けがの原因になります。

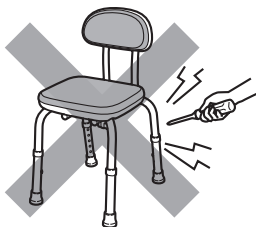

体重が 100kg を超える方は使用しないこと



浴室内で使用するシャワーベンチ以外の用途で使用しないこと

子どもを遊ばせたりしないこと

商品梱包用のポリ袋は幼児の手が届くところに置かないこと

幼児がかぶると窒息するおそれがあります。

本体を踏み台代わりにして、座面の上に立ったりしないこと

転倒やけがの原因になります。




- 本製品を手すり代わりにして身体を支えたり、移動しないこと
- 背もたれを支えにして、立ち座りしないこと

転倒やけがの原因になります。




上体を後方に大きくのけぞり、背もたれに体重をかけすぎないこと

転倒やけがの原因になります。

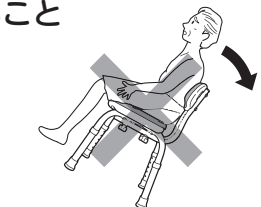

人が座っている状態で、本体を持って移動させたり、引きずったりしないこと

本体が破損したり、転倒やけがの原因になります。

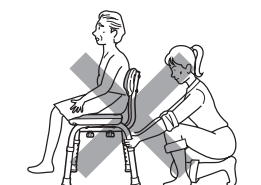

安全上のご注意



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

使用者が自分の体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添うこと




使用前、使用後は床やベンチについた石鹸やシャンプーを洗い流すこと

足元や座面などがすべりやすくなり、転倒やけがの原因になります。




背もたれはノブボルト4本でしっかりしめつけること

詳しくは… 4ページへ

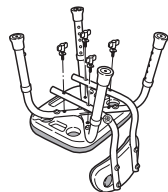

ベンチを浴槽の中など水の中に沈めて使用しないこと


パイプが腐食により破損したり、設置が不安定となり、けがの原因になります。

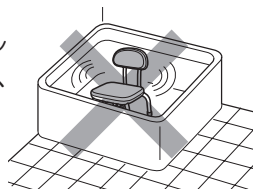

サウナで使用しないこと

脚ゴムが外れたまま使用しないこと

転倒やけがの原因になります。また、床に傷が付く原因になります。

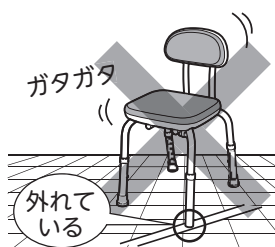

●お手入れ・保管時の注意●

塩ビ製フロアマット（床）の上に長期間放置しないこと

フロアマットや脚ゴムが劣化及び変色する恐れがあります。


屋外に放置したり、直射日光に当たったりしないこと

劣化および変色の原因になります。



熱湯をかけたり、ストーブなどの火気に近づけないこと

火災や変形、変色の原因になります。

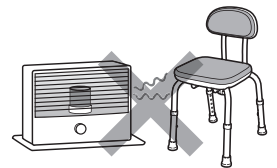


塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒及び温泉水や硫黄系の入浴剤をかけての使用は行わないこと

パイプが腐食により破損し、けがの原因になります。消毒はアルコールを使用してください。


お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと

製品が劣化または破損し、けがの原因になります。

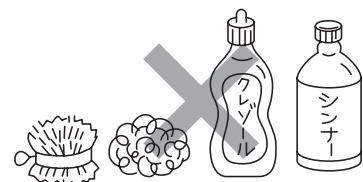


各部のなまえ

シャワーベンチ Mini / シャワーベンチ Mini S

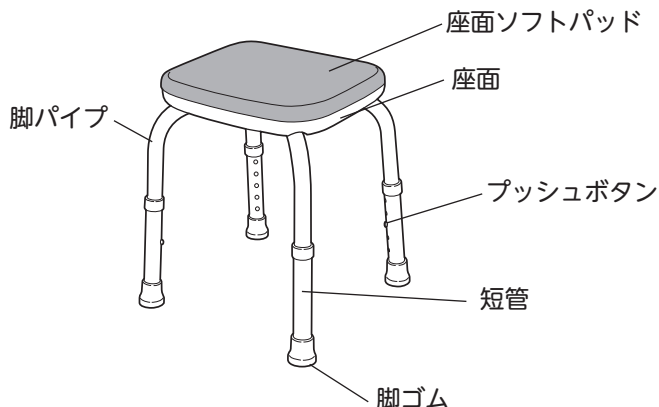

背付シャワーベンチMini / 背付シャワーベンチ Mini S

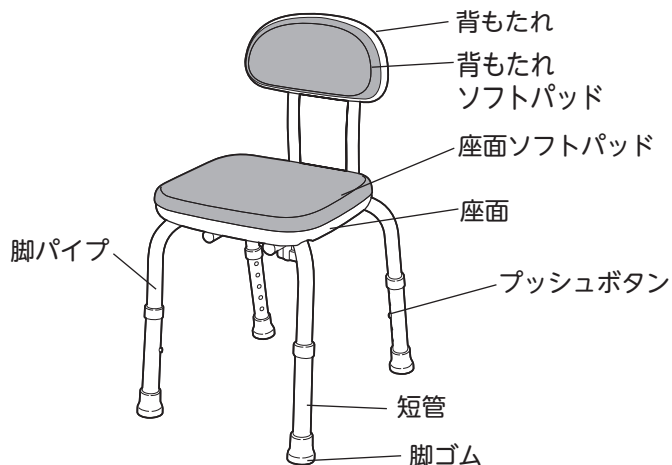


仕様

構成部材	部品名		材質
		座面・背もたれ	
	座面ソフトパッド・背もたれソフトパッド		EVA樹脂 (防カビ加工)
	脚パイプ・短管		アルミニウム
	プッシュボタン用バネ		ステンレス
	金属部品		ステンレス・黄銅
	脚ゴム		合成ゴム (防カビ加工)
サイズ	シャワーベンチMini	幅37.5×奥行36×高さ35~45cm	
	背付シャワーベンチMini	幅37×奥行40×高さ59.5~69.5cm	
	シャワーベンチMini S	幅36×奥行34.5×高さ28~35.5cm	
	背付シャワーベンチMini S	幅36.5×奥行37×高さ52~59.5cm	
重量	シャワーベンチMini	約1.8kg	
	背付シャワーベンチMini	約2.5kg	
	シャワーベンチMini S	約1.6kg	
	背付シャワーベンチMini S	約2.3kg	
座面までの高さ	Mini シリーズ	約35~45cm (5段階/2.5cmピッチ)	
	Mini S シリーズ	約28~35.5cm (5段階/2.5cmピッチ)	

背付シャワーベンチMini / 背付シャワーベンチMini S 付属品





SIAA
防カビ加工
JP0512240A0003S


SIAA 防カビ剤ポジティブリスト 第 JP0501016A0001P 号使用
防カビ加工部位：
座面ソフトパッド
背もたれソフトパッド
脚ゴム
防カビ加工方法：練りこみ

⚠ 注意事項

- ・防カビ試験は、SIAA 指定法にて実施しています。
- ・防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- ・使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- ・SIAA の安全性基準に適合しています。

廃棄上のご注意 お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

商品寸法図 (単位：cm)

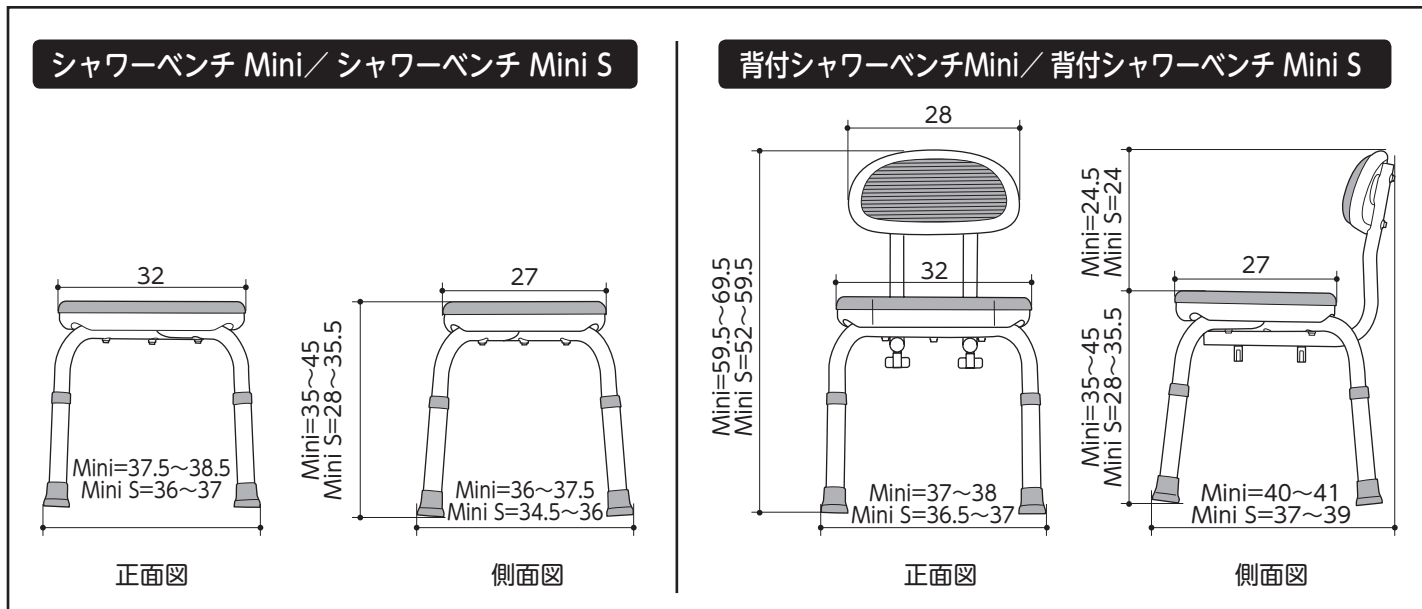


組み立てかた

背付シャワーベンチ Mini / Mini S 背もたれの取り付けかた

本体を裏返し、座面裏面の「後」と表記している側に背もたれがくるようにして、背もたれパイプの固定用穴を本体脚部にあるナットに合わせ、付属のノブボルトにバネ座金と波形座金をセットし、4箇所仮止めした状態で最後にしっかり固定してください。

※背もたれを取り付ける方向を間違わないように注意してください。

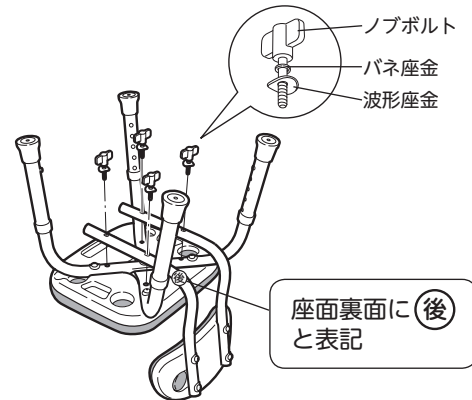


ノブボルト4本でしっかりしめつけること

座面の高さ調節方法

座面の高さは使用される方の体格や状況に合わせて調節できます。

- Mini 5段階〈約35～45cm/2.5cmピッチ〉……使用対象者の目安：身長150cm以上の方
- Mini S 4段階〈約28～35.5cm/2.5cmピッチ〉…使用対象者の目安：身長150cm以下の方

高さの設定などは、お買い上げの販売店やケアマネジャーなど専門家に相談することをおすすめします。

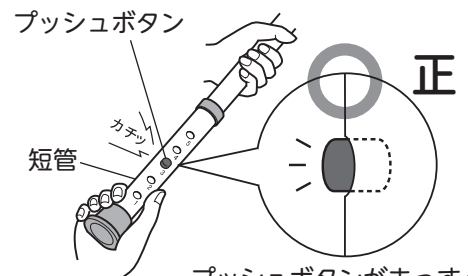


プッシュボタンがまっすぐしっかり出ていること

調節は、脚部にあるプッシュボタンを押しながら短管を上下に動かし、設定したい高さの穴に合わせてください。プッシュボタンが短管の穴から確実に飛び出せばセット完了です。

※高さ調節の目安（高さ表示番号と座面高さ）

	高さ表示番号	1	2	3	4	5
座面高さ	Mini	35cm	37.5cm	40cm	42.5cm	45cm
	Mini S	28cm	30.5cm	33cm	35.5cm	

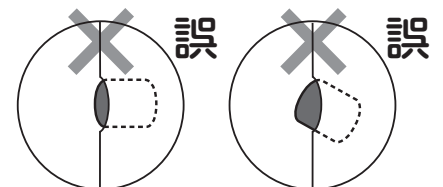


プッシュボタンが少しだけ出ている

プッシュボタンがななめに出ている



- 4本の脚部は全て同じ高さに設定すること
- 高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び出して固定されているか必ず確認すること

本体が不安定となり、転倒やけがの原因になります。

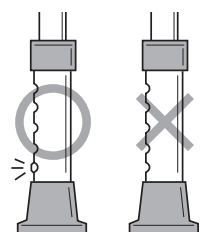

使いかた

ご使用の前に


(点検)

すべてのノブボルトがゆるんでいないか、必ず点検してください。

① “ゆるみ”がないか製品をゆらして確認。




② ゆるんでいたノブボルトをしめなおしてください。

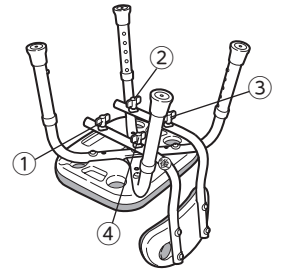

以上の対応でガタつきが直らない場合はただちに使用を止め、お買い上げの販売店や弊社「お客様相談室」までご相談ください。(お客様相談室番号：0120-86-7735)

使いかた

座面の中央に座ってください。

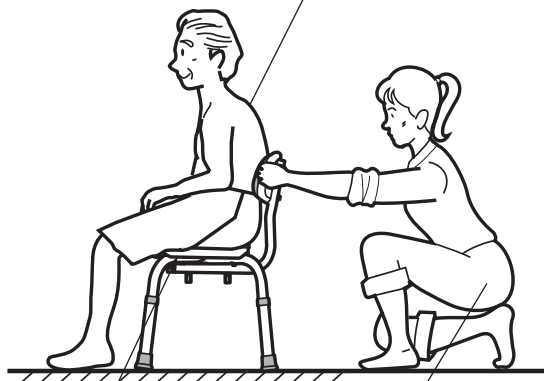


石鹸などがついていないことを確認してください。

使用者の身体状況(座位保持や立ち座りが不安定)などによっては介助者が付き添ってください。

下記の使いかたをすると、転倒やけがの原因になります。

背もたれに体重をかけすぎないこと

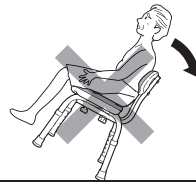


背もたれを支えにしないこと



警告

人が座っている状態で、本体を引きずらないこと

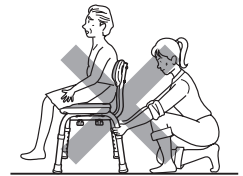

お手入れの方法

ソフトパッドの着脱方法


座面ソフトパッド・背もたれソフトパッドは、本体から取り外して両面をすすぎ、かげ干ししてください。

座面ソフトパッド・背もたれソフトパッドの取り外し

座面・背もたれの裏面からソフトパッドを押すと、取り外すことができます。

座面ソフトパッド・背もたれソフトパッドの取り付け

ソフトパッド裏面の凸部をそれぞれ座面・背もたれの穴に合わせ、上からしっかり押さえるだけで取り付けることができます。

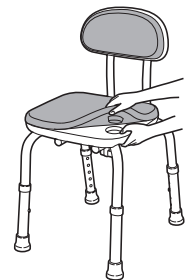

注意

ソフトパッドがしっかり固定されているか確認すること
転倒やけがの原因になります。



お手入れの方法

本体及びソフトパッドの洗浄方法


- 中性洗剤のうすめ液をスポンジか、やわらかい布に含ませ汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、かげ干しか、やわらかい布で空ぶきしてください。
- 消毒を行う場合は、アルコールを使用してください。



注意


- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- 塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと

製品が劣化または破損し、けがの原因になります。

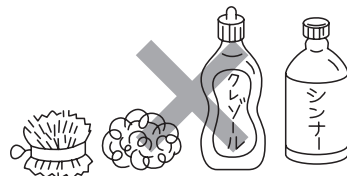


●スライド脚のお手入れ

- ※長期間使用していると、高さ調節用のプッシュボタンのまわりに石鹸などが付着し動かなくなることがありますので、定期的に汚れを落とし、プッシュボタンが作動するか確認してください。
- 短管を外したり、スライドさせたりしながら行うとより効果的です。

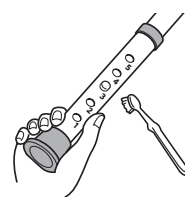

交換部品

座面ソフトパッド・背もたれソフトパッド・脚ゴムは消耗品ですので汚れたり、破損した場合はお買い求めになった販売店にお問い合わせの上、ご購入ください。

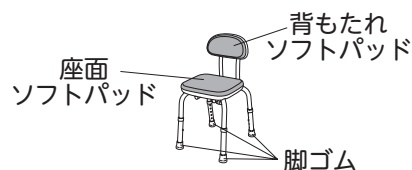

保証とアフターサービス よくお読みください

商品のご購入に関するお問い合わせ、ご相談は…お買い求めの販売店へ
商品の仕様等に関するお問い合わせ、ご相談は…下記お客様相談室へ

不具合が発生したとき

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、製品に保証書(取扱説明書)を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。部品供給、また修理対応期間はメーカー製品廃番後3年となります。ただし、期間内でも破損箇所によっては、部品供給、または修理できないケースがございますのでご了承ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

アロン化成株式会社

フリーダイヤル

お客様相談室 ☎ **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の
月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00 は除く)

保証とアフターサービス よくお読みください

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

1. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
2. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様相談室にご相談ください。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 3) 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
 - 4) お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。
 - 5) 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷。
 - 6) ソフトパッドや脚ゴムなど消耗品の損傷及び汚れ。
 - 7) 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈個人情報の取扱いについて〉

- 1) 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。
なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 2) 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	ご住所 〒
	ご芳名 TEL
★販売店	住所 〒
	店名 TEL

★ 印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

この保証書はご使用できません

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見
・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元

 TOAGOSEI グループ

 アロン化成

アロン化成株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索

ライフサポート事業部

21.12 919031-2