

# 吸着すべり止めマット

正しくお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 取扱説明書

### 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



#### 注意

誤った使いかたをすると「傷害又は財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を含んで説明しています。



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



#### 注意

	<b>必ず浴槽内でのみ使用すること</b>		<b>飛び乗ったりしないこと</b> マットが動き、転倒し、けがの原因になります。
	<b>入浴する前に吸盤が吸着しているか必ず確認すること</b> マットが滑り、転倒し、けがの原因になります。		<b>底面がざらついた浴槽や木製の浴槽には吸盤が効かないため、使用しないこと</b>
	<b>取り外す場合はゆっくりとめくこと</b> 無理に引っ張ると破損する恐れがあります。		<b>石けんやシャンプー、入浴剤等がマットや浴槽に付いた状態で使用しないこと</b> 滑り、転倒し、けがの原因になります。
	<b>使用後は浴槽から取り出すこと</b> 湯水につけたままでは製品の劣化が早まり、変形または破損する恐れがあります。		<b>高温になる場所に長時間放置しないこと</b> マットが変形し、使用できなくなります。
	<b>使用前にマットを置く場所の汚れやぬめりを取り除くこと</b> 吸着力が弱まり転倒やけがの原因になります。		<b>お湯を循環させている浴槽(24時間風呂)で使用する場合、必要時以外はマットを浴槽の底に敷かないこと</b> 汚れやぬめりが発生し、転倒やけがの原因になります。

### 使いかた

- 浴槽の底面に敷いてお使いください。
- マットの裏面に付いている吸盤を押さえつけるようにして、しっかり吸着させてください。
- 取り外す場合は、マットの端を軽くめくだけで吸盤がはがれます。

### お手入れの方法

中性洗剤をスポンジかやわらかい布にふくませて、汚れを取り除いたあと、きれいな水で洗剤を洗い流してください。しっかり水気を切り、かげ干しか、乾いた布で乾かしてください。

#### △ 使用上のご注意

- ※火のそばに置かないでください
- ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- ※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、漂白剤等は絶対に使用しないこと  
製品が劣化・変化・色おちする恐れがあります。
- ※直射日光があたる場所に長時間放置したり、乾燥器具等の火気に近づけないこと

#### 製品仕様(1枚あたり)

サイズ:28×36×厚さ0.8cm  
重量:約220g

#### 品質表示

原料樹脂:エラストマー  
耐熱温度:80度

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**  
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)



フィルム:PP

日本製



**アロン化成株式会社**



箱



4 970210 049617

ライフサポート事業部