

取扱説明書

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

❗ 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。 ⚡ してはいけない「禁止」内容を説明しています。

<p>警告 誤った使い方をすると「死亡または重症を負うなどを負う可能性が想定される」内容を説明しています。</p>	
<p>浴槽内でのみ使用すること</p> <p>入浴時のみ、マットを使用すること お湯に長期間沈め続けると、汚れやぬめりが発生して吸盤が十分効かない可能性があり、転倒やけがの原因になります。 ※お湯を循環させている浴槽（24時間風呂）で使用する場合も入浴時以外は取り出してください。</p>	<p>使用前にマットを置く場所やマットに付着したぬめりや石けんなどの汚れを取り除くこと 吸着力が弱まり転倒やけがの原因になります。</p> <p>足全体をマットに乗せて使用すること マットからはみ出た箇所がすべると、転倒やけがの原因になります。</p> <p>上から足を乗せるようにして使用すること 飛び乗ったりするとマットがすべり、転倒やけがの原因になります。 ※すり足歩行の方はつまづかないよう注意してご使用ください。</p> <p>使用者が自身の身体を十分に安定させられない場合は、介助者が付き添うこと</p>
<p>入浴する前に全ての吸盤がしっかり吸着しているか確認すること 吸盤がしっかり吸着していないとマットがすべり、転倒やけがの原因になります。 ※マットに折れぐせがついていて吸盤が吸着しにくい場合は、平らにしてお湯に数時間沈めて折れぐせをとってください。</p>	<p>マットの上に「もの（浴槽台など）」を置いて使用しないこと マットの上の「もの」がガタついたり、ずれると、転倒やけがの原因になります。</p> <p>肌に異常があったときは使用しないこと 安全性の高い素材を使用していますが、肌に異常があった場合は、すぐに使用を中止してください。</p>
<p>吸盤が効かない浴槽で使用しないこと</p> <ul style="list-style-type: none"> 底面がざらついた浴槽 木製の浴槽 <p>マットがすべり、転倒やけがの原因になります。</p> <p>温泉や入浴剤の入った浴槽で使用しないこと マットがすべり、転倒やけがの原因になります。</p>	

❗ **注意** 誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

<p>使用後は浴槽から取り出すこと 湯水につけたままでは製品の劣化が早まり、変形や破損の原因になります。</p>	<p>取り外す場合はゆっくりとめくこと 無理に引っ張ると破損する恐れがあります。</p>
<p>次にあげるものでお手入れしないこと</p> <ul style="list-style-type: none"> シンナー・クレゾール・酸、アルカリ性洗剤、塩素系薬剤（洗剤）や熱湯による殺菌、消毒 磨き粉、タワシ、研磨剤入りのスポンジ、その他製品を傷つけるもの 温泉水、入浴剤をかけたお手入れ <p>劣化および変色の原因となります。</p> <p>お手入れに洗濯機や乾燥機を使用しないこと 劣化の原因となります。</p>	<p>直射日光があたる場所に長時間放置したり、ストーブ等の火気に近づけないこと マットが変形し、使用できなくなります。</p> <p>高温になる場所に長時間放置しないこと マットが変形し、使用できなくなります。</p> <p>浴槽に変色が見られた場合、使用しないこと 浴槽の材質、表面加工などの種類によってはまれに変色するおそれがあります。</p>

使いかた

- 浴槽の底面に敷いてお使いください。
- マットの裏面に付いている吸盤を押さえつけるようにして、しっかり吸着させてください
- 取り外す場合は、マットの端を軽くめくだけで吸盤がはがれます。

お手入れの方法

中性洗剤をスポンジか柔らかい布にふくませて、汚れを取り除いたあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、しっかり水気を切り、かげ干しか、柔らかい布で乾がきしてください。

<p>製品仕様（1枚あたり）</p> <p>サイズ：28×36×厚さ0.8cm 重量：約0.2kg 耐熱温度：80度</p>
--

<p>家庭用品品質表示</p> <p>原料樹脂：エラストマー 取扱い上の注意： 火のそばに置かないでください。</p>

※廃棄上のご注意：お住まいの地域の分別ルールに従ってください。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)



フィルム:PP

日本製



アロン化成株式会社




紙箱



ライフサポート事業部

吸着すべり止めマット S

和風タイプのお風呂にピッタリ!
(四角く比較的深い浴槽向き)

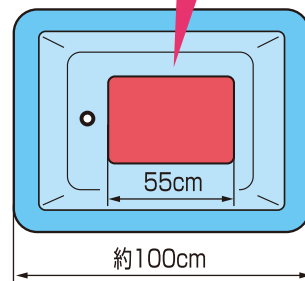

正しくお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

取扱説明書

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



注意

誤った使いかたをすると「傷害又は財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を含んで説明しています。



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



注意

<p>必ず浴槽内でのみ使用すること</p> <p>入浴する前に吸盤が吸着しているか必ず確認すること マットが滑り、転倒し、けがの原因になります。</p> <p>取り外す場合はゆっくりとめくこと 無理に引っ張ると破損する恐れがあります。</p> <p>使用後は浴槽から取り出すこと 湯水につけたままでは製品の劣化が早まり、変形または破損する恐れがあります。</p> <p>使用前にマットを置く場所の汚れやぬめりを取り除くこと 吸着力が弱まり転倒やけがの原因になります。</p>	<p>飛び乗ったりしないこと マットが動き、転倒し、けがの原因になります。</p> <p>底面がざらついた浴槽や木製の浴槽には吸盤が効かないため、使用しないこと</p> <p>石けんやシャンプー、入浴剤等がマットや浴槽に付いた状態で使用しないこと 滑り、転倒し、けがの原因になります。</p> <p>高温になる場所に長時間放置しないこと マットが変形し、使用できなくなります。</p> <p>お湯を循環させている浴槽(24時間風呂)で使用する場合、必要時以外はマットを浴槽の底に敷かないこと 汚れやぬめりが発生し、転倒やけがの原因になります。</p>
--	--

使いかた

●浴槽の底面に敷いてお使いください。●マットの裏面に付いている吸盤を押さえつけるようにして、しっかり吸着させてください。●取り外す場合は、マットの端を軽くめくだけで吸盤がはがれます。

お手入れの方法

中性洗剤をスポンジかやわらかい布にふくませて、汚れを取り除いたあと、きれいな水で洗剤を洗い流してください。しっかり水気を切り、かげ干しか、乾いた布で乾ぶきしてください。

⚠️ 使用上のご注意

- ※火のそばに置かないでください
- ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- ※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、漂白剤等は絶対に使用しないこと
- 製品が劣化・変化・色おちする恐れがあります。
- ※直射日光があたる場所に長時間放置したり、乾燥器具等の火気に近づけないこと

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎️ 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

日本製




4 970210 390313

製品仕様	品質表示
サイズ:55×36×厚さ0.8cm 重量:約430g	原料樹脂:エラストマー 耐熱温度:80度

吸着すべり止めマット M

洋風タイプのお風呂にピッタリ!
(長細く比較的浅い浴槽向き)

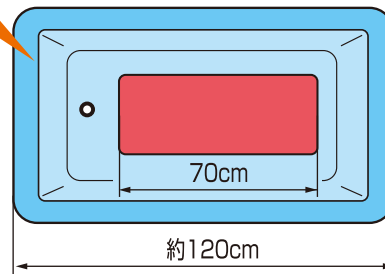

正しくお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

取扱説明書

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



注意

誤った使いかたをすると「傷害又は財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を含んで説明しています。



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。

注意

	必ず浴槽内でのみ使用すること		飛び乗ったりしないこと マットが動き、転倒し、けがの原因になります。
	入浴する前に吸盤が吸着しているか必ず確認すること マットが滑り、転倒し、けがの原因になります。		底面がざらついた浴槽や木製の浴槽には吸盤が効かないため、使用しないこと
	取り外す場合はゆっくりとめくこと 無理に引っ張ると破損する恐れがあります。		石けんやシャンプー、入浴剤等がマットや浴槽に付いた状態で使用しないこと 滑り、転倒し、けがの原因になります。
	使用後は浴槽から取り出すこと 湯水につけたままでは製品の劣化が早まり、変形または破損する恐れがあります。		高温になる場所に長時間放置しないこと マットが変形し、使用できなくなります。
	使用前にマットを置く場所の汚れやぬめりを取り除くこと 吸着力が弱まり転倒やけがの原因になります。		お湯を循環させている浴槽(24時間風呂)で使用する場合、必要時以外はマットを浴槽の底に敷かないこと 汚れやぬめりが発生し、転倒やけがの原因になります。

使いかた

●浴槽の底面に敷いてお使いください。●マットの裏面に付いている吸盤を押さえつけるようにして、しっかり吸着させてください。●取り外す場合は、マットの端を軽くめくだけで吸盤がはがれます。

お手入れの方法

中性洗剤をスポンジかやわらかい布にふくませて、汚れを取り除いたあと、きれいな水で洗剤を洗い流してください。しっかり水気を切り、かげ干しか、乾いた布で乾ぶきしてください。

使用上のご注意

- ※火のそばに置かないでください
- ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- ※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、漂白剤等は絶対に使用しないこと
製品が劣化・変化・色おちする恐れがあります。
- ※直射日光があたる場所に長時間放置したり、乾燥器具等の火気に近づけないこと

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

日本製



フィルム・PP



紙箱



4 970210 390344

製品仕様

サイズ:70×36×厚さ0.8cm
重量:約570g

品質表示

原料樹脂:エラストマー
耐熱温度:80度