



アプローチ用すり可変付エンドグリップ R 施工説明書

- このたびはアプローチ用すり可変付エンドグリップ Rをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- 施工前にこの施工説明書をよくお読み頂き、安全に正しく施工されるようお願いいたします。
- 取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全上のご注意




ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 警告** 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。
- 注意** 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。





■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示 (図記号) で区分し、説明しています。(下記は絵表示の例です)

- ❗ **必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。**
- 🚫 **してはいけない「禁止」内容を説明しています。**


警告

 改造や分解をしないこと けがや破損の原因になります。		転倒防止用ガードレールや防護柵、ベランダの柵、窓格子などや断崖地、転落の恐れのある場所などで使用しないこと 重大事故につながる恐れがあります。
 一般住宅に取り付ける歩行補助すり以外では使用しないこと 重大事故につながる恐れがあります。		取り付けは必ず指定寸法に従うこと 手すりが破損し、けがの原因になります。

注意

		<p>取り付けは必ず取付工事店が行なうこと 取り付けが不安定となり、けがの原因になります。</p> <p>必ず同梱の固定金具を使うこと 取り付けが不安定となり、けがの原因になります。</p> <p>必ず強度を確保できる地面に取り付けること 手すりが外れたり、取り付け面が壊れたりして、けがの原因になります。</p> <p>ガス・水道メーター及びガス管、水道管の位置を確認して施工すること 施工に支障のある場合は、手すりの位置をずらすか、ガス、水道メーター及びガス管・水道管の移設を行なってください。</p>
		<p>製品の取り付け後に、ぐらつきやガタつきが無く確実に固定されているか確認すること 手すりが外れたりして、けがの原因になります。</p> <p>アンカーボルトを取り付ける穴の周囲に必ずシーリング剤を塗布すること 手すりが外れたり、取り付け面が壊れたりして、けがの原因になります。</p> <p>製品に強い応力が加わった状態で無理に取り付けないこと 手すりが折れたり、外れたりしてけがの原因になります。</p> <p>埋め込み設置の場合は、養生期間を十分にとり、期間中は重い物をのせたり、手すりをゆすったりしないこと 手すりが外れたり、取り付け面が壊れたりして、けがの原因になります。</p>


各部のなまえ

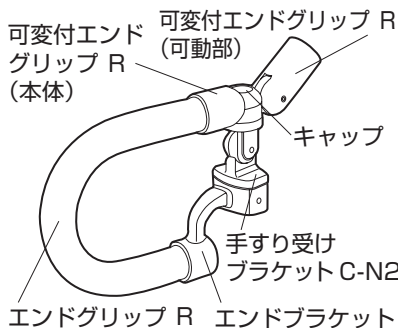

項目	部品名	材質
構成部品	本体・可動部	アルミ合金
	エンドブラケット	
	手すり受けブラケット C-N2	
	エンドグリップ R	ウッドパウダー混合半硬質樹脂/スチール
	キャップ	ポリプロピレン
	ねじ類	ステンレス
重量	1.2kg	


- ◇付属品
- 十字穴付き皿タッピンねじ (支柱固定用) 4.5×25mm 2本
 - 十字穴付き皿タッピンねじ (手すり固定用) 4.5×25mm 1本
 - 六角レンチ (部材固定用) 1本
 - キャップ 1個

商品寸法図

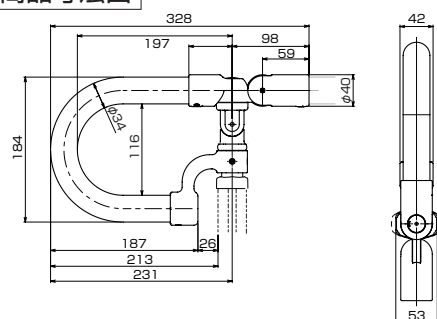


取り付けかた

①

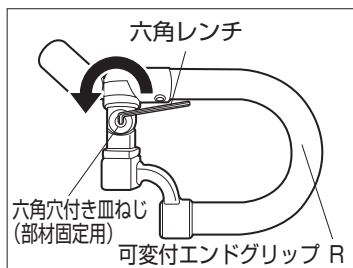

- ① 可変付エンドグリップ Rを固定している六角穴付き皿ねじ (部材固定用)を、付属の六角レンチ (部材固定用)でゆるめます。
- ② 高さ調節支柱に可変付エンドグリップ Rを差し込み、付属の十字穴付き皿タッピンねじ (支柱固定用)で固定します。(2ヶ所)

②

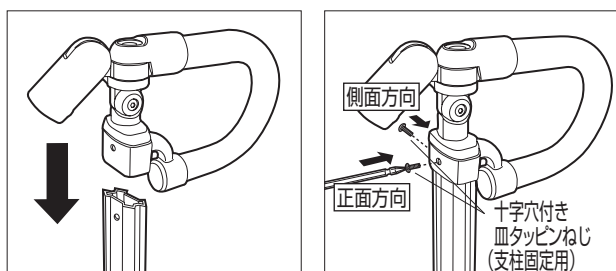


- ③ 回転部を回転させ手すりの方向を決め、回転固定ねじをしっかりと固定します。

可変付エンドグリップ R の角度調節範囲


回転部 水平方向	170°
可動部 垂直方向	90°

- ④ 可変付エンドグリップ Rを固定している六角穴付き皿ねじ (部材固定用)を、付属の六角レンチ (部材固定用)で締めます。
- ⑤ 手すりを可変付エンドグリップ Rに差し込み、付属の十字穴付き皿タッピンねじ (手すり固定用)で固定します。(手すりは 28.5mm 入り込みます。)

③

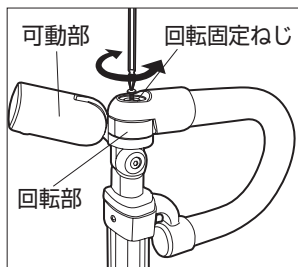


④

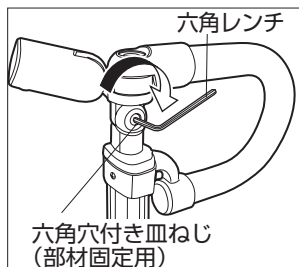


注意 部材は手すりにしっかりと差し込むこと (28.5mm)
部材がしっかりと固定されず設置したときに手すりがガタツク恐れがあります。

⑤

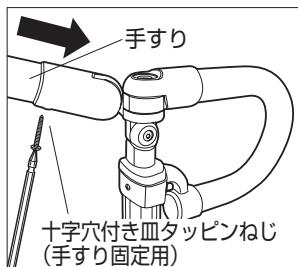


⑥

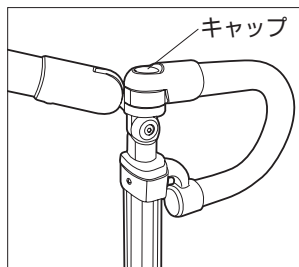

- ⑥ 最後に付属のキャップを取り付けます。

警告 取り付けは必ず指定寸法に従うこと
部材がしっかりと固定されず設置したときに手すりがガタツク恐れがあります。
製品の取り付け後に、ぐらつきやガタツキが無く確実に固定されているか確認すること
手すりが外れたりして、けがの原因になります。

取り付け指定寸法

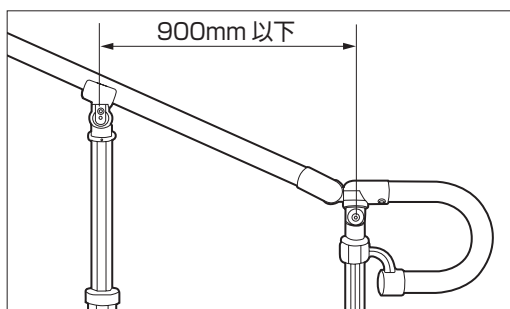

注意 手すりの端部は必ず、エンド支柱ブラケット R・可変付エンドグリップ R・エンドグリップ R・壁付エンド R・エンド受け金具 R・エンド受けを指定寸法で設置すること
手すりが外れたりして、けがの原因になります。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索