

- このたびはアプローチ用手すりをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- 正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

❗ 必ず行うこと ❗

使用者が介助を必要とする場合は、必ず介助者が付き添うこと
転倒し、けがの原因になります。

⊘ 絶対にしないこと ⊘

改造や分解をしないこと
けがや破損の原因になります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

❗ 必ず行うこと ❗

使用中にねじのゆるみやガタツキが発生した場合は直ちに使用を中止して取り付け工事店に修理を依頼すること
取り付けが不安定となり、けがの原因になります。

⊘ 絶対にしないこと ⊘

手すりにぶら下がったり、子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと
けがや破損の原因になります。

⊘ 絶対にしないこと ⊘

直接熱をかけたり、熱器具を近くで使用しないこと
火災や変形、破損の原因になります。

強い衝撃を与えないこと
けがや破損の原因になります。

製品に無理な力を加えないこと
手すり棒がたわんだり、支柱や壁付きブラケットが破損し、思わぬケガの原因になります。

お手入れの方法

- お手入れはやわらかい布でから拭きするか、固くしぼった布で水拭きしてください。
- 汚れがひどい時は中性洗剤をしみこませたやわらかい布で拭き、その後水拭きをしてから乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。

注意



次にあげるものではお手入れしないこと

- ・シンナー
- ・クレゾール
- ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系洗剤
- ・タワシ
- ・研磨剤入りのスポンジ
- ・磨き粉
- ・その他製品を傷つける物

定期的に、手すりにガタツキがないか確認すること

取り付けが不安定になり、けがの原因になります。



製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索

安あんじゅ寿

アプローチ用手すり 支柱埋め込み固定式R 施工説明書

- このたびはアプローチ用手すり 支柱埋め込み固定式Rをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- 施工前にこの施工説明書をよくお読み頂き、安全に正しく施工されるようお願いいたします。
- 取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 警告** 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。
- 注意** 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

- ❗必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。
- 🚫🚫してはいけない「禁止」内容を説明しています。


警告

- 🚫 **改造や分解をしないこと**
けがや破損の原因になります。
- 🚫 **一般住宅に取り付ける歩行補助手すり以外では使用しないこと**
重大事故につながる恐れがあります。
- 🚫 **転倒防止用ガードレールや防護柵、ベランダの柵、窓格子などや断崖地、転落の恐れのある場所などで使用しないこと**
重大事故につながる恐れがあります。
- 🚫 **取り付けは必ず指定寸法に従うこと**
手すりが破損し、けがの原因になります。

注意

- ❗ **取り付けは必ず取付工事店が行なうこと**
取り付けが不安定となり、けがの原因になります。
- ❗ **必ず同梱の固定金具を使うこと**
取り付けが不安定となり、けがの原因になります。
- ❗ **必ず強度を確保できる地面に取り付けること**
手すりが外れたり、取り付け面が壊れたりして、けがの原因になります。
- ❗ **ガス・水道メーター及びガス管、水道管の位置を確認して施工すること**
施工に支障のある場合は、手すりの位置をずらすか、ガス、水道メーター及びガス管・水道管の移設を行なってください。
- ❗ **製品の取り付け後に、ぐらつきやガタツキが無く確実に固定されているか確認すること**
手すりが外れたりして、けがの原因になります。
- ❗ **アンカーボルトを取り付ける穴の周囲に必ずシーリング剤を塗布すること**
手すりが外れたり、取り付け面が壊れたりして、けがの原因になります。
- 🚫 **製品に強い応力が加わった状態で無理に取り付けないこと**
手すりが折れたり、外れたりしてけがの原因になります。
- 🚫 **埋め込み設置の場合は、養生期間を十分にとり、期間中は重い物をのせたり、手すりをゆすったりしないこと**
手すりが外れたり、取り付け面が壊れたりして、けがの原因になります。

各部のなまえ

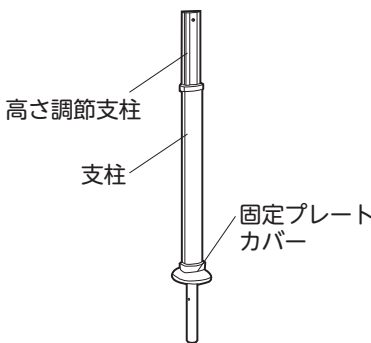


項目	部品名	材質
構成部品	高さ調節支柱	アルミニウム
	支柱	
	固定プレートカバー	ポリプロピレン
	ねじ類	ステンレス
重量	1.8kg	

- ◇付属品
- ・十字穴付き皿タッピンねじ（高さ固定用）4×16mm 2本
 - ・六角穴付き止めねじ（高さ調節用）M4×8mm 1本
 - ・六角レンチ（高さ調節用） 1本
 - ・六角ボルト（抜け止め用）M6×16mm 2本


商品寸法図

単位:mm


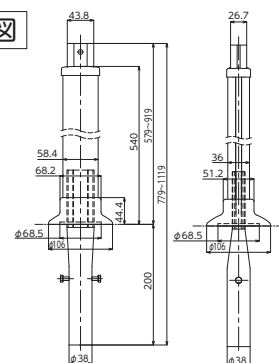


取り付けかた

表面がコンクリートの場合

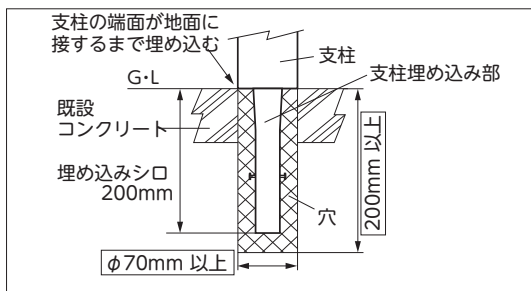


素地面の場合

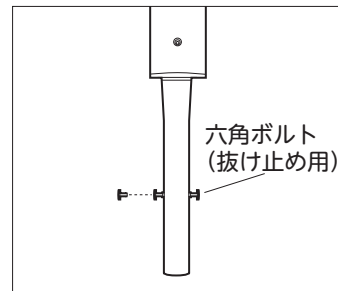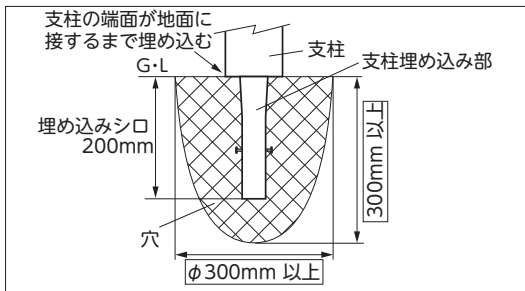

- ①支柱埋め込み固定式Rを設置する場所を決め、支柱を差し込む為の穴位置に印を付けます。
- ②表面がコンクリートの場合はコアドリル（ドリル径φ70mm）で深さ200mm以上の穴をあけ、素地面の場合はφ300mm以上、深さ300mm以上の穴をあけます。
- ③支柱埋め込み固定の埋め込み部分にあいているねじ穴に、付属の六角ボルト（抜止め用）を固定します。
- ④穴の中に溜まっているコンクリートの粉をダストポンプ又は、ブラシで取り除き、支柱を差し込みコンクリートを流し込みます。このとき支柱が垂直に立っているか確認し、コンクリートが固まるまで添え木等で支えます。
※コンクリートの養生期間は使用するコンクリートの取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※支柱埋め込み固定部が完全に埋まり、支柱端面が地面に接するまで埋め込んでください。

取り付け指定寸法

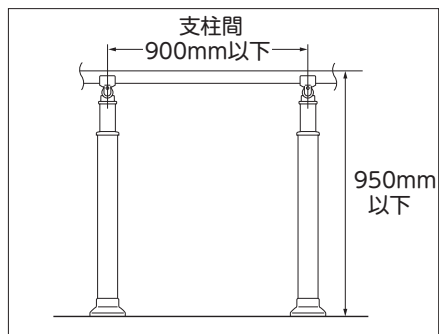

注意


穴は指定の深さ、大きさであけること
支柱が倒れたりし、けがの原因になります。
素地面は土の場合のみ施工可能です。砂地の場合は確
実な固定ができないため施工しないこと
支柱が倒れたりし、けがの原因になります。
支柱が垂直になっているか必ず確認すること
支柱が倒れたりし、けがの原因になります。



警告

取り付けは必ず指定寸法に従うこと
手すりが破損し、けがの原因になります。

手すり高さ調節方法

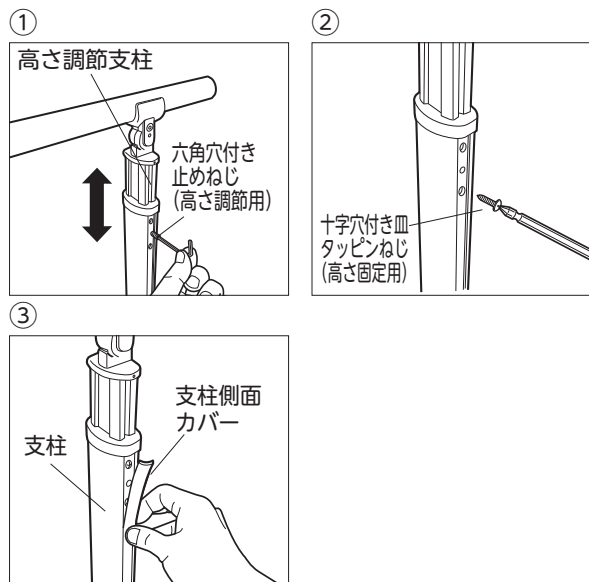

- ①高さ調節支柱をスライドさせ手すりの高さを調節し、支柱側面についている六角穴付き止めねじ（高さ調節用）を付属の六角レンチで締め付け、高さ調節支柱を仮固定します。
- ②十字穴付き皿タッピンねじ（高さ調節固定用）で高さ調節支柱を固定します。（2ヶ所）
- ③最後に長さを調節した支柱側面カバーを、支柱に取り付けます。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル **0120-86-7735**

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
（12:00～13:00はのぞく）

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索