


台座付住宅用手すり【ユニットバス用】


3タイプ

共通取扱説明書


共通施工説明書

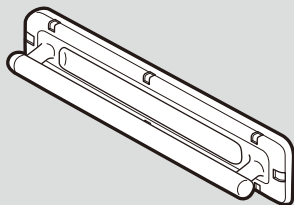

UB-400

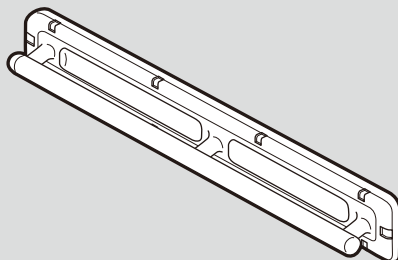

UB-600

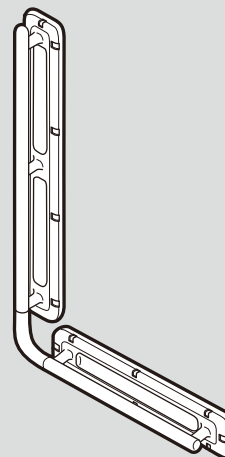

UB-L

このたびは台座付住宅用手すり【ユニットバス用】をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書・施工説明書・保証書を必ずお読みください。

もくじ

施工説明書	確認しましょう	1~4
	安全上のご注意	5~6
	取り付ける前に	8~9
	取り付けましょう	10~17
	困ったときには	20~21
	施工チェックリスト	22

取扱説明書	安全上のご注意	7
	使いましょう	18
	お手入れしましょう	19
	保証とアフターサービス・保証書	21・23

保存版
(保証書付)


取扱説明書を読んだ後は必ず保管してください。

👉 確認しましょう


梱包品の確認

購入した製品にレ点を付け、梱包品が揃っているか、下のイラストを見ながら確認しましょう。


☐ UB-400

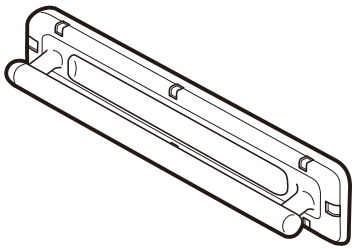

本体

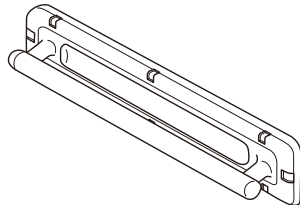

プラスチックアンカー 8本

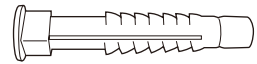


目隠しキャップ 8個



丸木ネジ 4.1×50mm 8本




角座金 12.5×12.5mm 8枚

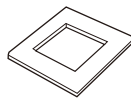


瞬間接着剤 「アロンアルファ®」 1本




☐ UB-600

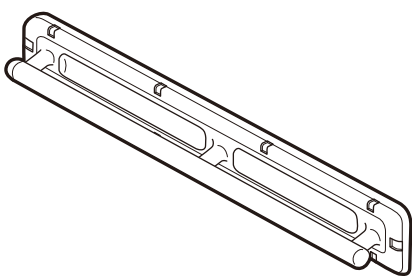

本体

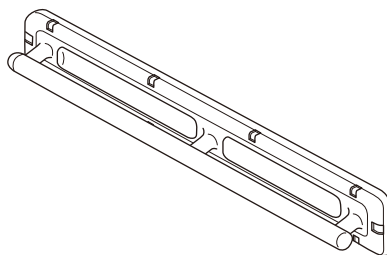

プラスチックアンカー 10本

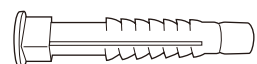


目隠しキャップ 10個



丸木ネジ 4.1×50mm 10本



角座金 12.5×12.5mm 10枚

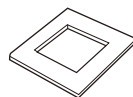

瞬間接着剤 「アロンアルファ®」 1本



確認しましょう

！安全上の注意

✕取り付ける前に


✕取り付けてください

👉使いましょう


💧お手入れしましょう

？困ったときには


□ UB-L

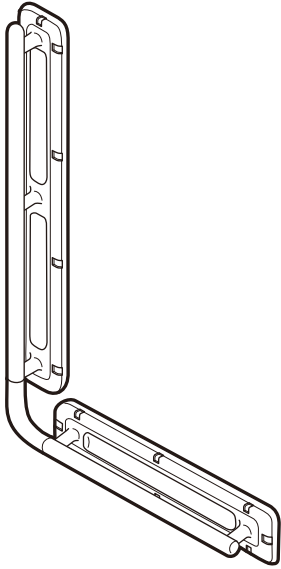


UB-400本体

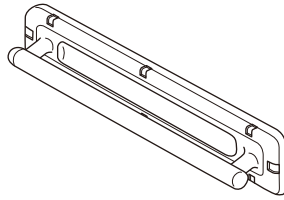


UB-600本体

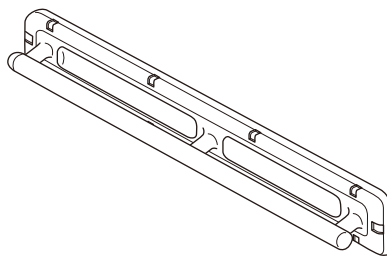

コーナーグリップ 1個

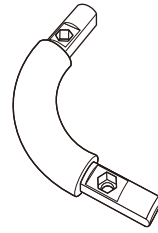

プラスチックアンカー 16本

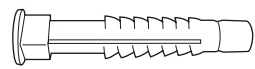


丸木ネジ
4.1×50mm 16本



目隠しキャップ 18個



角座金 16枚
12.5×12.5mm

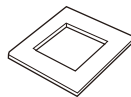


ナット
M8 2個



歯付座金
呼び8 2個



瞬間接着剤
「アロンアルファ®」 2本

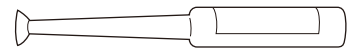

六角ボルト
M8×40 2個



六角レンチ
6mm 1本



確認しましょう

！安全上のご注意

✕取り付けの前に

✕取り付けましょう


♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

☝ 確認しましょう

各部の名称

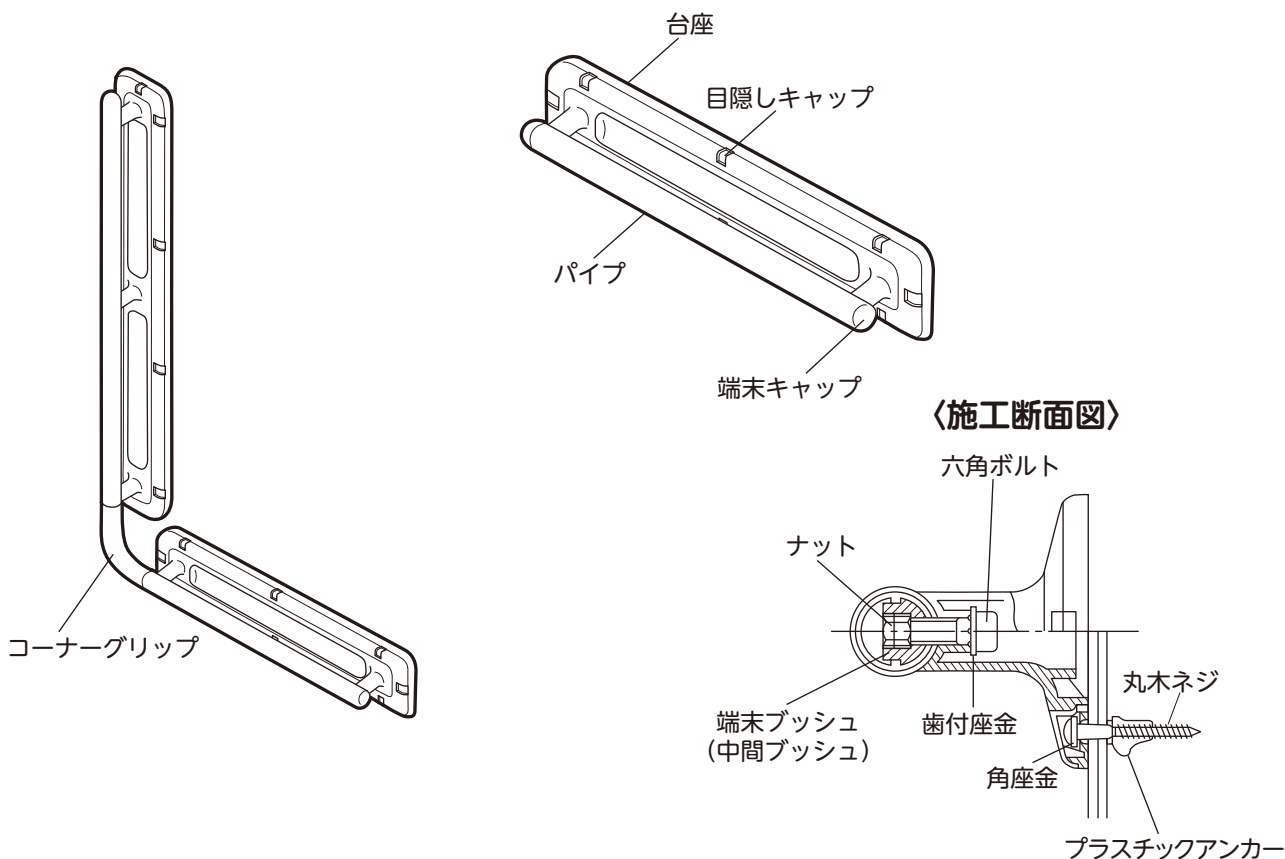

商品の仕様と寸法図

仕様

品名	UB-400/UB-600/UB-L	
	部品名	材質
構成部材	パイプ	表面：軟質塩化ビニル樹脂 (防カビ剤入り) 芯材：塩化ビニル樹脂
	台座・目隠しキャップ・端末キャップ	ABS樹脂
	端末ブッシュ 中間ブッシュ (UB-600/UB-L)	ポリプロピレン
	コーナーグリップ	表面：エラストマー 芯材：ポリプロピレン
	六角ボルト・歯付座金・丸木ネジ・角座金・ナット	ステンレス
	プラスチックアンカー	ポリエチレン
	サイズ	UB-400：幅50cm×奥行9cm×高さ10cm UB-600：幅70cm×奥行9cm×高さ10cm UB-L：幅60cm×奥行9cm×高さ80cm
重量	UB-400：約0.9kg UB-600：約1.2kg UB-L：約2.0kg	

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

確認しましょう

安全上の注意

取り付ける前に

取り付けてください

使いましょう


お手入れしましょう

困ったときには


商品寸法図

単位：cm


UB-400

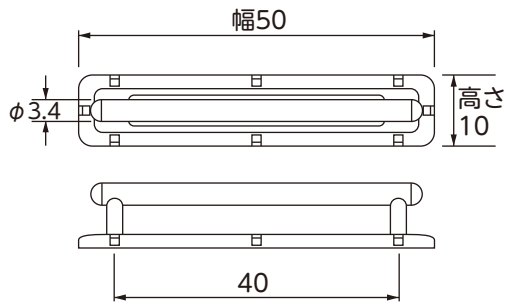

UB-600

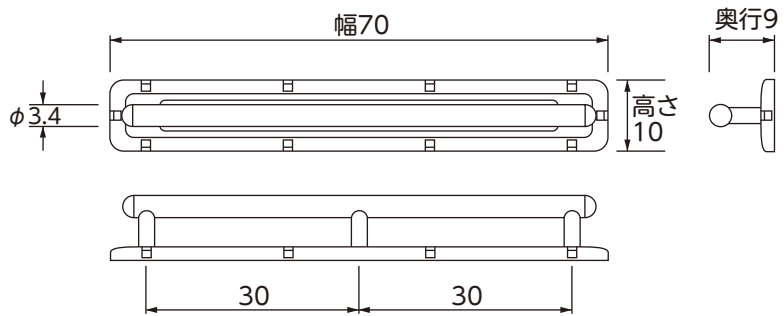

UB-L

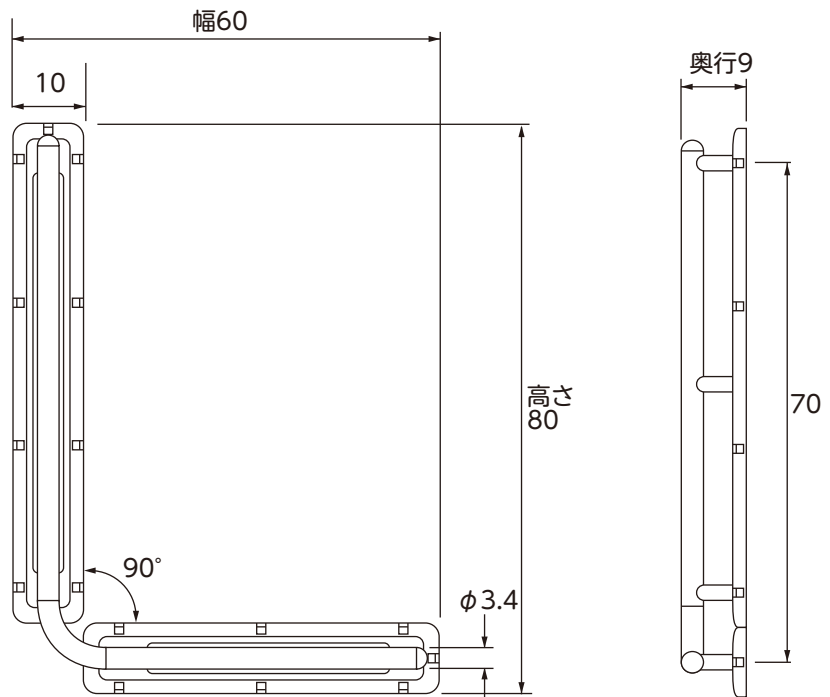

確認しましょう

！安全上のご注意

✕取り付ける前に

✕取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

！ 安全上のご注意 施工者様用

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

！ 必ず行うこと ！

梱包を開いて、製品に破損・欠損がないか確認すること

取り付ける前に、取り付け可能な壁パネルを確認すること

詳しくは…P.1・2へ

詳しくは…P.8へ




注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。


！ 必ず行うこと ！

取り付ける前にパイプにガタつきがないか確認すること

六角ボルトがしっかりとしまっているか確認ください。ゆるんでいる場合はさらにしめてください。

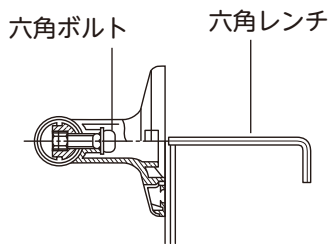

壁パネルのつなぎ目に2～3mmの凸部があり、台座取り付け位置の下側になる時は、壁パネル面まで削りこんで台座取り付け面を平面にして取り付けること

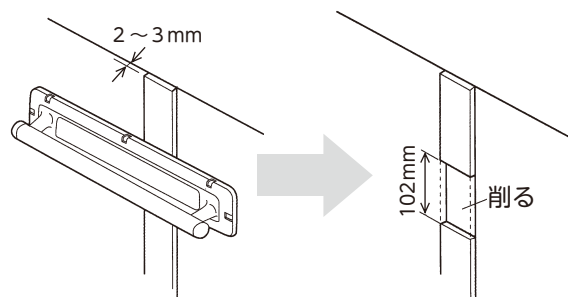

添付の丸木ネジおよびプラスチックアンカー、角座金は指定数量を使用すること

指定数量より少ない場合は、所定の取り付け強度が得られず、ガタつきが生じたり落下するおそれがあります。

製品番号	数量
UB-400	8
UB-600	10
UB-L	16

壁裏が石膏ボードの場合、添付のアロンアルファを必ず使用すること

アロンアルファにて下穴（石膏ボード）の補強をしないと、所定のしめ付け強度が得られません。

添付のアロンアルファは使いきりとする

アロンアルファが固まったり白濁している場合は、十分な強度が得られないおそれがあるため、代替品として市販品のアロンアルファ（木工用）2gをお買い求めください。

タイルに取り付ける場合、添付のアロンアルファは使用せずに取り付けること

下穴径6mmなので、アロンアルファを使用すると下穴径が小さくなり、むりやりプラスチックアンカーを挿入すると変形を起こし、まっすぐに入りません。

確認しましょう

！ 安全上のご注意

✕ 取り付ける前に

✕ 取り付けましょう

♡ 使いましょう

💧 お手入れしましょう

？ 困ったときには




注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

絶対にしないこと


直射日光の当たる場所へは取り付けないこと

変色や劣化を起こす原因となります。

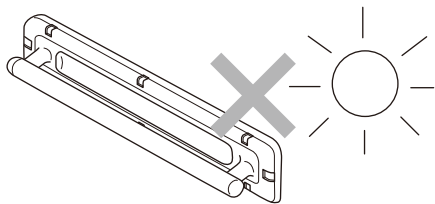


室温 60°C以上になるユニットバスルーム（換気乾燥機・サウナ機能付など）へは、取り付けないこと

変色や変形を起こす原因となります。

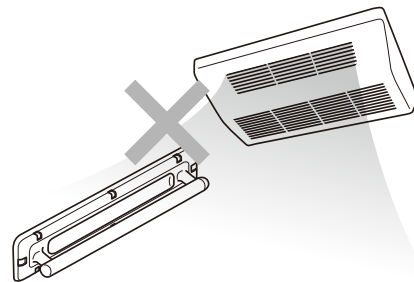

常時水に浸かる場所へは、取り付けないこと

取り付け部（下穴）から壁裏に水が浸透し、アンカー固定部の取り付け強度が低下するおそれがあります。

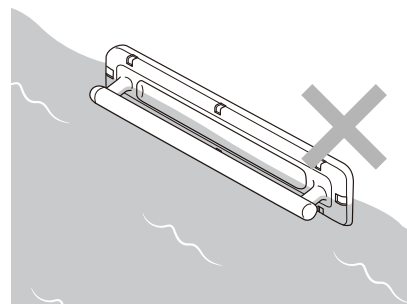

確認しましょう

！安全上のご注意

✕取り付けの前に

✕取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

！ 安全上のご注意 お客様用

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。




警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

！ 必ず行うこと ！

毎回ご使用前に製品を前後左右にゆらしてガタつきがないか確認すること

手すりが外れ、転倒やけがの原因になります。
ガタつきがある場合は購入された販売店へご相談ください。

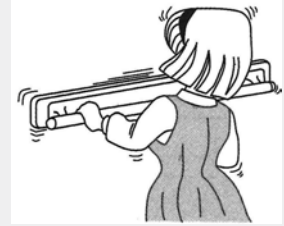

⊘ 絶対にしないこと ⊘


手すり以外の用途に使用しないこと (上に乗ったり、ぶら下がったりしないこと)

手すりが外れたり、壁が壊れたりして転倒やけがの原因になります。



重量物を手すりに掛けないこと

手すりが外れたり、壁が壊れたりして転倒やけがの原因になります。

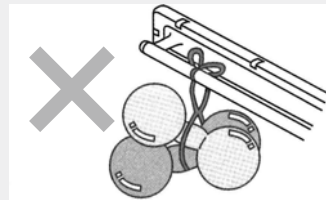


注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

⊘ 絶対にしないこと ⊘

石けんなどが付着した手でさわらないこと


石けんなどが付着した手で手すりをさわると滑って転倒やけがの原因になります。

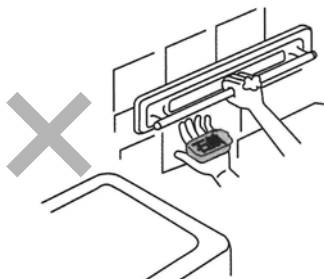

次にあげるものではお手入れしないこと

- ・シンナー ・クレゾール
- ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系薬剤（洗剤）や熱湯（煮沸消毒など）による殺菌、消毒
- ・磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの

製品が劣化し、破損の原因になります。

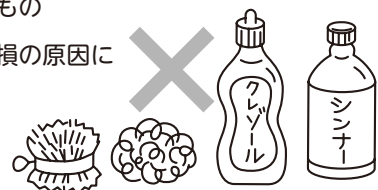

確認しましょう

！安全上のご注意

✕取り付ける前に

✕取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう


？困ったときには

✖ 取り付ける前に

取り付け可能な壁パネル

タイル


タイル (100角・200角・100×200)

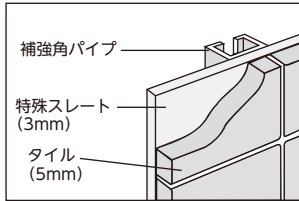


取り付け方法は…P.10へ

鋼板・セメント板


塩ビ鋼板複合

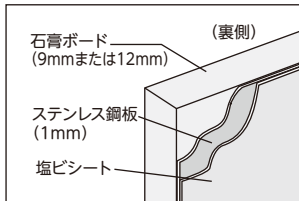


化粧鋼板

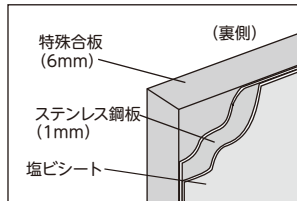

特殊化粧セメント板

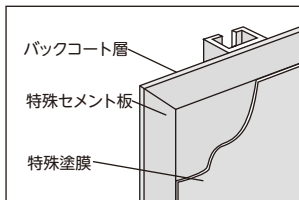

塩ビステンレス鋼板 (化粧ステンレス)

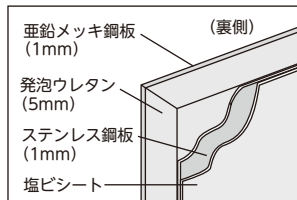


取り付け方法は… P.14へ

- 磁石が付く壁には取り付け可能です。(ホーローを除く)
- ※メーカーにより、呼称、構造などが異なる場合があります。


取り付け不可能な壁パネル

FRP

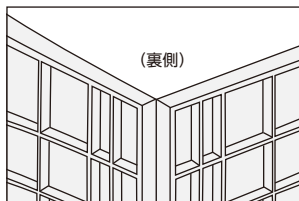

裏側に補強用のリブが多くあるため下穴を開けるのが困難。

ホーロー

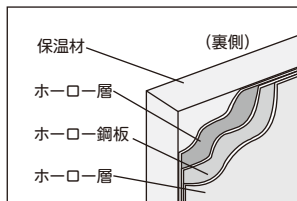

下穴を開けた後のサビ防止が困難。

- ※その他、大判タイル、天然大理石、天然木には取り付けすることはできません。
- ※取り付け前に壁の材質などを確認し、施工説明書をよく読んでから施工を行ってください。

確認しましょう

！安全上のご注意

✖ 取り付けの前に

✖ 取り付けましょう

♡ 使いましょう

💧 お手入れしましょう

? 困ったときには

✖ 取り付ける前に


組み立てましょう

UB-Lの組み立て

※ UB-400・UB-600の場合、組み立ての必要はありません。


1. 取り付け方向（形状）を決めます

利用される場所に合わせて取り付け方向（形状）を決めます。

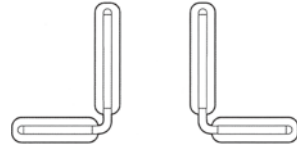


2. 手すり本体とコーナグリップを接続します

①コーナグリップのナット挿入口に面取り部が上側になるようにナットを挿入してください。（2ヶ所）

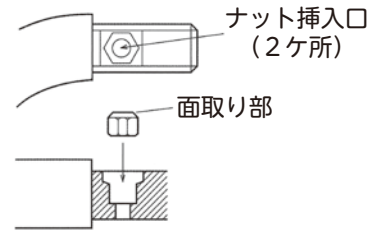

②歯付座金を六角ボルトに通し、台座裏側よりパイプを介してナットに六角ボルトを六角レンチ（6mm）で締め付けます。

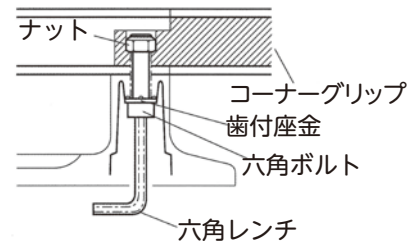


注意




取り付ける前にパイプにガタつきがないか確認すること

六角ボルトがしっかりとしまっているか確認してください。
ゆるんでいる場合はさらに締めてください。

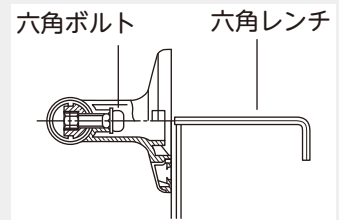

3. 増しじめをします

増しじめは、六角レンチ（6mm）を細いパイプまたはペンチにて半回転を目安に回してください。

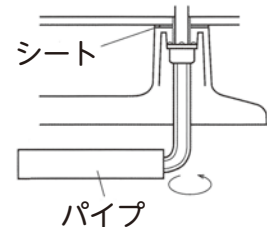

注意



トルクレンチを使用する場合には、締め付けトルク 50kgf・cm で締め付けること

50kgf・cm より大きいトルクで締めると、台座が破損するおそれがあります。

※台座のパイプ受け面に貼ってあるシートは、絶対に剥がさないでください。

確認しましょう

安全上の注意

取り付ける前に

取り付けましょう

使いましょう

お手入れしましょう

困ったときには

✖ 取り付けましょう

取り付けかた

「タイル」に取り付ける場合

注意




タイルに取り付ける場合、添付のアロンアルファは使用しないこと


下穴径φ6mmなので、アロンアルファを使用すると下穴径が小さくなり、むりやりプラスチックアンカーを挿入すると変形を起こし、まっすぐに入りません。

1. 取り付け前に確認をします①

①下穴は、必ず目地を中心として開けてください。タイル上に下穴を開けた場合、タイルにひび割れが生じることもあります。

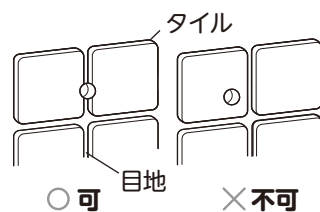


②下穴を開ける順番は、右図の番号順に開けてください。これは、壁パネル裏側の補強角パイプの位置を確認するためです。

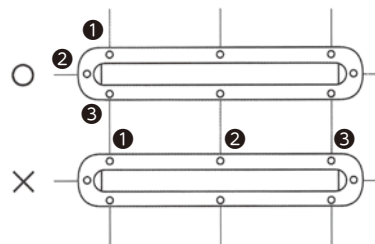


UB-Lの場合、コーナーグリップ部下側2ヶ所の下穴は不要です。

2. 取り付け前に確認をします②

①右図I以外で補強角パイプが見える場合は、横または上下方向に目地ピッチ分だけ移動させて、取り付けてください。

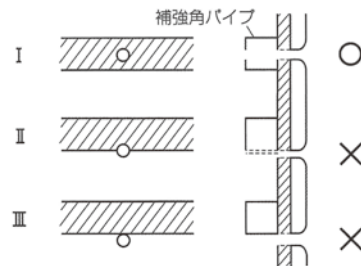

②右図①・②の場合はプラスチックアンカーが正常に作動しますが、③の場合はプラスチックアンカーのスリットからネジがはずれ、所定の締め付け強度が得られません。

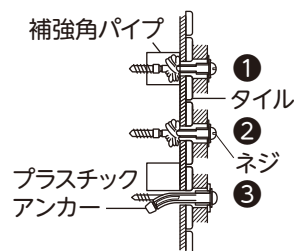

確認しましょう

！安全上のご注意

✖ 取り付けの前に

✖ 取り付けましょう

♡ 使いましょう


💧 お手入れしましょう

？ 困ったときには

✖️ 取り付けましょう

3. 下穴の切削をします

- ① 取り付け位置を決めたら、下穴を磁器タイル用ドリル（φ 6mm）で開けます。

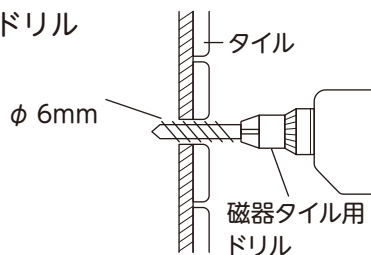


注意



ドリルは磁器タイル用ドリルを使用すること


他の用途のドリルでは、タイルが欠けたり、割れることがあります。

- ② 台座を壁パネルに当て、台座取り付け穴と下穴の位置が合っているか確認し、5. ③の施工で邪魔にならないように両端の端末キャップを左へ回し外します。

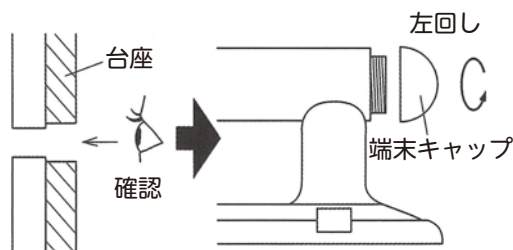

4. コーキング剤を注入します

- ① 全下穴に止水対応のためのコーキング剤を下穴が完全に隠れるまで注入します。

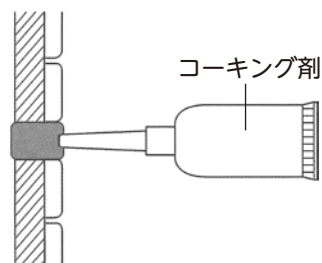

コーキング剤はシリコン系で防カビ剤入りの市販品をご使用ください。

5. 台座付手すりを取り付けます

注意



添付の丸木ネジおよびプラスチックアンカー、角座金は指定数量を使用すること

指定数量より少ない場合は、所定の取り付け強度が得られず、ガタつきが生じたり落下するおそれがあります。

製品番号	数量
UB-400	8
UB-600	10
UB-L	16

確認しましょう

安全上の注意

取り付け前


取り付け時

使いましょう

お手入れしましょう


困ったときには

- ①台座取り付け穴と下穴の位置を合わせ、角座金を通したプラスチックアンカーをつばの当たる位置まで差し込みます。

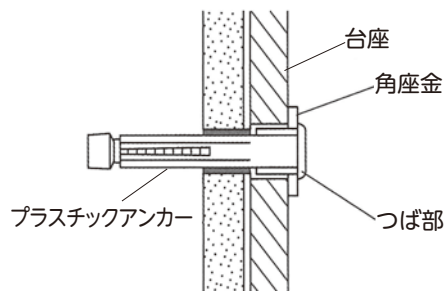


コーキング剤注入後すぐに、プラスチックアンカーを差し込んでください。固まってくるとコーキング剤が壁裏に押し出され、シール効果がなくなります。

- ②プラスチックアンカーの丸木ネジのしめ付け穴にコーキング剤を注入します。

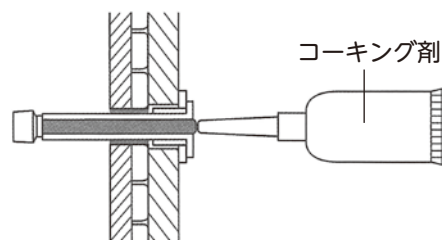


プラスチックアンカーは専用品のため、付属の物を使用してください。

- ③指定数量の丸木ネジをプラスチックアンカーにしめ付けます。しめ付け完了は、プラスチックアンカーのつば部がつぶれることで確認できます。

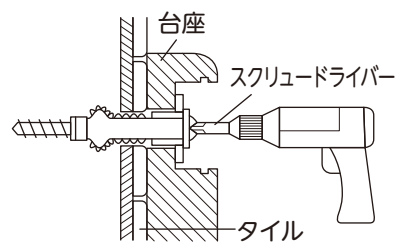

電動ドライバーでしめ付けを行う場合は、しめ付け開始時間から約10秒後に必ず回転を停止してください。手でしめ付ける場合は、初めは強く一旦ゆるくなって再びやや堅くなるまでしめ付けてください。

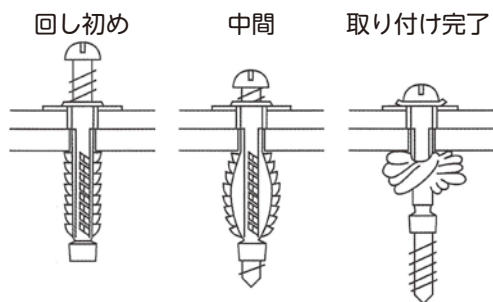

必要以上に回すと、プラスチックアンカーのネジ部外周が大きくなり、所定の取り付け強度が得られません。

確認しましょう

安全上のご注意

取り付ける前に

取り付けましょう


使いましょう

お手入れしましょう


困ったときには

✂️ 取り付けましょう

④ 端末キャップをしめ込みます。(両端)

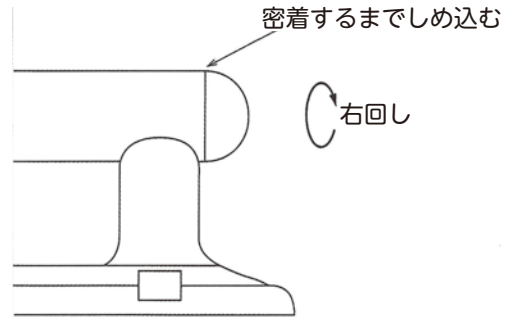

⑤ 目隠しキャップを装着します。
台座の周囲（台座と壁パネルとのすき間）
に沿ってコーキング剤を塗ってください。

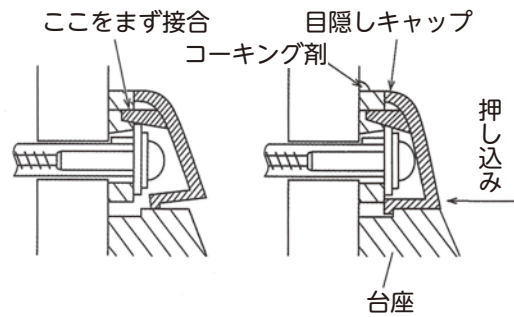

6. 施工チェックリストを確認します

22 ページの施工チェックリストにより確認してください。

確認しましょう

安全上のご注意

取り付けの前に

取り付けましょう

使いましょう

お手入れしましょう

困ったときには

鋼板・セメント板に取り付ける場合

注意




壁裏が石膏ボードの場合、添付のアロンアルファを必ず使用すること
アロンアルファにて下穴（石膏ボード）の補強をしないと、所定のしめ付け強度が得られません。

添付のアロンアルファは使いきりとする


アロンアルファが固まったり白濁している場合は、十分な強度が得られないおそれがあるため、代替品として市販品のアロンアルファ（木工用）2gをお買い求めください。

壁パネルのつなぎ目に2～3mmの凸部があり、台座取り付け位置の下側になる時は、壁パネル面まで削りこんで台座取り付け面を平面にして取り付けること

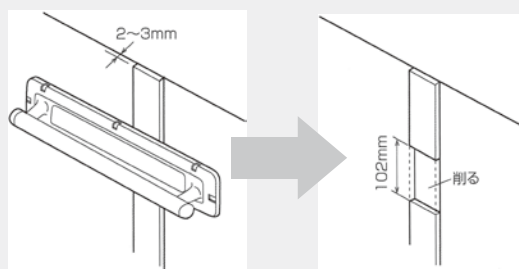


1. 取り付け前に確認をします①

- ①下穴を開ける場合は、ドリル先を壁に強く押しつけないでください。強く押しつけると、下穴の内側がすり鉢状になり、プラスチックアンカーがうまく固定できません。

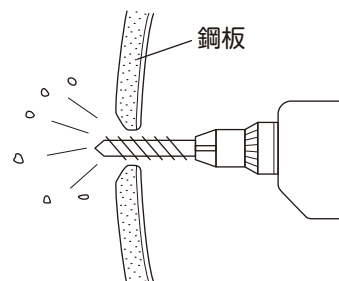

電気ドリルは回転数 1000rpm 以上で使用してください。
低速回転では下穴が崩れて所定のしめ付け強度が得られません。

- ②下穴を開ける順番は、右図の番号順に開けてください。これは、壁パネル裏側の補強角パイプの位置を確認するためです。

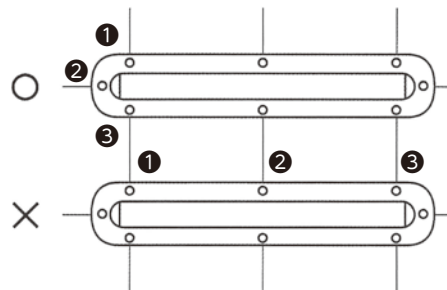

UB-L の場合、コーナーグリップ部下側 2ヶ所の下穴は不要です。

確認しましょう

安全上のご注意

取り付け前に

取り付けましょう

使いましょう


お手入れしましょう

困ったときには


✖️ 取り付けましょう

2. 取り付け前に確認をします②

①右図 I 以外で補強角パイプが見える場合は、横または上下方向に最低 30mm 以上移動させて、取り付けてください。

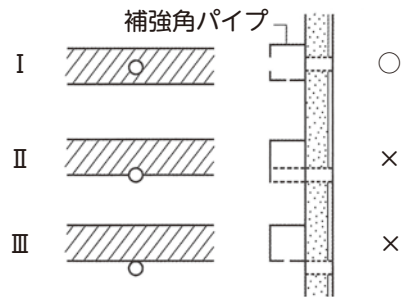

②右図①・②の場合はプラスチックアンカーが正常に作動しますが、③の場合はプラスチックアンカーのスリットからネジがはずれ、所定のしめ付け強度が得られません。

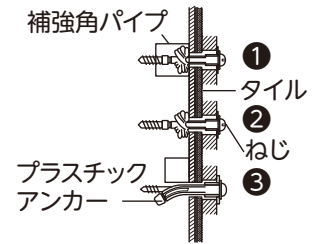


3. 下穴の切削をします


①取り付け位置を決めたら、下穴を鉄工用ドリル (φ 6.5mm) で開けます。



穴開け後、鋼板のかえり部を
カッターナイフで取り除いて
ください。取り付け後ガタ
つきが生じることがあります。

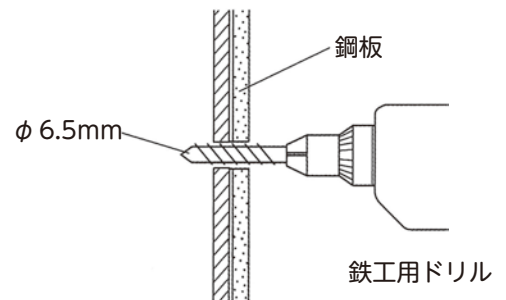

②台座を壁パネルに当て、台座取り付け穴と下穴の位置が合っているか確認し、6. ③の施工で邪魔にならないように両端の端末キャップを左へ回し外します。

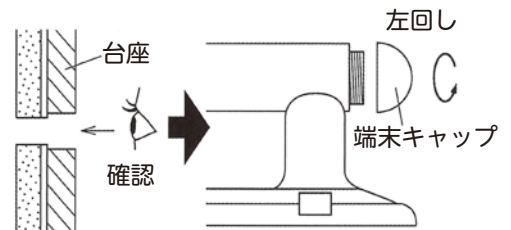


4. アロンアルファを下穴の壁部分に塗ります

下穴に添付のアロンアルファを 3 滴程度垂らして、容器先のノズル部で下穴の壁部分に均一に塗り広げます。



アロンアルファの使用上の注意
点はアロンアルファ一般用製品
ホームページに掲載されていま
すので、よく読んでからお使い
ください。

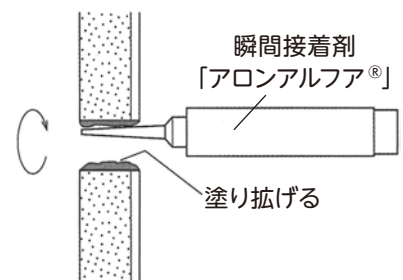

確認しましょう

安全上の注意

取り付ける前に

取り付けましょう


使いましょう

お手入れしましょう

困ったときには

5. コーキング剤を注入します

アロンアルファが乾いたら（約5分経過後）、全下穴に止水対応のためのコーキング剤を下穴が完全に隠れるまで注入します。

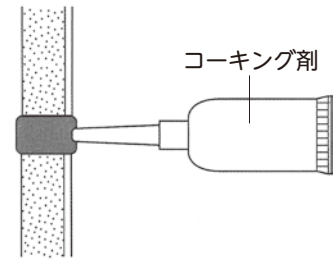

コーキング剤はシリコン系で防カビ剤入りの市販品をご使用ください。

6. 台座付手すりを取り付けます

注意




添付の丸木ネジおよびプラスチックアンカー、角座金は指定数量を使用すること

指定数量より少ない場合は、所定の取り付け強度が得られず、ガタつきが生じたり落下するおそれがあります。


製品番号	数量
UB-400	8
UB-600	10
UB-L	16

- ① 台座取り付け穴と下穴の位置を合わせ、角座金を通したプラスチックアンカーをつばの当たる位置まで差し込みます。

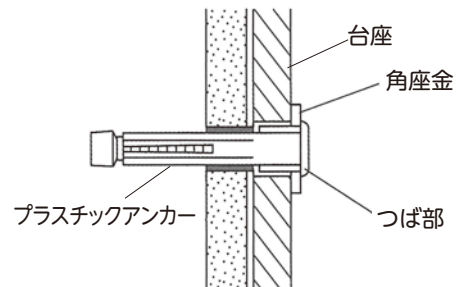

コーキング剤注入後すぐに、プラスチックアンカーを差し込んでください。固まってくるとコーキング剤が壁裏に押し出され、シール効果がなくなります。

- ② プラスチックアンカーの丸木ネジの締め付け穴にコーキング剤を注入します。

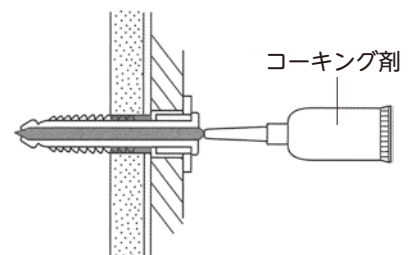

プラスチックアンカーは専用品のため、付属の物を使用してください。

確認しましょう

！安全上のご注意

✕取り付けの前に

✕取り付けましょう


♡使いましょう

💧お手入れしましょう


？困ったときには

✖️ 取り付けましょう

- ③ 指定数量の丸木ネジをプラスチックアンカーに
しめ付けます。しめ付け完了は、プラスチック
アンカーのつば部がつぶれることで確認できま
す。

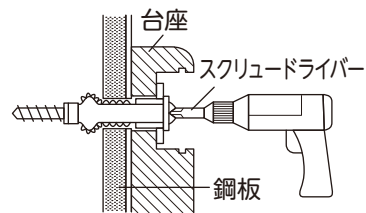


電動ドライバーでしめ
付けを行う場合は、し
め付け開始時間から約
10秒後に必ず回転を
停止してください。
手でしめ付ける場合
は、初めは強く一旦ゆ
るくなって再びやや堅
くなるまでしめ付けて
ください。

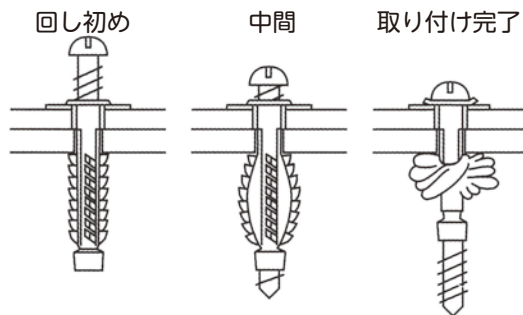


必要以上に回すと、プラスチックアンカーのネジ部外周が大きくな
り、所定の取り付け強度が得られません。

- ④ 端末キャップをしめ込みます。(両端)

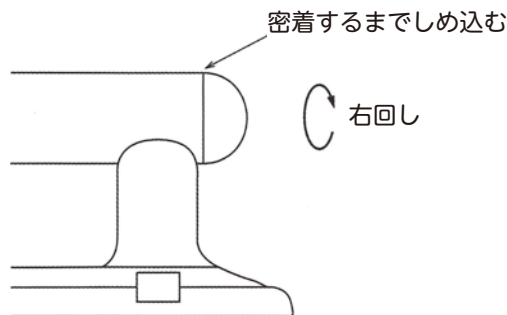

- ⑤ 目隠しキャップを装着します。
台座の周囲（台座と壁パネルとのすき間）
に沿ってコーキング剤を塗ってください。

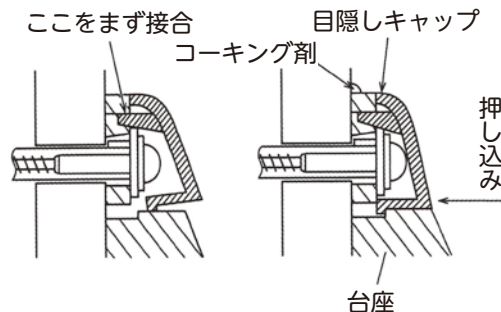

7. 施工チェックリストを確認します

22 ページの施工チェックリストにより確認してください。

確認しましょう

安全上の注意

取り付けの前に

取り付けましょう

使いましょう


お手入れしましょう

困ったときには

ご使用になる前に

毎回ご使用前に製品を前後左右にゆらしてガタつきがないか確認すること。

ガタつきがある場合は購入された販売店へご相談ください。

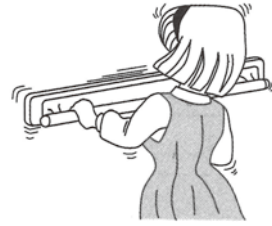

警告




**本品を手すり以外の用途に使用しないこと
(上に乗ったり、ぶら下がったりしないこと)**

手すりが外れたり、壁が壊れたりして転倒やけがの原因になります。



重量物を手すりに掛けないこと

手すりが外れたり、壁が壊れたりして転倒やけがの原因になります。

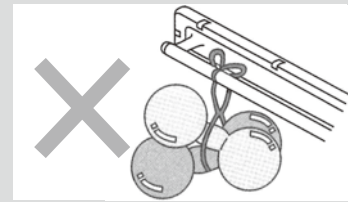


注意



石けんなどが付着した手でさわらないこと

石けんなどが付着した手で手すりをさわると滑って転倒やけがの原因になります。

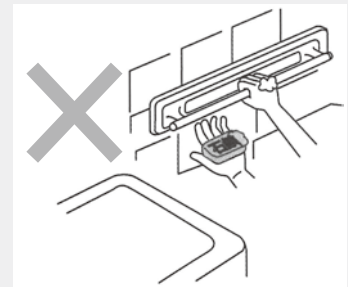

確認しましょう

！安全上のご注意

✕取り付けの前に

✕取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

👉 お手入れしましょう


UB-400・UB-600・UB-Lは、下記の手順に従ってこまめにお手入れしてください。

注意



次にあげるものではお手入れしないこと

- ・シンナー ・クレゾール ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系薬剤（洗剤）や熱湯（煮沸消毒など）による殺菌、消毒
- ・磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの

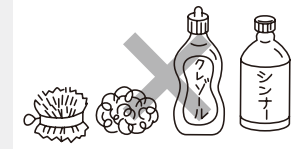


製品が劣化し、破損の原因になります。

お掃除のしかた

日常のお手入れ方法

- 普段はやわらかい布でふいてください。

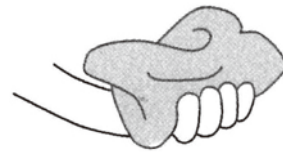

- 汚れがひどいときは、住宅用洗剤（弱アルカリ性・中性）をしみ込ませた布でふき、その後、水ぶきをしてください。



👉 確認しましょう

⚠️ 安全上の注意

✖️ 取り付ける前に

✖️ 取り付けましょう

👉 使いましょう

👉 お手入れしましょう

❓ 困ったときには

? 困ったときには

よくあるご質問

- Q
- 角座金を入れ忘れた
 - ガタつきが生じてきたので、取り付け位置を変更したい
 - タイル壁に穴開け中、誤ってひび割れが生じてしまい、取り付け位置を変更したい



A. 下記の手順に従ってアンカーの取り外し作業を行ってください。

1. 目隠しキャップを外します

2. 丸木ネジを外します




電動ドライバーで左回転させても、丸木ネジが出てこない場合は、プラスドライバーを使用して外してください。

丸木ネジが、プラスチックアンカーのスリットから外れて、取り付けられていることが考えられます。

3. プラスチックアンカーを取り外します

- ①ニッパーでプラスチックアンカーのつば部を切断してください。
- ②台座を壁から引き離し、プラスチックアンカーの回り止め用リブの下側をニッパーで切断します。
- ③プラスドライバーなどでプラスチックアンカーを壁側へ押し込みます。

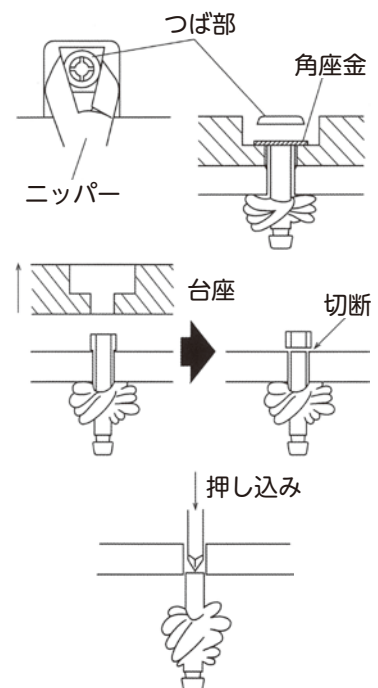

確認しましょう

! 安全上のご注意

✖ 取り付ける前に

✖ 取り付けましょう

♡ 使いましょう

💧 お手入れしましょう

? 困ったときには

? 困ったときには

4. 下穴を補修します

下穴は、水まわりの穴埋め専用のエポキシ粘土などで補修します。



プラスチックアンカーが不足した場合は、お客様相談室までご連絡ください。

保証とアフターサービス

商品のご購入に関するお問い合わせ、ご相談は…お買い求めの販売店へ
商品の仕様などに関するお問い合わせ、ご相談は…下記お客様相談室へ

不具合が発生したとき

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、製品に保証書（取扱説明書）を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
部品供給、また修理対応期間はメーカー製品廃番後3年となります。
ただし、期間内でも破損箇所によっては、部品供給、または修理できないケースがございますのでご了承ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業、作業員の出張にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

アロン化成株式会社

フリーダイヤル

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の
月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00 は除く)

確認しましょう

！安全上の注意

✖取り付ける前に

✖取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

? 困ったときには

施工チェックリスト

施工完了後、下記項目の確認を必ず行ってください。

確認

項	目	解説ページ
工程チェック		
	丸木ネジ、角座金、プラスチックアンカーは、付属品すべてを использовалиか	1, 2
	下穴は、アロンアルファで補強しましたか（下地が石膏ボードの場合）	15
	下穴は、コーキング剤で防水処理を施しましたか	12, 16
	角座金は、正しい位置にセットしましたか	12, 16
	鋼板のかえり部は、カッターで取り除きましたか	15
	UB-L の取り付け方向は正しいですか	9
取り付けチェック（実使用を想定して、パイプに荷重を加えてください）		
	台座と壁パネルの間に、ガタつきはないですか	
	パイプと台座のパイプ受部との間に、ガタつきはないですか	
	端末キャップとパイプ端部の間に、すき間はないですか	
	コーナーグリップとパイプとの間に、ガタつきはないですか	
	壁パネルに損傷はないですか（特に、タイルの割れ）	

処置欄

確認しましょう

！安全上のご注意

✖取り付けの前に

✖取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

保証とアフターサービス よくお読みください

※下記の保証内容は商品をご購入頂いたお客様向けのもので、レンタル（貸与）でご利用されたお客様はサービスを受けた福祉用具貸与事業所へお問い合わせください。

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

1. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
2. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様相談室にご相談ください。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 3) 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
 - 4) お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。
 - 5) 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷。
 - 6) ボルトなど消耗品の損傷及び汚れ。
 - 7) 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

（個人情報の取扱いについて）

- 1) 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。
なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 2) 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	ご住所 〒
	ご芳名 TEL
★販売店	店名 TEL

この保証書はご使用できません

★ 印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

■保証書について

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索

19.9 919149-2