


安^{あんじゅ}寿

AT-CRシリーズ

共通取扱説明書

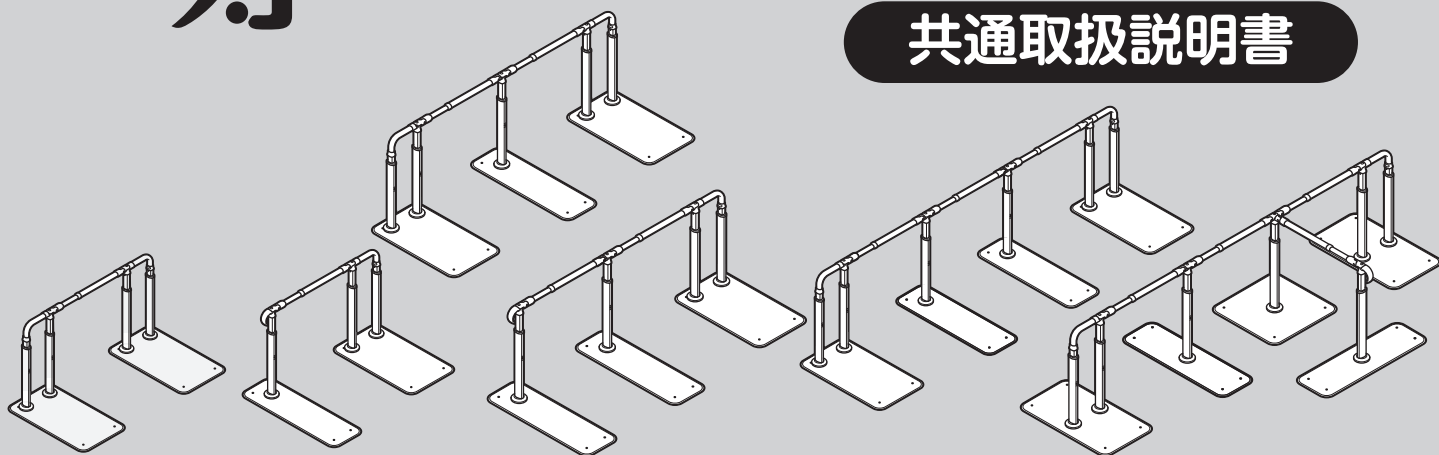

N2 タイプ

S-N タイプ

N-S-N タイプ

N-S2-N タイプ

M タイプ

S2-N タイプ


最大使用者体重：100kg

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

ご使用前にこの取扱説明書と保証書をお読みください。

このたびは本製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- 正しくお使いいただくため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書を読んだあとは必ず保管してください。

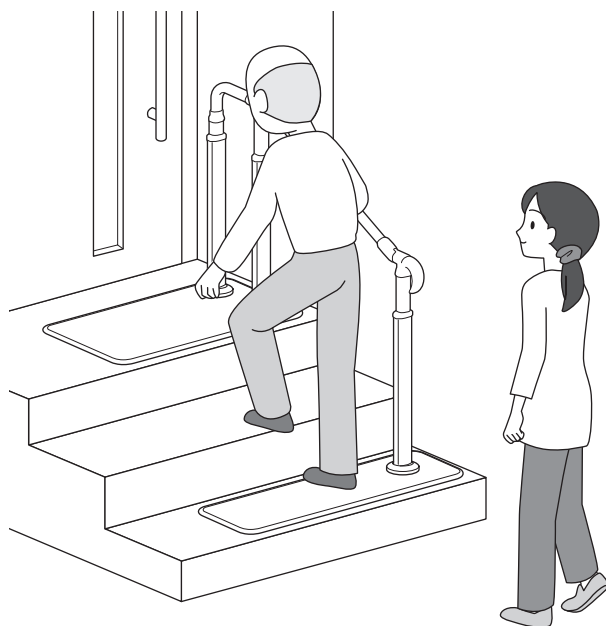

保存版
(保証書付)

ARONKASEI CO.,LTD.

もくじ

確認しましょう



確認しましょう P.2～14

- ・梱包品と構成部材表の確認…………… 2 ～ 7
- ・各部の名称と仕様…………… 8 ～ 10
- ・商品の寸法図…………… 11 ～ 14

安全上のご注意



安全上のご注意 P.15～21

準備しましょう



準備しましょう P.22～31

- ・設置する前に…………… 22 ～ 25
- ・設置・組み立てましょう…………… 26 ～ 30
- ・各部の調節をしましょう…………… 30 ～ 31

使いましょう



使いましょう P.32

- ・ご使用になる前に…………… 32

お手入れしましょう



お手入れしましょう P.33～34

- ・お掃除のしかた…………… 33 ～ 34
- ・点検のしかた…………… 34
- ・交換部品…………… 34

困ったときには



困ったときには P.34～35

- ・保証とアフターサービス…………… 34 ～ 35

👉 確認しましょう

梱包品と構成部材表の確認

梱包品が揃っているか、下のイラストを見ながら確認しましょう。

製品をご使用するには、製品名に応じた構成部材が必要になります。下表を見ながら準備しましょう。

N2タイプ

S-Nタイプ

N-S-Nタイプ

S2-Nタイプ

N-S2-Nタイプ

Mタイプ

確認しましょう

！安全上の注意

✖準備しましょう


👉使いまししょう

💧お手入れしましょう


？困ったときには

曲げ支柱セット

曲げ支柱セット

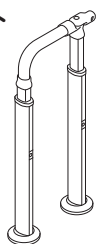


付属品

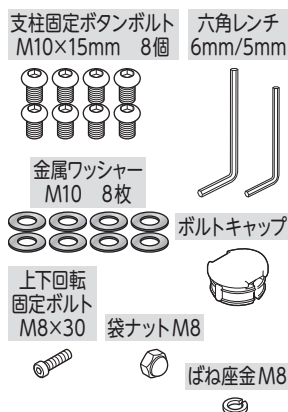


先端支柱セット

先端支柱セット

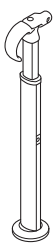

付属品

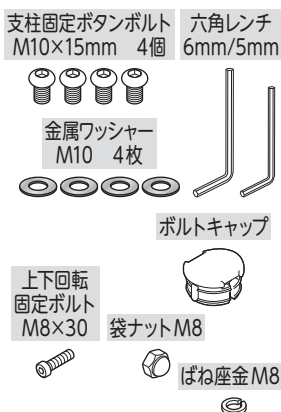

中間支柱セット

中間支柱セット




付属品



3方支柱セット

3方支柱セット

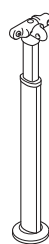


付属品




E800手すりセット

E800 手すりセット

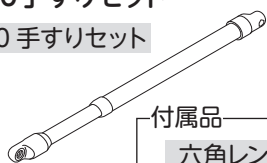


付属品

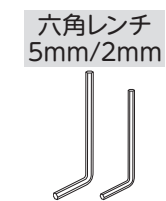

E1050手すりセット

E1050 手すりセット

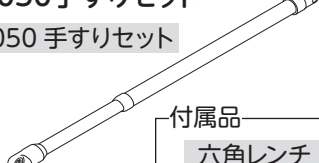


付属品



E1400手すりセット

E1400 手すりセット

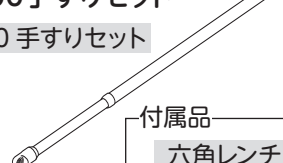


付属品




ベースプレートN

ベースプレートN

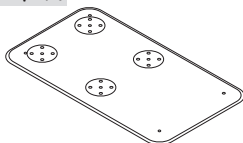


付属品

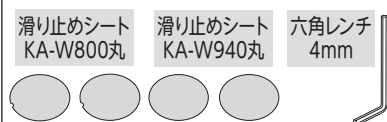


ベースプレートS

ベースプレートS

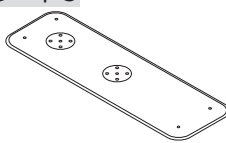


付属品

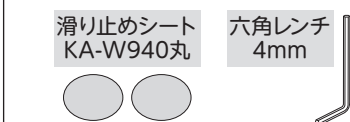


ベースプレートM

ベースプレートM




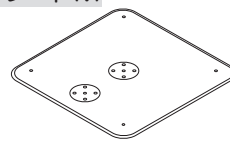


付属品




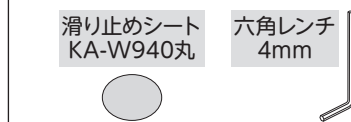


👉 確認しましょう
















N2タイプ

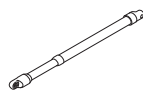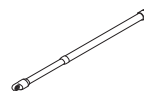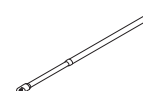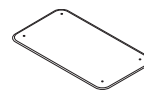製品名	製品イラスト	構成部材				
		曲げ支柱セット	E800手すりセット	E1050手すりセット	E1400手すりセット	ベースプレートN
						
AT-CR-E800-N2		2	1			2
AT-CR-E800T-N2		4	2			2
AT-CR-E1050-N2		2		1		2
AT-CR-E1050T-N2		4		2		2
AT-CR-E1400-N2		2			1	2
AT-CR-E1400T-N2		4			2	2

S-Nタイプ

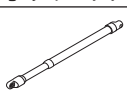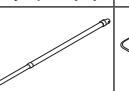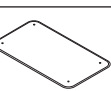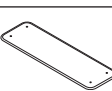製品名	製品イラスト	構成部材						
		曲げ支柱セット	先端支柱セット	E800手すりセット	E1050手すりセット	E1400手すりセット	ベースプレートN	ベースプレートS
								
AT-CR-E800-S-N		1	1	1			1	1
AT-CR-E800T-S-N		2	2	2			1	1
AT-CR-E1050-S-N		1	1		1		1	1
AT-CR-E1050T-S-N		2	2		2		1	1
AT-CR-E1400-S-N		1	1			1	1	1
AT-CR-E1400T-S-N		2	2			2	1	1

N-S-Nタイプ

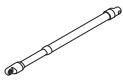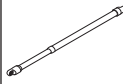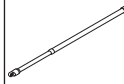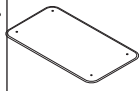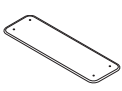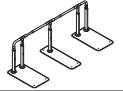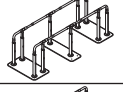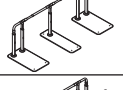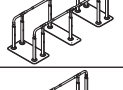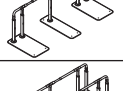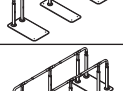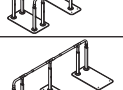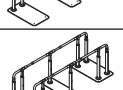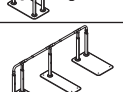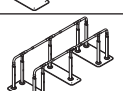製品名	製品イラスト	構成部材						
		曲げ支柱 セット	中間支柱 セット	E800 手すりセット	E1050 手すりセット	E1400 手すりセット	ベースプレート N	ベースプレート S
								
AT-CR-E1600-N-S-N		2	1	2			2	1
AT-CR-E1600T-N-S-N		4	2	4			2	1
AT-CR-E1850-N-S-N		2	1	1	1		2	1
AT-CR-E1850T-N-S-N		4	2	2	2		2	1
AT-CR-E2200-N-S-N		2	1	1		1	2	1
AT-CR-E2200T-N-S-N		4	2	2		2	2	1
AT-CR-E2100-N-S-N		2	1		2		2	1
AT-CR-E2100T-N-S-N		4	2		4		2	1
AT-CR-E2450-N-S-N		2	1		1	1	2	1
AT-CR-E2450T-N-S-N		4	2		2	2	2	1
AT-CR-E2800-N-S-N		2	1			2	2	1
AT-CR-E2800T-N-S-N		4	2			4	2	1

確認しましょう

！安全上のご注意

✂準備しましょう















👤使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

👉 確認しましょう

S2-Nタイプ

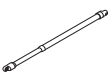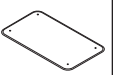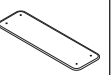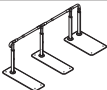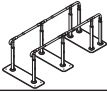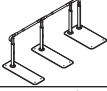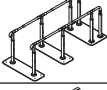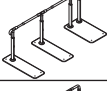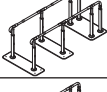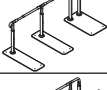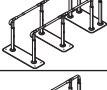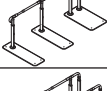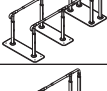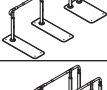製品名	製品イラスト	構成部材							
		曲げ支柱 セット	先端支柱 セット	中間支柱 セット	E800 手すり セット	E1050 手すり セット	E1400 手すり セット	ベース プレート N	ベース プレート S
									
AT-CR-E1600-S2-N		1	1	1	2			1	2
AT-CR-E1600T-S2-N		2	2	2	4			1	2
AT-CR-E1850-S2-N		1	1	1	1	1		1	2
AT-CR-E1850T-S2-N		2	2	2	2	2		1	2
AT-CR-E2200-S2-N		1	1	1	1		1	1	2
AT-CR-E2200T-S2-N		2	2	2	2		2	1	2
AT-CR-E2100-S2-N		1	1	1		2		1	2
AT-CR-E2100T-S2-N		2	2	2		4		1	2
AT-CR-E2450-S2-N		1	1	1		1	1	1	2
AT-CR-E2450T-S2-N		2	2	2		2	2	1	2
AT-CR-E2800-S2-N		1	1	1			2	1	2
AT-CR-E2800T-S2-N		2	2	2			4	1	2

👉 確認しましょう

! 安全上の注意

✂ 準備しましょう

💡 使いましょう

💧 お手入れしましょう

? 困ったときには

N-S2-Nタイプ

製品名	製品イラスト	構成部材						
		曲げ支柱 セット	中間支柱 セット	E800 手すりセット	E1050 手すりセット	E1400 手すりセット	ベースプレート N	ベースプレート S
AT-CR- E2400-N-S2-N		2	2	3			2	2
AT-CR- E2400T-N-S2-N		4	4	6			2	2
AT-CR- E2650-N-S2-N		2	2	2	1		2	2
AT-CR- E2650T-N-S2-N		4	4	4	2		2	2
AT-CR- E3000-N-S2-N		2	2	2		1	2	2
AT-CR- E3000T-N-S2-N		4	4	4		2	2	2
AT-CR- E2900-N-S2-N		2	2	1	2		2	2
AT-CR- E2900T-N-S2-N		4	4	2	4		2	2
AT-CR- E3250-N-S2-N		2	2	1	1	1	2	2
AT-CR- E3250T-N-S2-N		4	4	2	2	2	2	2
AT-CR- E3600-N-S2-N		2	2	1		2	2	2
AT-CR- E3600T-N-S2-N		4	4	2		4	2	2
AT-CR- E3150-N-S2-N		2	2		3		2	2
AT-CR- E3150T-N-S2-N		4	4		6		2	2
AT-CR- E3500-N-S2-N		2	2		2	1	2	2
AT-CR- E3500T-N-S2-N		4	4		4	2	2	2
AT-CR- E3850-N-S2-N		2	2		1	2	2	2
AT-CR- E3850T-N-S2-N		4	4		2	4	2	2
AT-CR- E4200-N-S2-N		2	2			3	2	2
AT-CR- E4200T-N-S2-N		4	4			6	2	2

確認しましょう

！安全上の注意

✖準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

👉 確認しましょう

Mタイプ


各支柱セット、手すりセット、ベースプレートを組み合わせてご利用いただけます。

製品構成	製品イラスト	構成部材							
		曲げ支柱 セット	先端支柱 セット	中間支柱 セット	3方支柱 セット	※手すり セット	ベースプレート N	ベースプレート S	ベースプレート M
N-M-N 2 (ベースプレート4枚)		3			1	3	3		1
N-M-S-N (ベースプレート4枚)		2	1		1	3	2	1	1
N-M-S 2 (ベースプレート4枚)		1	2		1	3	1	2	1
N-M-S-N 2 (ベースプレート5枚)		3		1	1	4	3	1	1
N-M-S 2-N (ベースプレート5枚)		2	1	1	1	4	2	2	1
N-M-S 2-N 2 (ベースプレート6枚)		3		2	1	5	3	2	1

※手すりセットは E800/E1050/E1400 手すりセットより、組み合わせてご利用ください。

- 組み合わせは、ベースプレート4枚で30パターン、5枚で30パターン、6枚で21パターンあります。
- 製品構成では、必ず3方支柱セット上部にある3方ブラケット側に曲げ支柱セットを接続し、その曲げ支柱セットは、ベースプレートNの真ん中に固定してください。

ベースプレートNの
真ん中に固定

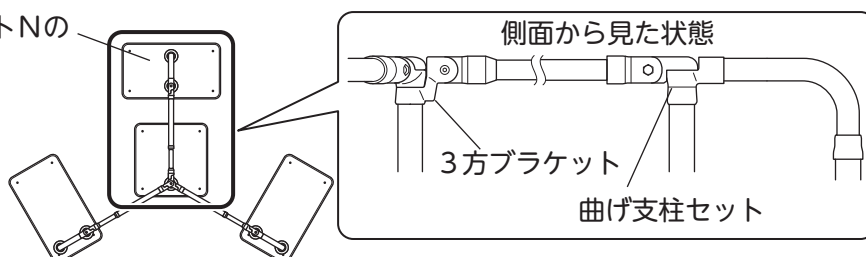

側面から見た状態

3方ブラケット

曲げ支柱セット

各部の名称と仕様

※Mタイプのイラストを例として掲載しています。イラストから各部の名称をご確認ください。

確認しましょう








！安全上のご注意

✖準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

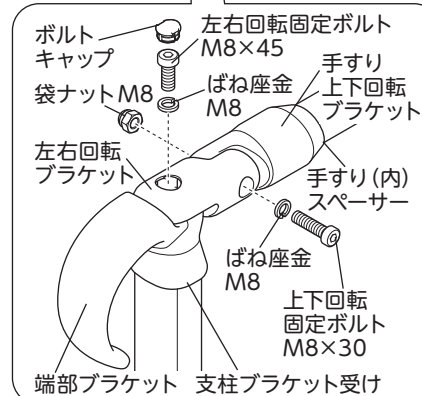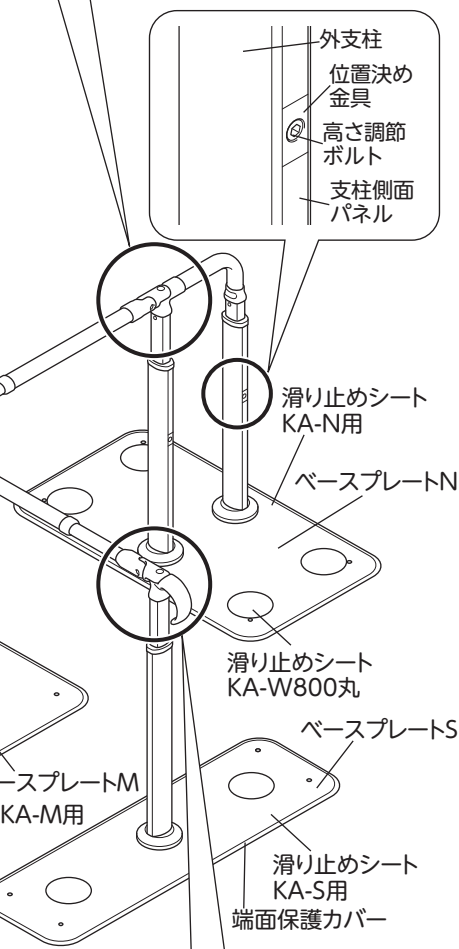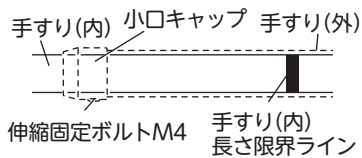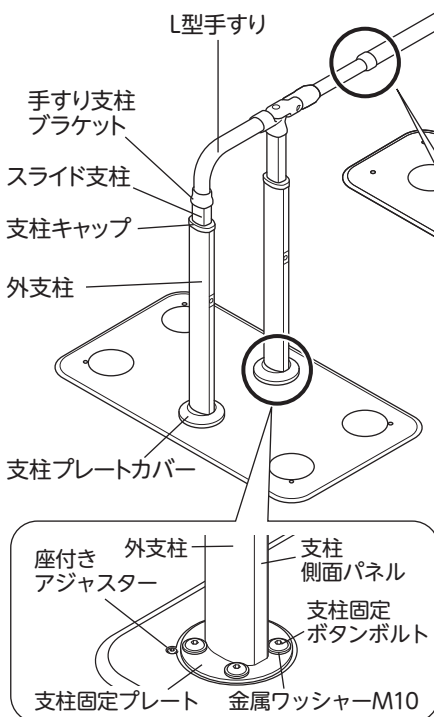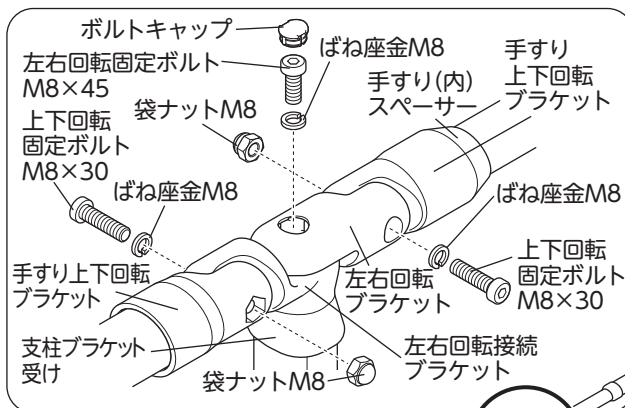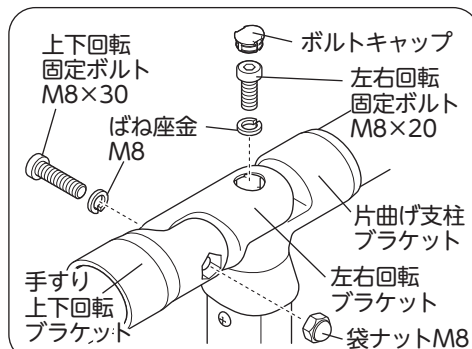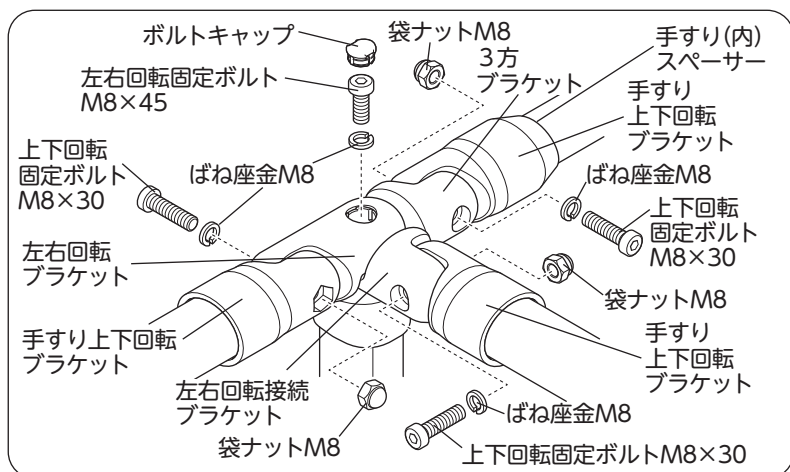

👉 確認しましょう

仕様

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

構成部材	部 品 名	材 質
	L 型手すり・手すり(内)・手すり(外)	半硬質塩化ビニル樹脂 (抗ウイルス加工) / アルミニウム
	外支柱・支柱側面パネル・スライド支柱・位置決め金具	アルミニウム
	ベースプレート N・S・M 支柱固定プレート・高さ調節ボルト	ステンレス
	各種ブラケット	アルミニウム合金
	支柱キャップ・支柱プレートカバー ボルトキャップ・小口キャップ 手すり(内)スパーサー	ASA 樹脂
	滑り止めシート KA-N 用・-S 用・-M 用 ・W800 丸・W940 丸	(表面)発泡ウレタンゴム・(接着面)アクリル系接着剤
	端面保護カバー	塩化ビニル樹脂



抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
有機合成系・練込
手すり持ち手部分
JP0612240A0001R

SIAA マークは ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

⚠ 注意事項

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
- ・SIAA の安全性基準に適合しています

イラスト	品 番	品 名	サイズ	重 量
	530000	AT-CR ベースプレート N	幅 80 × 奥行 45 × 高さ 1.3cm	約15.7kg
	530001	AT-CR ベースプレート S	幅 94 × 奥行 30 × 高さ 1.3cm	約10.8kg
	530002	AT-CR 曲げ支柱セット	幅 11 × 奥行 37 × 高さ 75 ～ 90cm	約 3.7kg
	530003	AT-CR 先端支柱セット	幅 11 × 奥行 16 × 高さ 75 ～ 90cm	約 2.2kg
	530004	AT-CR 中間支柱セット	幅 11 × 奥行 14 × 高さ 75 ～ 90cm	約 2.0kg
	530006	AT-CR-E800 手すりセット	幅 4.8 × 奥行 59 ～ 74 × 高さ 4cm	約 0.9kg
	530007	AT-CR-E1050 手すりセット	幅 4.8 × 奥行 74 ～ 99 × 高さ 4cm	約 1.2kg
	530008	AT-CR-E1400 手すりセット	幅 4.8 × 奥行 99 ～ 134 × 高さ 4cm	約 1.6kg
	530009	AT-CR ベースプレート M	幅 60 × 奥行 60 × 高さ 1.3cm	約15.6kg
	530010	AT-CR 3方支柱セット	幅 12 × 奥行 14 × 高さ 75 ～ 90cm	約 2.0kg

仕様

タイプ	品番	品名	サイズ	重量	手すり高さ
N2	870202	AT-CR-E800-N2	幅80×奥行135～150×高さ77～92cm	約40kg	75・77.5・ 80・82.5・ 85・87.5・ 90cm (7段階)
	870203	AT-CR-E800T-N2		約48kg	
	870204	AT-CR-E1050-N2	幅80×奥行150～175×高さ77～92cm	約40kg	
	870205	AT-CR-E1050T-N2		約49kg	
	870206	AT-CR-E1400-N2	幅80×奥行175～210×高さ77～92cm	約40kg	
	870207	AT-CR-E1400T-N2		約49kg	
S-N	870208	AT-CR-E800-S-N	幅94×奥行115～130×高さ77～92cm	約33kg	
	870209	AT-CR-E800T-S-N		約40kg	
	870210	AT-CR-E1050-S-N	幅94×奥行135～155×高さ77～92cm	約34kg	
	870211	AT-CR-E1050T-S-N		約41kg	
	870212	AT-CR-E1400-S-N	幅94×奥行155～190×高さ77～92cm	約34kg	
	870213	AT-CR-E1400T-S-N		約42kg	
N-S-N	870214	AT-CR-E1600-N-S-N	幅94×奥行200～230×高さ77～92cm	約53kg	
	870215	AT-CR-E1600T-N-S-N		約65kg	
	870216	AT-CR-E1850-N-S-N	幅94×奥行215～255×高さ77～92cm	約54kg	
	870217	AT-CR-E1850T-N-S-N		約65kg	
	870218	AT-CR-E2200-N-S-N	幅94×奥行240～290×高さ77～92cm	約54kg	
	870219	AT-CR-E2200T-N-S-N		約66kg	
	870220	AT-CR-E2100-N-S-N	幅94×奥行230～280×高さ77～92cm	約54kg	
	870221	AT-CR-E2100T-N-S-N		約66kg	
	870222	AT-CR-E2450-N-S-N	幅94×奥行255～315×高さ77～92cm	約54kg	
	870223	AT-CR-E2450T-N-S-N		約67kg	
S2-N	870224	AT-CR-E2800-N-S-N	幅94×奥行280～350×高さ77～92cm	約55kg	
	870225	AT-CR-E2800T-N-S-N		約67kg	
	870226	AT-CR-E1600-S2-N	幅94×奥行180～210×高さ77～92cm	約47kg	
	870227	AT-CR-E1600T-S2-N		約57kg	
	870228	AT-CR-E1850-S2-N	幅94×奥行195～235×高さ77～92cm	約47kg	
	870229	AT-CR-E1850T-S2-N		約57kg	
	870230	AT-CR-E2200-S2-N	幅94×奥行220～270×高さ77～92cm	約48kg	
	870231	AT-CR-E2200T-S2-N		約58kg	
	870232	AT-CR-E2100-S2-N	幅94×奥行210～260×高さ77～92cm	約48kg	
	870233	AT-CR-E2100T-S2-N		約58kg	
N-S2-N	870234	AT-CR-E2450-S2-N	幅94×奥行235～295×高さ77～92cm	約48kg	
	870235	AT-CR-E2450T-S2-N		約59kg	
	870236	AT-CR-E2800-S2-N	幅94×奥行260～330×高さ77～92cm	約48kg	
	870237	AT-CR-E2800T-S2-N		約60kg	
	870238	AT-CR-E2400-N-S2-N	幅94×奥行265～310×高さ77～92cm	約67kg	
	870239	AT-CR-E2400T-N-S2-N		約81kg	
	870240	AT-CR-E2650-N-S2-N	幅94×奥行280～335×高さ77～92cm	約67kg	
	870241	AT-CR-E2650T-N-S2-N		約82kg	
	870242	AT-CR-E3000-N-S2-N	幅94×奥行305～370×高さ77～92cm	約68kg	
	870243	AT-CR-E3000T-N-S2-N		約83kg	
	870244	AT-CR-E2900-N-S2-N	幅94×奥行295～360×高さ77～92cm	約68kg	
	870245	AT-CR-E2900T-N-S2-N		約82kg	
	870246	AT-CR-E3250-N-S2-N	幅94×奥行320～395×高さ77～92cm	約68kg	
	870247	AT-CR-E3250T-N-S2-N		約83kg	
	870248	AT-CR-E3600-N-S2-N	幅94×奥行345～430×高さ77～92cm	約69kg	
	870249	AT-CR-E3600T-N-S2-N		約84kg	
	870250	AT-CR-E3150-N-S2-N	幅94×奥行310～385×高さ77～92cm	約68kg	
	870251	AT-CR-E3150T-N-S2-N		約83kg	
	870252	AT-CR-E3500-N-S2-N	幅94×奥行335～420×高さ77～92cm	約68kg	
	870253	AT-CR-E3500T-N-S2-N		約84kg	
	870254	AT-CR-E3850-N-S2-N	幅94×奥行360～455×高さ77～92cm	約69kg	
	870255	AT-CR-E3850T-N-S2-N		約85kg	
	870256	AT-CR-E4200-N-S2-N	幅94×奥行385～490×高さ77～92cm	約69kg	
	870257	AT-CR-E4200T-N-S2-N		約85kg	

確認しましょう

！安全上のご注意

✖準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには


👉 確認しましょう

商品の寸法図

単位：cm


N2タイプ

(片側手すり)
天面図

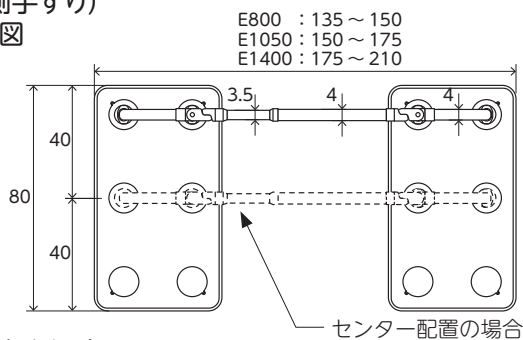


E800 : 135 ~ 150
E1050 : 150 ~ 175
E1400 : 175 ~ 210

(両側手すり)
天面図

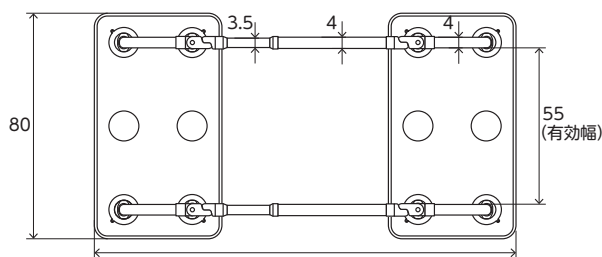

E800T : 135 ~ 150
E1050T : 150 ~ 175
E1400T : 175 ~ 210

側面図

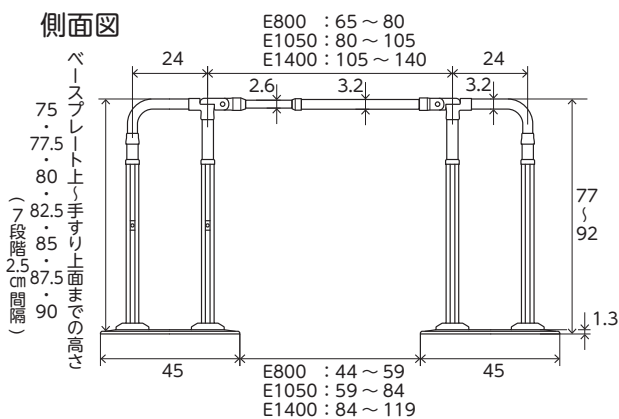


E800 : 65 ~ 80
E1050 : 80 ~ 105
E1400 : 105 ~ 140

E800 : 44 ~ 59
E1050 : 59 ~ 84
E1400 : 84 ~ 119


S-Nタイプ

(片側手すり)
天面図

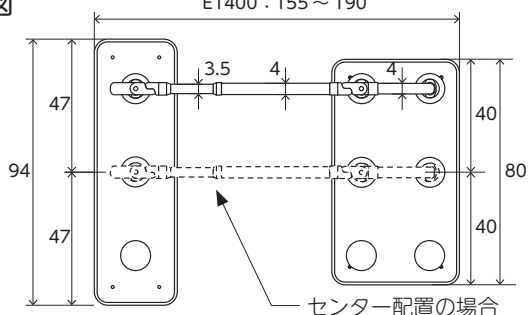


E800 : 115 ~ 130
E1050 : 130 ~ 155
E1400 : 155 ~ 190

(両側手すり)
天面図

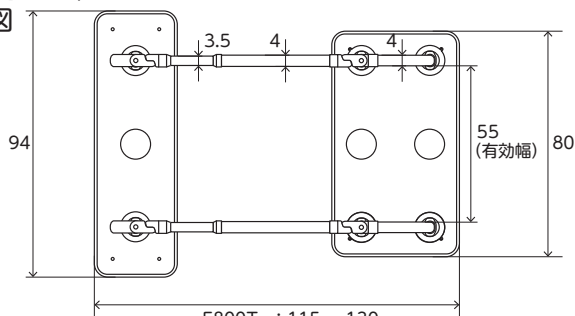

E800T : 115 ~ 130
E1050T : 130 ~ 155
E1400T : 155 ~ 190

側面図

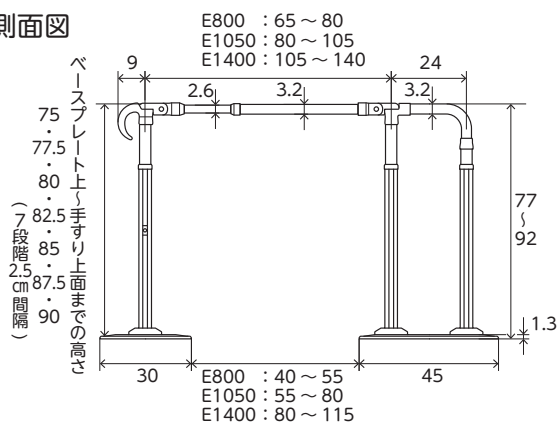


E800 : 65 ~ 80
E1050 : 80 ~ 105
E1400 : 105 ~ 140

E800 : 40 ~ 55
E1050 : 55 ~ 80
E1400 : 80 ~ 115


N-S-Nタイプ

(片側手すり)
天面図


E1600 : 200 ~ 230 E2100 : 230 ~ 280
E1850 : 215 ~ 255 E2450 : 255 ~ 315
E2200 : 240 ~ 290 E2800 : 280 ~ 350

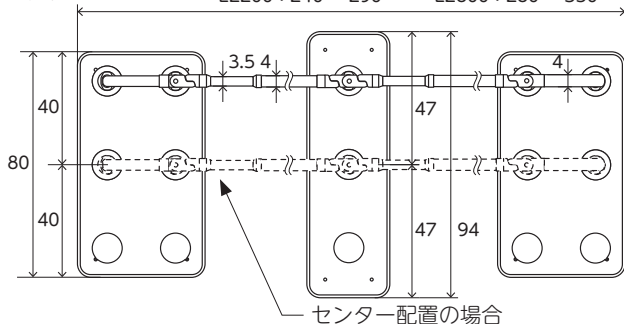

(両側手すり)
天面図

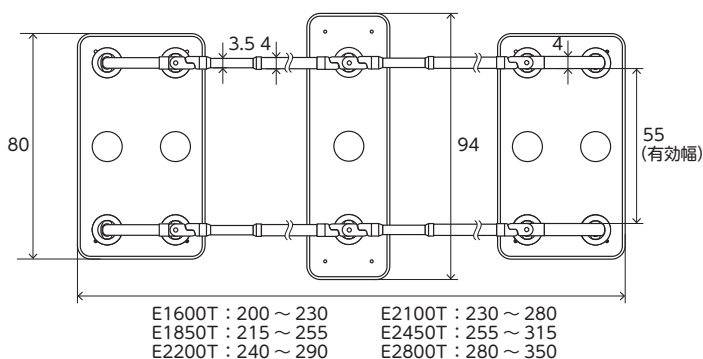


側面図

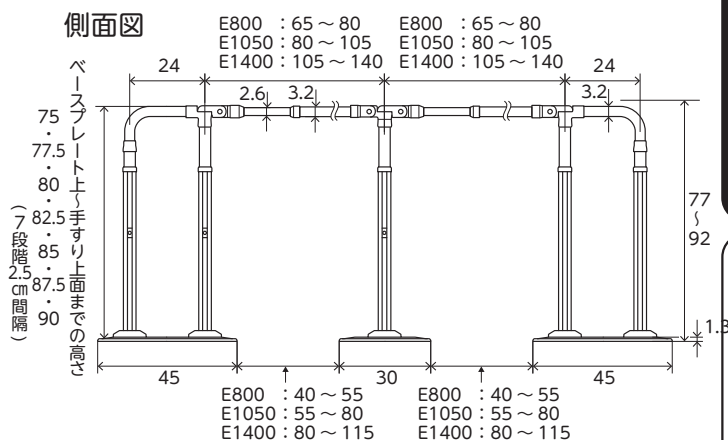


S2-Nタイプ

(片側手すり)
天面図


E1600 : 180 ~ 210 E2100 : 210 ~ 260
E1850 : 195 ~ 235 E2450 : 235 ~ 295
E2200 : 220 ~ 270 E2800 : 260 ~ 330

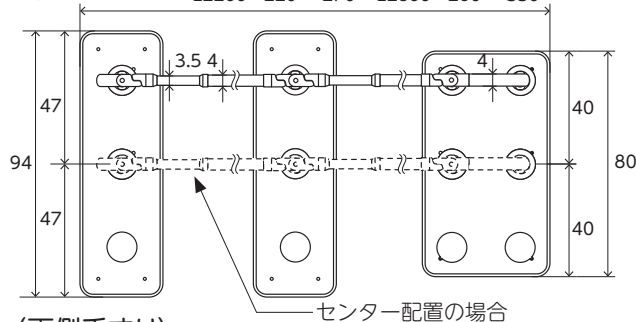

(両側手すり)
天面図

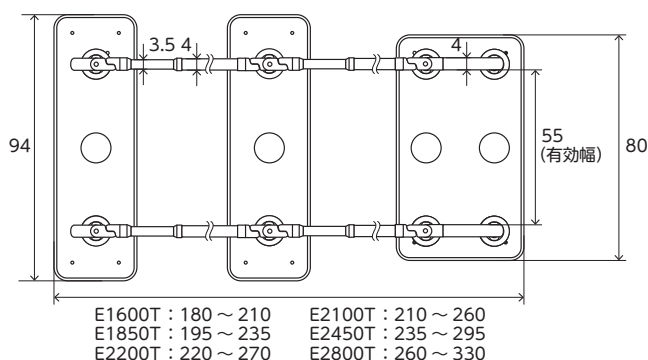

側面図

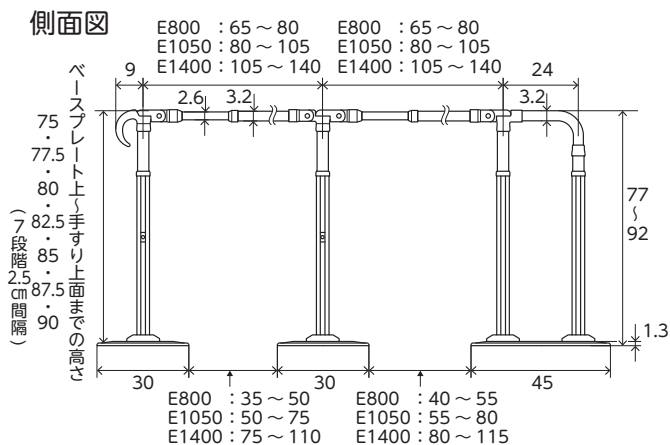

確認しましょう

！安全上のご注意

＊準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

👉 確認しましょう


商品の寸法図

単位：cm


N-S2-Nタイプ

(片側手すり)
天面図


E2400 : 265 ~ 310	E2900 : 295 ~ 360	E3150 : 310 ~ 385	E4200 : 385 ~ 490
E2650 : 280 ~ 335	E3250 : 320 ~ 395	E3500 : 335 ~ 420	
E3000 : 305 ~ 370	E3600 : 345 ~ 430	E3850 : 360 ~ 455	

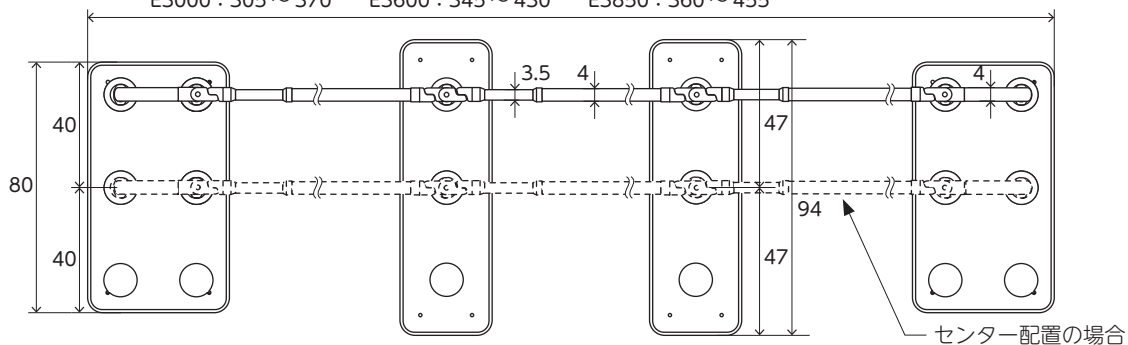

側面図

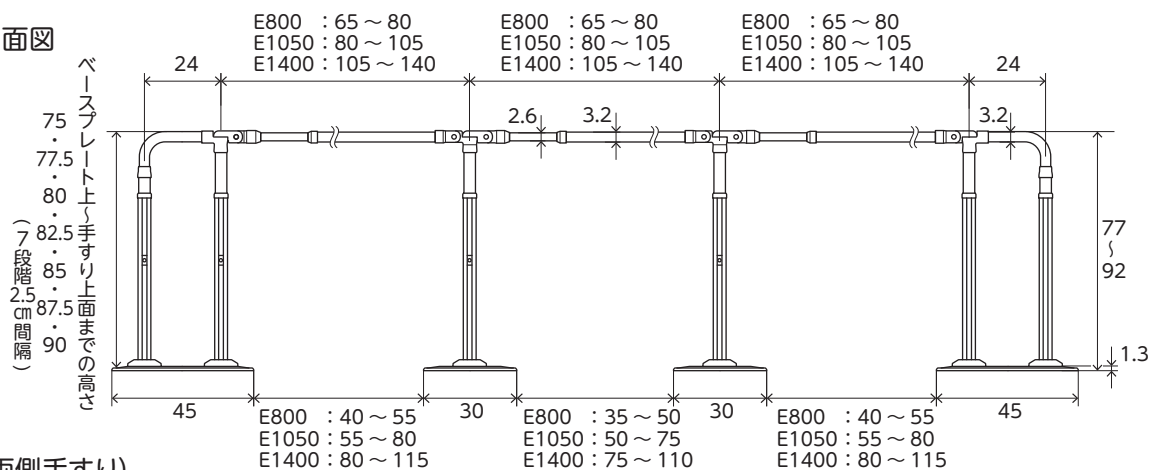

(両側手すり)
天面図

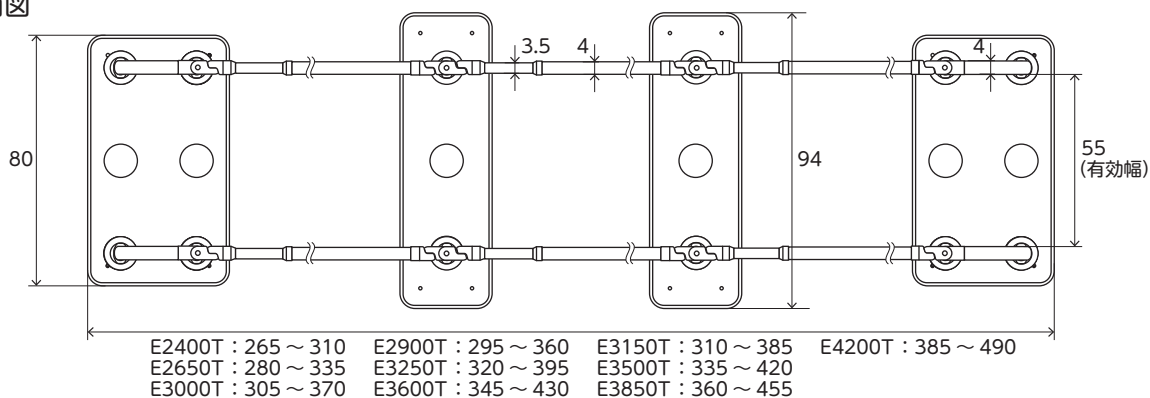

E2400T : 265 ~ 310	E2900T : 295 ~ 360	E3150T : 310 ~ 385	E4200T : 385 ~ 490
E2650T : 280 ~ 335	E3250T : 320 ~ 395	E3500T : 335 ~ 420	
E3000T : 305 ~ 370	E3600T : 345 ~ 430	E3850T : 360 ~ 455	

確認しましょう

！安全上の注意

✖準備しましょう

♡使いましょう


💧お手入れしましょう

？困ったときには


Mタイプ

※例としてベースプレート6枚構成を記載しています。


天面図

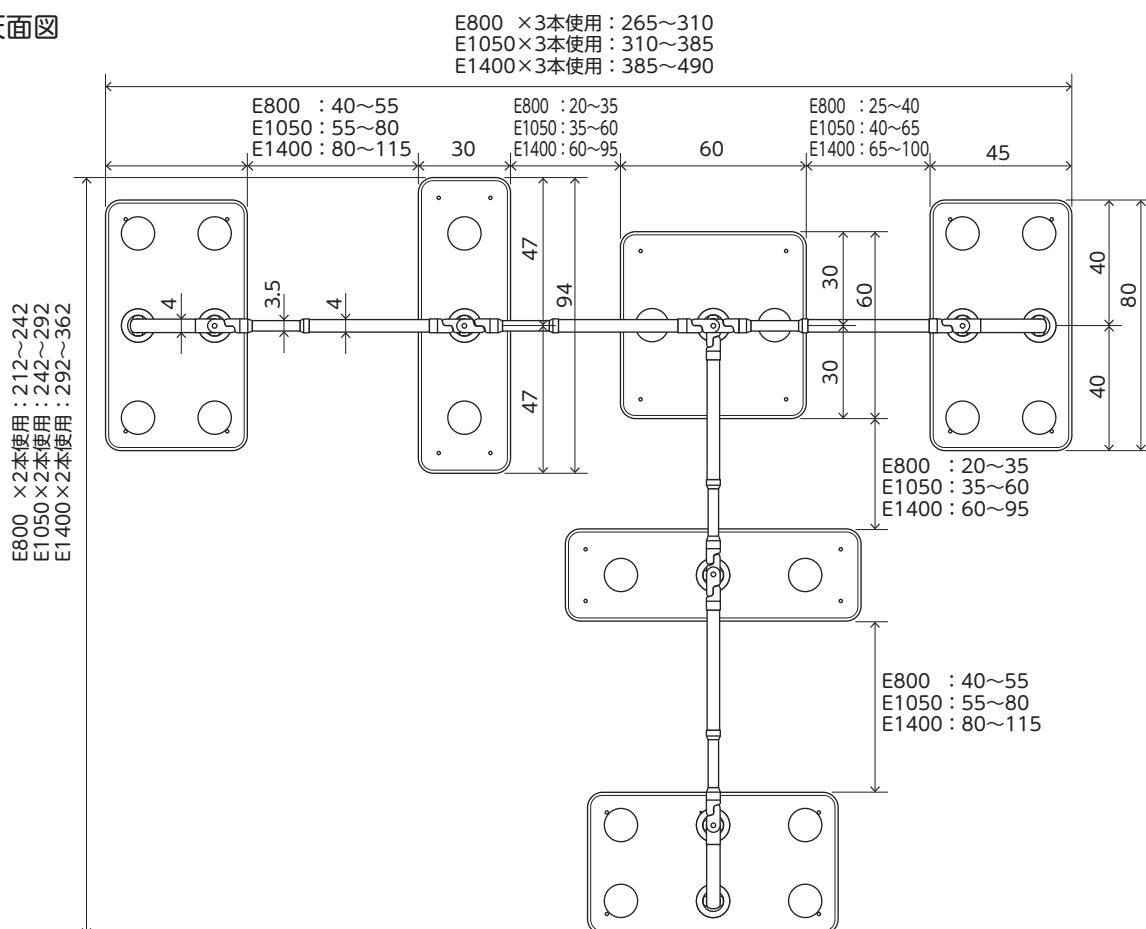

側面図

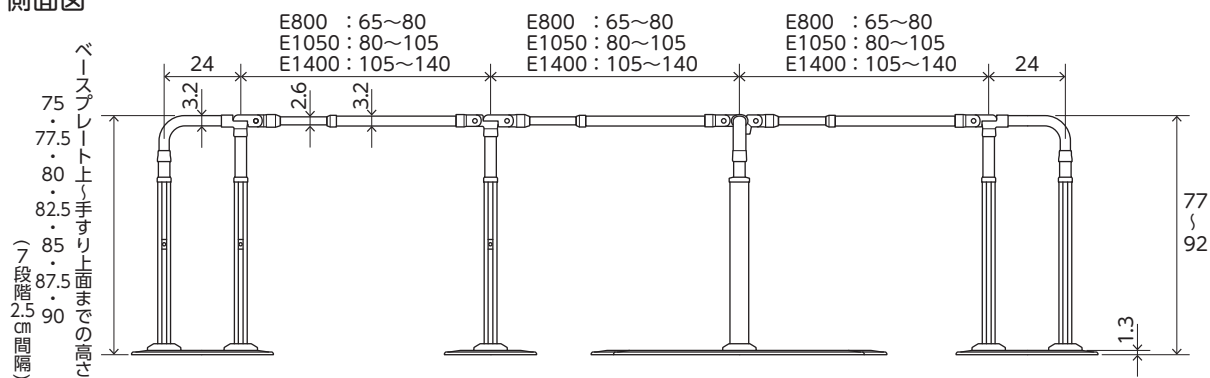

正面図

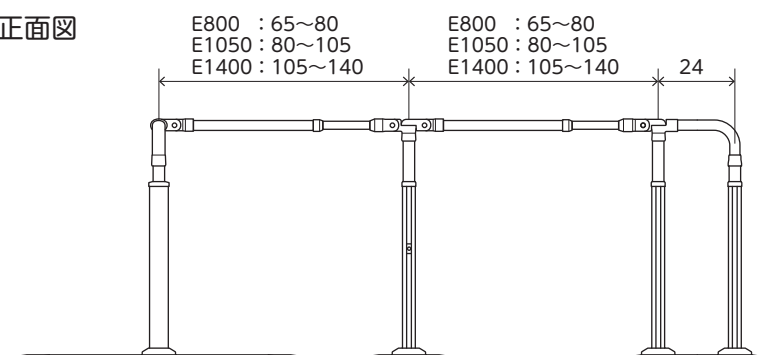

確認しましょう

！安全上の注意

✖準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

！ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。




警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。


！ 必ず行うこと ！

正しく設置すること 転倒やけがの原因になります。


- ・各ベースプレートに支柱を支柱固定ボタンボルトで固定して、使用してください。
- ・利用者がベースプレートを踏みながら使用できるように設置してください。
- ・手すりの高さは、大腿骨大転子の位置（太もも横の出っ張り辺り）を目安に調節してください。

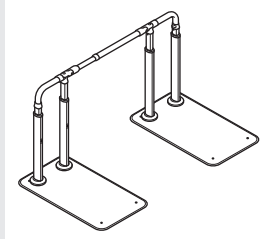

- ・手すりの左右角度は270°以内に納まるように設置してください。

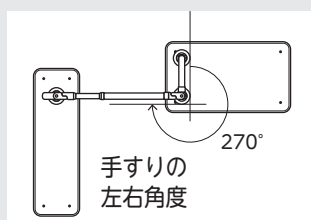


- ・手すりの上下角度は45°以内に納まるように設置してください。

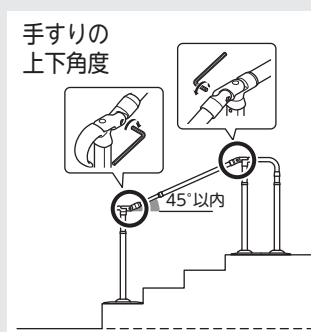


- ・手すりは、手すり角度を調節した後、上下回転固定ボルトを固定してから使用してください。

- ・上下に角度をつける際は、手すり（内）（細い方）が下側になるように設置してください。

- ・段差のある箇所に設置するときは、ベースプレート端部が段鼻よりも内側になるように設置してください。

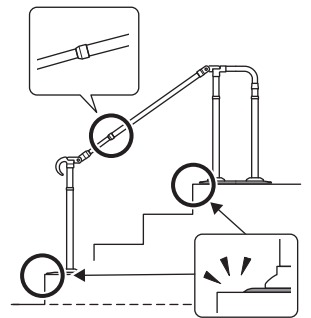


- ・各支柱は同じ向きに取り付けてください。
- ・各ベースプレートがしっかりと地面に接地し、支柱が垂直になるように設置してください。

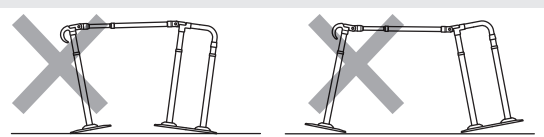


- ・手すり（内）の長さ限界ラインが小口キャップから見えないように長さを調節してください。




- ・手すり長さを調節した後、伸縮固定ボルトを固定してから使用してください。

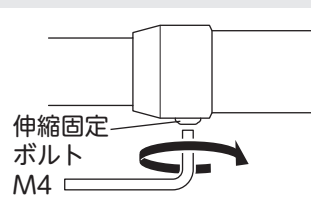

- ・両側手すりを使用するときは、ベースプレートNとSの端に取り付けてください。

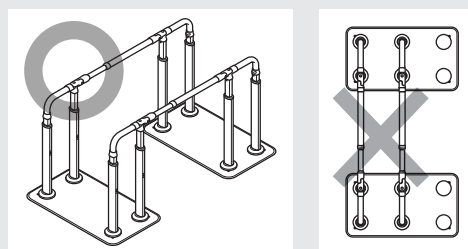

- ・3方支柱セットを使用するときは、ベースプレートMに固定してください。
- ・3方支柱セット上部にある3方ブラケット側に曲げ支柱セットを接続してください。
- ・3方ブラケット側の曲げ支柱セットは、ベースプレートNの真ん中に固定してください。

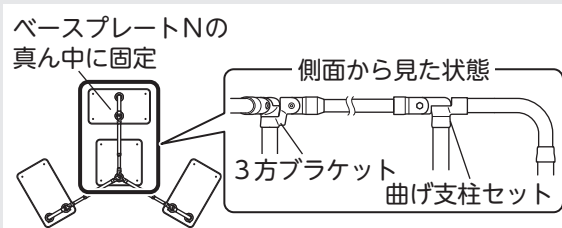

確認しましょう

！ 安全上のご注意

＊ 準備しましょう

♡ 使いましょう

💧 お手入れしましょう

？ 困ったときには




警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

！ 必ず行うこと ！


毎回ご使用前に製品を前後左右にゆらしてガタつきがないか確認すること

製品が破損し、けがの原因になります。

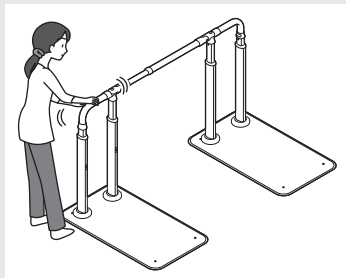


使用中にゆるみやガタつきが発生した場合はただちに使用を中止して必ず貸与事業所に相談すること

転倒やけがの原因になります。

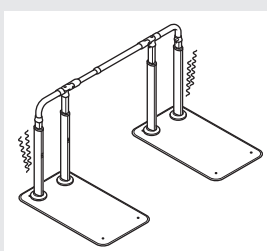

ベースプレートに段差があるので、つまずかないように注意すること

転倒やけがの原因になります。

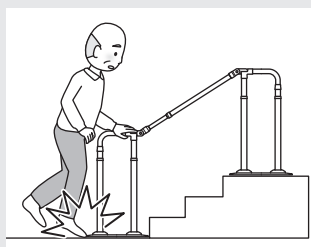

ベースプレートに足を乗せるときは、滑り止めシートにつまずかないように注意すること

転倒やけがの原因になります。

ぬれた状態の手すりやベースプレートは滑りやすくなるので注意すること


転倒やけがの原因になります。



使用するときには、安定性や利用者の状況を確認してから使用すること

転倒やけがの原因になります。








- ・利用者の身体状況によって、手すりの高さや、設置する位置を合わせてください。
- ・利用者が自分の身体で十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添ってください。

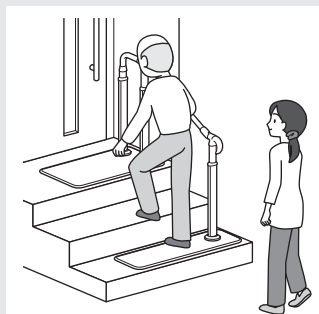

点検方法は…添付のご使用前点検シートをご確認ください。

手すりはベースプレートのある側から使用すること

転倒やけがの原因になります。

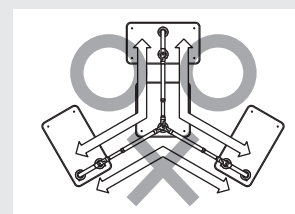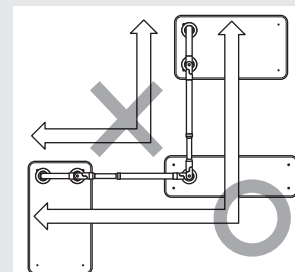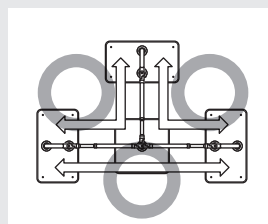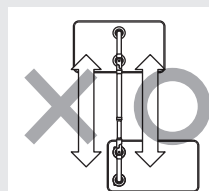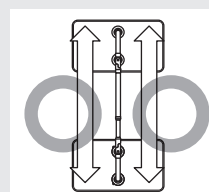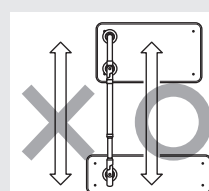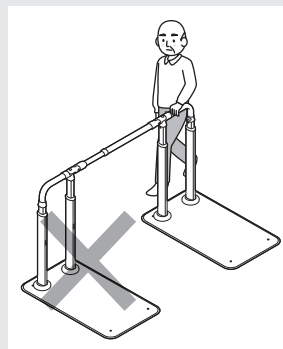

確認しましょう

！安全上の「注意

＊準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

！ 安全上のご注意




警告


誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

！ 必ず行うこと ！

手すりを固定するときは、必ずばね座金M8があることを確認してから固定すること
製品がガタつく原因になります。

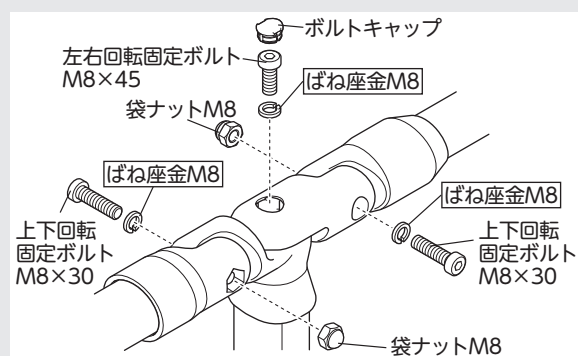


手すりを使用するときは、左右回転固定ボルトと上下回転固定ボルトを固定してから使用すること
製品がガタつき、転倒やけがの原因になります。

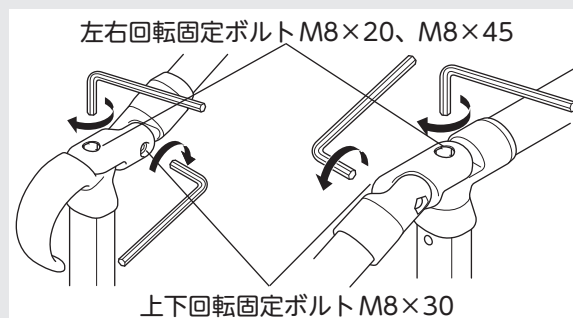

⊘ 絶対にしないこと ⊘



予測できない行動をとる利用者や、自力で危険な状態から回避することが難しい利用者には使用しないこと

利用者の心身状態や利用環境によって、誤って頭や手足、体の一部をぶつけて転倒する可能性があり、場合によっては生命にかかわる事故につながるおそれがあります。十分なモニタリングとフィッティングをお願いいたします。

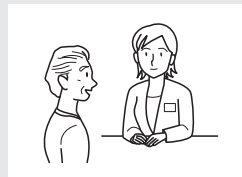




手すりに対して水平に力を加えたり、勢いよく力を加えるなどベースプレートが浮き上がるような使用をしないこと

固定式ではないため転倒やけがの原因になります。手すりを床面に押さえつけるように力を加えて使用してください。

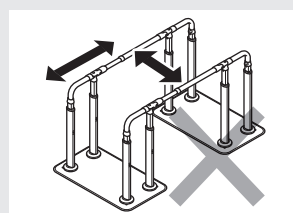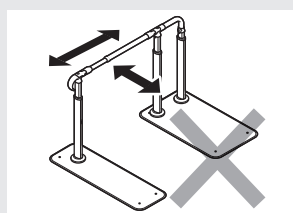

ベースプレートよりも小さい縁石や凹凸が大きい床面、芝生、滑りやすい床面の上に設置しないこと

ベースプレートがガタつき、転倒やけがの原因になります。砂利や土の上ではしっかりと地面をならしてガタつきがないことを確認してください。

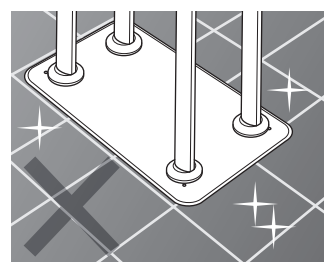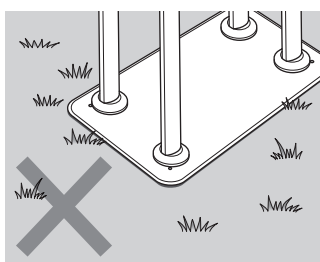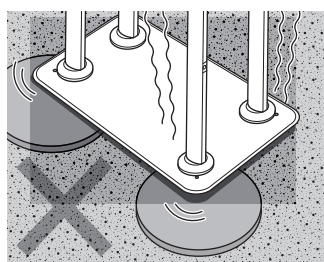




警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

❌ 絶対にしないこと ❌

斜面に設置しないこと

ベースプレートが浮き上がり、転倒やけがの原因になります。

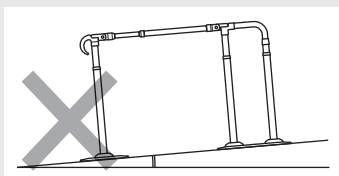

ベースプレートに砂利や土、雪などが乗ったまま使用しないこと

足を滑らせ、転倒やけがの原因になります。




ベースプレートの上にマットなどを載せたまま使用しないこと

足を滑らせ、転倒やけがの原因になります。


車いすからの立ち上がりには使用しないこと

転倒やけがの原因になります。

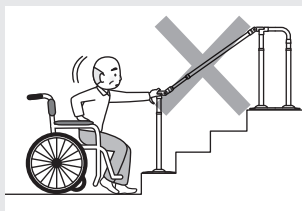

子ども、幼児を遊ばせるなど、ほかの用途では使用しないこと

転倒やけがの原因になります。

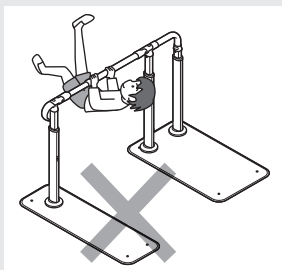

他社製品と組み合わせたり、連結して使用しないこと


破損やけがの原因になります。

2人以上で同時に使用しないこと

破損やけがの原因になります。


回転固定ボルトを固定したまま、製品を動かさないこと

ブラケットが破損し、転倒やけがの原因になります。

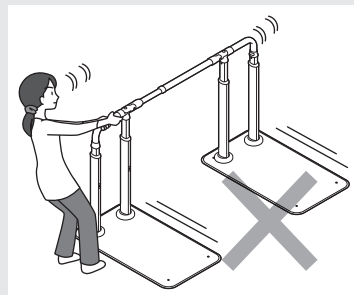


杖や傘など突起物と合わせて使用しないこと

つまずきや転倒の原因になります。

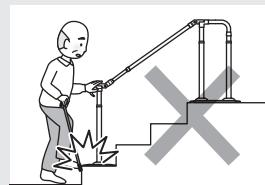


ベースプレート表面の滑り止めシートを剥がして使用しないこと

転倒やけがの原因になります。

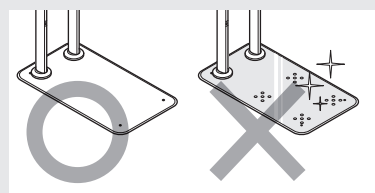


手すり支柱の間に頭、体、手や足などを入れないこと

窒息やけがの原因になります。

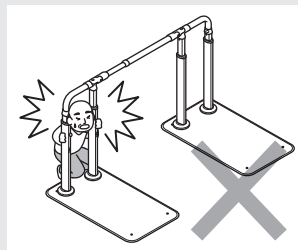

手すりに寄りかかったり、腰かけたりしないこと

ブラケットが破損し、転倒やけがの原因になります。

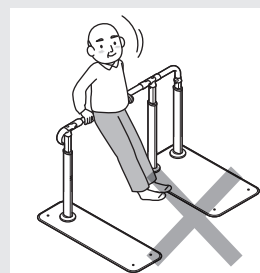

確認しましょう

！安全上の「注意」

✕準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

！ 安全上のご注意




警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

⊘ 絶対にしないこと ⊘


ベースプレートNとSの端に支柱を固定するときは、各ベースプレートの上に手すりを沿わせて設置しないこと

ベースプレートがズレ動き、転倒やけがの原因になります。

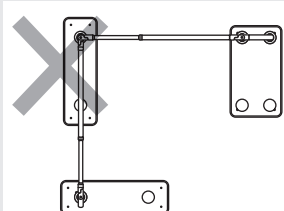


端部にベースプレートSを使用するときは、手すりから45°を超える角度で設置しないこと

ベースプレートがズレ動き、転倒やけがの原因になります。

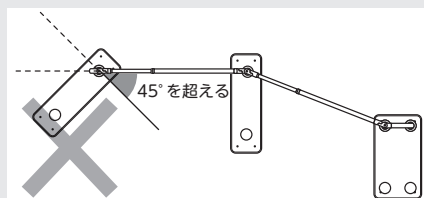


公道などの道路にはみだして設置しないこと

車両や人の通行を妨げ、事故につながるおそれがあります。

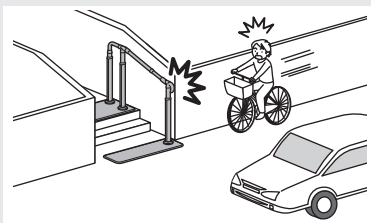

端部ブラケットの前方を握って引っ張らないこと

ベースプレートが浮き上がり、転倒やけがの原因になります。

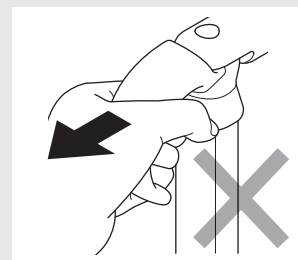


体重が100kgを超える方は使用しないこと

本体が破損し、転倒やけがの原因になります。




座付きアジャスターだけで接地しないこと

ベースプレートが浮き上がり、転倒やけがの原因になります。

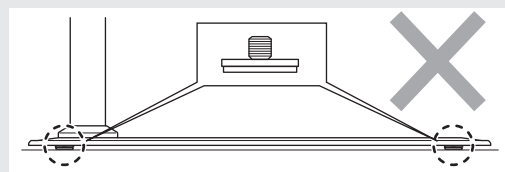

ベースプレートMを使用するときは、3方支柱セット1本のみ取り付けし、他支柱セットを使用しないこと

破損やけがの原因になります。

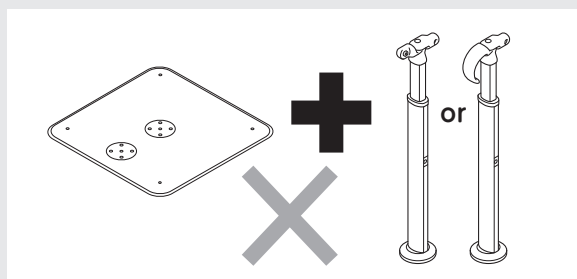

改造をしないこと

また、修理技術者以外の方は、分解したり修理したりしないこと



分解禁止

正常にはたらかず、けがの原因になります。

商品梱包用のポリ袋は幼児の手が届くところに置かないこと

幼児がかぶると窒息するおそれがあります。

確認しましょう

！ 安全上のご注意

✕ 準備しましょう

♡ 使いましょう

💧 お手入れしましょう

？ 困ったときには



注意


誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

！ 必ず行うこと ！


開き戸付近に設置するときは、扉と手すりとの干渉や扉の下とベースプレートとの干渉を確認して設置すること

扉や製品が破損する原因になります。

※上面

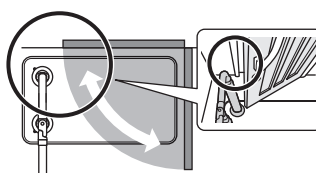



※正面

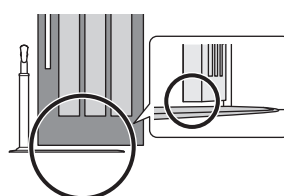

製品を移動させるときは、左右回転ブラケットにある左右回転固定ボルトあるいは上下回転固定ボルトをゆるめて、別々に移動すること


そのまま移動させようとする、床面に傷がついたり、製品が破損する原因になります。

※取り付け、取り外し、製品の移動は貸与事業所などの取り付け業者がおこなってください。

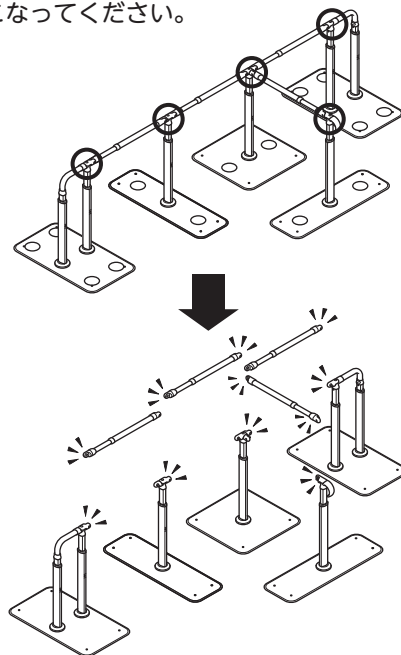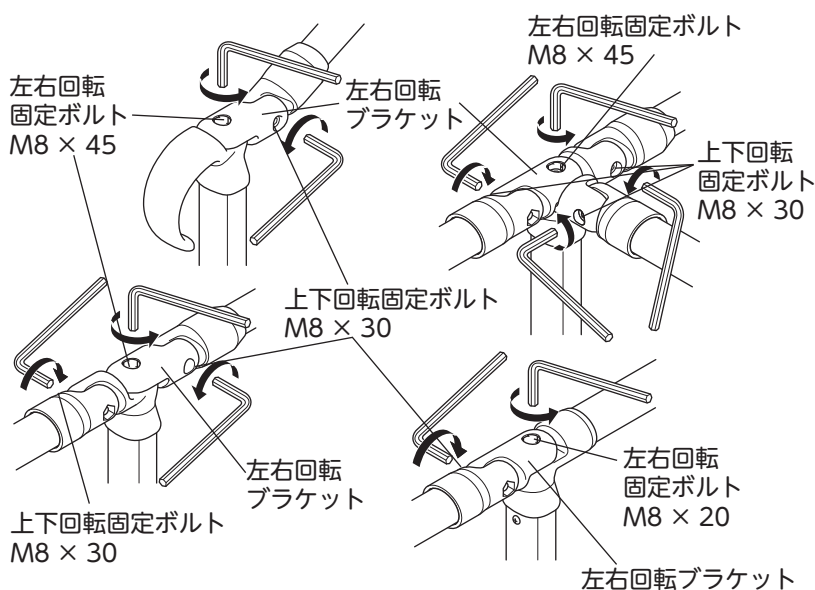

製品を設置するときは、地面に傷がつかないか確認すること

支柱固定ボタンボルトや座付きアジャスターで床材やタイルなどに傷がついたり、破損の原因となります。床に凹凸がある場合は、必要に応じて、支柱固定ボタンボルトの下にやわらかいマットなどを敷いてください。

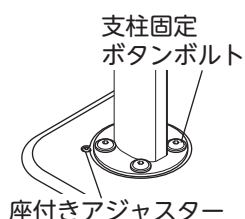


塩ビクッションフロアのような比較的やわらかい床面に設置する際は、床面に設置あとが発生する可能性があるので注意すること

本製品はベースプレートのサイズと重量によって、製品の安全性を確保しています。その点をご理解の上、ご使用ください。

製品重量が重たいので、足に落下しないように注意すること

けがの原因になります。

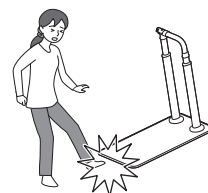

確認しましょう

！安全上の「注意」

※準備しましょう

使いまししょう

お手入れしましょう

？困ったときには

！ 安全上のご注意



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

！ 必ず行うこと ！


ベースプレートに触れる際は、滑り止めシートの突起に注意すること

けがの原因になります。



靴下やストッキングを履いたまま歩行する際は、滑り止めシートの突起に注意すること

つまずきや、靴下やストッキングが伝線する原因になります。

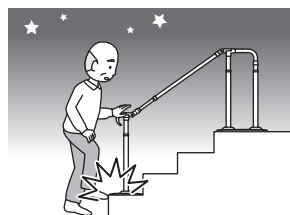


夜間など、視界が悪いときは、通行に注意すること

つまずきや転倒の原因になります。

定期的に各部位に破損などがないか確認すること


特に屋外で継続的に設置、使用していると日光や雨などによって、樹脂部分が破損する可能性があります。

破損などが見つかりましたら、貸与事業所などの取り付け業者にご連絡ください。

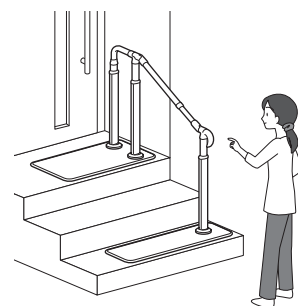

直接日光が当たる場所に設置すると、金属部が熱くなることがあるので注意すること

やけどの原因になります。

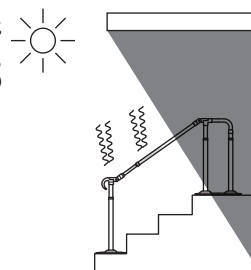

⊘ 絶対にしないこと ⊘

●お手入れ・保管時の注意 以下の行為をおこなうと、製品の変色や劣化がすすむ原因になります。

次にあげるものではお手入れしないこと


- ・シンナー ・クレンジール
- ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系薬剤（洗剤）や熱湯（煮沸消毒など）による殺菌、消毒
- ・磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの



製品が劣化し、破損の原因になります。


製品に重量物を乗せたり、手すりに物をかぶせたりしないこと

製品の変形や、変色の原因になります。

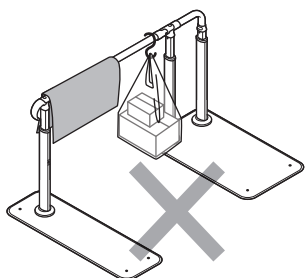


消毒に、オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しないこと

製品が破損する原因になります。

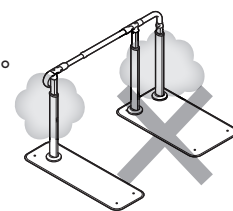


近くに火気がある場所には設置しないこと

火災・変形・変色などが起こり、設置場所によっては転倒やけがの原因になります。

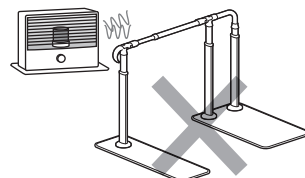

湿気の多い場所で保管しないこと

カビが発生する原因になります。

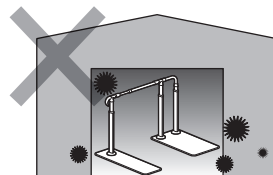

確認しましょう

！ 安全上のご注意

✖ 準備しましょう

♡ 使いましょう

💧 お手入れしましょう

？ 困ったときには

✖ 準備しましょう


設置する前に

設置する場所と、ベースプレートを置くスペースを確認します

N2タイプ


S-Nタイプ

通路などに設置する場合

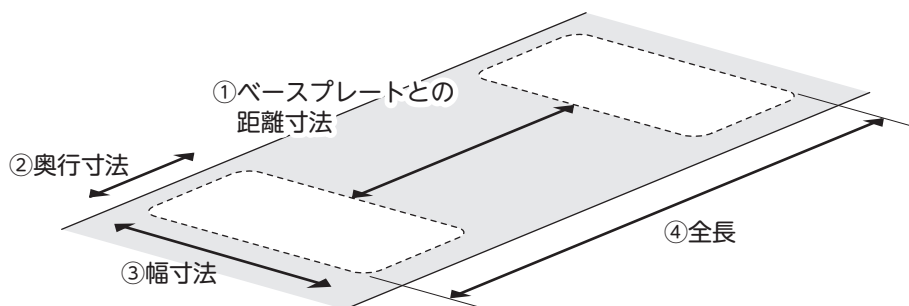


段差に設置する場合

N2タイプ

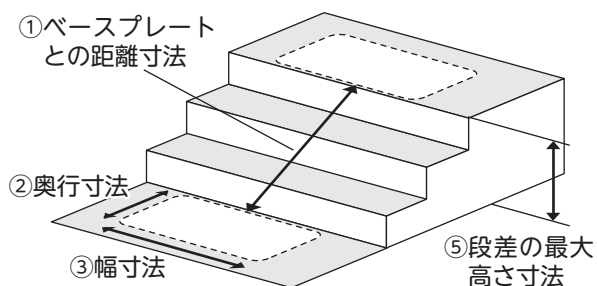

S-Nタイプ

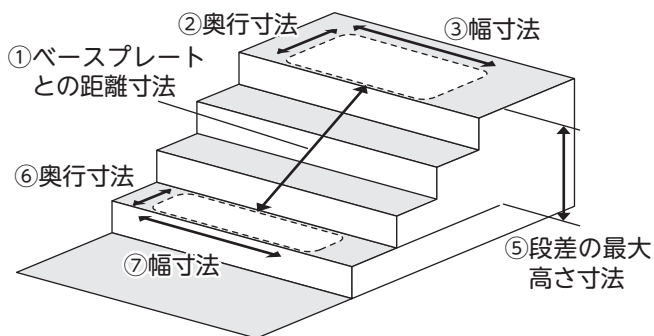

	N2タイプ	S-Nタイプ
① ベースプレートとの距離寸法	(E800) 44～59cm 目安 (E1050) 59～84cm 目安 (E1400) 84～119cm 目安	(E800) 40～55cm 目安 (E1050) 55～80cm 目安 (E1400) 80～115cm 目安
② 奥行寸法	45cm 以上	
③ 幅寸法	80cm 以上	
④ 全長	(E800) 135～150cm 以上 (E1050) 150～175cm 以上 (E1400) 175～210cm 以上	(E800) 115～130cm 以上 (E1050) 130～155cm 以上 (E1400) 155～190cm 以上
⑤ 段差の最大高さ寸法	(E800) 30cm 以下 (E1050) 45cm 以下 (E1400) 60cm 以下	
⑥ 奥行寸法		30cm 以上
⑦ 幅寸法		94cm 以上

※両側手すり (E000T) の場合も同様

※S-Nタイプは、②、③と⑥、⑦の位置が逆でも可

確認しましょう

！安全上のご注意

✖ 準備しましょう

使いましょ

お手入れしましょ


？困ったときには

✖ 準備しましょう


N-S-Nタイプ

S2-Nタイプ

通路などに設置する場合

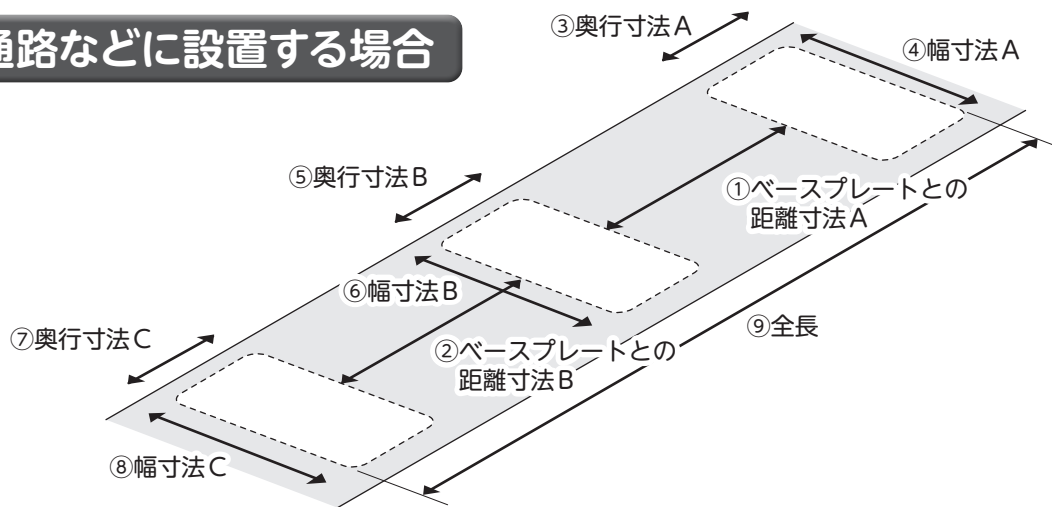

段差に設置する場合

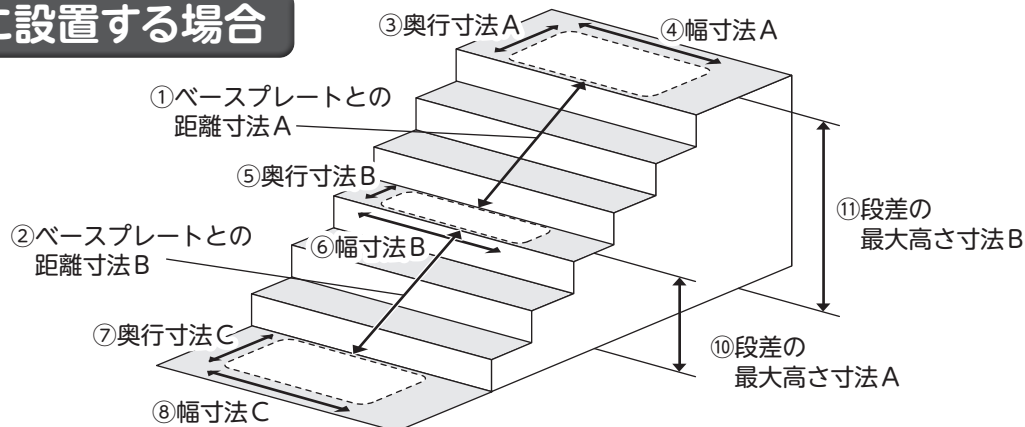


	N-S-Nタイプ	S2-Nタイプ
① ベースプレートとの距離寸法A	(E1600) 40~55cm目安 (E1850/E2100) 55~80cm目安 (E2200/E2450/E2800) 80~115cm目安	
② ベースプレートとの距離寸法B	(E1600/E1850/E2200) 40~55cm目安 (E2100/E2450) 55~80cm目安 (E2800) 80~115cm目安	(E1600/E1850/E2200) 35~50cm目安 (E2100/E2450) 50~75cm目安 (E2800) 75~110cm目安
③ 奥行寸法A		45cm以上
④ 幅寸法A		80cm以上
⑤ 奥行寸法B		30cm以上
⑥ 幅寸法B		94cm以上
⑦ 奥行寸法C	45cm以上	30cm以上
⑧ 幅寸法C	80cm以上	94cm以上
⑨ 全長	(E1600) 200~230cm以上 (E1850) 215~255cm以上 (E2200) 240~290cm以上 (E2100) 230~280cm以上 (E2450) 255~315cm以上 (E2800) 280~350cm以上	(E1600) 180~210cm以上 (E1850) 195~235cm以上 (E2200) 220~270cm以上 (E2100) 210~260cm以上 (E2450) 235~295cm以上 (E2800) 260~330cm以上
⑩ 段差の最大高さ寸法A	(下方にE800手すりを使用する場合) 30cm以下 (下方にE1050手すりを使用する場合) 45cm以下 (下方にE1400手すりを使用する場合) 60cm以下	
⑪ 段差の最大高さ寸法B	(E1600) 60cm以下 (E1850) 75cm以下 (E2200/E2100) 90cm以下 (E2450) 105cm以下 (E2800) 120cm以下	

※両側手すり(E000T)の場合も同様


※S2-Nタイプは、③、④と⑦、⑧の位置が逆でも可

N-S2-Nタイプ

通路などに設置する場合

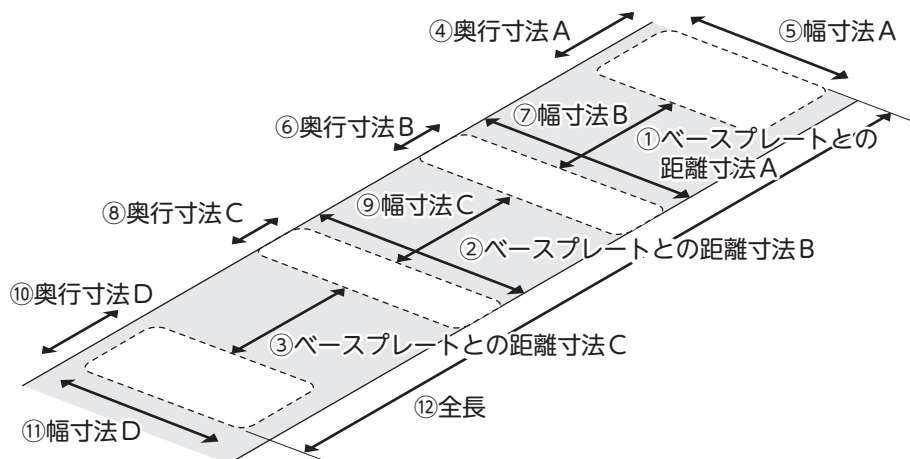

段差に設置する場合

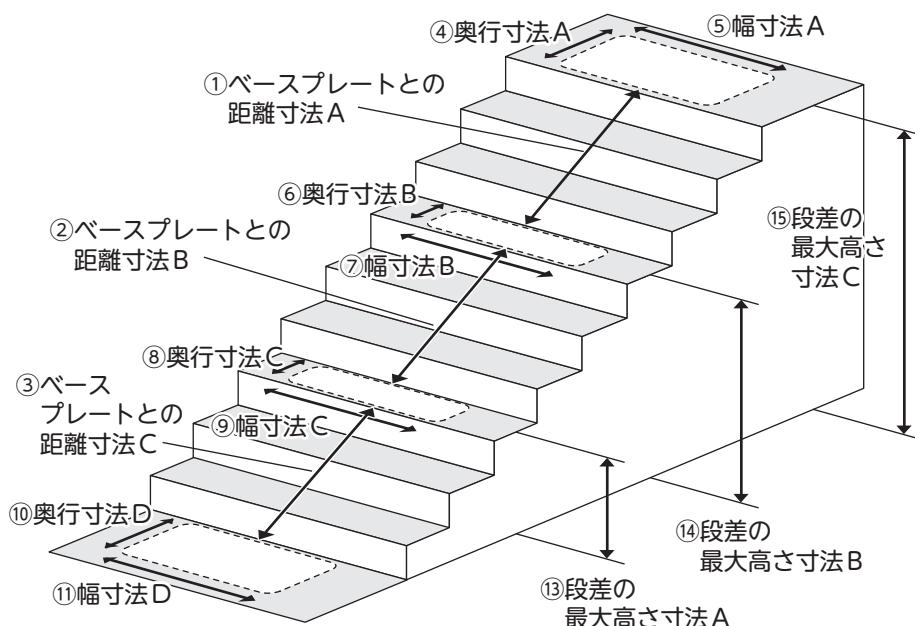

	N-S-Nタイプ
① ベース プレート との距離 寸法 A	(E2400) 40～55cm 目安 (E2650/E2900/E3150) 55～80cm 目安 (E3000/E3250/E3600/E3500/ E3850/E4200) 80～115cm 目安
② ベース プレート との距離 寸法 B	(E2400/E2650/E3000) 35～50cm 目安 (E2900/E3250/E3150/E3500) 50～75cm 目安 (E3600/E3850/E4200) 75～110cm 目安
③ ベース プレート との距離 寸法 C	(E2400/E2650/E3000/E2900/ E3250/E3600) 40～55cm 目安 (E3150/E3500/E3850) 55～80cm 目安 (E4200) 80～115cm 目安
④、⑩ 奥行寸法 A、D	45cm 以上
⑤、⑪ 幅寸法 A、D	80cm 以上
⑥、⑧ 奥行寸法 B、C	30cm 以上
⑦、⑨ 幅寸法 B、C	94cm 以上
⑫ 全長	(E2400) 265～310cm 以上 (E2650) 280～335cm 以上 (E3000) 305～370cm 以上 (E2900) 295～360cm 以上 (E3250) 320～395cm 以上 (E3600) 345～430cm 以上 (E3150) 310～385cm 以上 (E3500) 335～420cm 以上 (E3850) 360～455cm 以上 (E4200) 385～490cm 以上
⑬ 段差の 最大高さ 寸法 A	(下方にE800手すりを使用する場合) 30cm 以下 (下方にE1050手すりを使用する場合) 45cm 以下 (下方にE1400手すりを使用する場合) 60cm 以下
⑭ 段差の 最大高さ 寸法 B	(下方にE800手すりを2本使用する場合) 60cm 以下 (下方にE800手すり/E1050手すりを 各1本使用する場合) 75cm 以下 (下方にE800手すり/E1400手すりを 各1本使用する場合) 90cm 以下 (下方にE1050手すりを2本使用する場合) 90cm 以下 (下方にE1050手すり/E1400手すりを 各1本使用する場合) 105cm 以下 (下方にE1400手すりを2本使用する場合) 120cm 以下
⑮ 段差の 最大高さ 寸法 C	(E2400) 90cm 以下 (E2650) 105cm 以下 (E3000/E2900) 120cm 以下 (E3250/E3150) 135cm 以下 (E3600/E3500) 150cm 以下 (E3850) 165cm 以下 (E4200) 180cm 以下

両側手すり (E000T) の場合も同様

確認しましょう

安全上のご注意

準備しましょう

使いましょう


お手入れしましょう

困ったときには


✳ 準備しましょう

Mタイプ

通路などに設置する場合

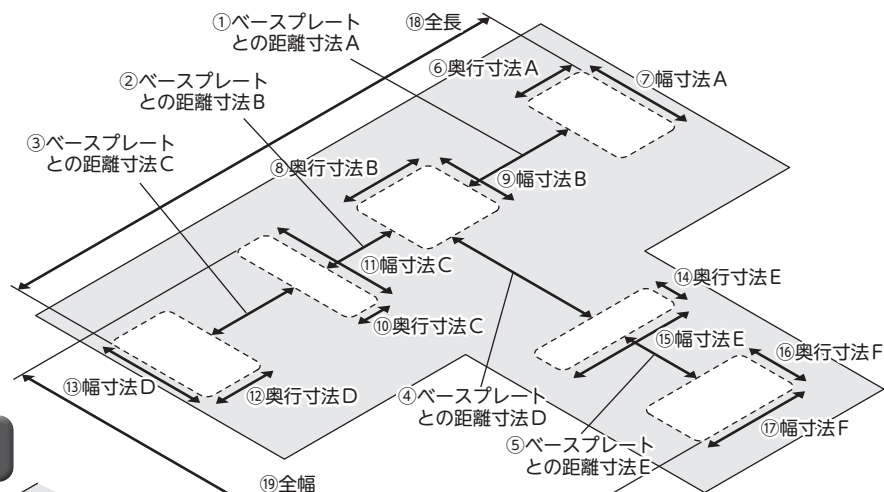

段差に設置する場合

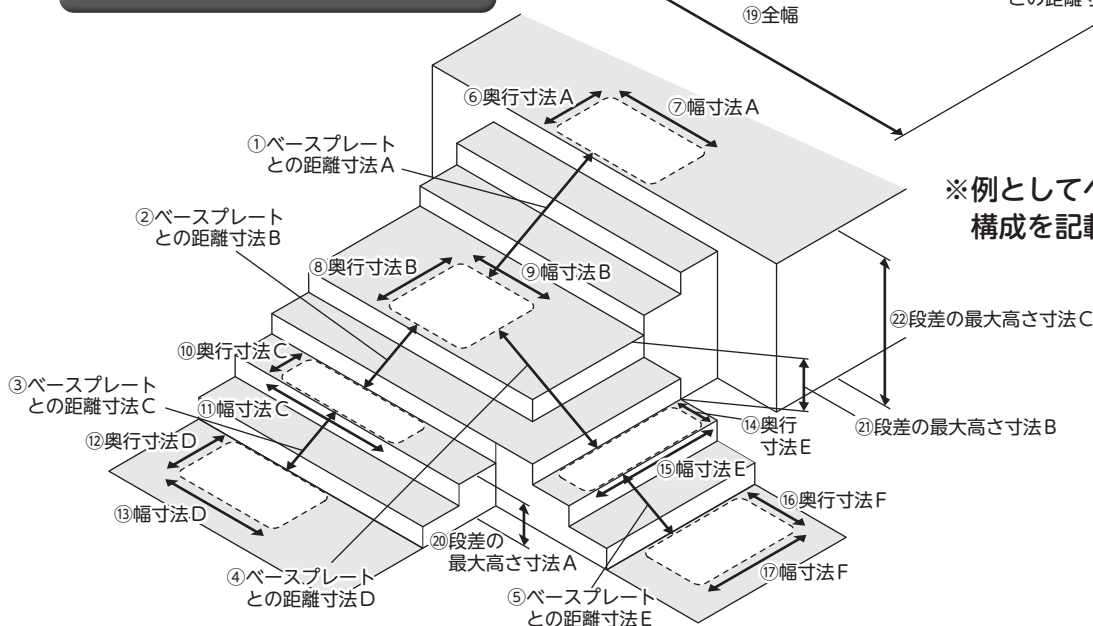

※例としてベースプレート6枚構成を記載しています。

	Mタイプ
① ベースプレートとの距離寸法 A	(E800手すり) 25~40cm 目安 (E1050手すり) 40~65cm 目安 (E1400手すり) 65~100cm 目安
② ベースプレートとの距離寸法 B	(E800手すり) 20~35cm 目安 (E1050手すり) 35~60cm 目安 (E1400手すり) 60~95cm 目安
③ ベースプレートとの距離寸法 C	(E800手すり) 40~55cm 目安 (E1050手すり) 55~80cm 目安 (E1400手すり) 80~115cm 目安
④ ベースプレートとの距離寸法 D	(E800手すり) 20~35cm 目安 (E1050手すり) 35~60cm 目安 (E1400手すり) 60~95cm 目安
⑤ ベースプレートとの距離寸法 E	(E800手すり) 40~55cm 目安 (E1050手すり) 55~80cm 目安 (E1400手すり) 80~115cm 目安
⑥, ⑫, ⑬ 奥行寸法 A, D, F	45cm 以上
⑦, ⑧, ⑨ 幅寸法 A, D, F	80cm 以上
⑧ 奥行寸法 B	60cm 以上
⑨ 幅寸法 B	60cm 以上
⑩, ⑭ 奥行寸法 C, E	30cm 以上
⑪, ⑮ 幅寸法 C, E	94cm 以上
⑬ 全長	(E800手すりを3本使用) 265~310cm 以上 (E800手すりを2本, E1050手すりを1本使用) 280~335cm 以上 (E800手すりを2本, E1400手すりを1本使用) 305~370cm 以上 (E800手すりを1本, E1050手すりを2本使用) 295~360cm 以上 (E800手すりを1本, E1050手すりを1本, E1400手すりを1本使用) 320~395cm 以上 (E800手すりを1本, E1400手すりを2本使用) 345~430cm 以上 (E1050手すりを3本使用) 310~385cm 以上

	Mタイプ
⑬ 全長	(E1050手すりを2本, E1400手すりを1本使用) 335~420cm 以上 (E1050手すりを1本, E1400手すりを2本使用) 360~455cm 以上 (E1400手すりを3本使用) 385~490cm 以上
⑭ 全幅	(E800手すりを2本使用) 212~242cm 以上 (E800手すりを1本, E1050手すりを1本使用) 237~267cm 以上 (E800手すりを1本, E1400手すりを1本使用) 272~302cm 以上 (E1050手すりを2本使用) 242~292cm 以上 (E1050手すりを1本, E1400手すりを1本使用) 277~327cm 以上 (E1400手すりを2本使用) 292~362cm 以上
⑯ 段差の最大高さ寸法 A	(下方にE800手すりを使用) 30cm 以下 (下方にE1050手すりを使用) 45cm 以下 (下方にE1400手すりを使用) 60cm 以下
⑰ 段差の最大高さ寸法 B	(下方にE800手すりを2本使用) 60cm 以下 (下方にE800手すりを1本, E1050手すりを1本使用) 75cm 以下 (下方にE800手すりを1本, E1400手すりを1本使用) 90cm 以下 (下方にE1050手すりを2本使用) 90cm 以下 (下方にE1400手すりを2本使用) 120cm 以下
⑱ 段差の最大高さ寸法 C	(E800手すりを3本使用) 90cm 以下 (E800手すりを2本, E1050手すりを1本使用) 105cm 以下 (E800手すりを2本, E1400手すりを1本使用) 120cm 以下 (E800手すりを1本, E1050手すりを2本使用) 120cm 以下 (E800手すりを1本, E1050手すりを1本, E1400手すりを1本使用) 135cm 以下 (E800手すりを1本, E1400手すりを2本使用) 150cm 以下 (E1050手すりを3本使用) 135cm 以下 (E1050手すりを2本, E1400手すりを1本使用) 150cm 以下 (E1050手すりを1本, E1400手すりを2本使用) 165cm 以下 (E1400手すりを3本使用) 180cm 以下

設置・組み立てましょう


例として AT-CR-E1600-S2-N を段差のある場所へ設置する方法を記載しています。
設置場所や製品型番に応じて設置してください。

設置や組み立ては貸与事業所などでおこなっていただき、利用者や介助者などがおこなわないようにしてください。

しっかりと設置されていない状態で使うと、転倒の危険があります。

1. ベースプレートを設置します


利用される位置にベースプレートを設置します。

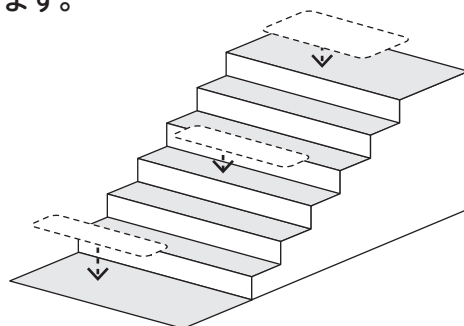

警告



段差のある箇所に設置するときは、ベースプレート端部が段鼻よりも内側になるように設置すること

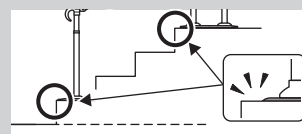


2. 各支柱セットをベースプレートに固定します

- ①支柱固定プレートをベースプレートの各部に設置し、支柱プレートカバーを上げ、付属の支柱固定ボタンボルトと金属ワッシャー M10（各 4 ケ所）を六角レンチ 6mm でベースプレートに固定します。

金属ワッシャー M10

※支柱固定ボタンボルト 1 本に取り付ける金属ワッシャー M10 は 1 枚です。
同じ位置に複数枚のワッシャーを取り付けしないでください。

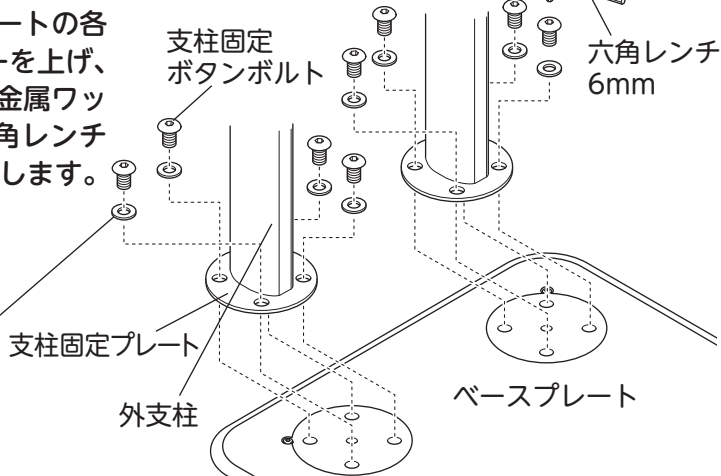


警告




各支柱は同じ向きで固定すること

ベースプレート長辺と、支柱の幅広い方向を平行にしてください。

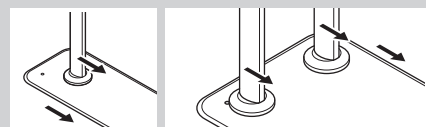

各ベースプレートの真ん中に支柱セットを固定することができます。
設置場所と利用者の動作を考慮して選択してください。

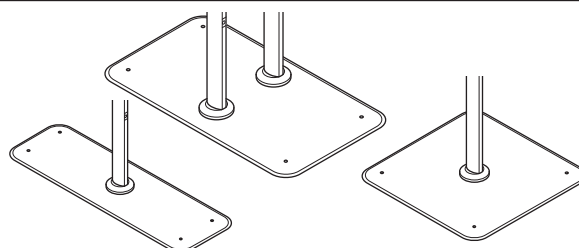

確認しましょう

！安全上のご注意

＊準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

✖ 準備しましょう

確認しましょう

！安全上の注意

✖ 準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう



？困ったときには

注意




開き戸付近に設置するときは、扉と手すりとの干渉や扉の下とベースプレートとの干渉を確認して設置すること

扉や製品が破損する原因になります。

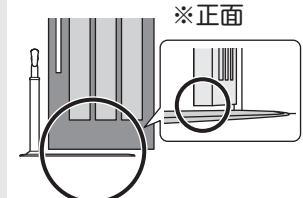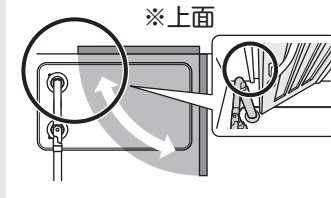


②支柱プレートカバーを下げます。

支柱プレートカバー

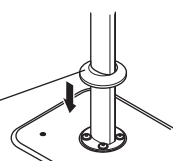

支柱プレートカバー

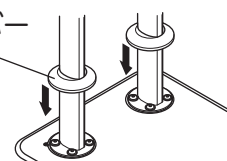

両側手すり（品名に“T”がある機種）の場合は、ベースプレートに貼られている滑り止めシート KA-W800 丸、W 940 丸を剥がしてから、同じ手順でベースプレートに各支柱セットを固定してください。

滑り止めシート
KA-W800 丸








滑り止めシート
KA-W940 丸





3. E800 手すりセットを固定します

①左右回転ブラケットにある左右回転固定ボルトを六角レンチ 5mm でゆるめて、左右に動くようにします。

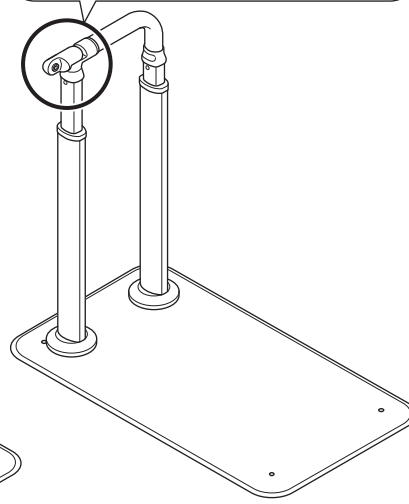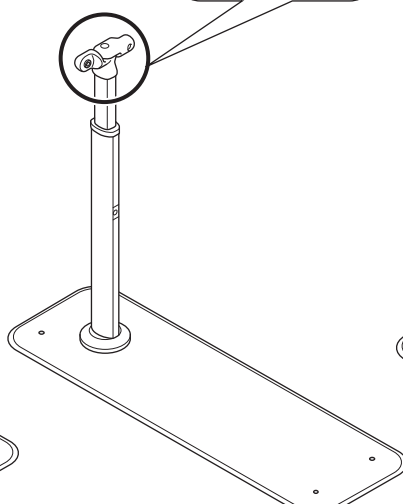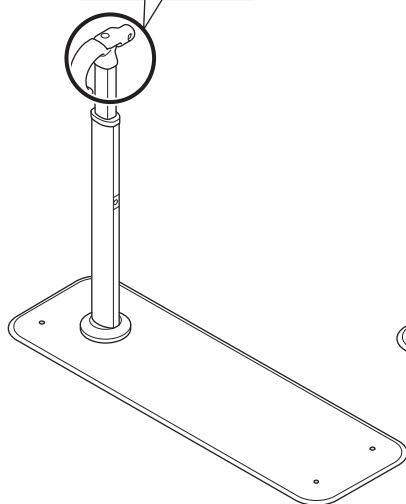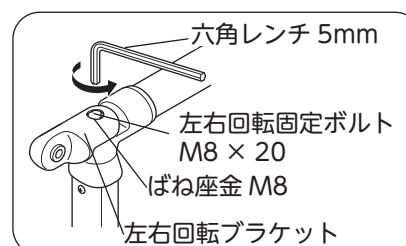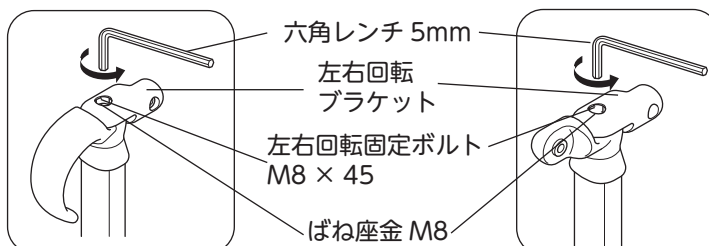

②小口キャップの下側にある伸縮固定ボルト M4 を六角レンチ 2mm でゆるめてください。

③左右回転ブラケットや左右回転接続ブラケットの側面と手すりの端部にある手すり上下回転ブラケットをはめ、上下回転固定ボルトとばね座金と袋ナットを差し込み、六角レンチ 5mm で固定します。(目安として締め付けトルク 12N・m)

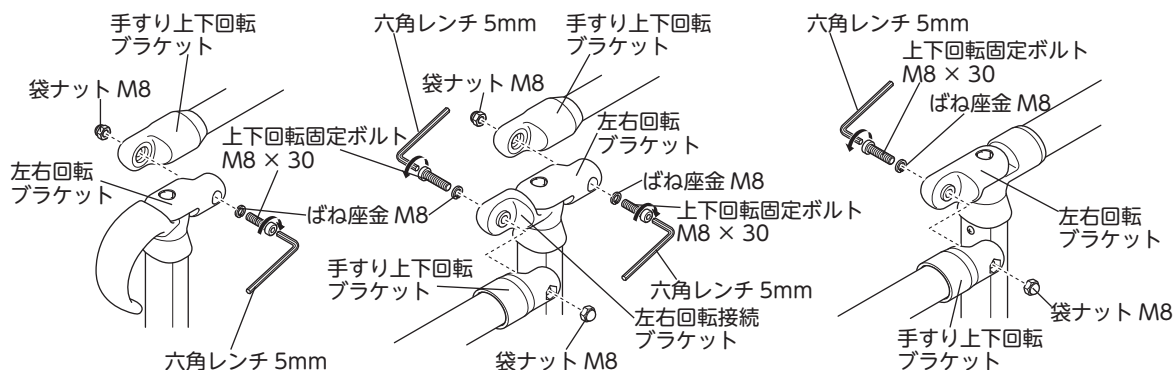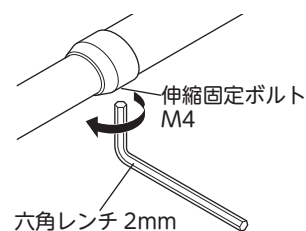


警告




手すりを固定するときは、必ずばね座金 M8 があることを確認してから固定すること

製品がガタつく原因になります。

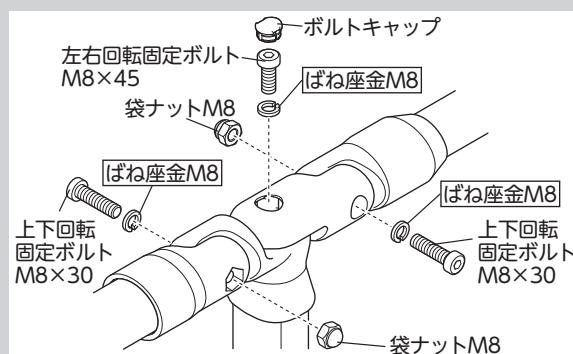


上下に角度をつける際は、手すり (内) (細い方) が下側になるように設置すること
段差のある箇所に設置するときは、ベースプレート端部が段鼻よりも内側になるように設置すること

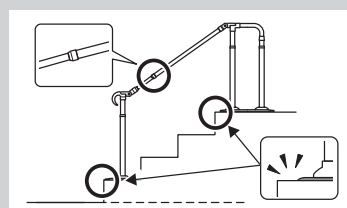


3方支柱セット上部にある3方ブラケット側に曲げ支柱セットを接続すること

3方ブラケット側の曲げ支柱セットは、ベースプレート N の真ん中に固定すること

ベースプレート N の真ん中に固定

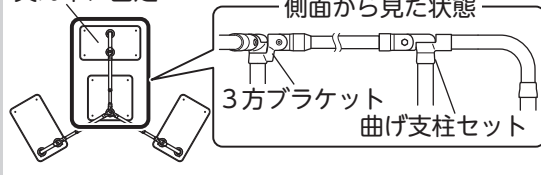

④手すり (内) の長さを調節してから、伸縮固定ボルトを六角レンチ 2mm で固定します。
(目安として締め付けトルク 1.5N・m)

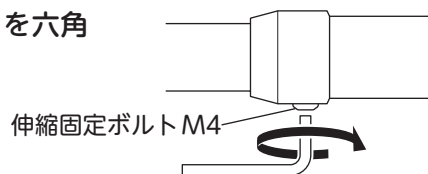

確認しましょう

安全上のご注意

準備しましょう

使いましょう

お手入れしましょう


困ったときには

✖ 準備しましょう

警告




手すり（内）の長さ限界ラインが小口キャップから見えなように長さを調節すること
手すり長さを調節した後、伸縮固定ボルトを固定してから使用すること

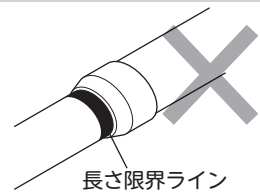

長さ限界ライン

- ⑤ 左右回転ブラケットにある左右回転固定ボルトを六角レンチ5mmで固定します。
（目安として締め付けトルク10N・m）

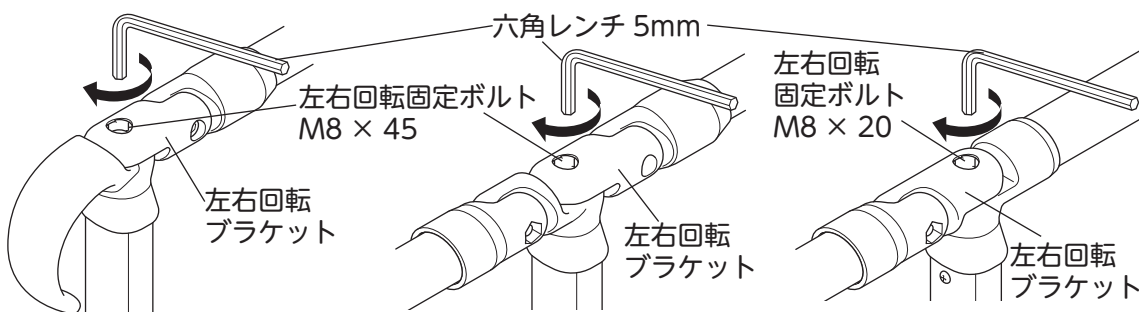


両側手すり（品名に“T”がある機種）の場合、同じ手順で両側に取り付けてください。
製品型番に応じて取り付ける部品が異なります。中身を確認して取り付けてください。

警告





手すりを使用するときは、左右回転固定ボルトと上下回転固定ボルトを固定してから使用すること

製品がガタつき、転倒やけがの原因になります。

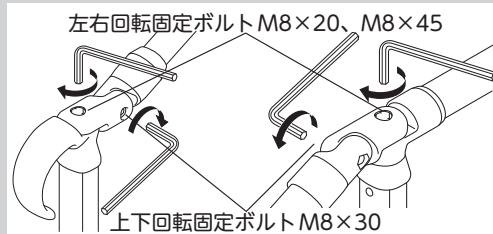


手すりの左右角度は、 270° 以内、上下角度は 45° 以内に納まるように設置すること

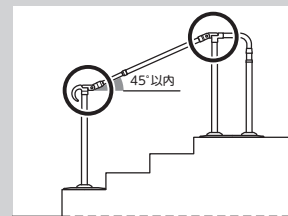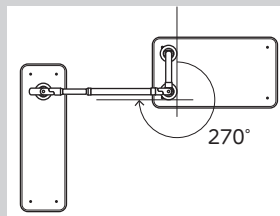

4. ベースプレートのガタつきを調整します

- ① ベースプレートの四隅にある座付きアジャスターを六角レンチ4mmで回して調整します。

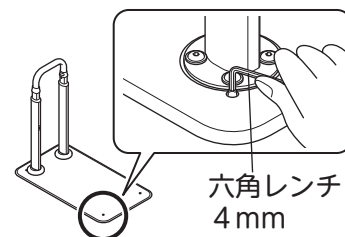


六角レンチ
4mm

警告




各ベースプレートがしっかりと地面に接地し、支柱が垂直になるように設置すること

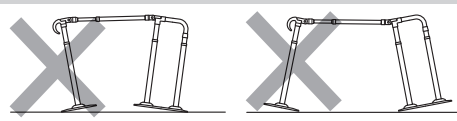


座付きアジャスターだけで接地しないこと

ベースプレートが浮き上がり、転倒やけがの原因になります。

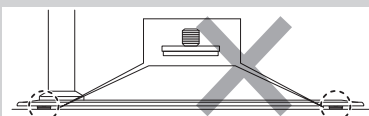


②ボルトキャップをはめます。

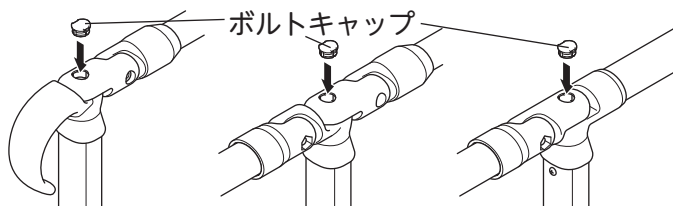

5. 滑り止めシートを貼り付けます


取り付け穴が空いている箇所に滑り止めシート KA-W940 丸を貼り付けます

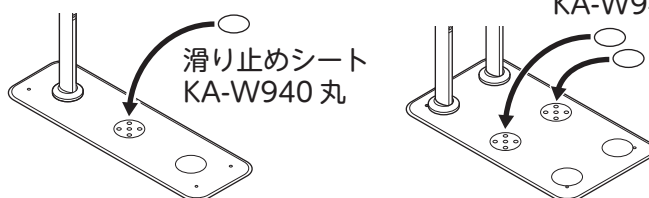

滑り止めシート KA-W940 丸



ベースプレートNの場合、真ん中には滑り止めシート KA-W940丸、端には滑り止めシート KA-W800丸を貼り付けてください。
ベースプレートSの場合、全て滑り止めシート KA-W940丸を貼り付けてください。

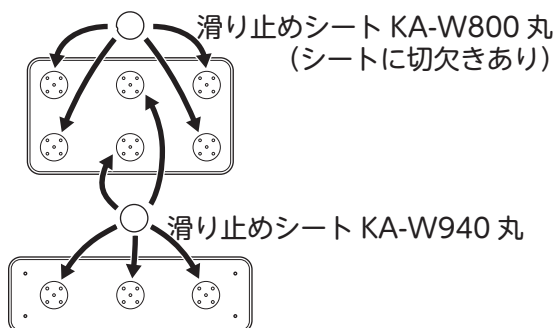


各部の調節をしましょう

移動動作がおこないやすいよう、利用する方の体格に合った設定をしてください。また、調節は貸与事業所、ケアマネジャーなど専門家に相談することをおすすめします。





設定の目安

①段差に設置するときは、段鼻に近い位置や、踏面端部に沿うように設置してください。

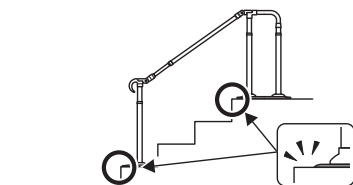

②手すりの高さは、大腿骨大転子の位置（太もも横の出っ張り辺り）を目安に調節してください。

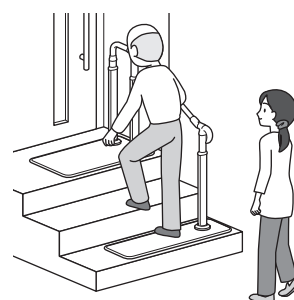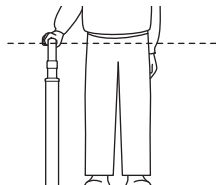

確認しましょう

！安全上のご注意

✕準備しましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

✖ 準備しましょう

警告



各ベースプレートに支柱を支柱固定ボタンボルトで固定して、使用すること

利用者がベースプレートを踏みながら使用できるように設置すること




利用者の体格や動きに合わせて確認してください。

手すりの高さ調節のしかた


1. 各固定ボルトをゆるめます

左右回転ブラケットと左右回転接続ブラケットに固定されている上下回転固定ボルトを六角レンチ 5mm でゆるめます。

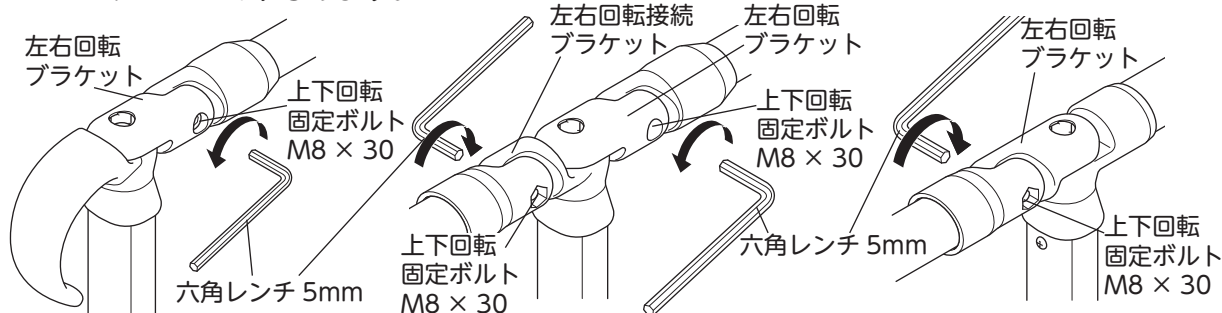

2. 高さ調節ボルトを外します

各支柱の高さ調節ボルトを六角レンチ 5mm でゆるめて外します。

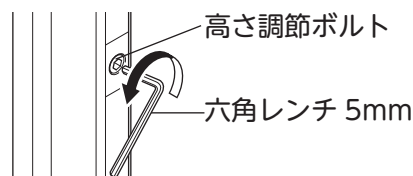

3. 高さを調節します


手すりやスライド支柱を持ちながら、側面に貼ってある目盛りシールで高さを合わせ、高さ調節ボルトを外支柱に差し込み、六角レンチ 5mm で固定します。
(目安として締め付けトルク 10N・m)



注意



左右回転ブラケットや左右回転接続ブラケットあるいは3方ブラケットにある上下回転固定ボルトをゆるめてから調節すること
製品が破損する原因になります。

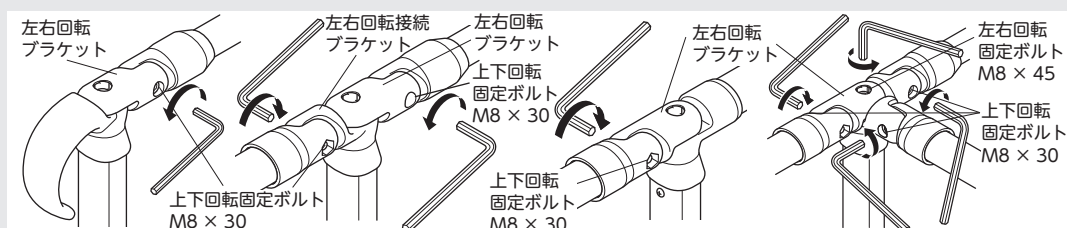

確認しましょう

安全上の注意

準備しましょう

使いましょう


お手入れしましょう

困ったときには

ご使用になる前に

ご利用の前に手すりやベースプレートを軽くゆすり、各部にガタつきなどの異常がないか点検すること。

詳しくは添付の「ご使用前点検シート」をよく確認してください。

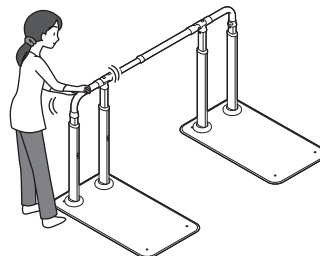


警告




予測できない行動をとる利用者や、自力で危険な状態から回避することが難しい利用者には使用しないこと

利用者の心身状態や利用環境によって、誤って頭や手足、体の一部をぶつけて転倒する可能性があり、場合によっては生命にかかわる事故につながるおそれがあります。
十分なモニタリングとフィッティングをお願いいたします。

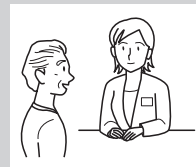


手すりに対して水平に力を加えたり、勢いよく力を加えるなどベースプレートが浮き上がるような使用をしないこと

固定式ではないため転倒やけがの原因になります。
手すりを床面に押さえつけるように力を加えて使用してください。

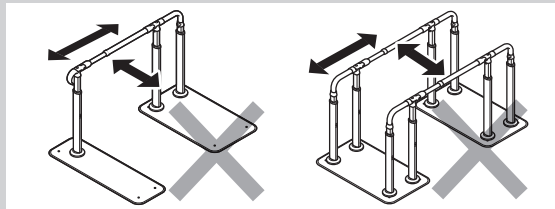


回転固定ボルトを固定したまま、製品を動かさないでください。

ブラケットが破損し、転倒やけがの原因になります。

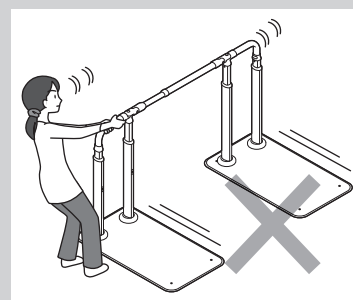

ベースプレートに砂利や土、雪などが乗ったまま使用しないこと

足を滑らせ、転倒やけがの原因になります。

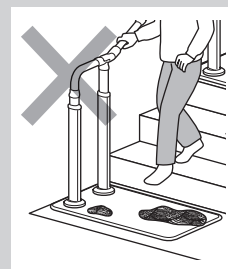

確認しましょう

！安全上のご注意

✖準備しましょう

❤️使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

🔧 お手入れしましょう

下記の手順に従ってこまめにお手入れしてください。

警告



改造をしないこと

また、修理技術者以外の方は、分解したり修理したりしないこと

本体機能が正常にはたらず、けがの原因になります。



分解禁止


注意



次にあげるものではお手入れしないこと

- ・シンナー ・クレゾール ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系薬剤（洗剤）や熱湯（煮沸消毒など）による殺菌、消毒
- ・磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの

製品が劣化し、けがの原因になります。

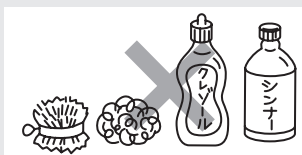


お掃除のしかた

日常のお手入れ方法


（手すり、支柱、ベースプレート部分）

- お手入れはやわらかい布で乾拭きするか、固くしぼった布で水拭きしてください。
- 汚れがひどい時は中性洗剤をしみこませたやわらかい布でふき、その後水拭きをしてから乾いた布で水分をきれいにふきとってください。

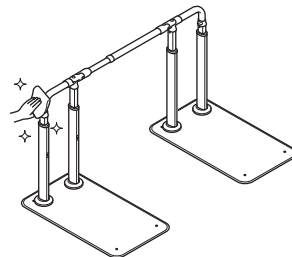

（滑り止めシート部分）

- 毛先のやわらかいブラシなどで掃いて、表面の砂や土などの汚れを落としてください。
- 汚れがひどい時は中性洗剤を使用しブラシなどで洗い、その後水で洗い流し、風通しの良い場所で乾かしてください。

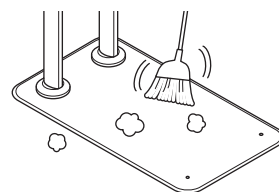

消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。

製品の消毒は、アルコール清拭消毒、逆性石けん清拭消毒などを推奨します。

製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。

注意



消毒に、オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しないこと

製品が破損する原因になります。

💧 お手入れしましょう／❓ 困ったときには

保管時の注意

「安全上のご注意」をご確認ください。

詳しくは…P.21へ

点検のしかた

別紙「ご使用前点検シート」をご確認ください。

交換部品

部品交換は、貸与事業所の修理技術者の方がおこなってください。
各部品が汚れたり、破損した場合は、貸与事業所もしくは取り付け業者にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

商品のご購入に関するお問い合わせ、ご相談は…お買い求めの販売店へ
商品の仕様等に関するお問い合わせ、ご相談は…下記お客様相談室へ

不具合が発生したとき

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、製品に保証書（取扱説明書）を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

部品供給、また修理対応期間はメーカー製品廃番後3年となります。

ただし、期間内でも破損箇所によっては、部品供給、または修理できないケースがございますのでご了承ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業、作業員の出張にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

🔍 確認しましょう

⚠️ 安全上のご注意

✂️ 準備しましょう

💡 使いましょう

💧 お手入れしましょう

❓ 困ったときには

アロン化成株式会社

フリーダイヤル

お客様相談室 ☎️ 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の
月～金 10:00～16:00
(12:00～13:00 は除く)

保証とアフターサービス よくお読みください

※下記の保証内容は商品をご購入頂いたお客様向けのものです。
レンタル（貸与）でご利用されたお客様はサービスを受けた福祉用具貸与事業所へお問い合わせください。

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

- 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
 - ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様相談室にご相談ください。
 - 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。
 - 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷。
 - ボルトなど消耗品の損傷及び汚れ。
 - 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
 - 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 〈個人情報の取扱いについて〉
- 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。
なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
 - 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	ご住所 〒 ご芳名 TEL
★販売店	住 所 〒

★ 印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見
・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索