




ご使用前にこの取扱説明書と保証書をお読みください。

このたびは本製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ・正しくお使いいただくため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ・取扱説明書を読んだあとは必ず保管してください。

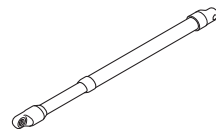

各部の名称

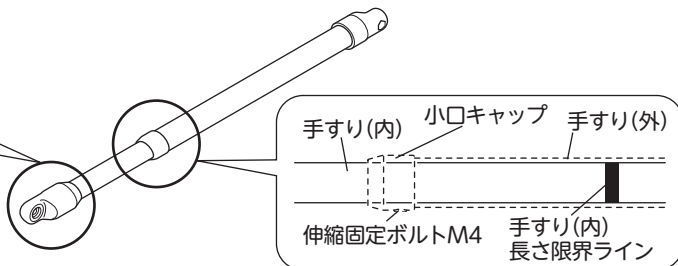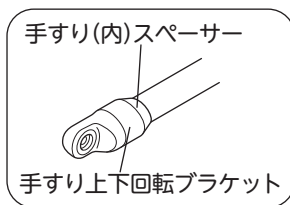

付属品


六角レンチ
5mm/2mm



商品の寸法図と仕様

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

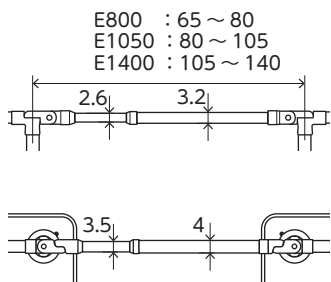

品名	AT-CR-E800/E1050/E1400手すりセット	
構成部材	部品名	材質
	手すり(内)・手すり(外)	半硬質塩化ビニル樹脂 (抗ウイルス加工) アルミニウム
	各ブラケット	アルミニウム合金
	手すり(内)スペーサー・小口キャップ	ASA樹脂
重量	AT-CR-E800 手すりセット : 0.9kg AT-CR-E1050 手すりセット : 1.2kg AT-CR-E1400 手すりセット : 1.6kg	



ISO 21702

抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
有機合成系・練込
手すり持ち手部分
JP0612240A0001R

SIAA マークは ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

⚠ 注意事項

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
- ・SIAA の安全性基準に適合しています

！安全上のご注意

必ずお守りください

この製品は、AT-CR シリーズ専用の手すりです。AT-CR シリーズの取扱説明書と併せて注意事項をご確認の上、ご使用ください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

⊘ 絶対にしないこと ⊘

AT-CRシリーズの取扱説明書に記載の警告欄 ⊘絶対にしないこと⊘ の行為をしないこと
転倒やけがの原因になります。



警告


誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

❗ 必ず行うこと ❗


正しく設置すること

転倒やけがの原因になります。

- ・ AT-CR シリーズの取扱説明書に記載の設置方法を守り、警告欄 **❗必ず行うこと❗** をご確認の上、ご使用ください。
- ・ AT-CR シリーズの支柱に回転固定ボルトで固定してご使用ください。
- ・ 手すり長さを調節した後、伸縮固定ボルトを固定してから使用してください。

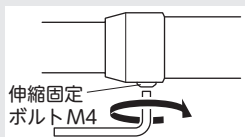

- ・ 上下に角度をつける際は、手すり(内)(細い方)が下側になるように設置してください。
- ・ 段差のある箇所に設置するときは、ベースプレート端部が段鼻よりも内側になるように設置してください。
- ・ 手すり(内)の長さ限界ラインが小口キャップから見えないように長さを調節してください。

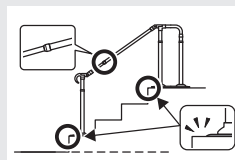

注意


誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

❗ 必ず行うこと ❗

AT-CRシリーズの取扱説明書に記載の注意欄 **❗必ず行うこと❗** の内容を確認の上、使用すること
転倒やけがの原因になります。

手すりを固定するときは、必ずばね座金 M8があることを確認してから固定すること

製品がガタつく原因になります。

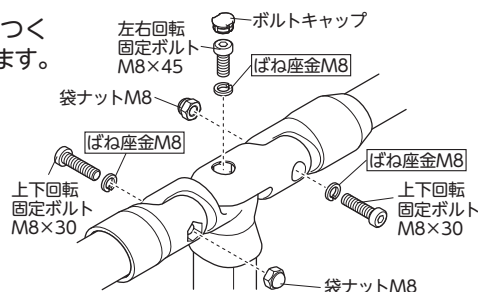

⊘ 絶対にしないこと ⊘

AT-CRシリーズの取扱説明書に記載の注意欄 **⊘絶対にしないこと⊘** の行為をしないこと
製品の劣化や変色がすすむ原因になります。

設置・組み立てましょう

例として AT-CR-E1600-S2-N を段差のある場所へ設置する方法を記載しています。
設置場所や製品型番に応じて設置してください。

設置や組み立ては貸与事業所などでおこなっていただき、利用者や介助者などがおこなわないようにしてください。


しっかりと設置されていない状態で使うと、転倒の危険があります。

1. ベースプレートを設置し、各支柱セットをベースプレートに固定します


AT-CR シリーズの取扱説明書に記載の **設置・組み立てましょう** を読みながら進めてください。

2. E800 手すりセットを固定します


- ① 左右回転ブラケットにある左右回転固定ボルトを六角レンチ 5mm でゆるめて、左右に動くようにします。

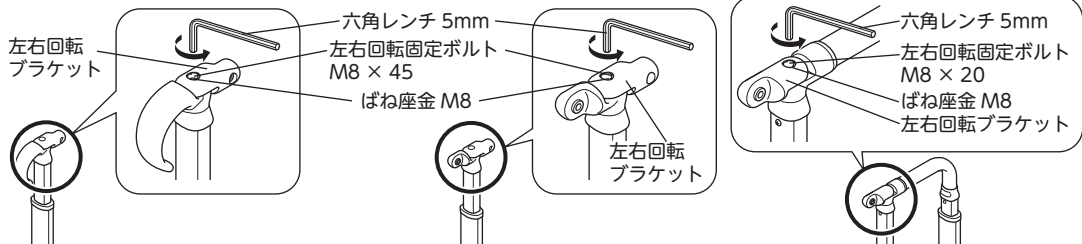

- ② 小口キャップの下側にある伸縮固定ボルト M4 を六角レンチ 2mm でゆるめてください。

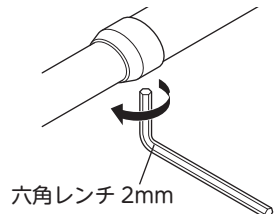

- ③ 左右回転ブラケットや左右回転接続ブラケットの側面と手すりの端部にある手すり上下回転ブラケットをはめ、上下回転固定ボルトとばね座金と袋ナットを差し込み、六角レンチ 5mm で固定します。(目安として締め付けトルク 12N・m)

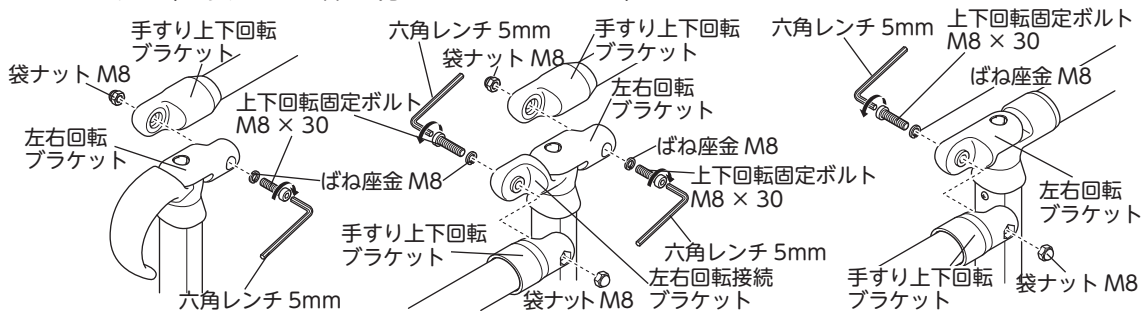

警告





手すりを固定するときは、必ずばね座金 M8 があることを確認してから固定すること


製品がガタつく原因になります。

上下に角度をつける際は、手すり(内) (細かい方) が下側になるように設置すること

段差のある箇所に設置するときは、ベースプレート端部が段鼻よりも内側になるように設置すること

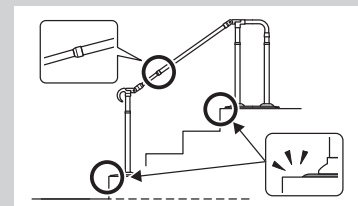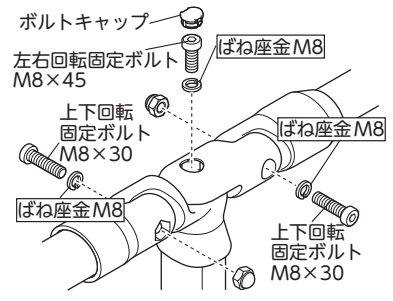

- ④ 手すり (内) の長さを調節してから、伸縮固定ボルトを六角レンチ 2mm で固定します。(目安として締め付けトルク 1.5N・m)

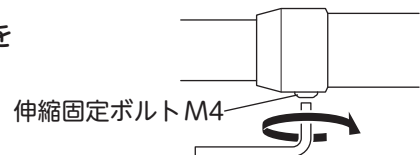

警告




手すり (内) の長さ限界ラインが小口キャップから見えないうように長さを調節すること

手すり長さを調節した後、伸縮固定ボルトを固定してから使用すること



- ⑤左右回転ブラケットにある左右回転固定ボルトを六角レンチ5mmで固定します。
(目安として締め付けトルク10N・m)

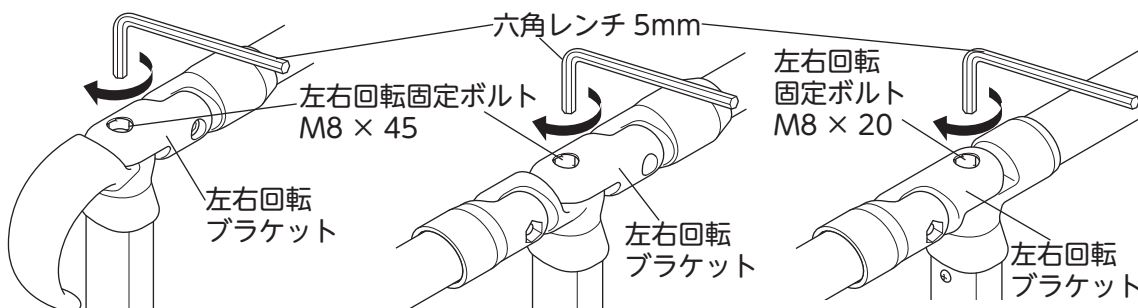


警告



手すりを使用するときは、左右回転固定ボルトと上下回転固定ボルトを固定してから使用すること

製品がガタつき、転倒やけがの原因になります。

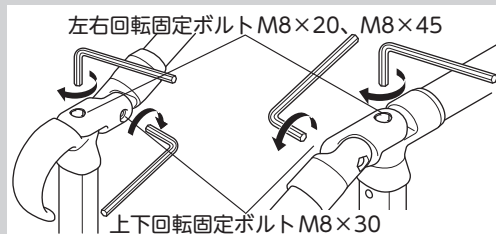


以降の手順は、AT-CRシリーズの取扱説明書に記載の **設置・組み立てましよう** を読みながら進めてください。

ご使用になる前に

ご利用の前に手すりやベースプレートを軽くゆすり、各部にガタつきなどの異常がないか点検すること。



ご使用になる前の確認事項や禁止事項、各部調節のしかた、お手入れのしかたは、AT-CRシリーズの取扱説明書をお読みください。

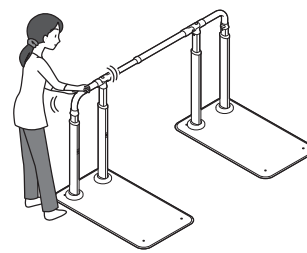

- 製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

**製品に関するご意見
・お問い合わせは**

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元

TOAGOSEI グループ

Aron
アロン化成

アロン化成株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/> 安寿

検索

ライフサポート事業部