


安^{あんじゅ}寿

ATTOGRIP AT-E-200

アットグリップ

取扱説明書

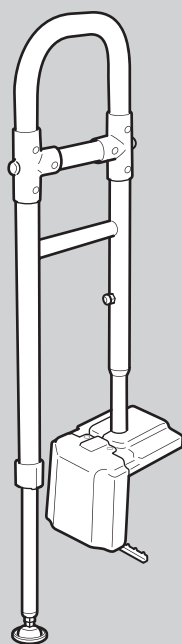

このたびは ATTOGRIP AT-E-200 をご利用いただき、まことにありがとうございます。

この製品は介護が必要な方もそうでない方もお使いいただけます。

正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みください。



準備するもの



- スパナ(17mm)またはソケットレンチ(17mm)
- スパナ(12mm)またはソケットレンチ(12mm)
- 六角レンチ(5 mm)
- プラスドライバー(JIS 2番)、スケール

保存版
(保証書付)

ARONKASEI CO.,LTD.



もくじ



確認しましょう P.3～4

- ・梱包品の確認..... 3
- ・各部の名称..... 3
- ・商品の寸法図と仕様..... 4



安全上のご注意 P.5～8



取り付けましょう P.9～14

- ・取り付ける前に..... 9
- ・取り付けましょう..... 10
- ・取り付けの手順..... 10～14



使いましょう P.15

- ・ご使用になる前に確認しましょう..... 15
- ・使いかた..... 15



お手入れしましょう P.16～21

- ・お掃除のしかた..... 16
- ・点検のしかた..... 16
- ・交換部品..... 17
- ・上段手すり(200用)と中段手すり(200用)の交換方法..... 18～20
- ・高さ調節ボルトの交換方法..... 21



困ったときには P.22

- ・保証とアフターサービス..... 22



確認しましょう



安全上のご注意



取り付けましょう



使いましょう



お手入れしましょう




困ったときには

👉 確認しましょう

梱包品の確認

本体および付属品が揃っているか下のイラストを見ながら確認しましょう。



本体

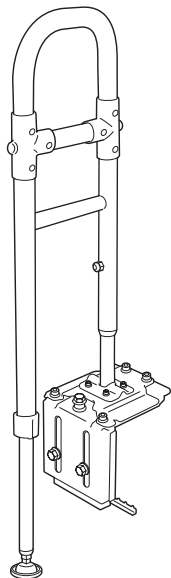

付属品

■ベースプレート
樹脂カバー B (調節側)


■ベースプレート
樹脂カバー C

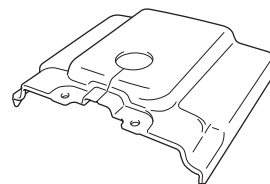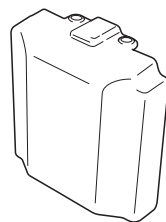

■ベースプレート樹脂カバー固定ネジ
十字穴付きトラス小ネジ M4 × 8 mm 2本




各部の名称

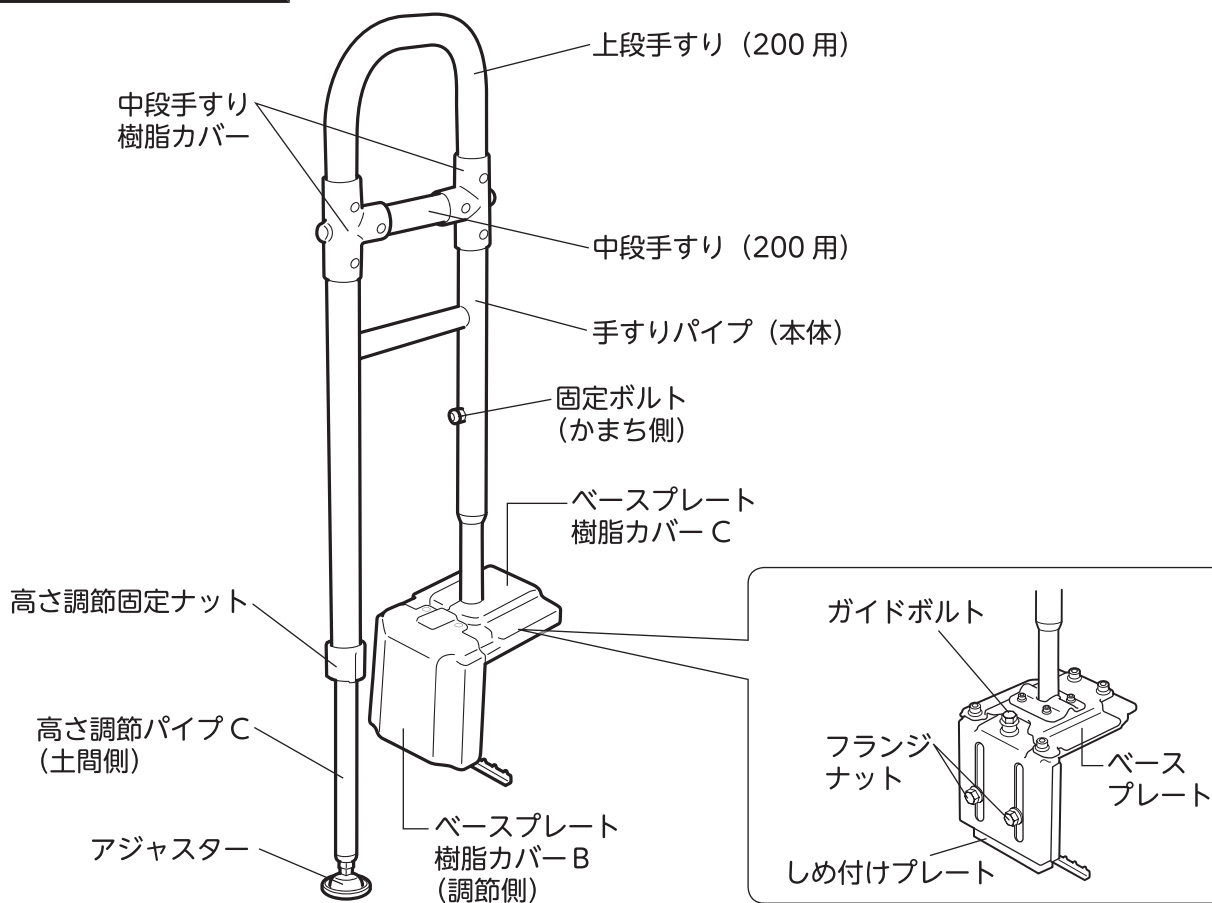

商品の寸法図と仕様

商品寸法図

(単位：cm)

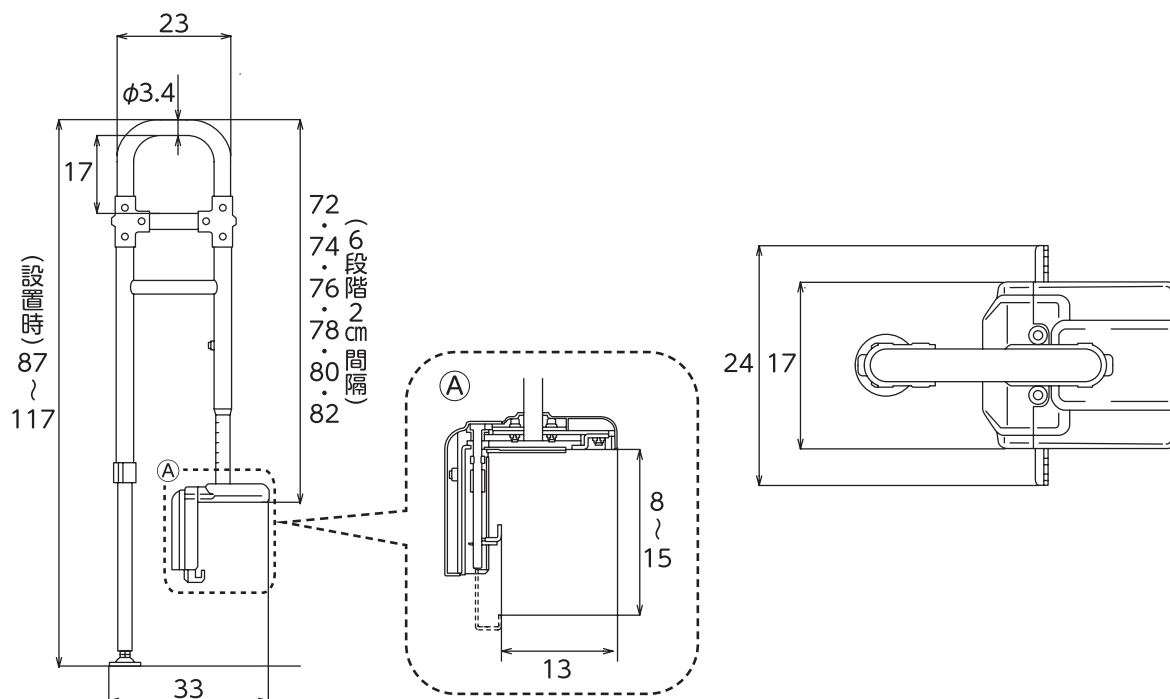

仕様

品 名	ATTOGRIP AT-E-200	
構 成 部 材	部 品 名	材 質
	上段手すり・中段手すり	エラストマー樹脂（表面） スチール（芯材）
	手すりパイプ（本体）／高さ調節パイプC（土間側）／ベースプレート／しめ付けプレート	スチール（メラミン焼付塗装）
	ベースプレート樹脂カバー B（調節側） ベースプレート樹脂カバー C	ポリエチレン
	中段手すり樹脂カバー	ポリプロピレン
	高さ調節固定ナット	ナイロン
	アジャスター	スチール（メッキ）
寸 法	幅 24 × 奥行 33 × 設置時高さ 87 ~ 117cm 上段手すり高さ 72・74・76・78・80・82cm（6段階）	
重 量	約 9kg	

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

！ 確認しましょう

！ 安全上のご注意

✖ 取り付けましょう

♡ 使いましょう

💧 お手入れしましょう

？ 困ったときには

！ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告


誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

！ 必ず行うこと ！

取り付け可能な上がりかまちに取り付けること

手すりが外れて、転倒・けがの原因になります。

取り付け可能寸法

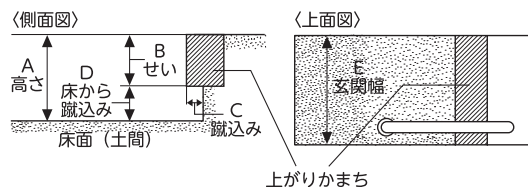

項目	取り付け可能寸法
A (高さ)	15 ~ 35cm
B (せい)	9 ~ 15cm
C (蹴込み)	1.5cm 以上
D (床から蹴込み)	2cm 以上
E (玄関幅)	30cm 以上


詳しくは… 9 ページを確認してください

正しく設置すること

手すりが外れて、転倒・けがの原因になります。


正常な状態

上がりかまちにベースプレートを当てた状態で取り付けること

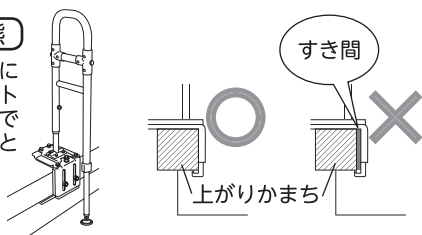


市販の踏み台を使われるときは、手すりとのすき間を確認すること

手すりとの踏み台にすき間が大きいとそこに足を踏み外して、転倒・けがの原因になります。

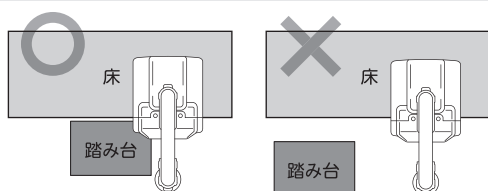

安全な使いかたをすること

転倒・けがの原因になります。

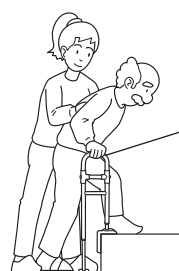

玄関や勝手口の段差を昇降する時に身体を安定させるための補助として使用してください。


使用者の身体状況によっては、介助者が付き添うこと

※使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添ってください。

毎回ご使用前に製品を前後・左右にゆらしてガタつきやずれが無い確認すること


取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

点検方法は P.15 または、添付のご使用前点検シートを確認してください。

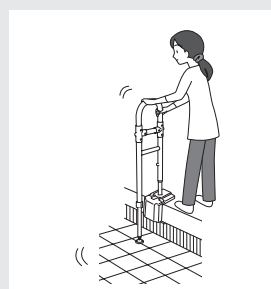

使用中にゆるみやガタつきが発生した場合は、直ちに使用を中止して必ずお買い上げの販売店に相談すること

取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

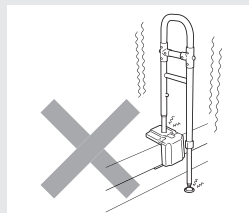




警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

❌ 絶対にしないこと ❌


木製以外の上がりかまち、発泡樹脂・中空構造など、強度の弱いかまちには、取り付けないこと

取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

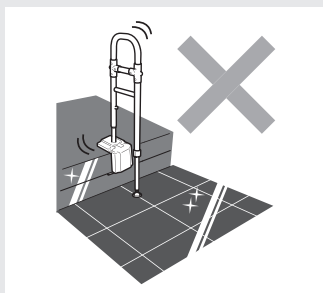


角形状・直線形状以外の上がりかまちには取り付けないこと

取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

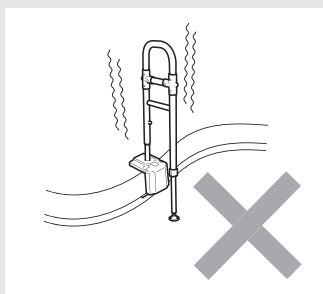

製品が破損、または正常な状態でないときは使用しないこと

各種ネジがゆるんでいる、ネジが取り付けしていない、かまちに固定されていない、製品がガタついているなど、製品や設置が正常でない時に使用すると、けがの原因になります。

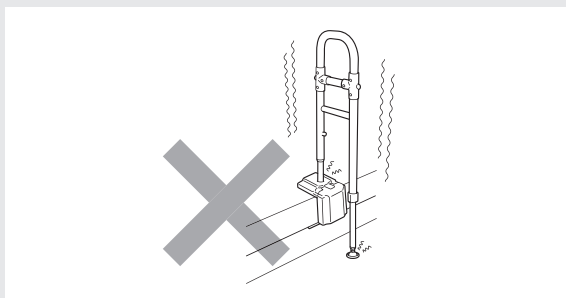


子ども、幼児を遊ばせるなど、他の用途では使用しないこと

破損や、けがの原因になります。



勢いよく力を加えたり、過度な力を加えたりしないこと


転倒・けがの原因になります。

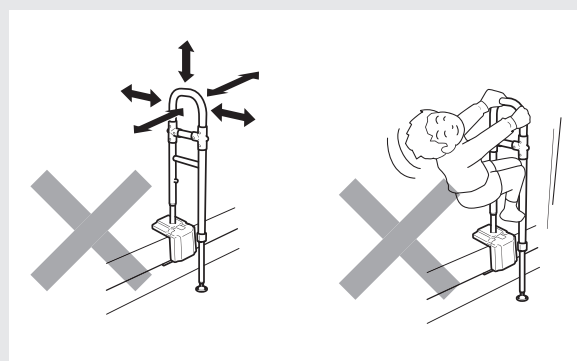

改造をしないこと

また、修理技術者以外の人には分解したり修理したりしないこと

正常にはたらかず、けがの原因になります。

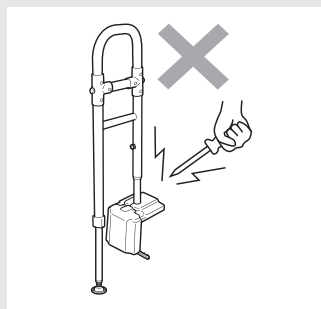

確認しましょう

！安全上のご注意

✖取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには

！ 安全上のご注意




警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

❌ 絶対にしないこと ❌


ガイドボルトをしめ直す際は、フランジナット（2ヶ所）を必ずゆるめてからおこなうこと

製品が破損する原因になります。

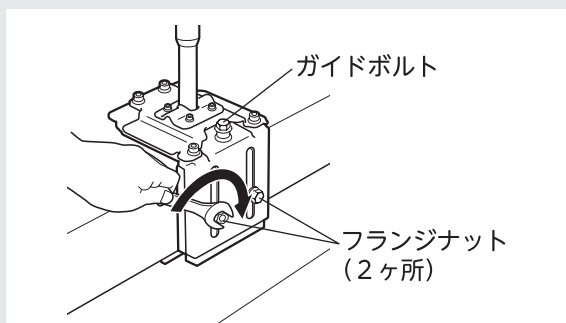


持ち運び、取り付けの際には、しめ付けプレートの歯の部分を持たないこと

けがの原因になります。

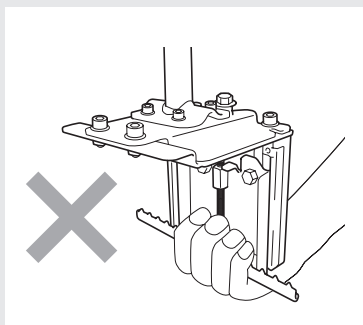


手すりのすき間に頭部や足を入れないこと

けがの原因になります。

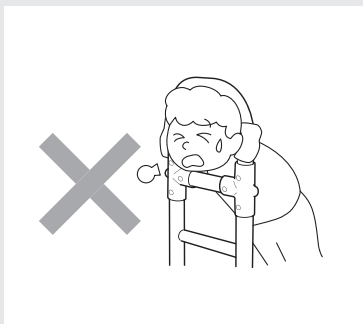

手、足、靴底が濡れた状態、また手すりなど製品が濡れた状態で使用しないこと

転倒・けがの原因になります。

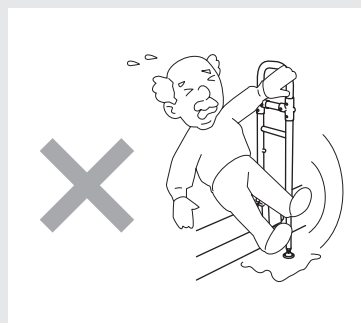

確認しましょう

！ 安全上のご注意

✖ 取り付けましょう

♡ 使いましょう

💧 お手入れしましょう

？ 困ったときには




注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

❗ 必ず行うこと ❗


設置する前に、ご利用者様へ上がりかまちの裏側にあとが残ることを相談の上、設置すること

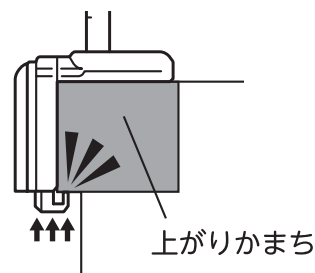

❌ 絶対にしないこと ❌

アジャスターでガタつきの調節をしないこと

不安定になり、転倒する原因になりますので、高さ調節パイプC（土間側）を回しておこなってください。

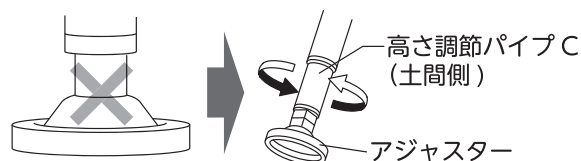


●お手入れ・保管時の注意 以下の行為をおこなうと、製品の変色や劣化がすすむ原因になります。

次にあげるものではお手入れしないこと


- ・シンナー ・クレゾール
- ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系薬剤（洗剤）をかけての殺菌、消毒
- ・タワシ ・研磨剤入りのスポンジ
- ・磨き粉 ・その他製品を傷つける物

製品が劣化し、けがの原因になります。

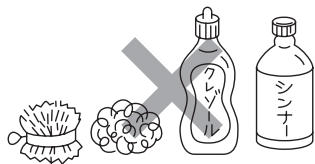


製品の上に重量物をのせた状態で保管しないこと

製品が変形し、けがの原因になります。

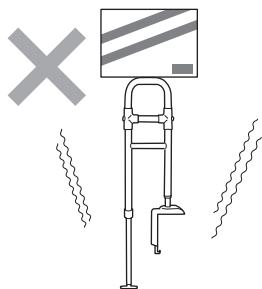


戸外に放置したり、直射日光に当てたりしないこと

劣化および変色の原因になります。

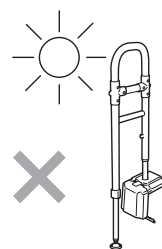


湿気の多い場所で保管しないこと

カビが発生する原因になります。

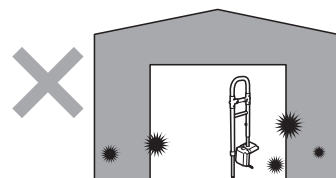

消毒に、オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しないこと

製品が破損する原因になります。

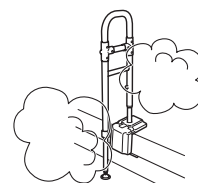

確認しましょう

！安全上のご注意

✖取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには


✖️ 取り付けましょう

取り付ける前に


取り付けられる上がりかまちに条件があります。
取り付け条件を満たすことを確認してください。

取り付け条件

1. 上がりかまちの高さと、玄関幅（土間の幅）を計測し、取り付け可能か確認します

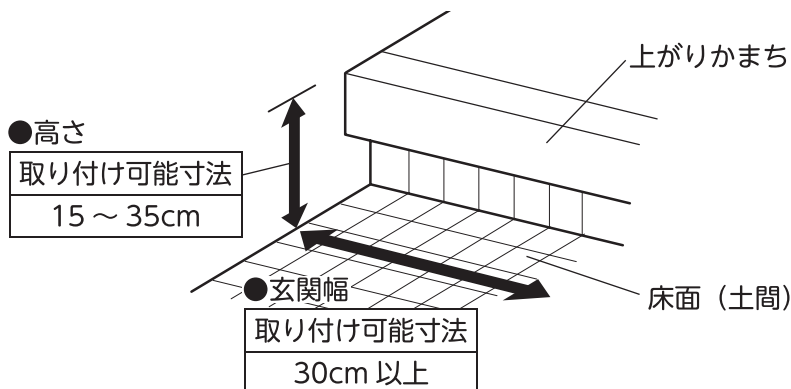

2. せいと床からの蹴込み高さ、蹴込みの奥行きを計測して、取り付け可能か確認します

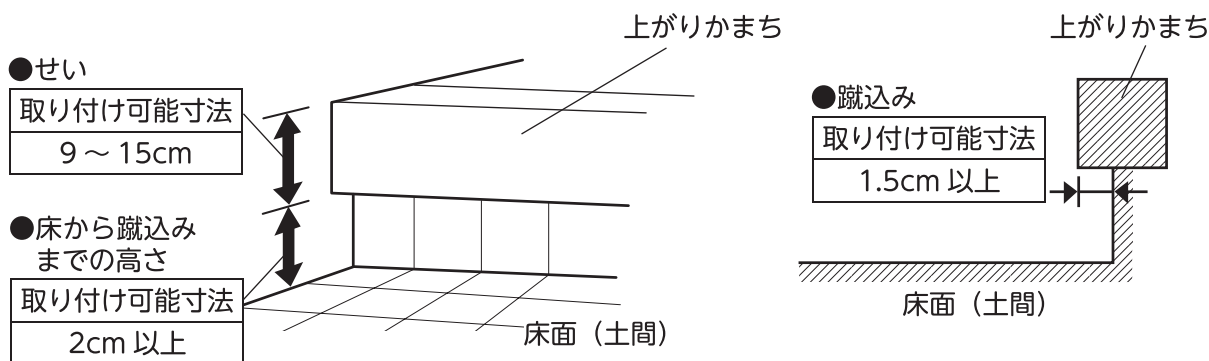

警告



取り付け可能な上がりかまちに取りつけること

- ・手すりを外れてバランスを崩し、転倒・けがの原因になります。
- ・上がりかまちの変形や破損の原因になります。

注意



設置する前に、ご利用者様へ上がりかまちの裏側にあとが残ることを相談の上、設置してください。

準備するもの

- スパナ (17mm) またはソケットレンチ (17mm)
- スパナ (12mm) またはソケットレンチ (12mm)
- 六角レンチ (5mm)
- プラスドライバー (JIS2番)、スケール



取り付けましょう

取り付け・取り外しは貸与されました販売店などでおこなっていただき、利用者や介助者などがおこなわないようにしてください。

しっかりと取り付けられていない状態で使うと、転倒の危険があります。

取り付ける位置を決めましょう

取り付け位置は、使う方の体格や昇降動作をしやすいよう、お買い上げの販売店やケアマネジャーなどの専門家に相談することをおすすめします。

※上がりかまちの寸法が P.9 の「取り付け条件」を満たす場合、取り付けができます。





取り付けの手順

1. しめ付けプレートを調節します

準備されたスパナ (12mm) などでフランジナット (2ヶ所) をゆるめてから、取り付ける上がりかまちの「せい」の高さに合わせて、スパナ (17mm) などを使ってガイドボルトを調整してください。

※開梱時はしめ付けプレートを「せい」の高さ約12cmの位置に設定しています。

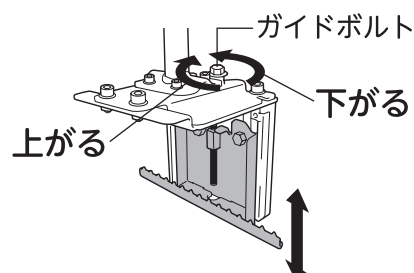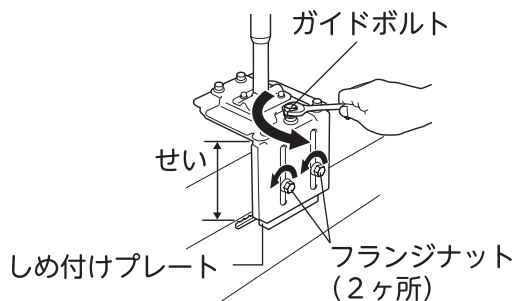

🔍 確認しましょう

! 安全上のご注意

✖ 取り付けましょう

💖 使いましょう


💧 お手入れしましょう

? 困ったときには


✖ 取り付けましょう

2. 高さ調節パイプC (土間側) を伸ばす長さを測ります

- ① 取り付けるかまちに製品が倒れないようにガイドボルトをスパナ (17mm) など締めつけて、仮取り付けします。

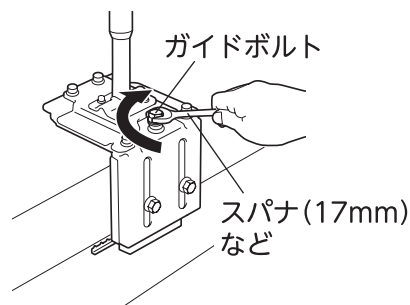


- ② アジャスターの下側から玄関床面までの高さを測ります。

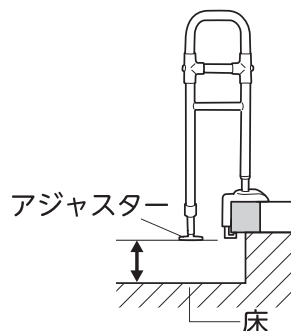


3. 高さ調節パイプC (土間側) を伸ばします

- ① 高さ調節固定ナットを回してゆるめてください。

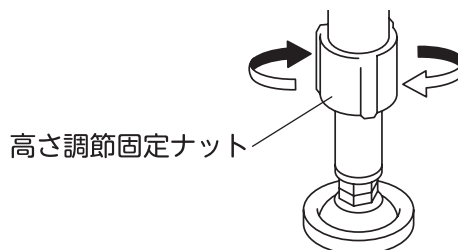

- ② 樹脂スリーブを手で持ちながら高さ調節パイプC (土間側) を回して、先ほど測定した高さまで伸ばします。

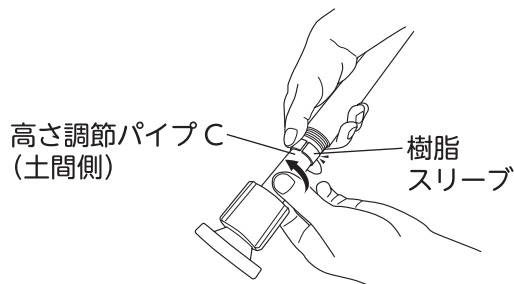

注意




高さ調節パイプC (土間側) を回す際は、樹脂スリーブを手で押さえながらおこなうこと

製品に傷がつく原因になります。




アジャスター裏側にプラスネジ溝がありますので、電動ドリルを使って回すこともできます。

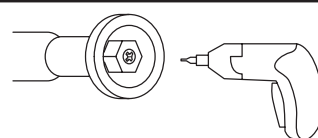

4. 上がりかまちに取り付けます

- ① ベースプレートが、上がりかまちの「せい」の側面に接触するように、取り付けてください。ベースプレートと壁の間を 5 cm 以上離すようにしてください。

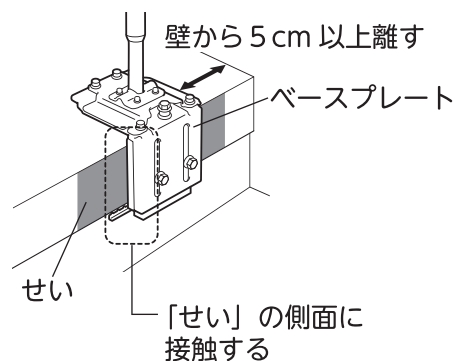


警告




上がりかまちにベースプレートを当てた状態で取り付けること


手すりを外れて、転倒・けがの原因になります。

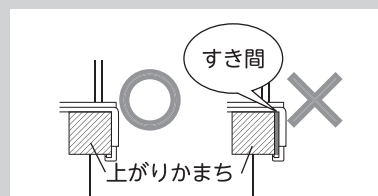

- ② ガイドボルトをスパナ (17mm) など、しっかり締め付けてください。

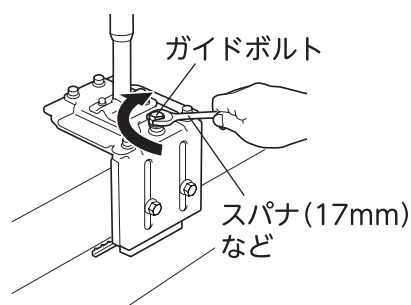

- ③ ガイドボルトでしっかり固定した後、ベースプレート前面のフランジナット (2ヶ所) を、スパナ (12mm) など、しっかり締め付けてください。しっかり締め付けた後、ガタつきがないことを確認してください。

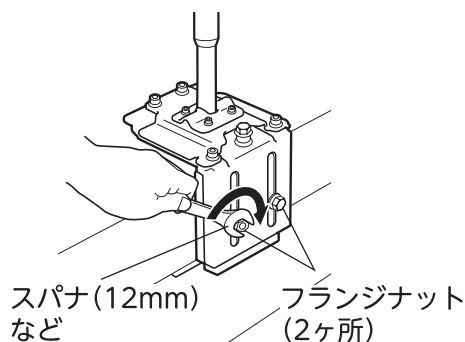

警告



ガイドボルトとフランジナット (2ヶ所) をしっかり締め付け、手すりにガタつきがないか確認すること

取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

確認しましょう

！安全上のご注意

✖取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう


？困ったときには

✖️ 取り付けましょう


5. 手すり高さ調節をします

- ① 支柱の目盛線に合わせ、固定ボルト(かまち側)を六角レンチ(5mm)で締め付けます。


※上段手すり(かまちの上から手すり上部まで)の初期設定は72cmです。
そこから2cm刻みで82cmまで調節可能です。

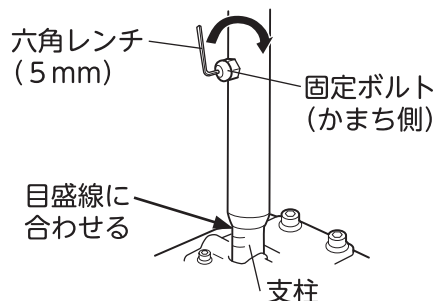

- ② 手すりの高さに合わせて、ガタつきが少なくなるように高さ調節パイプC(土間側)を回します。

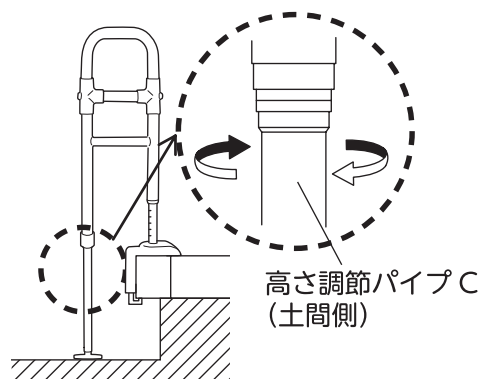

- ③ 高さ調節が終わった後、高さ調節固定ナットをしめ付けます。

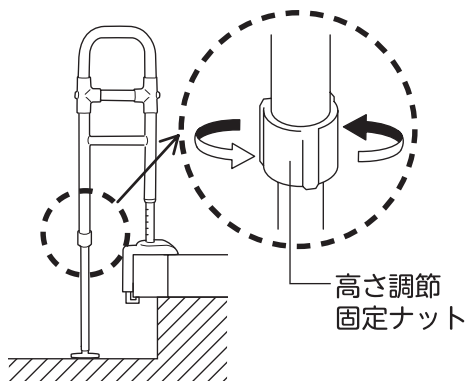

警告



固定ボルト(かまち側)がしっかり締め付けられ、手すりにガタつきがないか確認すること

取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

注意



高さ調節パイプC(土間側)を回してガタつきが少なくなるように調節すること

取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

確認しましょう

安全上の注意

取り付けましょう


使いましょう

お手入れしましょう


困ったときには

6. 樹脂カバーを取り付けます

- ①ベースプレート樹脂カバー C を、切り込み部を広げた状態ではめ込みます。

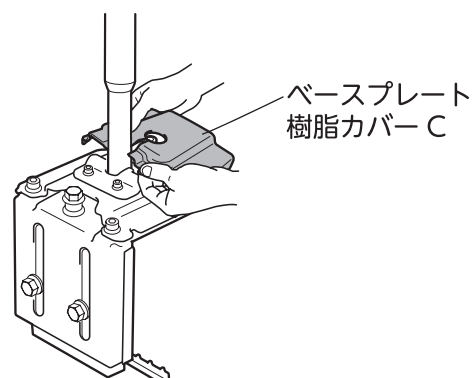

- ②ベースプレート樹脂カバー B (調節側) を取り付け、付属のベースプレート樹脂カバー固定ネジで固定します。

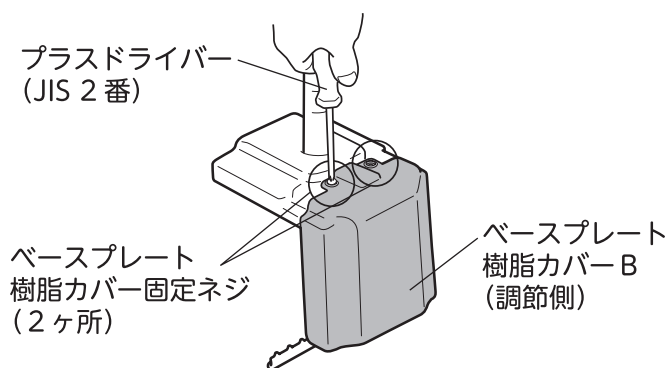

確認しましょう

！安全上のご注意

✕取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

？困ったときには


ご使用になる前に確認しましょう

上がりかまちに、しっかり固定されていることを確認してください。

① しっかり固定されているか
確認してください。

② かまちから製品が動くようなら、
P.10「取り付けの手順」を確認し、
再度取り付けてください。


前後左右に
かるくゆらして
チェック

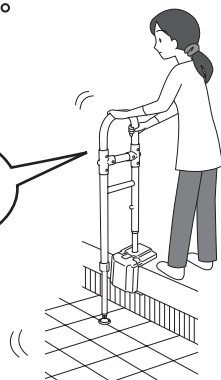


詳しくは添付の「ご使用前点検シート」を
よく確認してください

使いかた

玄関や勝手口の段差に取り付けて昇降を
補助する手すりとしてお使いください。
また、踏み台（別売品）を併設して使う
こともできます。

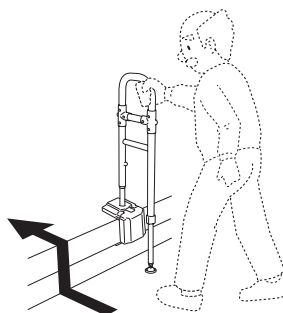

踏み台なし

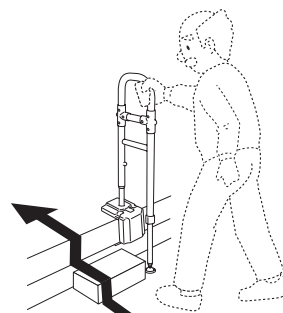

踏み台あり

警告




手、足、靴底が濡れた状態、また手すりなど製品が濡れた
状態で使用しないこと

転倒・けがの原因になります。



勢いよく力を加えたり、過度な力を加えたり
しないこと

転倒・けがの原因になります。

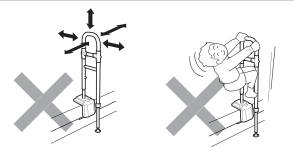

手すりのすき間に頭部や足を入れないこと

けがの原因になります。



💧 お手入れしましょう

ATTOGRIP AT-E-200 は、下記の手順に従ってこまめにお手入れしてください。

警告




**改造をしないこと
また、修理技術者以外の方は、分解したり修理したりしないこと**
本体機能が正常にはたらかず、けがの原因になります。



注意




次にあげるものではお手入れしないこと
・塩素系洗剤 ・タワシ ・酸、アルカリ性洗剤 ・研磨剤入りのスポンジ
・シンナー ・磨き粉 ・クレゾール
・塩素系薬剤をかけての殺菌、消毒 ・その他製品を傷付けるもの
製品が劣化し、けがの原因になります。

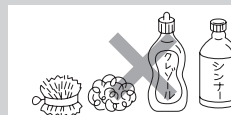

お掃除のしかた

日常のお手入れ方法

中性洗剤をうすめてスポンジかやわらかい布に含ませ
汚れをとったあと、乾いた布で乾拭きしてください。

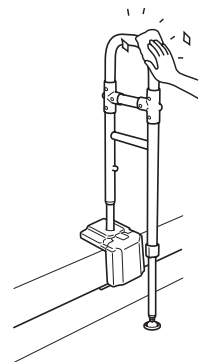

消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
製品の消毒は、アルコール清拭消毒、逆性石けん清拭消毒などを推奨します。
製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。

注意



消毒に、オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しないこと
製品が破損する原因になります。

保管時の注意

「安全上のご注意」をご確認ください。

詳しくは… 8 ページへ

点検のしかた

別紙「ご使用前点検シート」をご確認ください。

P.15 「ご使用になる前に確認しましょう」を確認してください

🔍 確認しましょう

! 安全上のご注意

✖ 取り付けましょう

💧 使いましょう


💧 お手入れしましょう

? 困ったときには

お手入れしましょう

交換部品

部品交換は、販売店の修理技術者の方が行ってください。
各部品が、汚れたり、破損した場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

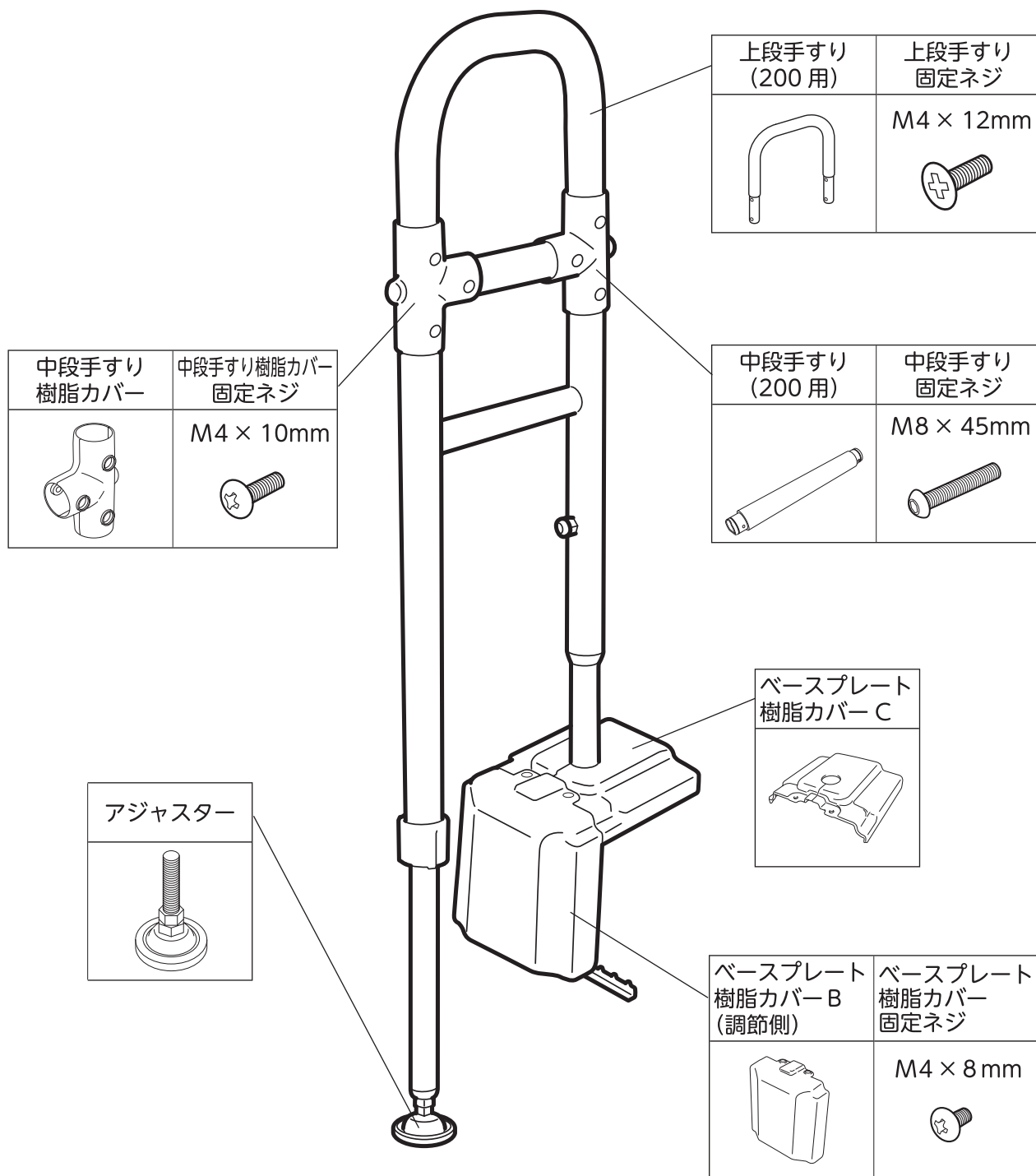

確認しましょう

！安全上の注意

✖取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう


？困ったときには

上段手すり(200用)と中段手すり(200用)の交換方法

外しかた


1. 高さ調節パイプ C (土間側) を外します

高さ調節固定ナットをゆるめてから、高さ調節パイプ C (土間側) を回し、手すりパイプ (本体) から外します。

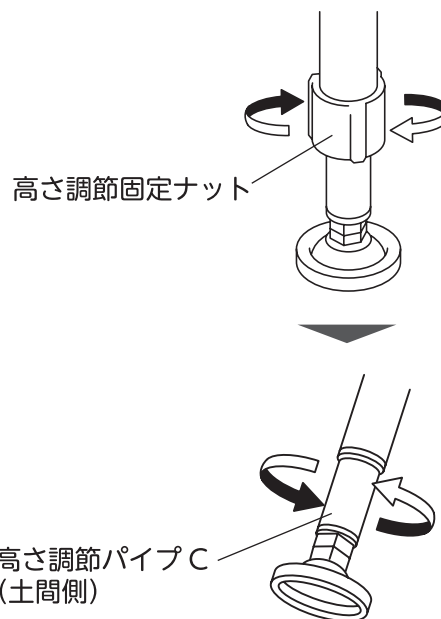

2. 中段手すり樹脂カバーを取り外します

中段手すり樹脂カバー固定ネジ (12ヶ所) をプラスドライバー (JIS 2 番) で外し、中段手すり樹脂カバーを取り外します。

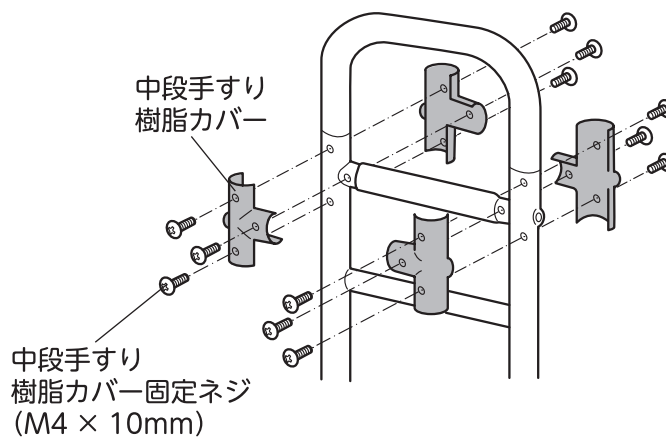

🔍 確認しましょう

⚠ 安全上のご注意

✖ 取り付けましょう

👉 使いましょう

💧 お手入れしましょう


❓ 困ったときには

💧 お手入れしましょう

3. 上段手すり(200用)を取り外します


①上段手すり固定ネジ(8ヶ所)を、プラスドライバー(JIS 2番)で外してください。

②中段手すり固定ボルト(2ヶ所)を六角レンチ(5mm)で外し、上段手すり(200用)を上方向に取り外してください。

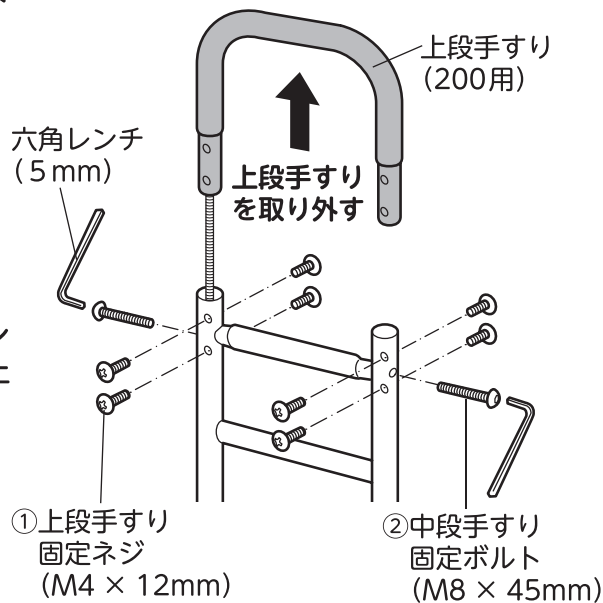

4. 中段手すり(200用)を取り外します

中段手すり(200用)を上方向に取り外してください。

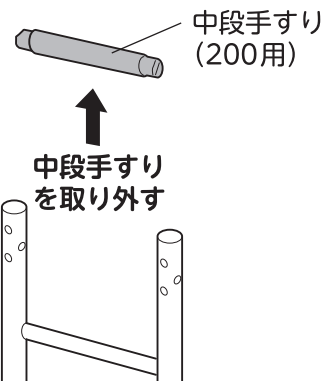

🔍 確認しましょう

⚠️ 安全上の注意

✖️ 取り付けましょう

💧 使いましょう


💧 お手入れしましょう

❓ 困ったときには

取り付けかた


1. 中段手すり(200用)を本体に差し込みます

中段手すり(200用)を下方方向に差し込んでください。

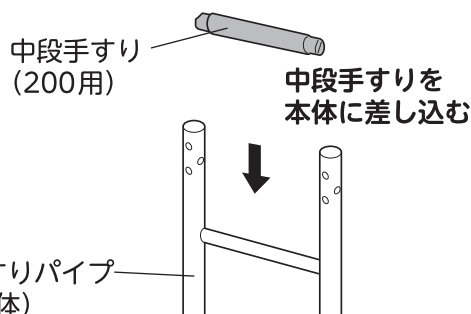

2. 上段手すり(200用)を固定します


上段手すり(200用)を手すりパイプ(本体)に差し込み、中段手すり固定ボルト(2ヶ所)と上段手すり固定ネジ(8ヶ所)を固定してください。

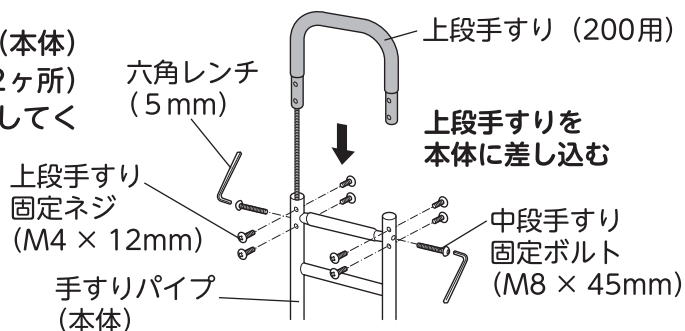

3. 中段手すり樹脂カバーを取り付けます

中段手すり樹脂カバーを、中段手すり樹脂カバー固定ネジ(12ヶ所)で取り付けてください。


※固定ネジを均等に締め込んでいくと、しめやすくなります。

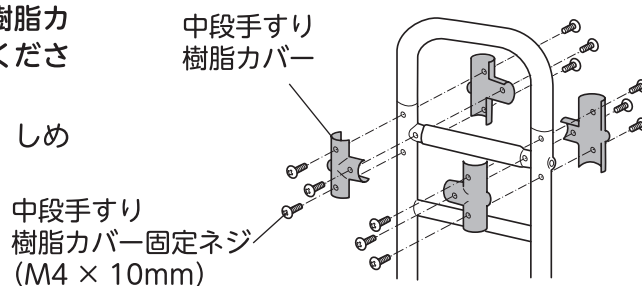

4. 高さ調節パイプC(土間側)を取り付けます

①アジャスターを高さ調節パイプC(土間側)に取り付けます。

②高さ調節パイプC(土間側)を回し、高さ調節固定ナットをしめます。

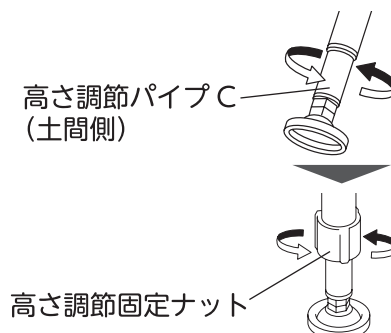

最後に、ネジがしっかり締められ、ガタつきがないことを確認すること

確認しましょう

安全上のご注意

取り付けましょう

使いましょう

お手入れしましょう

困ったときには

💧 お手入れしましょう

高さ調節ボルトの交換方法

準備するもの スパナ (17mm)




1. 上段手すり(200 用)を取り外します

詳しくは…18 ページを確認してください

2. 高さ調節ボルトを外します

上段手すり(200 用)に固定しているナット(M10)をスパナ (17mm) などで外します。

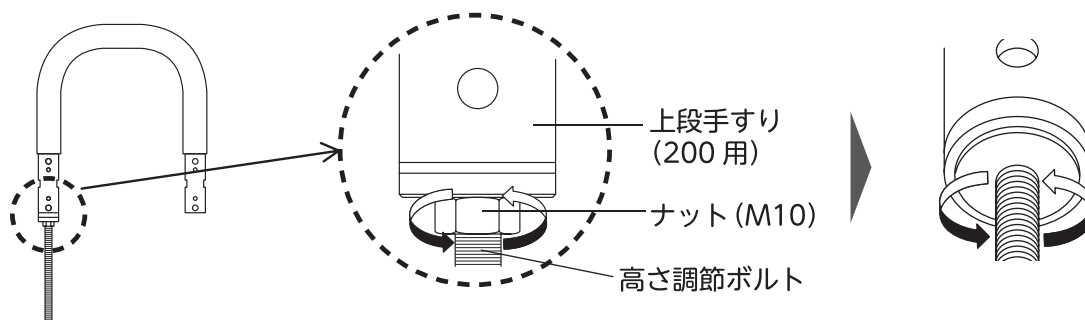

3. 逆の手順で高さ調節ボルトを固定して元に戻します

最後に、ネジがしっかりしめられ、ガタつきがないことを確認すること

🔍 確認しましょう

⚠️ 安全上の注意

✖️ 取り付けましょう

💡 使いましょう

💧 お手入れしましょう

❓ 困ったときには

? 困ったときには

保証とアフターサービス

商品のご購入に関するお問い合わせ、ご相談は…お買い求めの販売店へ
商品の仕様などに関するお問い合わせ、ご相談は…下記お客様相談室へ

不具合が発生したとき

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、製品に保証書（取扱説明書）を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業、作業員の出張にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

アロン化成株式会社

フリーダイヤル

お客様相談室

 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の

月～金 9:00～17:00

(12:00～13:00 は除く)

確認しましょう

！安全上のご注意

✕取り付けましょう

♡使いましょう

💧お手入れしましょう

? 困ったときには

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

1. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
2. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様相談室にご相談ください。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 3) 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
 - 4) お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。
 - 5) 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障または損傷。
 - 6) ボルトなど消耗品の損傷及び汚れ。
 - 7) 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈個人情報の取扱いについて〉

- 1) 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。
なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 2) 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	ご住所 〒 この保証書はご使用できません
★販売店	住 所 〒 店 名 TEL

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合は直にお買い上げの販売店にお申し出ください。

■保証書について

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索

13.09 919040