

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

## 1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品・対応方法

1)取扱説明書	不足していないこと。	取扱説明書(安寿HPより印刷)
2)支柱固定ボタンスボルト	支柱固定ボタンスボルトと平座金M8が不足していないこと。	支柱固定ボタンスボルト(4個)
3)六角レンチ	六角レンチが不足していないこと。(360:5mmと4mmが各1本、360F:5mm×1本と4mm×2本)	-
4)各種シール	スライド支柱に高さ目盛りシールがあること。	高さ目盛りシール(5枚)
	外支柱に警告シールがあること。	警告シール(5枚)
	外支柱に品質表示シールがあること。	外支柱

## 2. 外観の点検

チェック欄

交換部品・補修材

1)手すりの点検	変形・傷・汚れがないこと。 角度固定キャップボルトが緩みなく締め付けできること。	C型手すり or 中性洗剤等で清拭 角度固定キャップボルト(2本)
2)支柱の点検	変形・ひび割れ・ゆがみなど異常がないこと。	支柱セット or 中性洗剤等で清拭
3)支柱プレートカバーの点検	傷・汚れ・割れがないこと。	支柱プレートカバー or 中性洗剤等で清拭
4)支柱キャップの点検	傷・汚れ・割れがないこと。	支柱キャップ or 中性洗剤等で清拭
5)ベースプレートの点検	塗装剥がれや傷がないこと。 保護マットに傷・汚れ・剥がれがないこと。 ベース後方緩衝材とベース底部スペーサーに傷・汚れ・剥がれがないこと。 座付きアジャスターの底部にゴムがあり、傷・汚れ・剥がれがないこと。 端面保護カバーに変形・ひび割れ・ゆがみなど異常がないこと。	端面保護カバーL510 端面保護カバーL556(2本) 端面保護カバーコーナー(2個) 端面保護カバーボルト(13本) ベース後方緩衝材(1set) ベース底部スペーサー(2個) ベースプレート保護マット 座付きアジャスター(4個) or 中性洗剤等で清拭
6)踏み台の点検	塗装剥がれや傷がないこと。 保護マットに傷・汚れ・剥がれがないこと。 踏み台緩衝材に傷・汚れ・剥がれがないこと。 踏み台調節ボルトと固定ボルトが緩みなく締め付けできること。	踏み台本体補修スプレー 踏み台保護マット天面板用 踏み台保護マット段鼻用 踏み台緩衝材(2個) 踏み台固定/調節ボルト(6) or 中性洗剤等で清拭

## 3. 性能の点検

チェック欄

交換部品・対応方法

1)手すりガタつきの点検	前後・左右に軽くゆらしてガタつきやズレがないこと。	高さ調節ボルト、角度固定ボルト、 ブラケット固定ボルトM4を締め直し
2)支柱ガタつきの点検	ベースプレート等に固定して、前後・左右に軽くゆらしてガタつきやズレがないこと。	支柱固定ボタンスボルトを締め直し
3)踏み台ガタつきの点検	上下に軽くゆらしてガタつきやズレがないこと。	踏み台調節ボルト、踏み台固定ボルトを締め直し
4)手すり角度変更の点検	角度固定ボルトを調節して、手すりの角度変更が正常に行えること。	-
5)高さ調節の点検	高さ調節が正常に行えること。	-

おつかれさまでした。

