


このたびは「トイレサポート 床面調整シート」をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書と「トイレサポート」の取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は「トイレサポート」の取扱説明書と共に大切に保管してください。

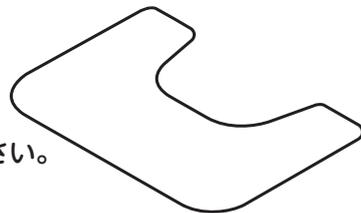

仕様

品名	トイレサポート 床面調整シート	
材質	不織布部分	ポリエステル
	滑り止め材（表面／点状）	塩化ビニル樹脂
	滑り止め材（裏面／ストライプ状）	エラストマー

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

この製品は、トイレサポートを設置する際、設置可能な床面の対象を広げるためのものです。それ以外の目的では使用しないでください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

絶対にしないこと


以下の床面には設置しないこと

- ・塩ビ製フロアマット（床）
- ・床板が劣化し、つまずくほどの段差が生じた床面
- ・著しい傾斜の床面
- ・大理石、人工大理石の床面
- ・たわむほど柔らかい床面

転倒やけがの原因になります。
製品や床面の破損、劣化および変色の原因になります。

手すりに対して水平に力を加えたり、勢いよく力を加えるなど、ベースプレートが浮き上がるような使用をしないこと

固定式ではないため転倒やけがの原因になります。また、浮き上がったベースプレートが便器や床面に当たり破損する原因になります。ベースプレートの上に乗るまでは、手すりを床面に押さえつけるように力を加えて使用してください。

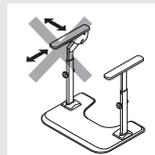

注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

必ず行うこと

使用前にトイレサポート本体が床面調整シートから外にはみ出さないように設置されていることを必ず確認すること。

定期的^に外して清掃すること。

長期間設置したままにすると床面に設置あとが発生する原因になります。

絶対にしないこと

次^にあげるものではお手入れしないこと

- ・シンナー ・クレンジール ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系薬剤（洗剤）や熱湯（煮沸消毒など）による殺菌、消毒
- ・磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの

製品が劣化し、破損の原因になります。



屋外に放置したり、直射日光に当たったりしないこと
劣化および変色の原因になります。

消毒に、オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しないこと


床面設置可否

床面調整シートを利用することで設置できる床面の対象が拡大します。

	床面の例	トイレサポート単体	床面調整シートを利用
一般的な床面	塩ビ製フロアーマット (床)	○	× (色移行の可能性)
	一般的なフローリング床	○	○
	Pタイル	○	○
	ざらざらした表面のタイル	△ (コーティング破損の可能性)	○
著しい凹凸の床面	例：小さい石のようなタイルが埋め込まれた床	× (横滑りの可能性)	○
	例：床板が劣化し、つまづくほどの段差が生じた床	× (転倒の可能性)	× (転倒の可能性)
著しい傾斜の床面	例：排水勾配が部分的に急で設置時にガタつく床	× (転倒の可能性)	× (転倒の可能性)
	例：排水勾配により設置時にひじ掛けが大きく傾く床	× (転倒の可能性)	× (転倒の可能性)
滑りやすい床面	例：特に表面が滑らかなフローリング床	× (横滑りの可能性)	○
	例：つるつるしたタイル	× (横滑りの可能性)	○
	例：塗装されたコンクリート床	× (横滑りの可能性)	○
	例：大理石、人工大理石の床面	× (横滑りの可能性)	× (色移行の可能性)
	床下腐食等で手すりに荷重を掛けると沈み込むほどにたわむ、柔らかい床	× (転倒の可能性)	× (転倒の可能性)

設置方法

- ① 便器の前に床面調整シートを広げて設置してください。白い点状の滑り止め材がある方が表、グレーのストライプ状の滑り止め材がある方が裏になります。裏面の保護フィルムは剥がして設置してください。
- ② 床面調整シートの上にトイレサポートを載せてください。

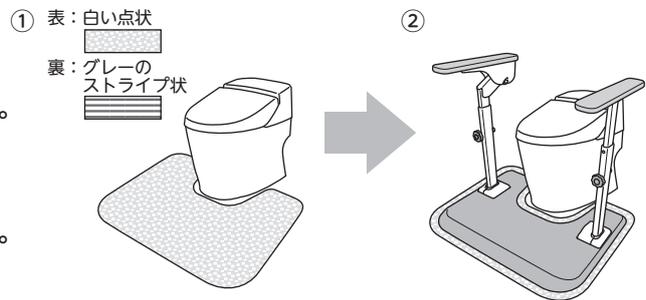


お手入れの方法

いつものお手入れは

長期間設置したままにすると床面に設置あとが発生する原因になるので定期的に外して清掃してください。外した床面調整シートは洗濯することができます。

洗濯は他の洗濯物との絡みつきによる破損を防ぐため、洗濯ネットに入れて洗濯するか、床面調整シート単独で洗濯してください。脱水も可能です。洗濯後は色落ちを防ぐため、陰干ししてください。

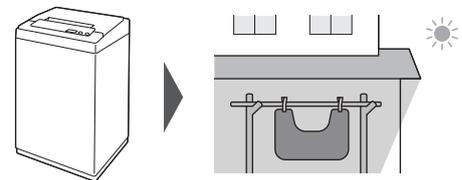

消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。製品の消毒は、アルコール清拭消毒、逆性石けん清拭消毒などを推奨します。製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。

- 製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見
・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元

TOAGOSEI グループ

Aron
アロン化成

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索