

⚠ 注意


- ・ 直射日光のあたる場所では変色の恐れがあります。
- ・ 熱源（ストーブ・ヒーター等）の近くでは使用しないでください。
変形の恐れがあります。
- ・ 付属の取り付け木ねじでしっかりと床面に固定してください。
使用中に外れて転倒し、けがの原因になります。
- ・ 保管は直射日光の当たらない場所、60℃以上にならない場所で
平らな面に置いてください。
反り・曲がり等の原因となります。

取り付け方法

- ① 設置面のゴミや水気、油は必ず乾いた布等で取り除いてください。




- ② 本体裏側に貼られている両面テープのはくり紙をはがし設置場所に仮固定してください。

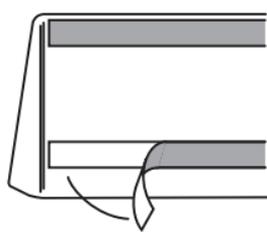

⚠ 注意

両面テープはあくまでも仮固定です。
このまま使用しないでください。

- ③ 付属の取り付け木ねじ2本と平座金で固定してください。

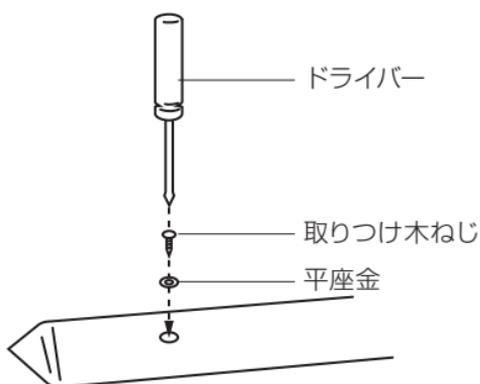

⚠ 注意

木ねじを必要以上に強くしめすぎると
取り付け部が変形する恐れがあります。

- ④ 取り付け木ねじの穴に付属の目隠しシールを貼ってください。

お手入れ方法

- 通常は柔らかい布などで水ぶきしてください。汚れがひどいときは中性洗剤を布に含ませて、汚れをふきとった後、水ぶきしてください。
- トイレ用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは表面を傷つけますので絶対に使用しないでください。

製品仕様

■ サイズ

品名	サイズ
段差スロープEVA #20	幅760×奥行80×高さ20mm
段差スロープEVA #25	幅760×奥行100×高さ25mm
段差スロープEVA #30	幅760×奥行120×高さ30mm

■ 材質：発泡EVA樹脂

■ 付属部品

取り付け木ねじ（なべ頭）：φ3.5×25 2本
平座金：2枚 目隠しシール：2枚



アロン化成株式会社