

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品・対応方法

1)取扱説明書	不足していないこと。	取扱説明書(安寿HPより印刷)
2)専用マット	容易にズレないこと。	専用マット
	臭いが染みついていること。	専用マットを洗濯、もしくは交換
	支柱を立てるために切り抜く部分から千切れや破れが発生していないこと。	専用マット
3)ナットカバー(支柱裏)	不足していないこと。	ナットカバー(10個)
	支柱を立てるために切り抜く部分が、次回設置する際の設置条件に適していること。	専用マット 穴埋シート 大(10枚) 専用マット 穴埋シート 小(10枚)
4)各種シール	内支柱に高さ表示シールがあること。	高さ表示シール(10枚)
	外支柱に警告シールがあること。	警告シール(10枚)
	はねあげ内支柱に指挟み注意シールがあること。	指挟み注意シール(10枚)

2. 外観の点検

チェック欄

交換部品・補修材

1)ひじ掛けの点検	ひじ掛け(木)に傷・汚れ・割れがないこと。	ひじ掛け(木)
2)支柱の点検	塗装剥がれや傷がないこと。	S-はねあげ塗料スプレー(300ml)
	異常(変形・ひび割れ・ゆがみ)がないこと。	H はねあげ内支柱 N ノーマル内支柱 外支柱セット
3)支柱カバーの点検	傷・汚れ・割れがないこと。	支柱カバー
4)スライドブッシュ ※内支柱・外支柱のガタ防止キャップ	傷・汚れ・割れがないこと。	スライドブッシュ (1個 固定ネジ付)
5)ひじ掛けストッパーの点検	変形・傷・汚れ・割れがないこと。 本体から外れていないこと。	ひじ掛けストッパー(チェーン付)
6)ひじ掛け緩衝ゴムの点検	不足していないこと。 へたりがないこと。	ひじ掛け緩衝ゴム
7)ベースプレートの点検	塗装剥がれや傷がないこと。 異常(変形・ひび割れ・ゆがみ)がないこと。	ベースプレート塗料
8)高さ調整ボルトの点検	不足していないこと。 支柱の高さ調節ノブボルトが緩みなく締め付けできること。	高さ調節ノブボルト(1本)
9)支柱固定ボルトの点検	不足していないこと。 支柱固定ボルトが緩みなく締め付けできること。	支柱固定ボルトセット(片側4本分)
10)滑り止め材の点検	滑り止め材が外れたり変形したりしていないこと。 滑り止め材とベースプレートの境目に尿臭が染みついていること。	滑り止め材セット(1台分)

3. 性能の点検

チェック欄

交換部品・対応方法

1)ガタつきの点検	前後・左右に軽くゆらしてガタつきやズレがないこと。	高さ調節ノブボルトと 支柱固定ボルトを締め直し
2)高さ調節の点検	高さ調節が正常に行えること。	動作不良の原因となる部品を交換 H はねあげ内支柱 N ノーマル内支柱 外支柱セット 高さ調節ノブボルト スライドブッシュ
3)ひじ掛けの点検	はねあげが正常に行えること。	H はねあげ内支柱

