

お手入れの方法

■清掃について

ご使用後は水分や汚れを乾いた布等で拭き取ってください。落ちにくい汚れは、中性洗剤をつけたタオルで拭き取ってください。



注意

製品の清掃に中性洗剤以外の物を使用しないこと
部品の変質、劣化の原因になります。

■点検について

つえ先ゴムは消耗品です。摩耗したり、破れていないかを適時点検し、必要に応じて交換してください。



注意

危険ですからむやみに改造や分解をしないこと
故障やけがの原因になります。

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱い説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げ日より1年間です。

- 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
- ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、お近くの支店・営業所にご相談ください。
- 本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- 保証期間内には、パーツの欠品、不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理いたしますが、お客様の責任によるものは実費修理といたします。
- 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 一般家庭用以外にご使用の場合の破損
 - 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取扱いによる損傷
 - 災害、事故などによるもの
 - つえ先ゴム、ストラップなど消耗品の損傷及び汚れ
- 一度ご使用になったものは、原則としてお取り替えできません。
- 製品についての各種お問い合わせは、お求めの店または、当社窓口まで直接ご連絡ください。

<個人情報の取扱いについて>

- 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用します。なお、本書にてお預かりするお客様の情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 修理のために、当社からの修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げの日より1年
お客様	ご住所 〒 ご氏名
★販売店	住 所 〒 店 名 TEL

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

SGマークの被害者救済制度

■SGマークの被害者救済制度

SGマーク制度は、つえの欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

ただしお買い上げ日より3年以内です。

■賠償についてのご注意

- 認定した つえ そのものが故障したとしても、その品質について保証するというものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害について賠償する制度です。

■製品の欠陥により事故が起きた場合には

事故が起きた場合、別欄の項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会に連絡してください。

製品安全協会 東京都台東区竜泉2-20-2ミナホムス*三ノ輪2階
TEL(03)5808-3300

事故の届出に必要な項目

- ①事故の原因となったつえの現品
イ) 製品の名称、SGマーク番号、ロ) 製品の購入先、購入年月日
- ②事故発生の状況
イ) 事故発生日月日、ロ) 事故発生場所、ハ) 事故発生状況
- ③被害の状況
イ) 被害者の氏名、年齢、性別、職業、住所
ロ) 被害の状況と程度


製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

12.01

お客様ご相談窓口
製品に関するご意見・お問い合わせは
0120-86-7735
祝祭日以外の月～金 9:00～17:00

アロン化成株式会社
ライフサポート事業部
〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階
TEL (03) 3502-1448 FAX (03) 3502-1452

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411

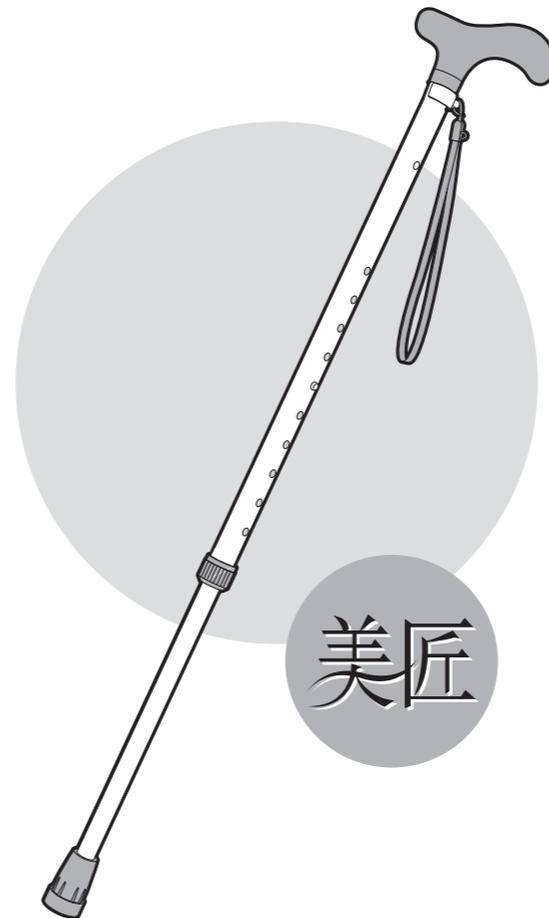

美匠

アルミ製伸縮杖 安寿
びしょう
美匠

取扱説明書

保証書付



財団法人製品安全協会
SG合格品

⚠️ご使用になる前に

この製品は、つえなしで自立歩行できる人が、より安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。

次のような場合の使用には適しません。
また、購入時はそうでなくても、次のような状態になった場合には、使用を中止してください。

- ①つえなしでは歩行できない人の使用
- ②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない人の使用。ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。

このたびはアルミ製伸縮杖「美匠」をお求めいただきましてまことにありがとうございます。

- 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書（保証書）は大切に保管してください。

- 保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書を併せてお渡してください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ・最適な長さの選びかた	2
グリップの正しい持ちかた・長さ調節方法	2
保管のしかた	2
お手入れの方法・保証書	3

ARONKASEI CO., LTD.

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

注意 誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示(図記号)で区分し、説明しています。

! 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。

⊘ してはいけない「禁止」内容を説明しています。

警告

つえなしで歩行できない人は使用しないこと
転倒し、けがの原因になります。

つえ以外の目的(登山用、トレッキングポール、護身用)には使用しないこと
故障の原因になるだけでなく、けがをする原因になります。



凍った路面では使用しないこと
転倒し、けがの原因になります。

からだに合った寸法に調節した後、正しい持ちかたで使用すること
不適切な長さのまま使用すると、姿勢が不安定になり、転倒し、けがをする原因になります。
※P2(最適な長さの選びかた・グリップの正しい持ちかた参照)

使用前には必ず各部の点検をして使用すること
万一、シャフトのキズ、グリップのヒビ割れ、つえ先ゴムの異常等を見つけたときは、使用を中止してください
そのまま使用すると、故障の原因となるだけでなく、けがをする原因になります。

使用中も含め、長さ調節部が確実に固定されているか、確認して使用すること
転倒し、けがの原因になります。




注意

濡れた路面等、滑りやすい所では、十分注意して使用すること
転倒し、けがの原因になります。


道路の側溝蓋(グレーチング)や凹みがある箇所では、つえ先ゴムがはまりこむ場合があるため、注意して使用すること
転倒し、けがの原因になります。

つえ先ゴムが摩耗してきたり、劣化して外れやすくなった場合は、早めに取り替えること
つえ先ゴムが外れ、姿勢が不安定になり、転倒し、けがをする原因になります。

つえ先ゴム(φ16用)


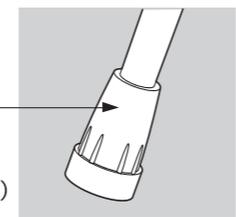


各部のなまえ

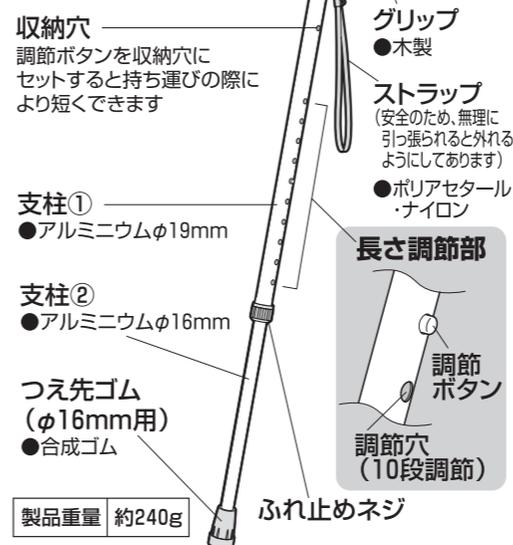

最適な長さの選びかた グリップの正しい持ちかた

つえを足先の
前外方向20cmに
置いたとき、
肘の角度が
30~40度
になる長さが、
最適な長さの
目安です。

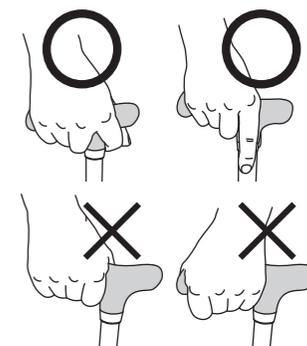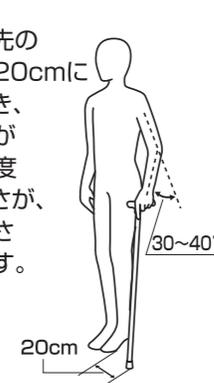


支柱の真上を持つように握ってください。

■身長とつえの長さの目安(cm)

身長	長さ	調節穴	身長	長さ	調節穴
130	68.0	一番上	155	80.5	
135	70.5		160	83.0	
140	73.0		165	85.5	
145	75.5		170	88.0	
150	78.0		175	90.5	一番下

警告 正しい持ちかたで使用すること
グリップが破損する原因になるだけでなく、姿勢が不安定になり、転倒し、けがをする原因になります。

長さ調節方法

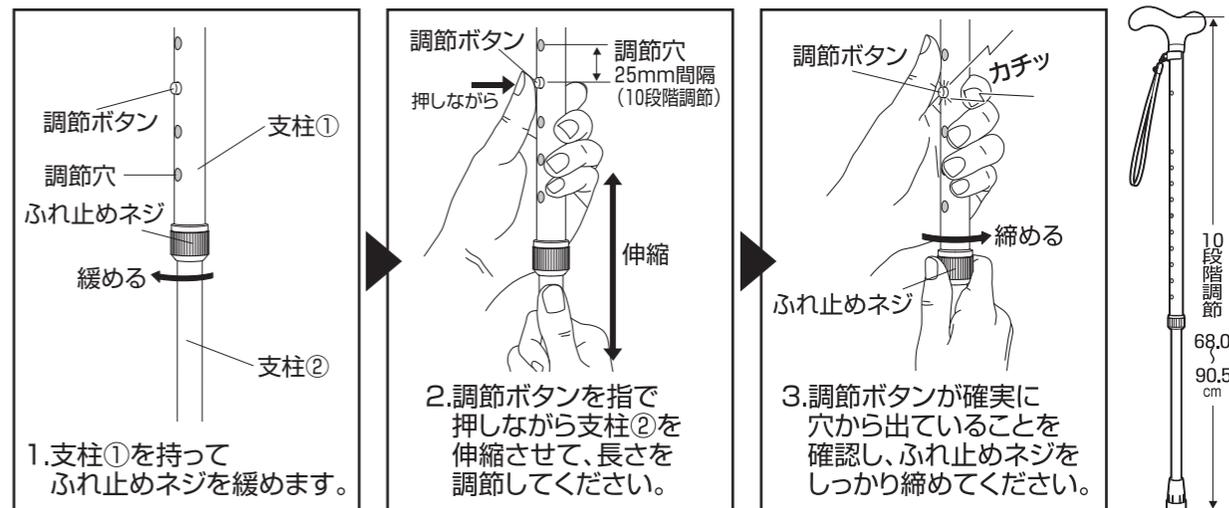

警告

長さ調節後は調節ボタンが確実に穴から出ており、ふれ止めネジがしっかり締まっているか確認すること
転倒し、けがの原因になります。

保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に保管してください。

注意

雨ざらしにしないこと
金属部が錆びて、故障の原因になります。

幼児や小さなお子様の手の届くところに置かないこと
思わぬけがの原因になります。

火の近く、及び夏期の車内など、高温になる場所には保管しないこと
故障や変形の原因になります。

荷物をグリップにかけたり圧力が加わる状態で保管しないこと
故障や変形の原因になります。