

本製品をレンタル・販売する場合には、
取り扱い事業者様から必ず本文書をご利用者様へお渡しいただき、ご説明願います。
(現在、既にご利用中のお客様に関してはモニタリング時に実施願います)

- ・ご利用者様へのお願い
ご利用の際、下記の動作を絶対にしないでください。

記

◆注意事項

折りたたみレバーに過度に体を預けて寄りかからないでください。転倒の原因になります。
(本製品は、下記参考事例の動作をしないように注意してご利用願います)

■過度に体を預けて寄りかかっている状況の参考事例


参考事例①

後方の物を取ろうとして折りたたみレバーに寄りかかる。



参考事例②

折りたたみレバーに寄りかかり、足を使って歩行車を動かす。

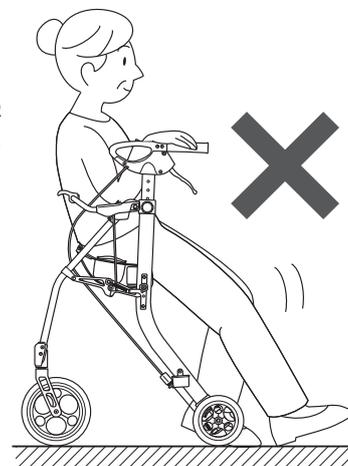

■推奨する座り方

座面に座る際は、前輪が進行方向に向いていることを確認し、折りたたみレバーや、片側のハンドルに過度に寄りかからず座面の中央に座ってください。


■着座時及び、立ち座りする際の注意事項

- ・折りたたみレバーは背もたれではありませんので、着座時に体を預けて寄りかからないでください。
- ・立ち座りの際や、着座時に片側のハンドルに寄りかからないでください。

片側のハンドルに寄りかからない

折りたたみレバーに寄りかからない

前輪が進行方向に向いている

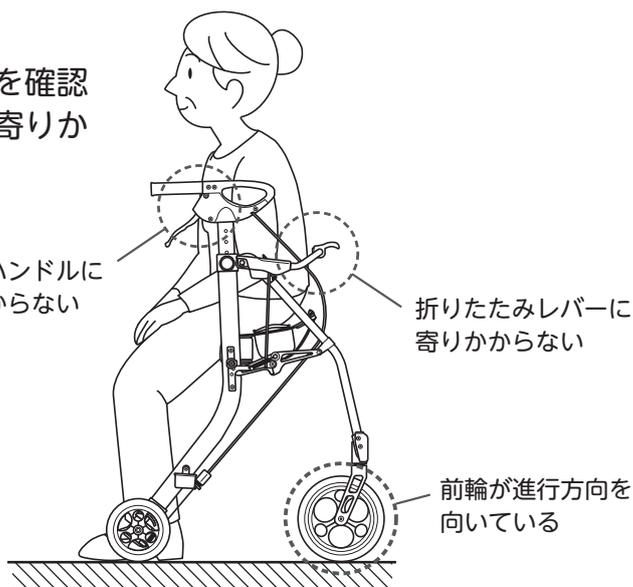

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階