

# 歩行車 イコットエアM

# メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

| 実施日 | 累積回数 | 実施者 |
|-----|------|-----|
|     |      |     |

## 1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

|         |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| 1)取扱説明書 |   | 取扱説明書                 |
| 2)座面バッグ | ファスナー部に破損がなくスムーズに動作することを確認してください。                 | 座面バッグ                 |
|         | 座面バッグにほつれ、破れ、汚れがないことを確認してください。                    |                       |
|         | 座面ベルトにほつれ、破れ、汚れがないことを確認してください。                    |                       |
|         | 取付用のホック(3カ所)がしっかりと固定されていることを確認してください。             |                       |
| 3)各種シール | 指はさみ注意シールが、折りたたみ側面カバーの内側に、左右計2カ所貼ってあることを確認してください。 | 指はさみ注意シール左右セット(10枚入り) |
|         | ブレーキ・駐車ロックシールが、ハンドル基部の内側に左右計2カ所貼ってあることを確認してください。  | ブレーキ・駐車ロックシール(10枚入り)  |
|         | 反射シール後が前輪アームカバーに左右計2カ所貼ってあることを確認してください。           | 反射シール後(10枚入り)         |
|         | 反射シール後がブレーキプレートに左右計2カ所貼ってあることを確認してください。           | 反射シール後(10枚入り)         |
| 4)杖ホルダー | 杖ホルダー上/下に割れや劣化がないことを確認してください。                     | 杖ホルダー上/下              |
|         | ブレーキ調節表示シールがブレーキ調節ネジに左右計2カ所貼ってあることを確認してください。      | ブレーキ調節表示シール(10枚入り)    |

## 2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| 1)フレームの点検   | フレームの塗装に傷やはがれがないことを確認してください。                               | 補修用ペイント(タッチペン)     |
|   | フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、ガタつき)がないことを確認してください。                   | × (廃棄)             |
| 2)溶接部の点検  | 座面バッグと座面パッドを外し、フレーム溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。     | × (廃棄)             |
|   | 折りたたみ側面カバーを外して、折りたたみパイプ溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。 | × (廃棄)             |
|   | 後輪軸溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。                     | × (廃棄)             |
| 3)バネ部の点検  | 折りたたみバネに、錆・外れがないことを確認してください。                               | 折りたたみバネセット(2セット入り) |
|   | 折りたたみバネが、伸びて引きが悪くなっていることを確認してください。                         |                    |
|   | 折りたたみバネが、正しい方向で取り付けられていることを確認してください。                       | ブレーキバネ(2本入り)       |
|   | ブレーキバネに、錆・外れがないことを確認してください。                                |                    |
| 4)ネジ部の点検  | ブレーキバネが、伸びて引きが悪くなっていることを確認してください。                          |                    |
|   | ハンドルカバーネジが6カ所固定されていることを確認してください。                           | ハンドルカバーネジ(3本入り)    |
|   | ハンドルカバーネジが6カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。                      |                    |
|   | 高さ調節ノブボルトが2カ所固定されていることを確認してください。                           | 高さ調節ノブボルト          |
|   | 高さ調節ノブボルトが2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。                      |                    |
|   | 前輪シャフトを固定している前輪ナットが2カ所固定されていることを確認してください。                  | 前輪シャフトセット(2セット入り)  |
|   | 前輪シャフトを固定している前輪ナットが2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。             |                    |
|   | 後輪シャフトを固定している後輪ナットが2カ所固定されていることを確認してください。                  | 後輪ナットセット(2セット入り)   |
|   | 後輪シャフトを固定している後輪ナットが、2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。            |                    |
| 杖ホルダー固定ネジが、2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。              | 杖ホルダー固定ネジ(10本入り)   |                    |
| ブレーキワイヤー固定ナットが、2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。          | ブレーキワイヤー固定部セット(2セット入り)                                     |                    |
| 5)樹脂部の点検  | 折りたたみアーム2カ所に傷、割れ、汚れがないことを確認してください。                         | × (廃棄)             |
|   | 前フレームアーム2カ所に傷、割れ、汚れがないことを確認してください。                         | × (廃棄)             |
|   | ブレーキプレート2カ所に傷、割れ、汚れがないことを確認してください。                         | × (廃棄)             |
|   | ハンドルグリップ2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。                      | ハンドルグリップ           |
|   | ハンドル基部、ハンドルカバーの2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。               | ハンドル基部セット(左・右)     |
|   |  | ハンドルカバー(左・右)       |
|   | ブレーキレバー2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。                       | ブレーキレバーセット         |
|   | 折りたたみレバーと折りたたみレバーパッドに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。             | 折りたたみレバー(前・後)      |
|   |  | 折りたたみレバーパッド        |
| 高さ調節ノブボルト、高さ調節ノブボルトカバー2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 高さ調節ノブボルト  |                    |
|   | 高さ調節ノブボルトカバー   |                    |
| 折りたたみ側面カバー2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。             | 折りたたみ側面カバー(左・右)  |                    |

※裏面へ続きます

|           |  |                             |
|-----------|--|-----------------------------|
| 5) 樹脂部の点検 | 高さ調節部外カバー、高さ調節部内カバー2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。                 | 高さ調節部外カバー(左・右)<br>高さ調節部内カバー |
|           | 前輪キャップ2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。                              | 前輪キャップ(2個入り)                |
|           | 前輪、後輪のホイール4カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。                          | 前輪セット(2個入り)<br>後輪セット(2個入り)  |
|           | ブレーキパッド2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失、表面の著しい摩耗(凸部がすり減ってなくなっている状態)がないことを確認してください。 | ブレーキパッド(2個入り)               |
|           | 折りたたみリンク2カ所に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。                            | × (廃棄)                      |
|           | 折りたたみロッド2カ所に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。                            | × (廃棄)                      |
|           | 前輪アーム2カ所に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。                               | 前輪アーム                       |

3. 性能の点検

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| 1) 車輪の点検         | 前輪、後輪に摩耗や割れがないことを確認してください。  | 前輪セット(2個入り)<br>後輪セット(2個入り)  |
|                  | 前後4輪が同時に接地することを確認してください。  | × (廃棄)                      |
|                  | 前輪が左右ともスムーズに360°回転することを確認してください。  | × (廃棄)                      |
|                  | 本体を押したときに、違和感なく直進、後退することを確認してください。  | × (廃棄)                      |
| 2) ブレーキ・駐車ロックの点検 | ブレーキパッドと後輪ホイール内面の間隔が2.0mmになっていることを確認してください。   | ブレーキパッド(2個入り)               |
|                  | ブレーキレバーを握った時に、ブレーキの利き具合が正常であることを確認してください。<br>※ブレーキプレートに異常(変形、割れ)がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。                              | ブレーキワイヤーセット                 |
|                  |   | ブレーキワイヤー端部キャップ(10本入り)       |
|                  |   | ブレーキワイヤー固定部セット(2セット入り)      |
|                  |   | ブレーキバネ(2本入り)                |
|                  | 駐車ロックが正常に作動することを確認してください。<br>※ブレーキプレートに異常(変形、割れ)がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。<br>※ブレーキプレートの動きが悪い場合は、「シリコン系潤滑油」を少量注油してください。 | ブレーキワイヤーセット                 |
|                  |   | ブレーキワイヤー端部キャップ(10本入り)       |
|                  |   | ブレーキワイヤー固定部セット(2セット入り)      |
| ブレーキバネ(2本入り)     |   |                             |
| 3) 高さ調節の点検       | 高さ調節ノブボルトを抜いた状態で、ハンドル高さをスムーズに上下することができることを確認してください。   | 後輪セット(2個入り)                 |
|                  |   | ハンドル基部セット(左・右)              |
|                  |   | 高さ調節部外カバー(左・右)<br>高さ調節部内カバー |
| 5) 折りたたみ動作の点検    | 折りたたみ機能が正常に作動すること<br>※折りたたみパイプ、折りたたみロッド、折りたたみアームに異常(変形、割れ)がある、折りたたみパイプ溶接部に外れがある場合は、使用を中止して、廃棄してください。                  | 折りたたみ軸                      |
|                  |   | 高さ調節部外カバー(左・右)              |

おつかれさまでした。

