

歩行車 イコットエア

メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

1) 取扱説明書		取扱説明書
2) 座面バッグ	ファスナー部に破損がなくスムーズに動作することを確認してください。	座面バッグ
	座面バッグにほつれ、破れ、汚れがないことを確認してください。	
	座面ベルトにほつれ、破れ、汚れがないことを確認してください。	
	取付用のホック(3カ所)がしっかりと固定されていることを確認してください。	
3) 各種シール	指はさみ注意シールが、折りたたみ側面カバーの内側に、左右計2カ所貼ってあることを確認してください。	指はさみ注意シール左右セット(10枚入り)
	ブレーキ・駐車ロックシールが、ハンドル基部の内側に左右計2カ所貼ってあることを確認してください。	ブレーキ・駐車ロックシール(10枚入り)
	反射シール前が前輪アームカバーに左右計2カ所貼ってあることを確認してください。	反射シール前 左右セット(10枚入り)
	反射シール後がブレーキプレートに左右計2カ所貼ってあることを確認してください。	反射シール後(10枚入り)
4) 杖ホルダー	ブレーキ調節表示シールがブレーキ調節ネジに左右計2カ所貼ってあることを確認してください。	ブレーキ調節表示シール(10枚入り)
	杖ホルダー上/下に割れや劣化がないことを確認してください。	杖ホルダー上/下

2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

1) フレームの点検	フレームの塗装に傷やはがれがないことを確認してください。	補修用ペイント(タッチペン)
	フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、ガタつき)がないことを確認してください。	× (廃棄)
2) 溶接部の点検	座面バッグと座面パッドを外し、フレーム溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。	× (廃棄)
	折りたたみ側面カバーを外して、折りたたみパイプ溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。	× (廃棄)
	後輪軸溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。	× (廃棄)
3) バネ部の点検	折りたたみバネに、錆・外れがないことを確認してください。	折りたたみバネセット(2セット入り)
	折りたたみバネが、伸びて引きが悪くなっていることを確認してください。	
	折りたたみバネが、正しい方向で取り付けられていることを確認してください。	ブレーキバネ(2本入り)
	ブレーキバネに、錆・外れがないことを確認してください。	
4) ネジ部の点検	ブレーキバネが、伸びて引きが悪くなっていることを確認してください。	ハンドルカバーネジ(3本入り)
	ハンドルカバーネジが6カ所固定されていることを確認してください。	高さ調節ノブボルト
	ハンドルカバーネジが6カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	
	高さ調節ノブボルトが2カ所固定されていることを確認してください。	
	高さ調節ノブボルトが2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	前輪シャフトセット(2セット入り)
	前輪シャフトを固定しているナットが2カ所固定されていることを確認してください。	
	前輪シャフトを固定しているナットが2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	後輪ナットセット(2セット入り)
	後輪シャフトを固定しているナットが2カ所固定されていることを確認してください。	
	後輪シャフトを固定しているナットが、2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	
5) 樹脂部の点検	杖ホルダー固定ネジが、2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	杖ホルダー固定ネジ(10本入り)
	ブレーキワイヤー固定ナットが、2カ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	ブレーキワイヤー固定部セット(2セット入り)
	折りたたみアーム2カ所に傷、割れ、汚れがないことを確認してください。	× (廃棄)
	前フレームアーム2カ所に傷、割れ、汚れがないことを確認してください。	× (廃棄)
	ブレーキプレート2カ所に傷、割れ、汚れがないことを確認してください。	× (廃棄)
	ハンドルグリップ2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	ハンドルグリップ
	ハンドル基部、ハンドルカバーの2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	ハンドル基部セット(左・右)
		ハンドルカバー(左・右)
	ブレーキレバー2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	ブレーキレバーセット
	折りたたみレバーと折りたたみレバーパッドに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	折りたたみレバー(前・後)
	折りたたみレバーパッド	
高さ調節ノブボルト、高さ調節ノブボルトカバー2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	高さ調節ノブボルト	
	高さ調節ノブボルトカバー	
折りたたみ側面カバー2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	折りたたみ側面カバー(左・右)	

※裏面へ続きます

歩行車 イコットエア

メンテナンスチェックリスト

チェック欄

交換部品

5) 樹脂部の点検	高さ調節部外カバー、高さ調節部内カバー2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	高さ調節部外カバー(左・右) 高さ調節部内カバー
	前輪キャップ2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	前輪キャップ(2個入り)
	前輪、後輪のホイール4カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	前輪セット(2個入り) 後輪セット(2個入り)
	ブレーキパッド2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失、表面の著しい摩耗(凸部がすり減ってなくなっている状態)がないことを確認してください。	ブレーキパッド(2個入り)
	折りたたみリンク2カ所に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。	× (廃棄)
	折りたたみロッド2カ所に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。	× (廃棄)
	前輪アーム2カ所に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。	前輪アーム

3. 性能の点検

チェック欄

交換部品

1) 車輪の点検	前輪、後輪に摩耗や割れがないことを確認してください。	前輪セット(2個入り) 後輪セット(2個入り)
	前後4輪が同時に接地することを確認してください。	× (廃棄)
	前輪が左右ともスムーズに360°回転することを確認してください。	× (廃棄)
	本体を押したときに、違和感なく直進、後退することを確認してください。	× (廃棄)
2) ブレーキ・駐車ロックの点検	ブレーキパッドと後輪ホイール内面の間隔が2.0mmになっていることを確認してください。	ブレーキパッド(2個入り)
	ブレーキレバーを握った時に、ブレーキの利き具合が正常であることを確認してください。 ※ブレーキプレートに異常(変形、割れ)がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。	ブレーキワイヤーセット
		ブレーキワイヤー端部キャップ(10本入り)
		ブレーキワイヤー固定部セット(2セット入り)
	駐車ロックが正常に作動することを確認してください。 ※ブレーキプレートに異常(変形、割れ)がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。	ブレーキバネ(2本入り)
		ブレーキワイヤーセット
		ブレーキワイヤー端部キャップ(10本入り)
		ブレーキワイヤー固定部セット(2セット入り)
3) 高さ調節の点検	高さ調節ノブボルトを抜いた状態で、ハンドル高さをスムーズに上下することができることを確認してください。	後輪セット(2個入り)
		ハンドル基部セット(左・右)
		高さ調節部外カバー(左・右) 高さ調節部内カバー
5) 折りたたみ動作の点検	折りたたみ機能が正常に作動すること ※折りたたみパイプ、折りたたみロッド、折りたたみアームに異常(変形、割れ)がある、折りたたみパイプ溶接部に外れがある場合は、使用を中止して、廃棄してください。	折りたたみ軸
		高さ調節部外カバー(左・右)

おつかれさまでした。

