

歩行車 リトルターン II KM

メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

①取扱説明書			取扱説明書
②バッグ	1)ファスナーがスムーズに動く		バッグ(KM用)
	2)バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない		
	3)取付用のスライド金具がバッグにしっかりと固定されている		
③各種シール	1)フレーム前方保護シールが脚部の前に左右計2カ所ある		各種シール
	2)フレーム後方保護シールが脚部の後ろに左右計2カ所ある		
	3)ブレーキ・駐車ロックシールがブレーキ基部(内側)に左右計2カ所ある		
	4)前輪角度位置表示シール、回転制御表示シールが前輪回転制御レバーに左右計2カ所ある		
	5)指はさみ注意シールがクロスバーに1カ所ある		
	6)品名・品番シールがクロスバーに1カ所ある		
	7)ブレーキ調節表示シールがブレーキ調節ネジに左右計2カ所ある		
	8)ブレーキ指はさみ注意シールがブレーキ基部(外側)に左右計2カ所ある		
	9)買い物かご受けシールがかご受けに左右計2カ所ある		
④杖ホルダー	1)杖ホルダーに割れや、劣化がない		杖ホルダー
⑤杖固定ベルト	1)杖固定ベルトに破れや、ほつれがない		杖固定ベルト

2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

①フレームの点検	1)フレームの塗装に傷やはがれがない		補修用ペイントR(タッチペン)
	2)フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、がたつき)がない		× (廃棄)
②溶接部の点検	1)フレーム溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
	2)クロスバー溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
	3)ハンドルポスト溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
	4)シートパイプ溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
③バネ部の点検	1)折りたたみ防止フック部のバネに錆、外れがない		× (廃棄)
	2)折りたたみ防止フック部のバネが伸びて引きが悪くなっていない		× (廃棄)
	3)折りたたみ防止フック部のバネの先端が外を向いて指に触れない		× (廃棄)
	4)左右2カ所のブレーキバネに錆、外れがない		ブレーキバネ
	5)左右2カ所のブレーキバネが伸びて引きが悪くなっていない		
	6)左右2カ所のブレーキバネの先端が外を向いて指に触れない		
	7)左右2カ所のかご受けロックバネに錆、外れがない		かご受けロックバネ
	8)左右2カ所のかご受けロックバネが伸びて引きが悪くなっていない		
	9)左右2カ所のかご受けロックバネの先端が外を向いて指に触れない		
④ネジ・ボルト・ナット部の点検	1)座面固定ボルトが6カ所とも緩みなく締まっている		座面固定ボルトセット
	2)ブレーキ板固定ボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		ブレーキ板固定ボルトセット
	3)クロスバーのネジ部11カ所が緩みなく締まっている		※対処方法については ご購入先にお問い合わせください
	4)楽らくグリップ固定ネジが左右計10カ所とも緩みなく締まっている		楽らくグリップ固定ネジセット
	5)買い物かご保持ベルトの固定ネジが左右計6カ所とも緩みなく締まっている		買い物かご保持ベルトセット
	6)高さ調節ノブボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		高さ調節ノブボルト
	7)前輪角度制御レバーの固定ネジが左右計4カ所とも緩みなく締まっている		前輪角度制御レバー 固定ネジセット
	8)前輪フォーク軸、前輪、後輪の固定ナットが左右計6カ所とも緩みなく 締まっている		前輪・後輪固定ナットセット
	9)ブレーキ固定ソケットのネジが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		ブレーキ固定ソケットセット
	10)かご受け固定ボルト、かご受けストッパー固定ボルトがそれぞれ 左右計2カ所とも緩みなく締まっている		かご受け固定ボルトセット、 かご受けストッパー固定ボルトセット

※裏面へ続きます

歩行車 リトルターン II KM

メンテナンスチェックリスト

⑤樹脂部の点検	1)ハンドルグリップ(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	ハンドルグリップ
	2)シートパイプエンドキャップ(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	シートパイプエンドキャップセット
	3)折りたたみ保持フックに傷、汚れ、割れがない	折りたたみ保持フック
	4)高さ調節ノブボルト(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	高さ調節ノブボルト
	5)買い物かご保持ベルトに傷、汚れ、割れがない	買い物かご保持ベルトセット
	6)楽らくグリップ、楽らくグリップカバー(それぞれ左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	楽らくグリップ左右セット、 楽らくグリップカバー左右セット
	7)高さ調節クランプ外・内(それぞれ左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	高さ調節クランプ外左右セット 高さ調節クランプ内(2個入り)
	8)前輪フォークキャップ(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	前輪フォークキャップ
	9)後輪キャップ(前輪後輪共通、左右計4カ所)に傷、汚れ、割れがない	後輪キャップ
	10)ハンドル基部(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	ハンドル基部左右セット(LT II 用)
	11)ブレーキ基部、ブレーキ基部キャップ(それぞれ左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	ブレーキ基部(左右セット)、 ブレーキ基部キャップ
	12)ブレーキレバー(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	ブレーキレバーセット
	13)ブレーキバネカバー(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	ブレーキバネカバー
	14)前輪角度制御レバー(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	前輪角度制御レバー左右セット
	15)前輪角度制御レバーの樹脂バネ(左右計4カ所)に傷、汚れ、変形、割れがない	前輪角度制御セット
	16)前輪、後輪のホイール(左右計4カ所)に傷、汚れ、割れがない	タイヤセット前輪・後輪共通
	17)かご受け、かご受けストッパー(それぞれ左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない	かご受け左右セット、 かご受けストッパー(2個入り)
⑥金属部の点検	1)前輪フォーク(左右計2カ所)に傷、汚れ、変形、割れがなく、前輪フォークがスムーズに回転する	前輪フォークセット(左)・(右)
	2)ブレーキ板(左右計2カ所)に傷、汚れ、変形、割れがない	ブレーキ板左右セット
⑦縫製部の点検	1)座面に傷、ほつれ、汚れがない	座面
	2)折りたたみベルトに傷、ほつれ、汚れがない	折りたたみベルト
	3)買い物かご保持ベルトカバーに傷、ほつれ、汚れがない	買い物かご保持ベルトカバー

3. 性能の点検		チェック欄	交換部品
①車輪の点検	1)前輪、後輪(左右4カ所)に摩耗や割れがない		タイヤセット前輪・後輪共通
	2)前後4輪が同時に接地する		廃棄
	3)車体を押したときに、違和感なく直進する		
②ブレーキ・駐車ロックの点検	1)ブレーキ板とタイヤの間隔が左右とも1.5mmを超えていない		※対処方法については メンテナンスガイドを ご参照ください
	2)ブレーキレバーを握ったときに、ブレーキ板が後輪タイヤに当たっている		
	3)ブレーキレバーを押し下げたときに、ブレーキ板が後輪タイヤに当たっている		
③ハンドル高さ調節の点検	1)ハンドルポストをスムーズに上下させることができる		
④折りたたみ動作の点検	1)折りたたみがスムーズに行える		
⑤前輪角度制御機能の点検	1)前輪の回転角度を3段階に調節でき、設定通りに前輪が回転する		
⑥かご受けの点検	1)かご受けを倒したり跳ね上げたりする動作が正常に行える		

