

歩行車 リトルターン II / リトルターン II 抑速プラス メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

①取扱説明書	1)取扱説明書の有無を確認する		取扱説明書
②バッグ	1)ファスナーがスムーズに動く		バッグセット(H・L)
	2)バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない		
	3)取付用のスライド金具がバッグにしっかりと固定されている		
③各種シール	1)フレーム前方保護シールが脚部の前に左右計2カ所ある		各種シール
	2)フレーム後方保護シールが脚部の後ろに左右計2カ所ある		
	3)ブレーキ・駐車ロックシールがブレーキ基部(内側)に左右計2カ所ある		
	4)前輪角度位置表示シール、回転制御表示シールが前輪回転制御レバーに左右計2カ所ある		
	5)指はさみ注意シールがクロスバーに1カ所ある		
	6)品名・品番シールがクロスバーに1カ所ある		
	7)ブレーキ調節表示シールがブレーキ調節ネジに左右計2カ所ある		
	8)ブレーキ指はさみ注意シールがブレーキ基部(外側)に左右計2カ所ある		
	9)バッグ積載量5kg注意シールがクロスバーに1ヶ所ある(抑速プラスのみ)		
④杖ホルダー	1)杖ホルダーに割れや、劣化がない		杖ホルダー
⑤杖固定ベルト	1)杖固定ベルトに破れや、ほつれがない		杖固定ベルト

2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

①フレームの点検	1)フレームの塗装に傷やはがれがない		補修用スプレーR
			補修用ペイントR(タッチペン)
②溶接部の点検	2)フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、がたつき)がない		× (廃棄)
	1)フレーム溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
	2)クロスバー溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
③パネ部の点検	3)ハンドルポスト溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
	1)折りたたみ防止フック部のパネに錆、外れがない		× (廃棄)
	2)折りたたみ防止フック部のパネが伸びて引きが悪くなっていない		× (廃棄)
	3)折りたたみ防止フック部のパネの先端が外を向いて指に触れない		× (廃棄)
	4)左右2カ所のブレーキパネに錆、外れがない		ブレーキパネ
	5)左右2カ所のブレーキパネが伸びて引きが悪くなっていない		
④ネジ・ボルト・ナット部の点検	6)左右2カ所のブレーキパネの先端が外を向いて指に触れない		
	1)座面固定ボルトが6カ所とも緩みなく締まっている		座面固定ボルトセット
	2)ブレーキ板固定ボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		ブレーキ板固定ボルトセット
	3)クロスバーのネジ部11カ所が緩みなく締まっている		※対処方法については ご購入先にお問い合わせください
	4)楽らくグリップ固定ネジが左右計10カ所とも緩みなく締まっている		楽らくグリップ固定ネジセット
	5)姿勢保持ベルト固定ナットが左右計6カ所とも緩みなく締まっている		姿勢保持ベルトセット
	6)姿勢保持ベルト固定ノブボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		姿勢保持ベルト固定ノブボルト
	7)高さ調節ノブボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		高さ調節ノブボルト
	8)前輪角度制御レバー固定ネジが左右計4カ所とも緩みなく締まっている		前輪角度制御レバー 固定ネジセット
	9)前輪フォーク軸、前輪・後輪の固定ナットが左右計6カ所(抑速プラスは 前輪フォーク軸、前輪のみ左右計4カ所)とも緩みなく締まっている		前輪・後輪固定ナットセット
	10)ブレーキ固定ソケットのネジが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		ブレーキ固定ソケットセット

※裏面へ続きます

歩行車 リトルターン II / リトルターン II 抑速プラス メンテナンスチェックリスト

⑤樹脂部の点検	1) ハンドルグリップ(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		ハンドルグリップ
	2) シートパイプエンドキャップ(左右計4カ所)に傷、汚れ、割れがない		シートパイプエンドキャップセット
	3) 折りたたみ保持フックに傷、汚れ、割れがない		折りたたみ保持フック
	4) 高さ調節ノブボルト(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		高さ調節ノブボルト、 高さ調節ノブボルトカバー
	5) 姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部に傷、 汚れ、割れがない		姿勢保持ベルトカバー、 姿勢保持ベルトセット
	6) 楽らくグリップ、楽らくグリップカバー(それぞれ左右計2カ所)に傷、 汚れ、割れがない		楽らくグリップ左右セット、 楽らくグリップカバー左右セット
	7) 高さ調節クランプ外・内(それぞれ左右計2カ所)に傷、汚れ、割れが ない		高さ調節クランプ外(2個入り)、 高さ調節クランプ内(2個入り)
	8) 前輪フォークキャップ(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		前輪フォークキャップ
	9) 後輪キャップ(前輪後輪共通、左右計4カ所)に傷、汚れ、割れがない (抑速プラスは前輪のみ左右計2カ所)		後輪キャップ
	10) ハンドル基部(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		ハンドル基部左右セット(LT II 用)
	11) ブレーキ基部、ブレーキ基部キャップ(それぞれ左右計2カ所)に傷、 汚れ、割れがない		ブレーキ基部(左右セット)、 ブレーキ基部キャップ
	12) ブレーキレバー(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		ブレーキレバーセット
	13) ブレーキバネカバー(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		ブレーキバネカバー
	14) 前輪角度制御レバー(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		前輪角度制御レバー左右セット
	15) 前輪角度制御レバーの樹脂バネ(左右計4カ所)に傷、汚れ、変形、 割れがない		前輪角度制御セット
	16) 前輪・後輪のホイール(前輪後輪共通、左右計4カ所)に傷、汚れ、 割れがない(抑速プラスは前輪のみ左右計2カ所)		タイヤセット前輪・後輪共通
⑥金属部の点検	1) 前輪フォーク(左右計2カ所)に傷、汚れ、変形、割れがなく、 前輪フォークがスムーズに回転する		前輪フォークセット(左)・(右)
	2) ブレーキ板(左右計2カ所)に傷、汚れ、変形、割れがない		ブレーキ板左右セット
⑦縫製部の点検	1) 座面に傷、ほつれ、汚れがない		座面
	2) 折りたたみベルトに傷、ほつれ、汚れがない		折りたたみベルト

3. 性能の点検

チェック欄

交換部品

①車輪の点検	1) 左右の抑速付後輪に傷、摩耗、汚れがない		LT II 抑速プラス抑速ユニット 左右セット LT II 抑速プラス交換タイヤキット 1台分
	2) 走行時、抑速ブレーキが効いている		LT II 抑速プラス抑速ユニット 左右セット
	3) 袋付Uナットが緩みなくしまっている		LT II 抑速プラス抑速ユニット 左右セット
	4) センターキャップ(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れがない		LT II 抑速プラスセンターキャップ
	5) 抑速ブレーキ力が左右同一の設定になっており、 中の部品が外れていない		LT II 抑速プラス抑速ユニット 左右セット
	6) 前輪、後輪(左右4カ所)に摩耗や割れがない		タイヤセット前輪・後輪共通
	7) 前後4輪が同時に接地する		廃棄
	8) 車体を押したときに、違和感なく直進、後退する		
②ブレーキ・駐車ロックの点検	1) ブレーキ板とタイヤの間隔が左右とも1.5mmを超えていない		※対処方法については メンテナンスガイドを ご参照ください
	2) ブレーキレバーを握ったときに、ブレーキ板が後輪タイヤに当たっている		
	3) ブレーキレバーを押し下げたときに、ブレーキ板が後輪タイヤに当たって いる		
③ハンドル高さ調節の点検	1) ハンドルポストをスムーズに上下させることができる		
④折りたたみ動作の点検	1) 折りたたみがスムーズに行える		
⑤前輪角度制御機能の点検	1) 前輪の回転角度を3段階に調節でき、設定通りに前輪が回転する		

