

歩行車 リトルターン(電動アシスト付) メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

①取扱説明書の点検	取扱説明書の有無を確認してください		取扱説明書
②バッグの点検	1)ファスナーがスムーズに動く		バッグ
	2)バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない		
	3)取付用のスライド金具がバッグにしっかりと固定されている		
③各種シールの点検	1)フレーム保護シールが前後左右脚部に4カ所ある		※ご購入先にお問い合わせください
	2)プレーキ・駐車ロックシールが左右のプレーキ基部内側に2カ所ある		
	3)高さ調節ロック・解除シールが左右の高さ調節ボタンに2カ所ある		
	4)指はさみ注意シールがクロスバーに1カ所ある		
	5)プレーキ調節表示シールが左右のプレーキ調節ネジに2カ所ある		
	6)プレーキ指はさみ注意シールが左右のプレーキ基部外側に2カ所ある		
	7)操作パネルシールが制御ボックス上側に1カ所ある		
④杖ホルダーの点検	杖ホルダーに割れや、劣化がない。		杖ホルダー
⑤杖固定ベルト点検	杖固定ベルトに破れや、ほつれがない。		杖固定ベルト

2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

①フレームの点検	1)フレームの塗装に傷やはがれがない		補修ペイント
	2)フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、がたつき)がない		× (廃棄)
②溶接部の点検	1)フレーム溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
	2)クロスバー溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
	3)ハンドルポスト溶接部にがたつきや外れがない		× (廃棄)
③バネ部の点検	1)折りたたみ防止フック部のバネに錆、外れがない		× (廃棄)
	2)折りたたみ防止フック部のバネが伸びて引きが悪くなっていない		× (廃棄)
	3)折りたたみ防止フック部のバネの先端が外を向いて指に触れない		× (廃棄)
	4)左右2カ所のプレーキバネに錆、外れがない		プレーキバネ
	5)左右2カ所のプレーキバネが伸びて引きが悪くなっていない		プレーキバネ
	6)左右2カ所のプレーキバネの先端が外を向いて指に触れない		プレーキバネ
④ネジ部の点検	1)座面固定ボルトが6カ所とも緩みなく締まっている		座面固定ボルト
	2)プレーキ板固定ボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		プレーキ板固定ボルトセット
	3)クロスバーのネジ部11カ所が緩みなく締まっている		※対処方法についてはご購入先にお問い合わせください
	4)ハンドル基部のネジが左右計4カ所とも緩みなく締まっている		※対処方法についてはご購入先にお問い合わせください
	5)姿勢保持ベルト基部のネジが左右計6カ所とも緩みなく締まっている		姿勢保持ベルトセット
	6)姿勢保持ベルト固定ノブボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		姿勢保持ベルト固定ノブボルト
	7)制御ボックスとステーのネジが左右計4カ所とも緩みなく締まっている		※対処方法についてはご購入先にお問い合わせください
⑤樹脂部の点検	1)ハンドルグリップ(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		ハンドルグリップ
	2)シートパイプエンドキャップ(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		シートパイプエンドキャップ
	3)折り畳み保持フックに傷、汚れ、割れがない		折りたたみ保持フック
	4)ハンドルポスト受け(左右計2カ所)、高さ調節スイッチ(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		ハンドルポスト受けセット
	5)姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部に傷、汚れ、割れがない		姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部

※裏面へ続きます

歩行車 リトルターン(電動アシスト付)

メンテナンスチェックリスト

チェック欄

交換部品

⑥電池の点検	1)電池のツメ(2カ所)に割れ、破損がない		電池
	2)電池の端子に汚れ、変形、破損がない		電池
	3)電池ケースに割れ、破損がない		電池
⑦配線の点検	1)配線に切れ、折れ、被覆の破れがない		※対処方法についてはご購入先にお問い合わせください
⑧制御ボックスの点検	1)制御ボックスに割れ、破損がない		※対処方法についてはご購入先にお問い合わせください

3. 性能の点検

チェック欄

交換部品

①車輪の点検	1)前輪(左右計2カ所)に摩耗や割れがない		前輪セット(右)、前輪セット(左)
	2)前輪フォークキャップ(左右計2カ所)に傷、割れがない		前輪フォークキャップ
	3)前輪キャップ(左右計2カ所)に傷、割れがない		前輪セット(右)、前輪セット(左)
	4)前輪カシメワッシャー(左右計2カ所)に割れ、緩みがない		前輪セット(右)、前輪セット(左)
	5)前輪フォーク(左右計2カ所)に割れやゆがみがない		前輪セット(右)、前輪セット(左)
	6)前輪フォーク固定ナット(左右計2カ所)に緩みがない		前輪セット(右)、前輪セット(左)
	7)前輪ベアリング(左右計4カ所)、 前輪フォークベアリング(左右計4カ所)に割れなどがない		前輪セット(右)、前輪セット(左) 前輪フォークベアリングセット
	8)後輪(左右計2カ所)に摩耗や割れがない		後輪セット
	9)後輪のボルトに緩みがない(左右計8カ所)		
	10)前後4輪が同時に接地する		※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
	11)前輪(左右計2カ所)が360° スムーズに回転する		
	12)車体を押したときに、違和感なく直進する		
②ブレーキ・駐車ロックの点検	1)ブレーキレバー(左右計2カ所)に傷や割れがない		ブレーキレバーセット
	2)ブレーキ基部(左右計2カ所)に傷や割れがない		ブレーキ基部
	3)ブレーキ基部キャップ(左右計2カ所)に傷や割れがない		ブレーキ基部キャップ
	4)ブレーキパネカバー(左右計2カ所)に傷や割れがない		ブレーキパネカバー
	5)ブレーキ板に取り付けられているゴム部に摩耗、亀裂、剥がれがない		ブレーキ板
	6)ブレーキ板とタイヤの間隔が左右とも1.5mmを超えていない		
	7)ブレーキレバーを十分握ることができる		※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
	8)ブレーキの利き具合が正常である		
	9)ブレーキ板に大きなガタツキがない		
	10)駐車ロックが正常に作動する		
③高さ調節の点検	1)高さ調節が正常に行える		※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
④折りたたみ動作の点検	1)折りたたみがスムーズに行える		×(廃棄)

4. アシスト機能の点検

①アシスト機能の点検	1)登坂路、降坂路でアシスト機能が作動する(縦断勾配 12% (7度)以下)		※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
	2)片傾斜勾配路でアシスト機能が作動する(横断勾配 5% (3度)以下)		
	3)登坂路、降坂路でグリップから両手を放すと停車(微動)する		
②操作パネルの点検	1)電源を入れた時に操作パネルの「注意」LEDが消灯する		※対処方法については ご購入先にお問い合わせください
③音声案内の点検	1)操作パネルの「電源」が入った状態で、「切替」を 2秒以上押し続けて音量が切り替わる		※対処方法については ご購入先にお問い合わせください
④電池の点検	1)電池を専用充電器で約3時間充電し、操作パネルの電池残量 LEDが3つ点灯(80%以上)する		電池

