

# 歩行車 リトルターン抑速付

# メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

## 1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

①取扱説明書			取扱説明書
②バッグ	1)ファスナーがスムーズに動く		バッグ
	2)バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない		
	3)取付用のスライド金具がバッグにしっかりと固定されている		
③各種シール	1)フレーム保護シールが前左右脚部に2カ所ある		※ご購入先にお問い合わせください
	2)ブレーキ・駐車ロックシールが左右のブレーキ基部(内側)に2カ所ある		
	3)高さ調節ロック・解除シールが左右の高さ調節ボタンに2カ所ある		
	4)指はさみ注意シールがクロスバーに1カ所ある		
	5)ブレーキ調節表示シールが左右のブレーキ調節ネジに2カ所ある		
	6)ブレーキ指はさみ注意シールが左右のブレーキ基部(外側)に2カ所ある		
④杖ホルダー	杖ホルダーに割れや、劣化がない。		杖ホルダー
⑤杖固定ベルト	杖固定ベルトに破れや、ほつれがない。		杖固定ベルト

## 2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

①フレームの点検	1)フレームの塗装に傷やはがれがない		補修用ペイント、補修用ペイントR
	2)フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、がたつき)がない		× (廃棄)
②溶接部の点検	1)フレーム溶接部にかたつきや外れがない		× (廃棄)
	2)クロスバー溶接部にかたつきや外れがない		× (廃棄)
	3)ハンドルポスト溶接部にかたつきや外れがない		× (廃棄)
③バネ部の点検	1)折りたたみ防止フック部のバネに錆、外れがない		× (廃棄)
	2)折りたたみ防止フック部のバネが伸びて引きが悪くない		× (廃棄)
	3)折りたたみ防止フック部のバネの先端が外を向いて指に触れない		× (廃棄)
	4)左右2カ所のブレーキバネに錆、外れがない		ブレーキバネ
	5)左右2カ所のブレーキバネが伸びて引きが悪くない		ブレーキバネ
	6)左右2カ所のブレーキバネの先端が外を向いて指に触れない		ブレーキバネ
④ネジ部の点検	1)座面固定ボルトが6カ所とも緩みなく締まっている		座面固定ボルト
	2)ブレーキ板固定ボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		ブレーキ板固定ボルト
	3)クロスバーのネジ部11カ所が緩みなく締まっている		※対処方法についてはご購入先にお問い合わせください
	4)ハンドル基部のネジが左右計4カ所とも緩みなく締まっている		ハンドル基部(左右)セット
	5)姿勢保持ベルト基部のネジが左右計6カ所とも緩みなく締まっている		姿勢保持ベルトセット
	6)姿勢保持ベルト固定ノブボルトが左右計2カ所とも緩みなく締まっている		姿勢保持ベルト固定ノブボルト
⑤樹脂部の点検	1)ハンドルグリップ(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		ハンドルグリップ
	2)シートパイプエンドキャップ(左右計4カ所)に傷、汚れ、割れがない		シートパイプエンドキャップ
	3)折り畳み保持フックに傷、汚れ、割れがない		折りたたみ保持フック
	4)ハンドルポスト受け(左右計2カ所)、高さ調節ボタン(左右計2カ所)に傷、汚れ、割れがない		ハンドルポスト受けセット
	5)姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部に傷、汚れ、割れがない		姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部

※裏面へ続きます

3. 性能の点検

チェック欄

交換部品

①車輪の点検	チェック欄	交換部品
	1) 前輪(左右計2カ所)に摩耗や割れがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	2) 前輪フォークキャップ(左右計2カ所)に傷、割れがない	前輪フォークキャップ
	3) 前輪キャップ(左右計2カ所)に傷、割れがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	4) 前輪カンメワッシャー(左右計2カ所)に割れ、緩みがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	5) 前輪フォーク(左右計2カ所)に割れやゆがみがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	6) 前輪フォーク固定ナット(左右計2カ所)に緩みがない	前輪セット(右)、前輪セット(左)
	7) 前輪ベアリング(左右計4カ所)、 前輪フォークベアリング(左右計4カ所)に割れなどがない	前輪セット(右)、前輪セット(左) 前輪フォークベアリングセット
	8) 後輪(タイヤ部)に摩耗や割れがない	LT抑速付交換タイヤキット1台分
	9) センターキャップに傷、汚れがなく、外れやすくなっていない	LT抑速付センターキャップ
	10) 抑速ブレーキ力が左右同一設定であり、中の部品も外れていない	※交換部品については メンテナンスガイド をご参照ください
	11) 抑速ブレーキの効き具合が正常である	
	12) 抑速付後輪からこすれ音などの異音が発生しない	
	13) 使用時に抑速付後輪が大きく振れない	
	14) 接続ジョイントが緩んでいない	※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
	15) 抑速付後輪が本体フレームとナットの間に座金を取り付けた状態で 接続されている	
	16) 前4輪が同時に接地する	
	17) 前輪(左右計2カ所)が360° スムーズに回転する	
	17) 車体を押したときに、違和感なく直進する	
②ブレーキ・駐車ロックの点検	チェック欄	交換部品
	1) ブレーキレバー(左右計2カ所)に傷や割れがない	ブレーキレバーセット
	2) ブレーキ基部(左右計2カ所)に傷や割れがない	ブレーキ基部
	3) ブレーキ基部キャップ(左右計2カ所)に傷や割れがない	ブレーキ基部キャップ
	4) ブレーキバネカバー(左右計2カ所)に傷や割れがない	ブレーキバネカバー
	5) ブレーキ板とタイヤの間隔が左右とも1.5mmを超えていない	※対処方法については メンテナンスガイド をご参照ください
	6) ブレーキレバーを十分握ることができる	
	7) ブレーキの利き具合が正常である	
	8) ブレーキ板に大きなガタつきがない	
	9) 駐車ロックが正常に作動する	
③高さ調節の点検	チェック欄	交換部品
	1) 高さ調節が正常に行える	
④折りたたみ動作の点検	チェック欄	交換部品
	1) 折りたたみがスムーズに行える	

