

歩行車 リトルターン Z / ZT / Z 抑速付 / ZT 抑速付

メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

| 実施日 | 累積回数 | 実施者 |
|-----|------|-----|
| | | |

1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

| | | |
|---------------|---|---|
| 1)取扱説明書 | 取扱説明書の有無を確認してください。 | 取扱説明書 |
| 2)バッグ | バッグにほつれ、破れ、汚れがないことを確認してください。 | バッグ |
| 3)各種シール | フレーム前方保護シールが前側左右に計2ヶ所貼ってあることを確認してください。 | フレーム前方保護シール(10枚入り) |
| | 前ブレーキ・駐車ロックシール及び後駐車ロックシールが、ブレーキ基部カバーの外側に左右計4ヶ所貼ってあることを確認してください。 | 前ブレーキ・駐車ロックシール左右セット(10枚入り) 後駐車ロックシール左右セット(10枚入り) |
| | アームレストロック解除シールがアームレストロック解除ボタンに1ヶ所貼ってあることを確認してください。 | アームレストロック解除シール(10枚入り) |
| | トレーフレーム注意シールがトレーフレーム受けに左右計2ヶ所貼ってあることを確認してください。 | トレーフレーム注意シール(10枚入り) |
| | 指はさみ注意シールがクロスバーに1ヶ所、アームレストベース(裏側)に左右計2ヶ所貼ってあることを確認してください。 | 指はさみ注意シール(10枚入り) |
| | ブレーキ調節表示シールがブレーキ調節ネジに左右計2ヶ所貼ってあることを確認してください。 | ブレーキ調節表示シール(10枚入り) |
| 4)トレー・トレーフレーム | トレー・トレーフレームに割れや変形、劣化がないことを確認してください。 | トレーセット |

2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1)フレームの点検 | フレームの塗装に傷やはがれがないことを確認してください。 | 補修用スプレー |
| | | 補修用スプレーR |
| 2)溶接部の点検 | フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、ガタつき)がないことを確認してください。 | 補修用ペイント(タッチペン) 補修用ペイントR(タッチペン) |
| | 本体フレーム溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。 | × (廃棄) |
| | クロスバー溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。 | × (廃棄) |
| | 高さ調節支柱溶接部にガタつきや外れがないことを、動作確認してください。 | × (廃棄) |
| | ハンドルパイプ溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。 | × (廃棄) |
| 3)パネ部の点検 | アームレストクッションを取り外し、アームレストブラケット溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。 | × (廃棄) |
| | アームレストロック解除ボタンを押してロックを解除した後、アームレスト中央部が上方に跳ね上がり、ハの字になるか確認してください。 | アームレストロック解除ボタンセット |
| | 上記動作後、アームレストを押し下げたときに、アームレストのロックがかかるか確認してください。 | |
| | 左右の前ブレーキレバーと後駐車レバーをそれぞれ押し下げたときに、レバーが勝手に解除されず、駐車ロックがかかっていることを確認してください。 | 駐車ロックピンセット |
| | ブレーキパネに、錆・破損・紛失がないことを確認してください。 | ブレーキパネ(4個入り) |
| | ブレーキパネが、変形してパネの戻りが悪くないことを確認してください。 | |
| 4)ネジ・ボルト・ナット部の点検 | 折りたたみベルトを持ち上げたときに、折りたたみロック部に付いているコイルパネの抵抗があることを確認してください。 | × (廃棄) |
| | 本体を開いたとき、折りたたみ防止フックツメがスライドストッパーにかかることを確認してください。 | |
| | クッションサポートの固定ボルトが4ヶ所(左右各2ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | クッションサポート左右セット |
| | アームレスト指はさみ防止ベルトの固定ボルトが4ヶ所(左右各2ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | アームレスト指はさみ防止ベルトセット |
| | アームレストベースの固定ボルトが6ヶ所(左右各3ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | アームレストベース左右セット |
| | アームレストロック解除ボタンの固定ボルトが8ヶ所(左右各4ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | アームレストロック解除ボタンセット |
| | 左右の高さ調節ノブボルトが緩みなく締まっていることを確認してください。 | 高さ調節ノブボルト |
| | 立ち上がり補助グリップカバー固定ボルトが4ヶ所(左右各2ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | 立ち上がり補助グリップカバー固定ボルト(4個入り) |
| | 左右の座面ベルト固定ナットが緩みなく締まっていることを確認してください。 | 座面ベルト固定ボルトセット |
| | 左右の折りたたみベルト固定ナットが緩みなく締まっていることを確認してください。 | 折りたたみベルト固定セット |
| | クロスバー固定ナットが5ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | ※対処方法については ご購入先にお問い合わせください。 |
| | 座面固定ボルトが4ヶ所(左右各2ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | 座面固定ボルトセット(Z用) |
| | 折りたたみ防止フックツメ固定ボルトが緩みなく締まっていることを確認してください。 | 折りたたみ防止フックツメ固定ボルト |
| | 前ブレーキレバー端部カバー固定ボルトが4ヶ所(左右各2ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | 前ブレーキレバー端部カバー固定ボルト(4個入り) |
| ブレーキ基部カバー固定ボルトが10ヶ所(左右各5ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | ブレーキ基部カバー固定ボルト(10個入り) | |
| スライドストッパーの固定ボルトが4ヶ所(左右各2ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | ※対処方法については ご購入先にお問い合わせください。 | |
| ブレーキブラケット固定ナットが4ヶ所(左右各2ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | ブレーキブラケット固定ボルトセット | |

※次のページへ続きます

歩行車 リトルターン Z / ZT / Z 抑速付 / ZT 抑速付

メンテナンスチェックリスト

2. 外観の点検(つづき)

チェック欄

交換部品

| | | |
|---|--|----------------------------|
| 4)ネジ・ボルト・ナット部の点検 | ブレーキパッド固定ボルトが4ヶ所(左右各2ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | ブレーキパッド固定ボルト(4個入り) |
| | フレーム端部カバー固定ボルトが4ヶ所(左右各2ヶ所)とも緩みなく締まっていることを確認してください。 | ブレーキブラケット固定ボルトセット |
| | 左右の前輪ナットが緩みなく締まっていることを確認してください。 | 前輪シャフトセット(2セット入り) |
| | 左右の後輪キャップをマイナスドライバー等で取り外し、後輪固定ナットが緩みなく締まっていることを確認してください。 | 後輪セット(Z用) |
| | 左右のブレーキワイヤー固定ソケットネジが緩みなく締まっていることを確認してください。 | ブレーキ固定ソケットセット |
| 5)樹脂部の点検 | 左右のアームレストクッションに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | アームレストクッション左右セット |
| | アームレストロック解除ボタンに傷、割れ、汚れがないことを確認してください。 | アームレストロック解除ボタンセット |
| | 左右のアームレストベースに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | アームレストベース左右セット |
| | 左右のアームレスト衝撃吸収パッドに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | アームレスト衝撃吸収パッド(2個入り) |
| | 左右のハンドルクッションに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | ハンドルクッション(2個入り) |
| | 左右のハンドルエンドキャップに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | ハンドルエンドキャップ(2個入り) |
| | 左右の高さ調節ノブボルト・高さ調節ノブボルトカバーに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 高さ調節ノブボルト |
| | | 高さ調節ノブボルトカバー |
| | 左右の立ち上がり補助グリップベース・立ち上がり補助グリップカバーに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 立ち上がり補助グリップベース左右セット |
| | | 立ち上がり補助グリップカバー左右セット |
| | 左右の高さ調節部内カバーに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 高さ調節部内カバー(2個入り) |
| | 左右の回転補助ローラー本体・回転補助ローラーカバーに傷、割れ、汚れ、紛失がなく、スムーズに回転することを確認してください。 | 回転補助ローラーセット(2セット入り) |
| | シートパイプエンドキャップ4ヶ所(シートパイプの前後左右)に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | シートパイプエンドキャップ(4個入り)(Z用) |
| | 折りたたみ防止フックツメに傷、割れ、摩耗、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 折りたたみ防止フックツメ |
| | 左右の前ブレーキレバー端部カバーに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 前ブレーキレバー端部カバー左右セット |
| | 左右の前ブレーキレバー・後駐車レバーに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 前ブレーキレバー左セット |
| | | 前ブレーキレバー右セット |
| | | 後駐車レバー左右セット |
| | 左右のブレーキ基部・ブレーキ基部カバーに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | ブレーキ基部左右セット |
| | | ブレーキ基部カバー左右セット |
| | 左右のブレーキプレートに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | ブレーキプレート左右セット |
| | 左右のブレーキパッドに傷、割れ、汚れ、紛失、表面の著しい摩耗(凸部がすり減ってなくなっている状態)がないことを確認してください。 | ブレーキパッド(2個入り)(Z用) |
| | 左右のブレーキブラケットに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | ブレーキブラケット(2個入り) |
| | 左右のフレーム端部カバーに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | フレーム端部カバー左セット |
| | | フレーム端部カバー右セット |
| | 左右のスライドストッパーに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | ※対処方法についてはご購入先にお問い合わせください。 |
| | 左右の前輪ホイール・後輪ホイールに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 前輪セット(2個入り) |
| 後輪セット(Z用) | | |
| 左右の前輪フォークキャップに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 前輪フォークキャップ | |
| 左右の後輪キャップに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | 後輪キャップ | |
| ボルトキャップ3ヶ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | ボルトキャップ(10個入り) | |
| 6)金属部の点検 | 左右の前輪アームに傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。 | 前輪アーム(Z用) |
| | 左右のスライドブラケットに傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。 | × (廃棄) |
| 7)縫製部の点検 | 座面に傷、ほつれ、汚れがないことを確認してください。 | 座面(Z用) |
| | 座面ベルトに傷、割れ、変形、ほつれ、汚れがないことを確認してください。 | 座面ベルト |
| | 折りたたみベルトに傷、ほつれ、汚れがないことを確認してください。 | 折りたたみベルト(Z用) |
| | 折りたたみ保持ベルトに傷、ほつれ、汚れがないことを確認してください。 | 折りたたみ保持ベルト(Z用) |
| | アームレスト指はさみ防止ベルトに傷、割れ、ほつれ、汚れがないことを確認してください。 | アームレスト指はさみ防止ベルトセット |

※次ページへ続きます

2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

| | | | |
|-------------|---|--|------------------------------|
| 8) 抑速付後輪の点検 | 左右の抑速付後輪に傷、摩耗、汚れがないことを確認してください。 | | LT抑速付(M8)抑速ユニット左右セット |
| | 走行時、左右の抑速付後輪に異音がなく、抑速ブレーキが効いていることを確認してください。 | | |
| | 左右のスペーサー付ナットが緩みなくしまっていることを確認してください。 | | リルターン Z 抑速付 接続ジョイントセット1台分 |
| | 左右の抑速付後輪のタイヤ部に傷、摩耗、汚れがないことを確認してください。 | | LT抑速付交換タイヤキット1台分 |
| | 左右のセンターキャップに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。 | | LT抑速付センターキャップ |
| | 左右のセンターキャップを取り外し、抑速ブレーキ力が左右同一の設定となっているか、中の部品が外れていないか確認してください。 | | LT抑速付(M8)抑速ユニット左右セット |

3. 性能の点検

チェック欄

交換部品

| | | | | |
|------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| 1) 車輪の点検 | 前輪、後輪に摩耗や割れがないことを確認してください。 | | 前輪セット(2個入り) | |
| | | | 後輪セット(Z用) | |
| | | | LT抑速付交換タイヤキット1台分 | |
| | 前後4輪が同時に接地することを確認してください。 | | × (廃棄) | |
| 2) ブレーキ・駐車ロックの点検 | 前輪が左右ともスムーズに360°回転することを確認してください。 | | × (廃棄) | |
| | 本体を押したときに、違和感なく直進、後退することを確認してください。 | | × (廃棄) | |
| | ブレーキパッドと後輪のタイヤの間隔が1.5mmになっていることを確認してください。 ブレーキレバーを握った時に、ブレーキの利き具合が正常であることを確認してください。 ※ブレーキプレートの動きが悪い場合は、「シリコン系潤滑油」を少量注油してください。 | | | ブレーキパッド(2個入り)(Z用) |
| | | | | ブレーキパッド(2個入り)(Z用) |
| | | | 後輪セット(Z用) | |
| | | | ブレーキワイヤーセット | |
| | | | ブレーキ固定ソケットセット | |
| | | | ブレーキバネ(4個入り) | |
| | | | ブレーキプレート左右セット | |
| 3) アームレスト高さ調節の点検 | 高さ調節ノブボルトを抜いた状態で、高さ調節支柱をスムーズに上下できることを確認してください。 ※本体フレーム、高さ調節支柱に異常(変形、割れなど)がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。 | | 立ち上がり補助グリップベース左右セット | |
| | | | 高さ調節部内カバー(2個入り)(Z用) | |
| 4) 折りたたみ動作の点検 | アームレストロック解除ボタンを押した後、折りたたみベルトを引くと本体が折りたたまれ、自立しながら折りたたまれた状態を維持することを確認してください。 ※クロスバー、アームレストブラケット、本体フレーム、スライドブラケットに異常(変形、割れ)がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。 | | アームレストロック解除ボタンセット 折りたたみベルト(Z用) | |

おつかれさまでした。

