

※利用者様は補修を行わず、補修については製品をお求めになった販売店にご相談ください。

歩行車 ショッピングターン メンテナンスガイド




このメンテナンスガイドは必ずお読みいただき、大切に保管してください

このメンテナンスガイドを必ずよくお読みいただき、十分ご理解の上、ガイドに沿って作業を進めてください。
なお、誤った交換などによるトラブルなどについては弊社は一切保証いたしかねます。

必要工具

六角レンチ	:	4mm × 2本 5mm
ソケットレンチ	:	10mm 13mm 17mm
スパナ	:	10mm
プラスドライバー	:	2番
マイナスドライバー	:	

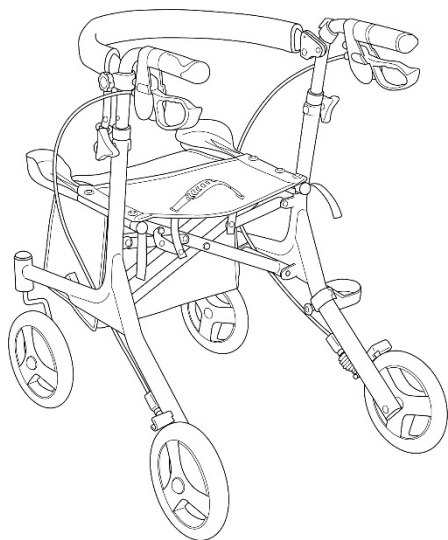

もくじ

はじめに	1
1. 付属品の点検	1~3
①取扱説明書の点検	1
②バッグの点検	1
③各種シールの点検	2
④杖ホルダーの点検	3
⑤杖固定ベルトの点検	3
⑥シートパイプエンドキャップの確認	3
2. 外観の点検	3~10
①フレームの点検	3
②溶接部の点検	4~5
③パネ部の点検	5~6
④ネジ部の点検	6~8
⑤樹脂部の点検	9~10
3. 性能の点検	10~18
①車輪の点検	10~13
②ブレーキ・駐車ロックの点検	13~16
③高さ調節の点検	17
④姿勢保持ベルト固定の点検	18
⑤折りたたみ動作の点検	18
注意事項	19

はじめに

メンテナンスを始める前にメンテナンスチェックリストを入手してください。(メンテナンスチェックリストは弊社ホームページからダウンロードできます。)
作業はメンテナンスチェックリストの順に従ってお進めください。

メンテナンスチェックリストの付属品の点検、外観の点検、性能の点検の各項目について、確認を行い、異常のない場合はチェック欄にチェックマーク(✓)をご記入ください。異常が見つかった場合は、交換部品を取り寄せて補修いただいた上で、チェック欄に記入してください。

※ 補修ができない場合は製品の使用を中止してください。

※ 廃棄するときは、各自治体のルールに従って廃棄してください。

弊社ホームページからダウンロードできるもの

- ・取扱説明書
- ・メンテナンスチェックリスト
- ・メンテナンスガイド
- ・部品交換マニュアル

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

掲載ページへのアクセス方法:

TOP ⇒ 製品情報 ⇒ レンタル用品 ⇒ 歩行車 ⇒ 歩行車ショッピングター

1. 付属品の点検

① 取扱説明書の点検

取扱説明書の有無を確認してください。

取扱説明書

取扱説明書がない場合は、弊社ホームページからのダウンロードが可能です。



② バッグの点検

- 1) 折りたたみベルトを上方向に引っ張り、本体を軽く閉じ、バッグを斜め上方に向けてスライドさせるように引っ張り上げバッグを取り外します。
- 2) 面ファスナー部に破損がなくスムーズに開閉できることを確認してください。
- 3) バッグにほつれ、破れ、汚れがないことを確認してください。
- 4) 取付用のスライド部がバッグにしっかりと固定されていることを確認してください。



スライド部

バッグに異常がある場合は交換部品「バッグセット」を発注し、交換してください。

1. 付属品の点検

③各種シールの点検

- 1) フレーム(前方・後方)保護シールが脚部の前後左右に計4ヶ所あることを確認してください。
- 2) ブレーキ・駐車ロックシールがブレーキ基部(内側)に左右計2ヶ所あることを確認してください。
- 3) 指はさみ注意シールがクロスバーに1ヶ所あることを確認してください。
- 4) ブレーキ調節表示シールがブレーキ調節ネジに左右計2ヶ所あることを確認してください。
- 5) ブレーキ指はさみ注意シールがブレーキ基部(外側)に左右計2ヶ所あることを確認してください。

5) ブレーキ指はさみ注意シール
※右側の同じ位置にもあります。



2) ブレーキ・駐車ロックシール
※左側の同じ位置にもあります。



1) (LT・ST)フレーム前方保護シール
※右側の同じ位置にもあります。



3) 指はさみ注意シール



4) ブレーキ調節表示シール
※左側の同じ位置にもあります。




1) フレーム後方保護シール
※左側の同じ位置にもあります。

各種シールにはがれや劣化がある場合は、交換部品の各種シールを発注し貼付してください。

1. 付属品の点検

④杖ホルダーの点検

杖ホルダーに割れや劣化がないことを確認してください。


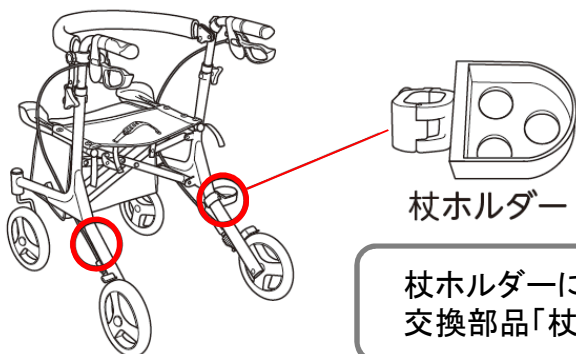


杖ホルダーに異常がある場合は
交換部品「杖ホルダーセット」を 発注し、交換してください。

⑤杖固定ベルトの点検

杖固定ベルトに破れやほつれがないことを確認してください。


杖固定ベルト

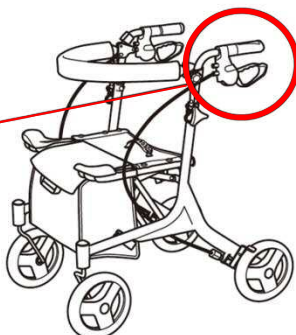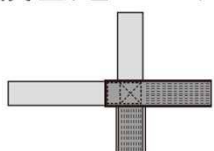

杖固定ベルトに異常が
ある場合は、交換部品
「杖固定ベルト」を発注し
交換してください。

⑥シートパイプエンドキャップ(前)の点検

シートパイプエンドキャップ(前)に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

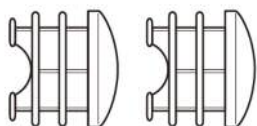

シートパイプエンドキャップ(前)に異常がある場合は
交換部品「シートパイプエンドキャップ」を発注し
交換してください。

2. 外観の点検

①フレームの点検

1) フレームの塗装に傷やはがれがないことを確認してください。

フレームに傷やはがれが見られる場合は、
補修部品「補修用ペイント(タッチペン)」にて補修してください。

2) フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、ガタつき)がないことを確認してください。


フレームに異常が見られる場合は、使用を中止して、廃棄してください。

2. 外観の点検

②溶接部の点検

- 1) バッグを外し、フレーム溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。
※溶接部の全周を確認すること

フレーム溶接部の詳細図(拡大図は右側のみを表示)

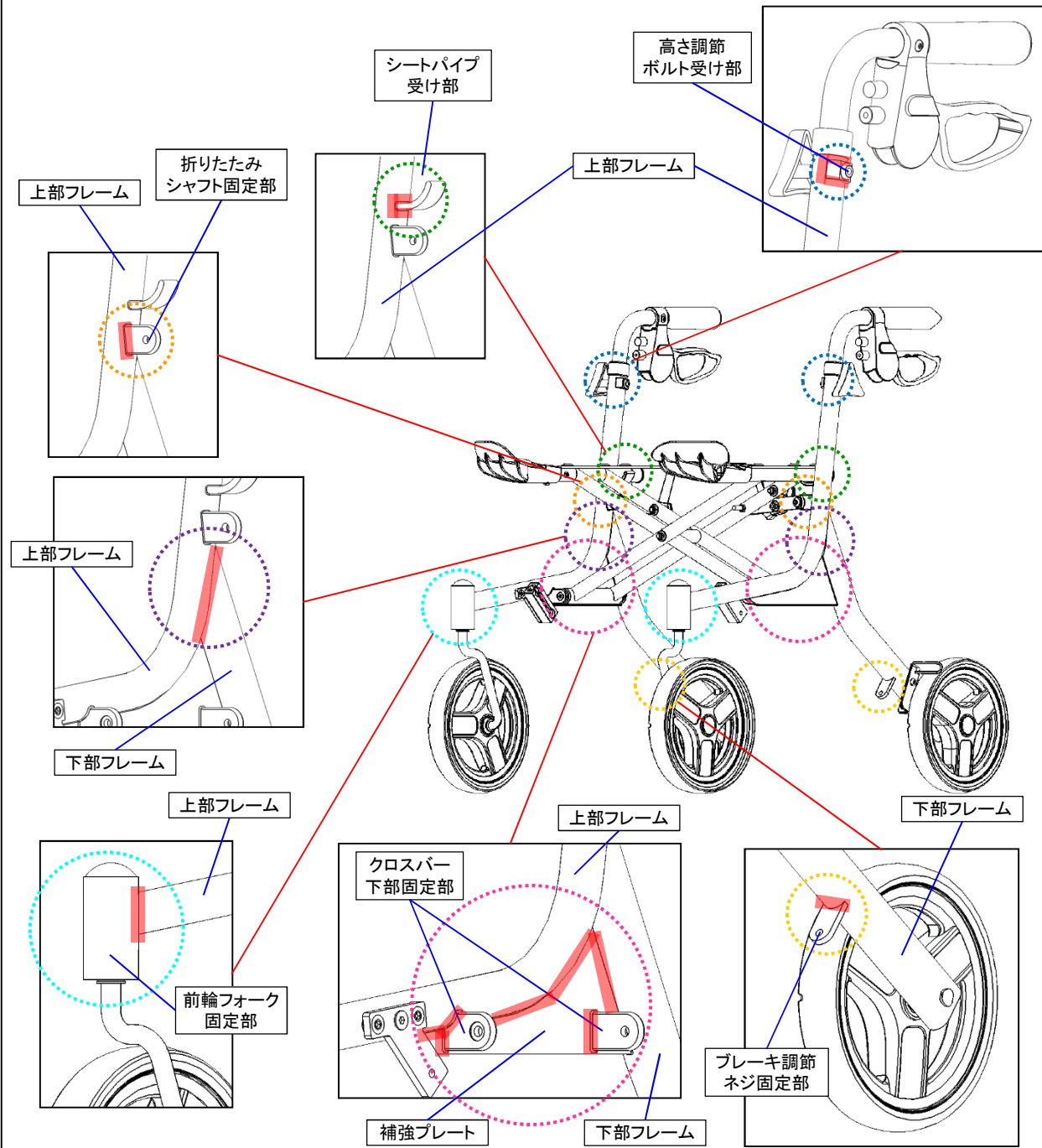

溶接部にガタつきや外れがある場合は
使用を中止して、廃棄してください。


2. 外観の点検

②溶接部の点検(つづき)

2)クロスバー溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。

※溶接部の全周を確認すること

クロスバー溶接部の詳細図(拡大図は右側のみを表示)

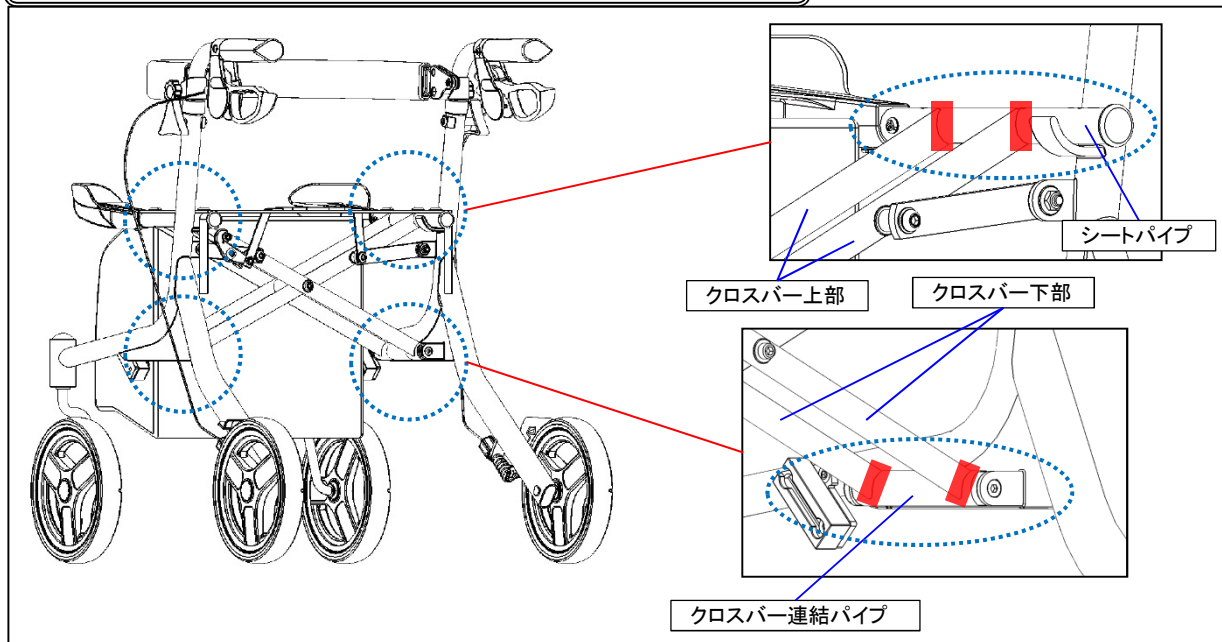

溶接部にガタつきや外れがある場合は
使用を中止して、廃棄してください。

③バネ部の点検


1)折りたたみ防止フック部のバネに、錆・外れがないことを確認してください。

2)折りたたみ防止フック部のバネが、伸びて引きが悪くないことを確認してください。

👁️ 本体を折りたたみ上から見ると、折りたたみ防止フック部のバネの目視がしやすくなります。
引きが悪くなると、座面を開く時に折りたたみ防止フックがかかなくなります。

3)折りたたみ防止フック部のバネの先端が、外を向いて指が触れないことを確認してください。

折りたたみ防止フック部のバネの詳細図

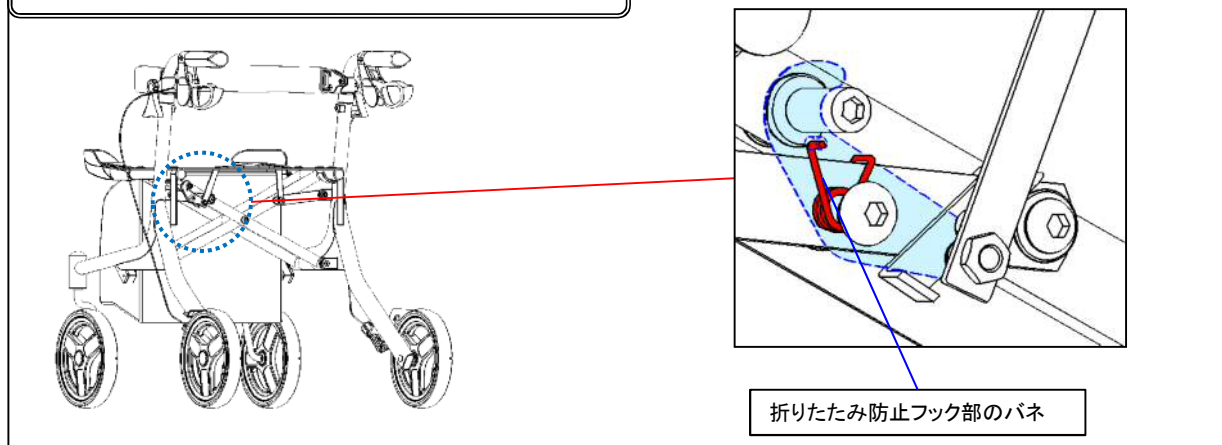


折りたたみ防止フック部のバネに異常がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。

2. 外観の点検

③ バネ部の点検(つづき)

- 4) 左右計2ヶ所のブレーキバネに、錆・外れがないことを確認してください。
- 5) 左右計2ヶ所のブレーキバネが、伸びて引きが悪くないことを確認してください。
☞ 引きが悪くなると、ブレーキをかけた時にブレーキ板の戻りが悪くなります。
- 6) 左右計2ヶ所のブレーキバネの先端が、外を向いて指が触れないことを確認してください。

ブレーキバネの詳細図(拡大図は右側のみを表示)

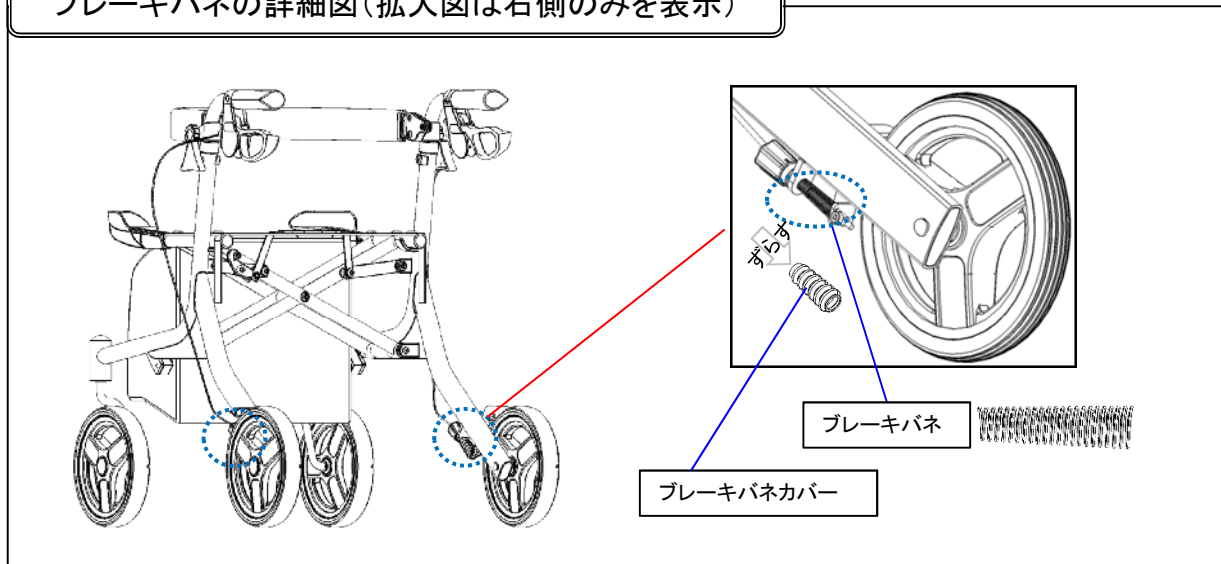


ブレーキバネに異常がある場合は、交換部品「ブレーキバネ」を発注して、交換してください。

④ ネジ部の点検

※ 増し締めを行い緩みがないことを確認してください。

- 1) 座面固定ボルトが6ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

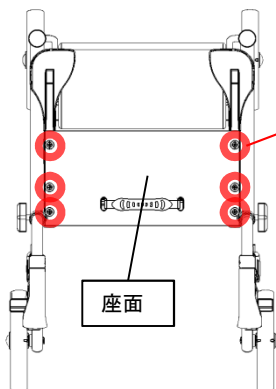


座面固定ボルト×6


プラスドライバー:2番

座面固定ボルトが破損していたり、なくなっている場合は交換部品「座面固定ボルト」を発注して交換してください。

- 2) ブレーキ板固定ボルトが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

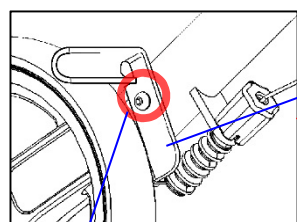

ブレーキ板固定ボルト×2

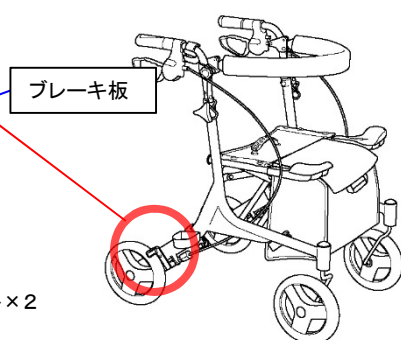


六角レンチ:4mm

ブレーキ板固定ボルトが破損していたり、なくなっている場合は、交換部品「ブレーキ板固定ボルトセット」を発注して、交換してください。

2. 外観の点検

④ネジ部の点検(つづき)


3)クロスバー固定ボルトが12ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

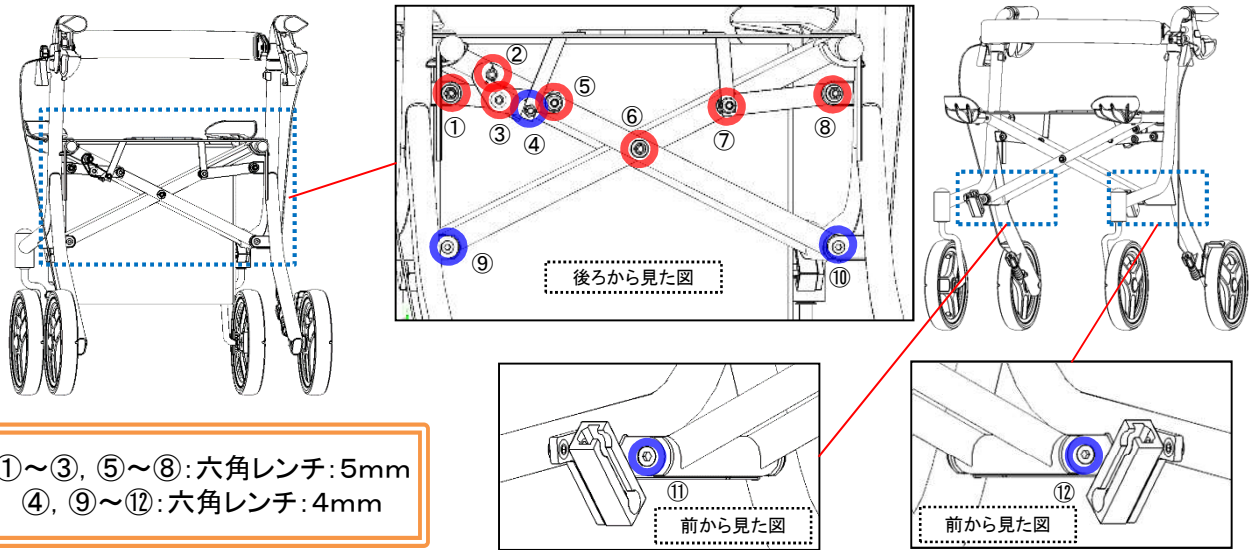

クロスバー固定ボルトに緩み、外れがある場合は、使用を中止して、ご購入先にお問い合わせください。

4)ブレーキ基部のネジが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

内側から見た図

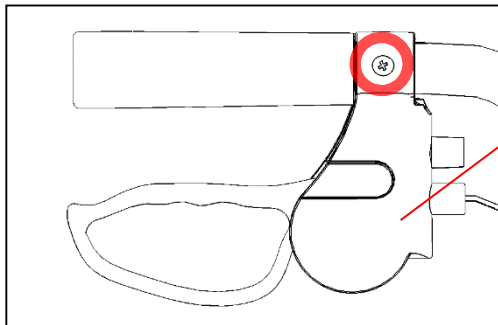


ブレーキ基部

プラスドライバー: 2番

ブレーキ基部のネジが破損していたりなくなっている場合は使用を中止して廃棄してください。

5)姿勢保持ベルト固定ボルトが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

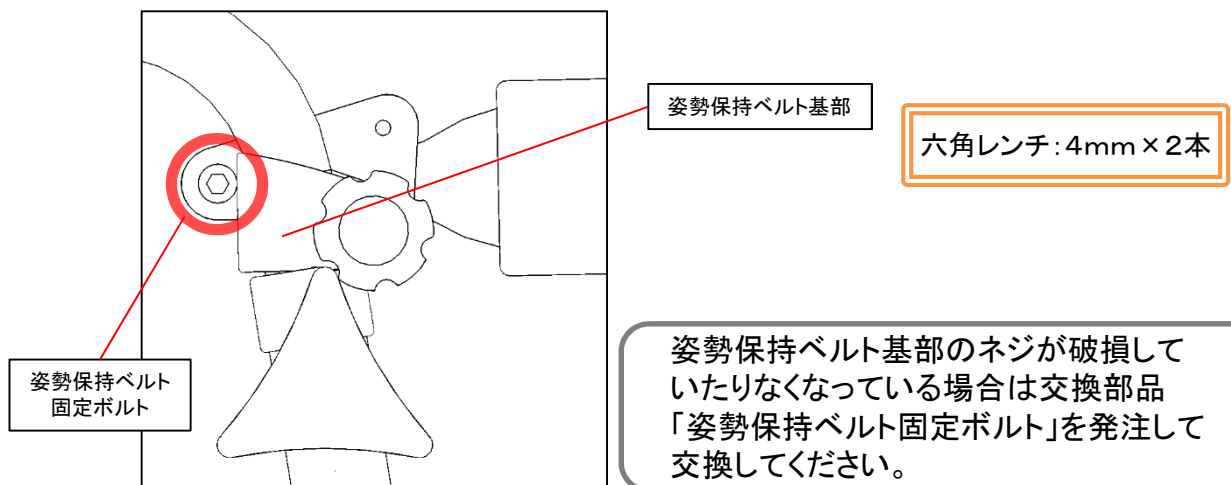

姿勢保持ベルト基部

六角レンチ: 4mm x 2本

姿勢保持ベルト基部のネジが破損していたりなくなっている場合は交換部品「姿勢保持ベルト固定ボルト」を発注して交換してください。


2. 外観の点検

④ネジ部の点検(つづき)

6) 姿勢保持ベルト基部固定ノブボルトが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。




姿勢保持ベルト
基部固定ノブボルト

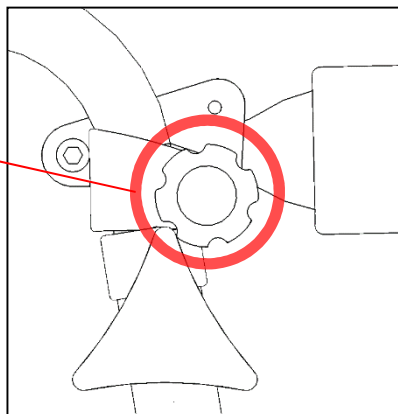

姿勢保持ベルト基部固定ノブボルトが破損していたり、なくなっている場合は交換部品「姿勢保持ベルト基部固定ノブボルト」を発注して、交換してください。

7) バッグ固定部のネジが左右計8ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

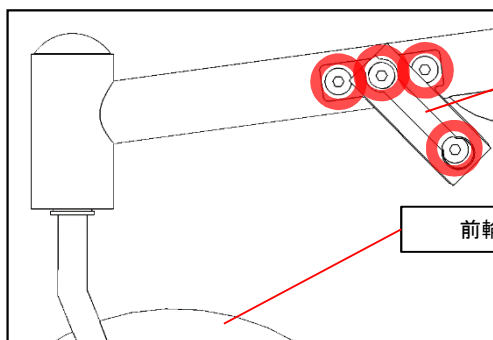


バッグ固定部

六角レンチ: 4mm

バッグ固定部のネジが破損していたりなくなっている場合は使用を中止して廃棄してください。

8) バasketホルダーのネジが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

内側から見た図

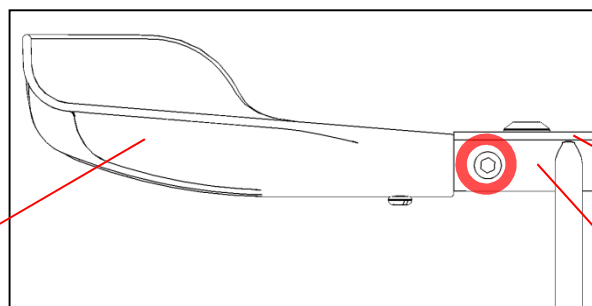

バスケットホルダー

六角レンチ: 4mm

座面


シートパイプ

バスケットホルダーのネジが破損していたりなくなっている場合は交換部品「バスケットホルダー」を発注して、交換してください。

2. 外観の点検


⑤樹脂部の点検

1) ハンドルグリップ(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

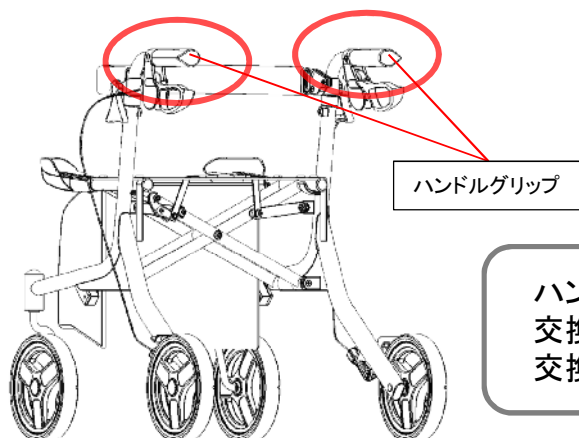


ハンドルグリップに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「ハンドルグリップ」を発注して交換してください。

2) シートパイプエンドキャップ(後)(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

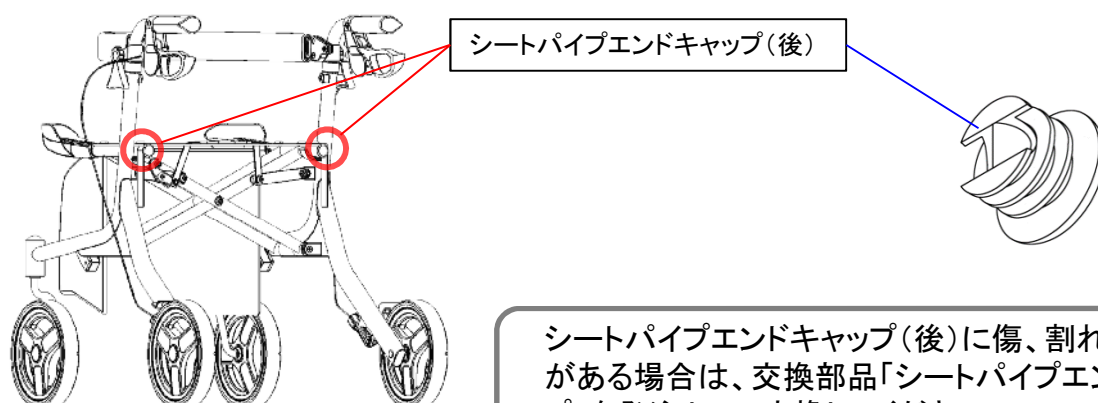

シートパイプエンドキャップ(後)に傷、割れ、紛失がある場合は、交換部品「シートパイプエンドキャップ」を発注して、交換してください。

3) バasketホルダー(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

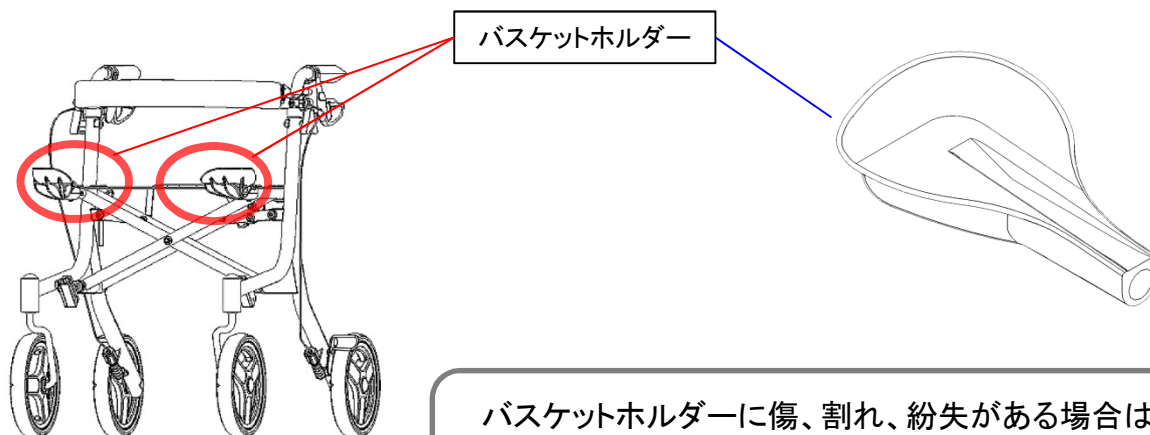


バスケットホルダーに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「バスケットホルダー(左右セット)」を発注して交換してください。

2. 外観の点検


⑤樹脂部の点検(つづき)

- 4) ハンドルポスト受け(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

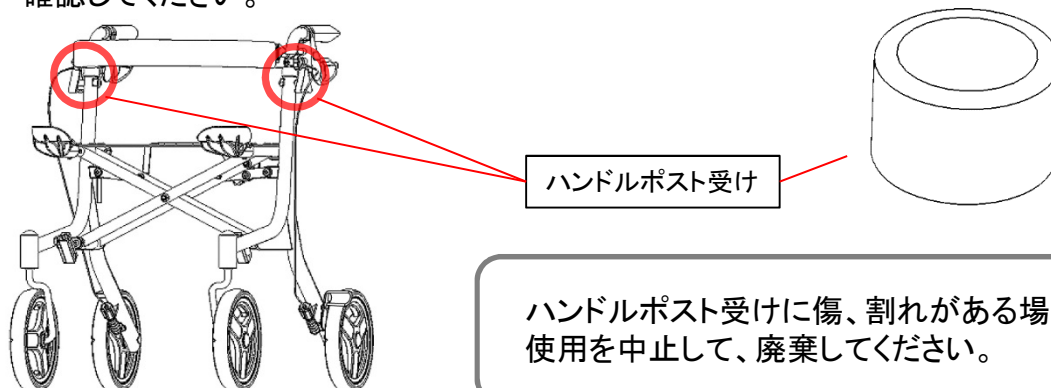

ハンドルポスト受けに傷、割れがある場合は使用を中止して、廃棄してください。

- 5) 姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

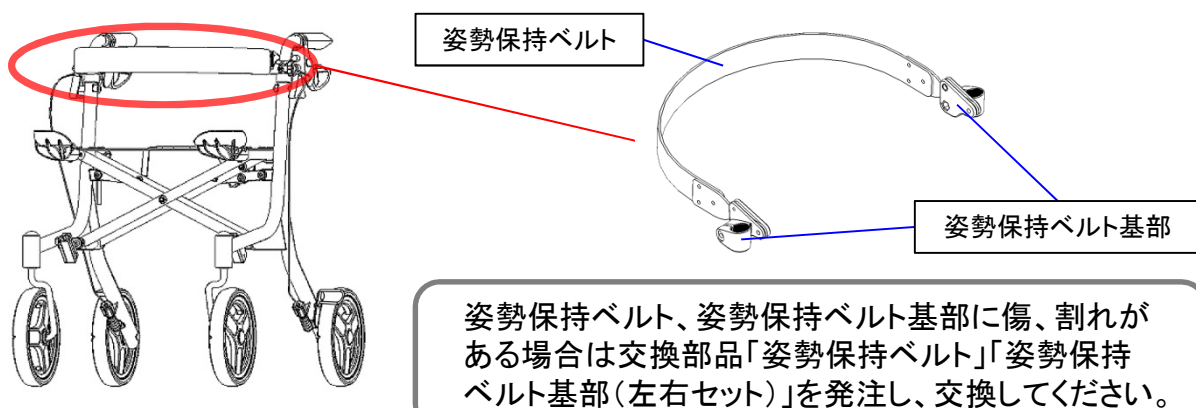

姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部に傷、割れがある場合は交換部品「姿勢保持ベルト」「姿勢保持ベルト基部(左右セット)」を発注し、交換してください。

3. 性能の点検


①車輪の点検

- 1) 前輪に摩耗や割れがないことを確認してください。

🔗 交換の目安は取扱説明書の25ページに記載されています。

前輪に摩耗や割れがある場合には、交換部品「前輪セット(右)」または「前輪セット(左)」を発注して、交換してください。

- 2) 前輪フォークキャップに傷、汚れ、割れ、緩みがないことを確認してください。


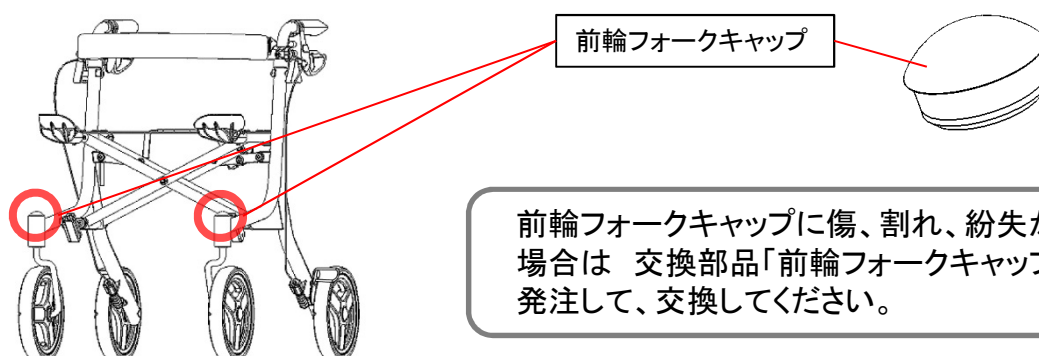


前輪フォークキャップに傷、割れ、紛失がある場合は 交換部品「前輪フォークキャップ」を発注して、交換してください。


3. 性能の点検

①車輪の点検(つづき)


- 3) 前輪の車輪キャップに傷、汚れ、割れ、緩みがないことを確認してください。
- 4) 前輪の車輪キャップをはずし、前輪ナットに緩みがないことを確認してください。
- 5) 前輪フォークに割れ、ゆがみがないことを確認してください。
- 6) 前輪フォークキャップをはずし、前輪フォーク固定ナットに緩みがないことを確認してください。

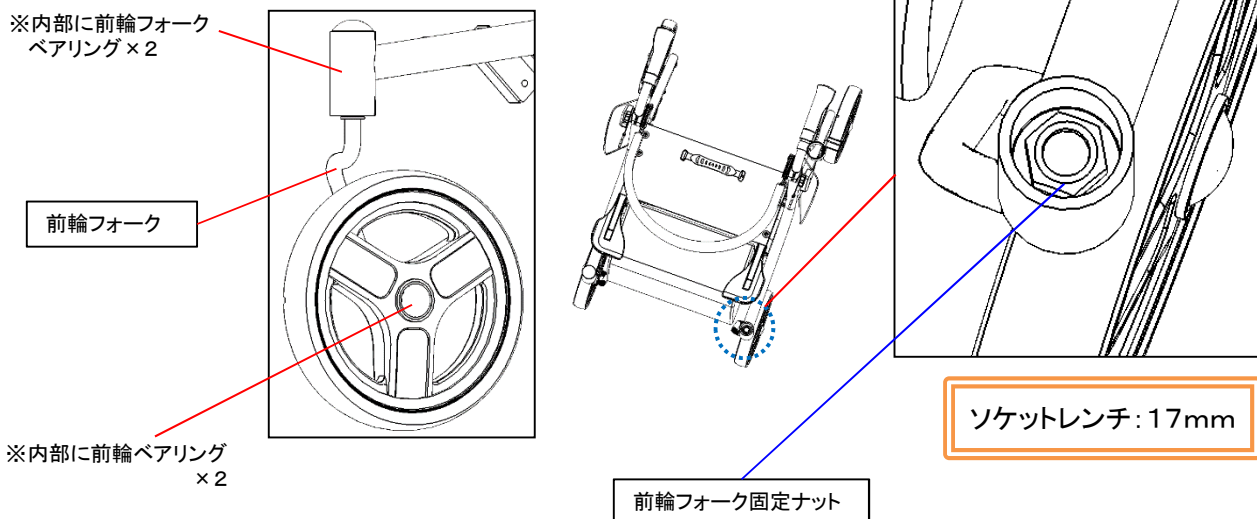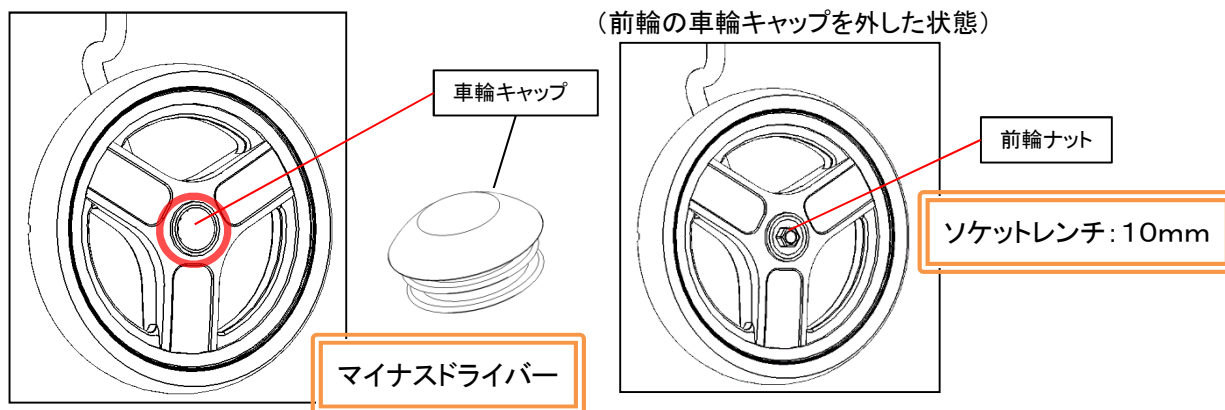

前輪、前輪ナット、前輪フォーク、前輪フォーク固定ナットに異常がある場合は、交換部品「前輪セット」を、前輪フォークベアリングに異常がある場合は「前輪フォークベアリングセット」を、車輪キャップに異常がある場合は「車輪キャップ」を発注して、交換してください。

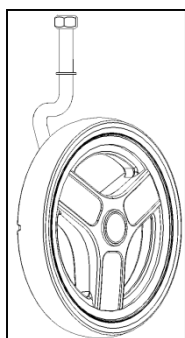

前輪セット:
ホイール、タイヤ・ベアリング×2、前輪フォーク、前輪ナット、車輪キャップ、前輪フォーク固定ナット
※組み付け状態での販売となります。

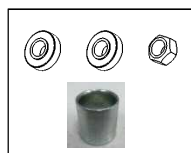

前輪フォークベアリングセット:
ベアリング×2、カラー、前輪フォーク固定ナット

3. 性能の点検

①車輪の点検(つづき)



7) 後輪に摩耗や割れがないことを確認してください。

 交換の目安は取扱説明書の25ページに記載されています。

8) 後輪の車輪キャップに傷、汚れ、割れ、緩みがないことを確認してください。

9) 後輪の車輪キャップをはずし、後輪ナットに緩みがないことを確認してください。



10) 後輪ベアリングに割れなどがなくないことを確認してください。

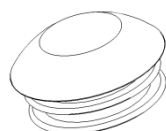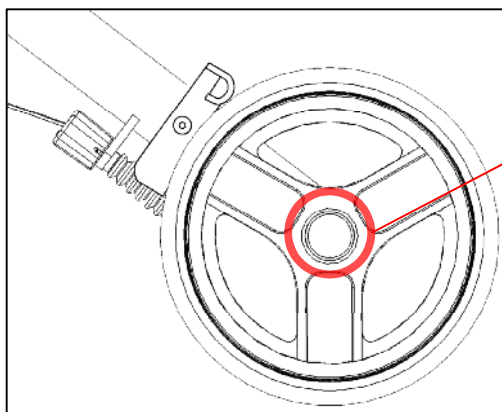

車輪キャップ

車輪キャップに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「車輪キャップ」を発注して、交換してください。

(後輪の車輪キャップを外した状態)

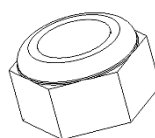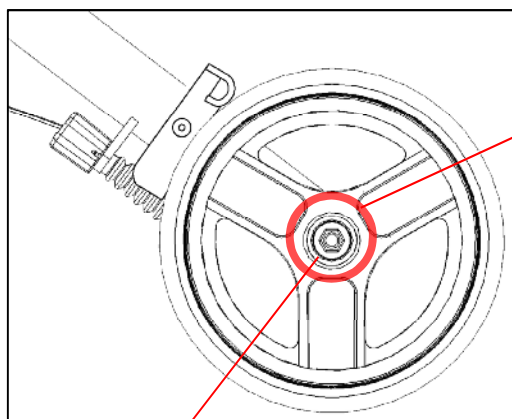


後輪ナット

ソケットレンチ: 13mm
六角レンチ: 5mm

※内部に後輪ベアリング
×2

後輪、後輪ナット、後輪ベアリングに異常がある場合は交換部品「後輪セット」を発注して、交換してください。

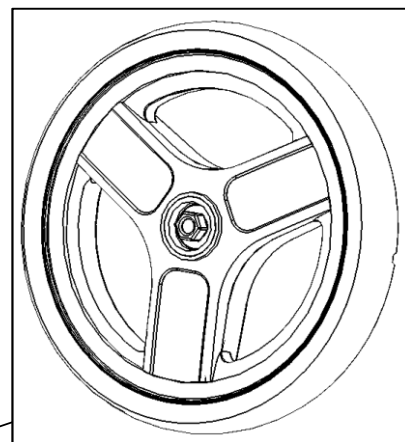

後輪セット:
ホイール、タイヤ、ベアリング×2、後輪ナット
後輪スリーブ
※組み付け状態での販売となります。

3. 性能の点検

①車輪の点検(つづき)

11) 前後4輪が同時に接地することを確認してください。

前後4輪が同時に接地しない場合は、タイヤの摩耗状態を再度確認してください。

👉 タイヤ交換の目安は取扱説明書の25ページに記載されています。

タイヤの摩耗状態に異常がなく、前後4輪が同時に接地しない場合は、使用を中止して、廃棄してください。

12) 前輪が左右ともスムーズに360° 回転することを確認してください。


前輪がスムーズに回転しない場合は、前輪フォークベアリングに異常がないかを再度確認してください。前輪フォークベアリングに異常がなく、車体が直進しない場合は使用を中止して、廃棄してください。

13) 車体を押した時に、違和感なく直進することを確認してください。

車体が直進しない場合は、各ベアリングに異常がないか、タイヤに摩耗がないか、前輪フォークにゆがみがないかを再度確認してください。全てに異常がなく、車体が直進しない場合は使用を中止して、廃棄してください。

②ブレーキ・駐車ロックの点検

1) ブレーキレバー(左右計2ヶ所)に傷や割れがないことを確認してください。


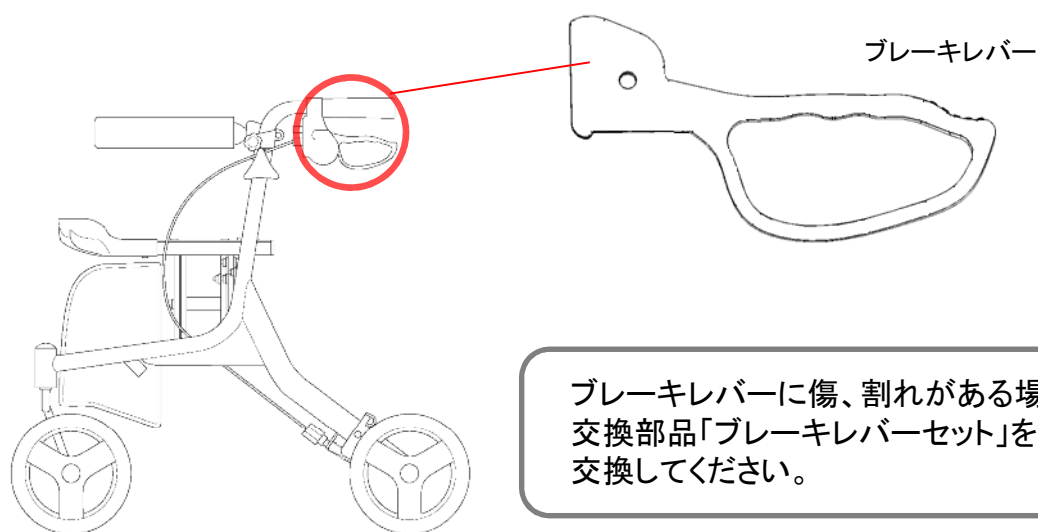


ブレーキレバーに傷、割れがある場合は交換部品「ブレーキレバーセット」を発注して交換してください。

3. 性能の点検




②ブレーキ・駐車ロックの点検(つづき)

2)ブレーキ基部に傷や割れがないことを確認してください。

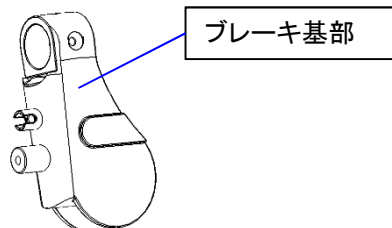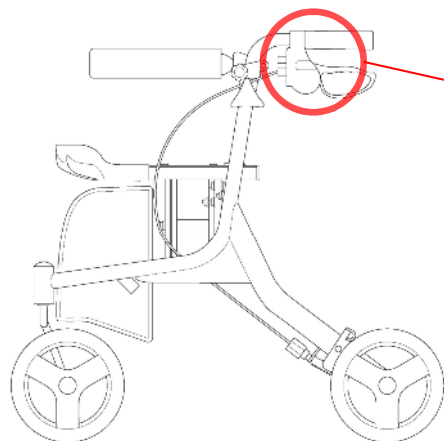



ブレーキ基部に傷、割れがある場合は交換部品「ブレーキ基部(左右セット)」を発注して、交換してください。

3)ブレーキ基部キャップに傷や割れがないことを確認してください。

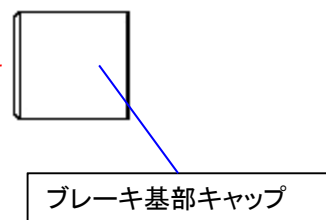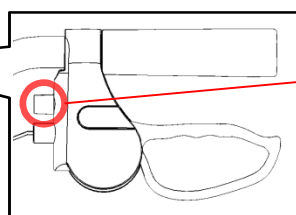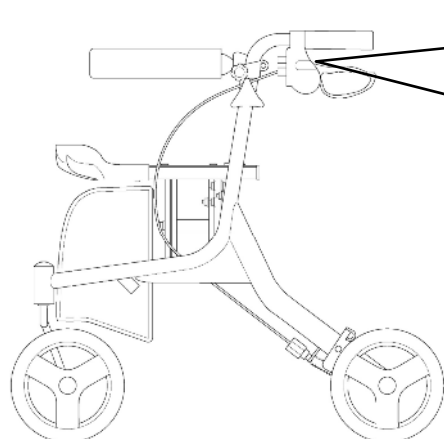

ブレーキ基部キャップに傷、割れ、紛失がある場合は、交換部品「ブレーキ基部キャップ」を発注して、交換してください。

4)ブレーキバネカバーに傷や割れがないことを確認してください。

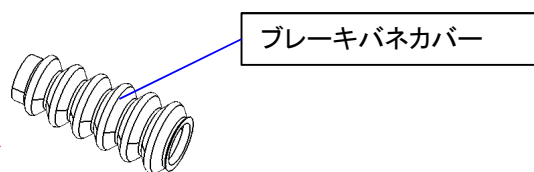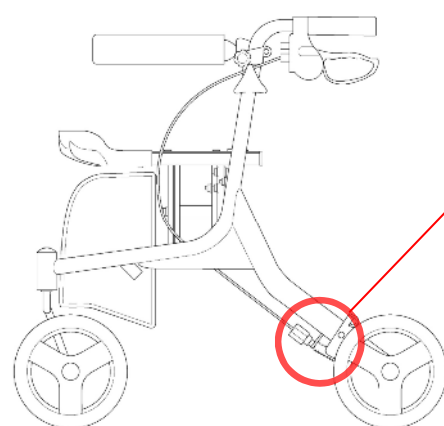


ブレーキバネカバーに傷、割れがある場合は交換部品「ブレーキバネカバー」を発注して交換してください。

3. 性能の点検

②ブレーキ・駐車ロックの点検(つづき)

5)ブレーキ板とタイヤの間隔が1.5mmになっていることを確認してください。

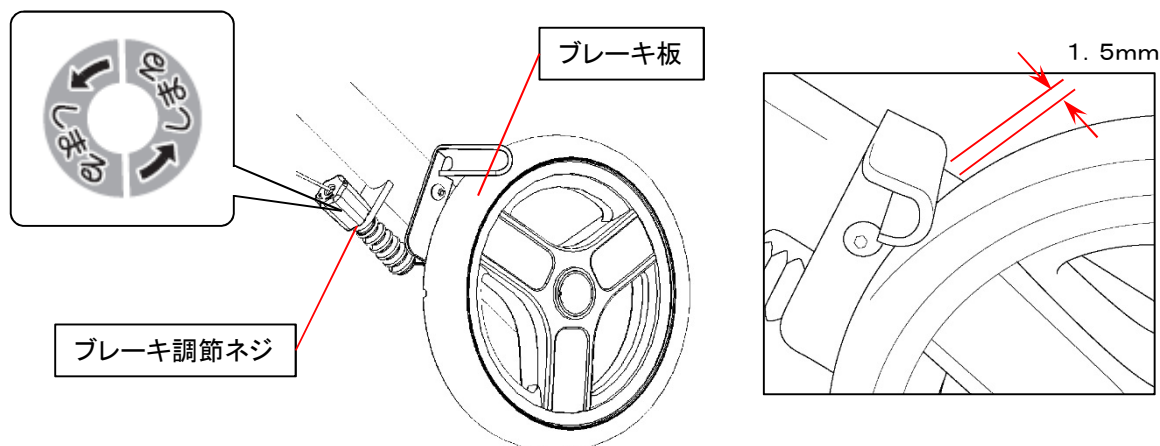

ブレーキ板とタイヤの間隔が1.5mmを超えている場合は、ブレーキ調節ネジを締めて間隔が1.5mmになるよう調節してください。

(1.5mmの目安=10円玉の厚み)

調節しても間隔が1.5mmにならない場合は、タイヤとブレーキ板の摩耗状態を確認してください。(交換部品「後輪セット」「ブレーキ板」)

6)ブレーキレバーをブレーキが利くまで十分に握ることができることを確認してください。


ブレーキが十分に利かない場合は、ブレーキ板とタイヤの間隔を再度確認してください。ブレーキレバーを握る時に固く感じる場合には、ブレーキワイヤーが折れ曲がっていることがあります。(交換部品「ブレーキワイヤーセット」)

7)ブレーキの利き具合が正常であることを確認してください。

■ブレーキ固定ソケットが緩みなくしまっていることを確認してください。

■ブレーキワイヤーに切れ、ほつれ、屈曲がないことを確認してください。

※ブレーキレバーを握った時に、左右両輪ともにブレーキ板がしっかりと当たり車輪が回転しないことを確認してください。

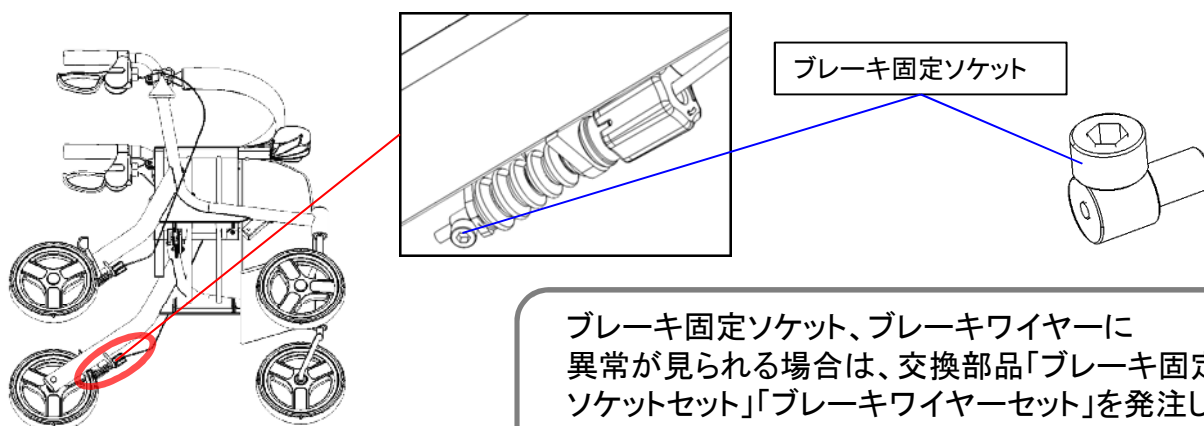


ブレーキ固定ソケット、ブレーキワイヤーに異常が見られる場合は、交換部品「ブレーキ固定ソケットセット」「ブレーキワイヤーセット」を発注して交換してください。

3. 性能の点検

②ブレーキ・駐車ロックの点検(つづき)


8) ブレーキ板に大きなガタつきがないことを確認してください。

※ブレーキ板に大きなガタつきがある場合はブレーキ板固定ナットを締めつけてブレーキ板が回転可能な範囲内でガタつきをできるだけ小さくした後で、ブレーキ板固定ボルトを締めつけてください。

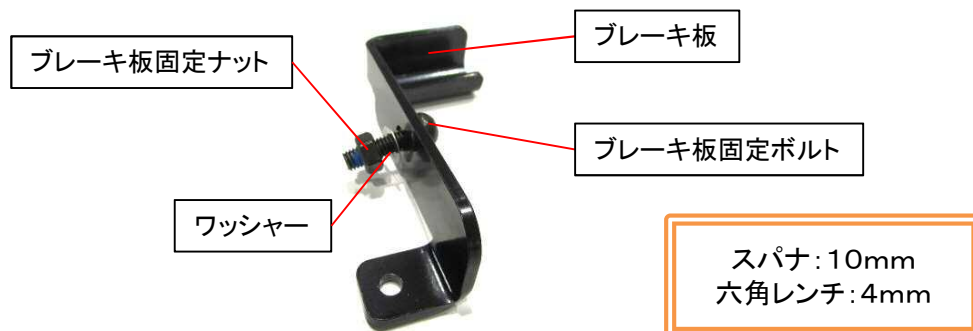

9) 駐車ロックが正常に作動することを確認してください。

※駐車ロックを作動した時に、左右両輪ともにブレーキ板がしっかりと当たり、車輪が回転しないことを確認してください。

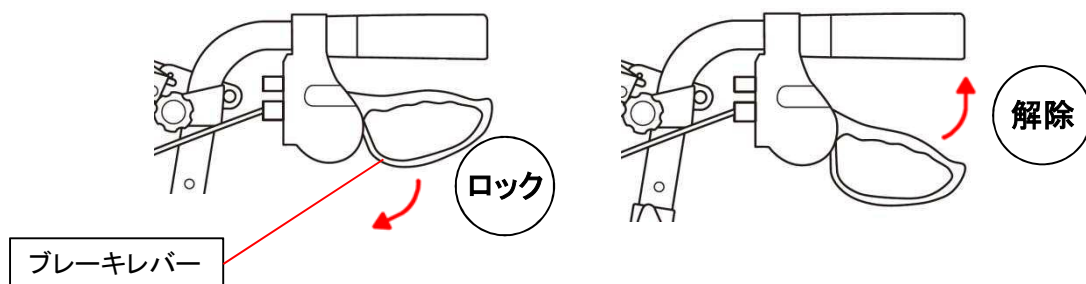


駐車ロックが正常に作動しない場合は、ブレーキ板とタイヤの間隔を再度確認してください。駐車ロックをかける時に固く感じる場合には、ブレーキワイヤーが折れ曲がっていることがあります。(交換部品「ブレーキワイヤーセット」)

3. 性能の点検

③高さ調節の点検

1) ハンドルの高さ調節が正常に行えることを確認してください。


- 高さ調節ノブボルトが正常に抜き差しできることを確認してください。
- 高さ調節ノブボルトにゆがみ、割れなどがないことを確認してください。
- 高さ調節ノブボルトを抜いた状態で、ハンドルポストがスムーズに上下することを確認してください。

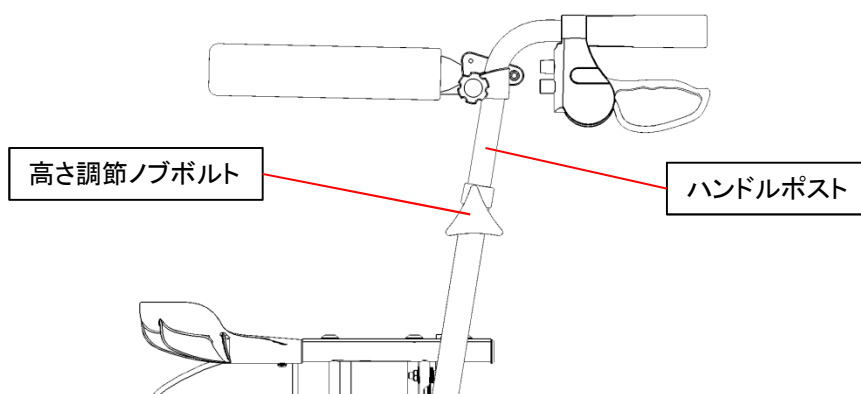

高さ調節動作がスムーズに行えない場合は、フレームやハンドルポスト、高さ調節ノブボルトにゆがみがないか、高さ調節ノブボルト、ハンドルポスト受けに割れなどがないかを確認してください。（交換部品「高さ調節ノブボルト」）
フレームやハンドルポストにゆがみが見つかった場合は、使用を中止し廃棄してください。

2) 姿勢保持ベルトの高さ調節が正常に行えることを確認してください。

- 姿勢保持ベルト基部固定ノブボルトが正常に抜き差しできることを確認してください。
- 姿勢保持ベルト基部固定ノブボルトにゆがみ、割れなどがないことを確認してください。
- 姿勢保持ベルト基部固定ノブボルトを抜いた状態で、姿勢保持ベルト基部がスムーズに上下することを確認してください。

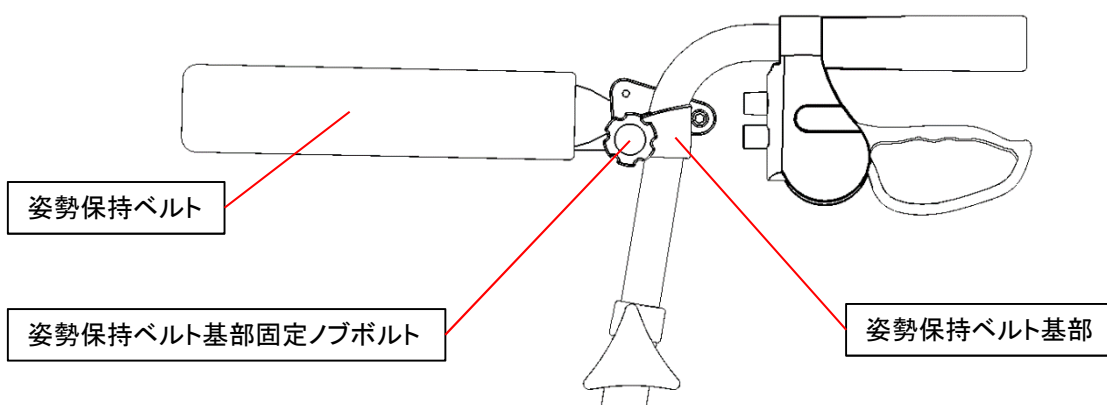


姿勢保持ベルトの高さ調節動作がスムーズに行えない場合は、姿勢保持ベルト基部固定ノブボルトにゆがみがないか、姿勢保持ベルト基部固定ノブボルトや姿勢保持ベルト基部に割れなどがないかを確認してください。
（交換部品「姿勢保持ベルト基部固定ノブボルト」「姿勢保持ベルト基部」）

3. 性能の点検


④姿勢保持ベルト固定用フックの点検

姿勢保持ベルトの固定が正常に行えることを確認してください。

- 姿勢保持ベルト固定用フックが正常に抜き差しできることを確認してください。
- 姿勢保持ベルト固定用フックにゆがみ、折れなどが無いことを確認してください。
- 姿勢保持ベルト固定用フックを固定するゴムに破れ、ほつれのないことを確認してください。

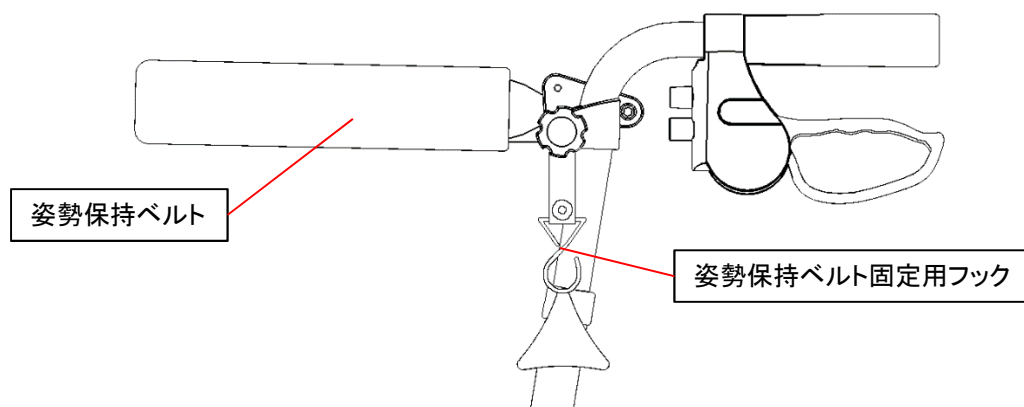

姿勢保持ベルトの固定のしかた

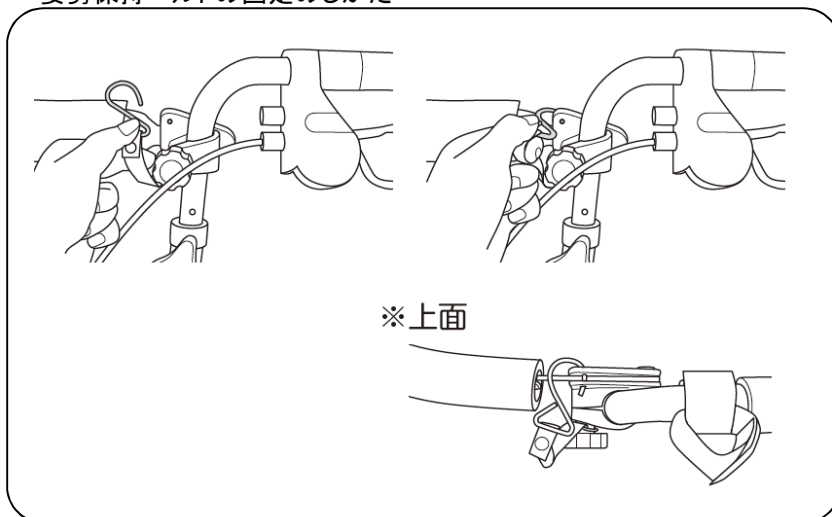

姿勢保持ベルトの固定が正常に行えない場合は、姿勢保持ベルト固定用フックにゆがみ、折れがないか、姿勢保持ベルト基部に割れがないかを確認してください。
(交換部品「姿勢保持ベルト固定用フック」「姿勢保持ベルト基部」)

⑤折りたたみ動作の点検

折りたたみ動作がスムーズに行えることを確認してください。

折りたたみ動作がスムーズに行えない場合は、フレームやクロスバーにゆがみがないか確認してください。フレームやクロスバーにゆがみが見つかった場合は、使用を中止し廃棄してください。



注意事項

👉 保管について

- 戸外に保管して風雨や直射日光にさらしたままにしないこと
- 火気に近づけないこと、また高温になる場所に保管しないこと
- 荷物を重ねたり、圧力が加わる状態で保管しないこと
- 取扱説明書は本体と一緒に保管すること

👉 お手入れについて

- 車輪に付着した泥や汚れなどはそのままにせず、よく絞った布などで必ず落とすこと
- 次にあげるものではお手入れしないこと
 - ・シンナー
 - ・クレゾール
 - ・塩素系薬剤をかけたの殺菌、消毒
 - ・磨き粉
 - ・塩素系洗剤
 - ・酸、アルカリ性洗剤
 - ・タワシ
 - ・研磨剤入りのスポンジ
 - ・その他製品を傷つけるもの
- オゾンガス、ホルムアルデヒドガスを用いた消毒を行わないこと。
- 注油する場合は、タイヤ、ブレーキ板に油がつかないように注意すること。
タイヤやブレーキ板に付着した油はよく拭き取ってください。

👉 廃棄について

- 廃棄については各自治体の指示にしたがって処分、廃棄すること

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索