

歩行車 ショッピングターン

メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

①取扱説明書			取扱説明書
②バッグ	1)面ファスナーに破損が無くスムーズに動く		バッグセット
	2)バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない		
	3)取付用のスライド部がバッグにしっかりと固定されている		
③各種シール	1)フレーム保護シールが脚部の前後左右に計4ヶ所ある		フレーム前方保護シール フレーム後方保護シール
	2)ブレーキ・駐車ロックシールがブレーキ基部(内側)に左右計2ヶ所ある		ブレーキ・駐車ロックシール
	3)指はさみ注意シールがクロスバーに1ヶ所ある		指はさみ注意シール
	4)ブレーキ調節表示シールがブレーキ調節ネジに左右計2ヶ所ある		ブレーキ調節表示シール
	5)ブレーキ指はさみ注意シールがブレーキ基部(外側)に左右計2ヶ所ある		ブレーキ指はさみ注意シール
④杖ホルダー	杖ホルダーに割れや劣化がない		杖ホルダー
⑤杖固定ベルト	杖固定ベルトに破れやほつれがない		杖固定ベルト
⑥シートパイプエンドキャップ	シートパイプエンドキャップ(前)に傷、汚れ、割れがない		シートパイプエンドキャップ

2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

①フレームの点検	1)フレームの塗装に傷やはがれがない		補修用ペイント(タッチペン)
	2)フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、ガタつき)がない		× (廃棄)
②溶接部の点検	1)フレーム溶接部にガタつきや外れがない		× (廃棄)
	2)クロスバー溶接部にガタつきや外れがない		× (廃棄)
③バネ部の点検	1)折りたたみ防止フック部のバネに、錆・外れがない		× (廃棄)
	2)折りたたみ防止フック部のバネが、伸びて引きが悪くなっていない		× (廃棄)
	3)折りたたみ防止フック部のバネの先端が外を向いて指が触れない		× (廃棄)
	4)左右計2ヶ所のブレーキバネに、錆・外れがない		ブレーキバネ
	5)左右計2ヶ所のブレーキバネが、伸びて引きが悪くなっていない		
	6)左右計2ヶ所のブレーキバネの先端が外を向いて指が触れない		
④ネジ部の点検	1)座面固定ボルトが6ヶ所とも緩みなく締まっている		座面固定ボルト
	2)ブレーキ板固定ボルトが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっている		ブレーキ板固定ボルト
	3)クロスバー固定ボルトが12ヶ所とも緩みなく締まっている		※対処方法については ご購入先にお問い合わせください
	4)ブレーキ基部のネジが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっている		× (廃棄)
	5)姿勢保持ベルト固定ボルトが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっている		姿勢保持ベルト固定ボルト
	6)姿勢保持ベルト基部固定ノブボルトが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっている		姿勢保持ベルト基部固定ノブボルト
	7)バッグ固定部のネジが左右計8ヶ所とも緩みなく締まっている		× (廃棄)
	8)バスケットホルダーのネジが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっている		バスケットホルダー(左右セット)
⑤樹脂部の点検	1)ハンドルグリップ(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れがない		ハンドルグリップ
	2)シートパイプエンドキャップ(後)(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れがない		シートパイプエンドキャップ
	3)バスケットホルダー(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れがない		バスケットホルダー(左右セット)
	4)ハンドルポスト受け(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れがない		× (廃棄)
	5)姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部に傷、汚れ、割れがない		姿勢保持ベルト 姿勢保持ベルト基部(左右セット)

※裏面へ続きます

3. 性能の点検

チェック欄

交換部品

①車輪の点検	1)前輪(左右計2ヶ所)に摩耗や割れがない	前輪セット(右) 前輪セット(左)
	2)前輪フォークキャップ(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れ、緩みがない	前輪フォークキャップ
	3)前輪の車輪キャップ(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れ、緩みがない	車輪キャップ
	4)前輪ナット(左右計2ヶ所)に緩みがない	前輪セット(右) 前輪セット(左)
	5)前輪フォーク(左右計2ヶ所)に割れ、ゆがみがない	前輪セット(右) 前輪セット(左)
	6)前輪フォーク固定ナット(左右計2ヶ所)に緩みがない	前輪セット(右) 前輪セット(左)
	7)後輪(左右計2ヶ所)に摩耗や割れがない	後輪セット
	8)後輪の車輪キャップ(左右計2ヶ所)に傷、汚れ、割れ、緩みがない	車輪キャップ
	9)後輪ナット(左右計2ヶ所)に緩みがない	後輪セット
	10)後輪ベアリング(左右計2ヶ所)に割れなどがない	後輪セット
	11)前後4輪が同時に接地する	※対処方法については メンテナンスガイドを ご参照ください。
	12)前輪が左右ともスムーズに360°回転する	
	13)車体を押した時に、違和感なく直進する	
②ブレーキ・駐車ロックの点検	1)ブレーキレバー(左右計2ヶ所)に傷や割れがない	ブレーキレバーセット
	2)ブレーキ基部に傷や割れがない	ブレーキ基部(左右セット)
	3)ブレーキ基部キャップに傷や割れがない	ブレーキ基部キャップ
	4)ブレーキバネカバーに傷や割れがない	ブレーキバネカバー
	5)ブレーキ板とタイヤの間隔が左右とも1.5mmを超えていない	※対処方法については メンテナンスガイドを ご参照ください。
	6)ブレーキレバーをブレーキが利くまで十分に握ることができる	
	7)ブレーキの利き具合が正常である	
	8)ブレーキ板に大きなガタつきがない	
	9)駐車ロックが正常に作動する	
③高さ調節の点検	1)ハンドルの高さ調節が正常に行える	高さ調節ノブボルト
	2)姿勢保持ベルトの高さ調節が正常に行える	姿勢保持ベルト基部(左右セット) 姿勢保持ベルト基部固定ノブボルト
④姿勢保持ベルト 固定用フックの点検	姿勢保持ベルトの固定が正常に行える	姿勢保持ベルト固定用フック
⑤折りたたみ動作の点検	折りたたみ動作がスムーズに行える	※対処方法については メンテナンスガイドを ご参照ください。

おつかれさまでした。

