


エクササイズステップ用 補助フレーム(歩行器)

取扱説明書

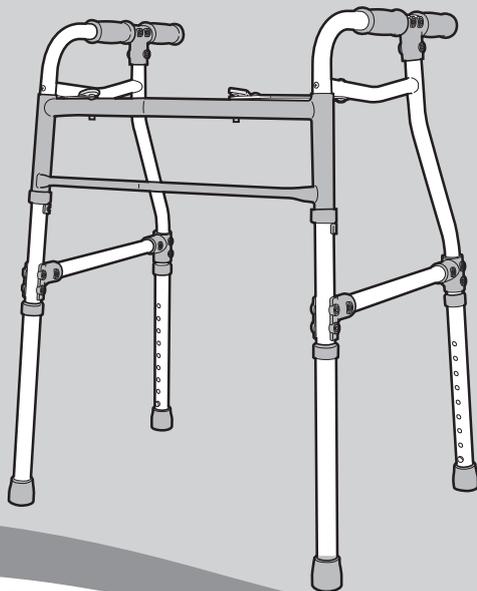

ご使用前にこの取扱説明書と保証書をお読みください。

このたびは本製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- 正しくお使いいただくため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書を読んだあとは必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部のなまえ・特長	3
使いかた	4
お手入れの方法	5
保証とアフターサービス	6
保証書	7

保存版
(保証書付)

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示 (図記号) で区分し、説明しています。(下記は絵表示の例です)



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



警告



使用前に、折りたたみロックが確実にかかっているか必ず確認すること
転倒し、けがの原因になります。




本体を開いたり、折りたたむときに、手や指をはさまないように十分注意すること
けがの原因になります。



注意



改造や分解をしないこと
本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。

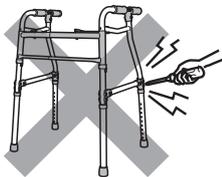


使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添うこと

使用前にネジのゆるみなど各部に異常がないか定期的に点検し、使用すること
けがの原因になります。



4本の脚部がすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び出して固定されているか必ず確認すること
転倒し、けがの原因になります。

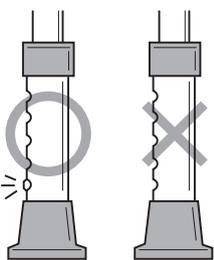

フィッティング (高さの設定など) は、お買い上げの販売店かケアマネージャーなど専門家に相談すること

使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店かケアマネージャーなど専門家に相談すること

濡れた床面などの滑りやすい場所では使用しないこと
転倒し、けがの原因になります。



必ず硬く平たんで安定した場所で使用すること
やわらかいマットや段差がある不安定な場所で使用すると転倒し、けがの原因になります。



踏み台昇降運動の補助、歩行器以外の用途では使用しないこと
子供を遊ばせないこと

安全上のご注意

注意

フレームにぶら下がったり、上に乗ったりしないこと

本体が破損、または転倒し、けがの原因になります。



イスやベッドなどから立ち上がるときの支えにしたり、フレームを引張ったりしないこと

転倒し、けがの原因になります。

脚ゴムが外れたまま使用しないこと

転倒し、けがの原因になります。また、床にキズがつく原因になります。

急な傾斜の付いた場所や階段では使用しないこと

転倒し、けがの原因になります。

屋外では使用しないこと

本体が正常にはたらかず、転倒し、けがの原因になります。

故意にゆすらないこと

本体が転倒し、けがの原因になります。

浴室など水気が多い場所では使用しないこと

転倒し、けがの原因になります。また、金属が腐食により破損したり、不安定となり、けがの原因になります。

体重が100kg以上の方は使用しないこと
本体が破損する原因になります。

戸外に放置したり、直射日光に当てたりしないこと

劣化および変色の原因になります。


ストーブなどの火気に近づけないこと
火災や変形、変色の原因になります。

塩ビ製フロアマット（床）など塩ビ製品の上に長期間放置しないこと

塩ビ製品や脚ゴムが劣化および変色する原因になります。

タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと

塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックや金属、ゴムが劣化、変色または破損し、けがの原因になります。

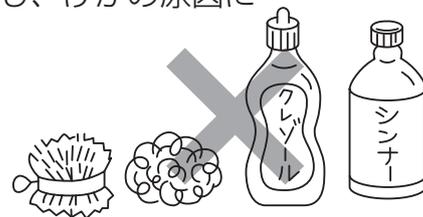

製品に直接水や洗剤をかけないこと


金属が腐食したり、劣化または破損し、けがの原因になります。

商品梱包用のポリ袋は幼児の手が届くところに置かないこと

幼児がかぶると窒息するおそれがあります。

各部のなまえ

エクササイズ ステップ用補助フレーム(歩行器)

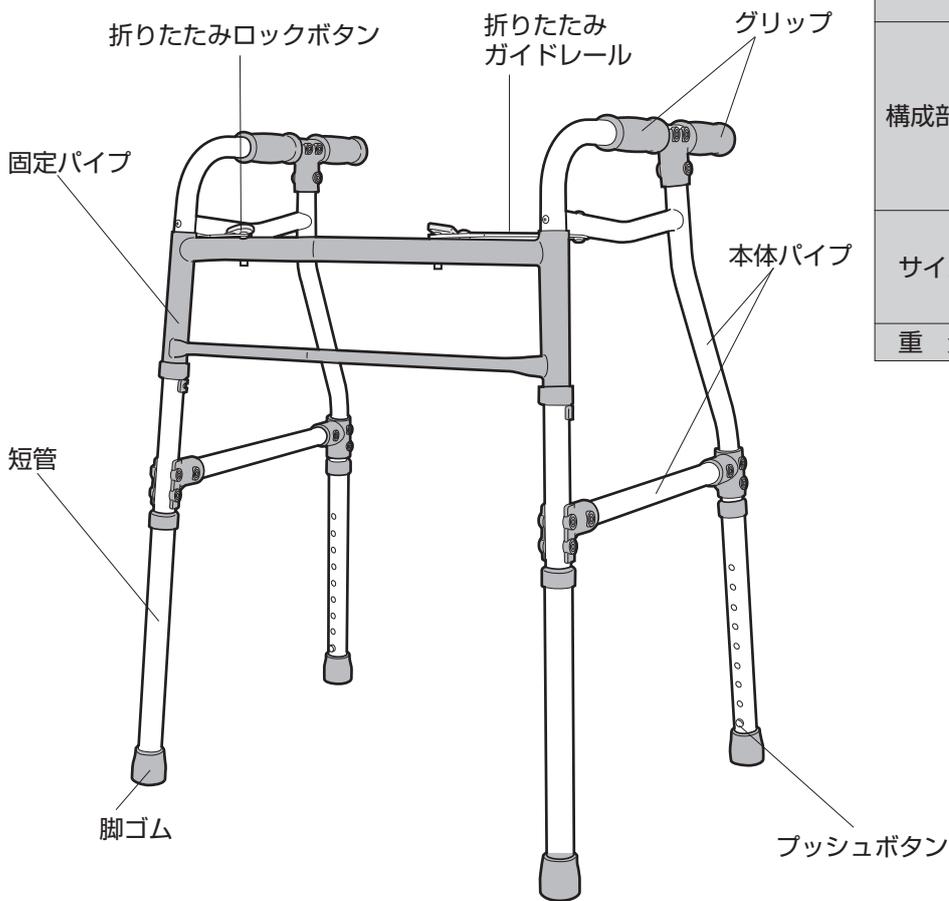

仕様

	部品名	材質
構成部材	本体パイプ・短管	アルミニウム
	固定パイプ・折りたたみガイドレール	スチール
	グリップ	塩化ビニル
	脚ゴム	合成ゴム
サイズ	幅62×奥行50×高さ80～100cm (折りたたみ時 幅62×奥行15×高さ80～100cm)	
重量	約3.7kg	


特長

- ステップ運動の昇降時に握り換えられるように、またフレームを利用したトレーニングを行いやすいように、後ろ側にもグリップが付いています。
- ステップ運動の昇降時に、使う方の体格や症状、ステップ台の高さに合わせてグリップの高さは80～100cmまで2.5cm刻みで9段階の調節が可能です。
- 高さ調節時の目安となるように短管の穴の上に「1」～「9」まで番号がついています。
- 歩行器としてもご使用いただけます。

使いかた

使用できる状態にセットする


グリップを握りながら左右に開き、折りたたみロックボタンが「カチッ」と音がし、ロックがかかればセット完了です。

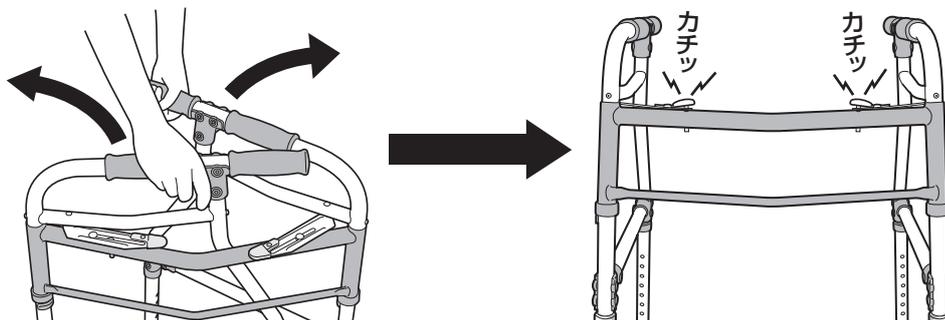

折りたたみロックが確実にかかっているか必ず確認すること
転倒し、けがの原因になります。

折りたたんだ状態にする

折りたたみロックボタンを押し、ロックを解除しながら折りたたんでください。

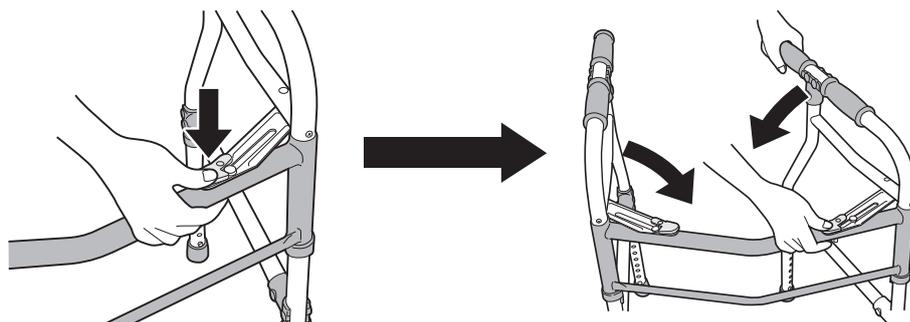


本体を開いたり、折りたたむときに、手や指をはさまないように十分注意すること
けがの原因になります。

高さ調節

グリップまでの高さは9段階（約80～100cm、2.5mm刻み）に調節できます。
調節は、脚部にあるプッシュボタンを押しながら短管をスライドさせてください。
プッシュボタンがカチッという音がして飛び出せば、セット完了です。



4本の脚部がすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び出して固定されているか必ず確認すること
転倒し、けがの原因になります。

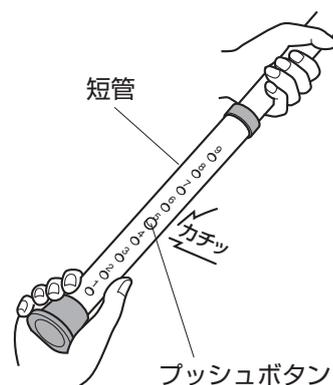


お手入れの方法

やわらかい布で乾拭きしていただくか、あるいはやわらかい布で水拭きをしてください。
汚れがひどい場合には、中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませ、汚れを取ったあと、乾いた布でよく拭き取ってください。

⚠
注意

- ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- ※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックや金属、ゴムが劣化、変色または破損し、
けがの原因になります。
- ※製品に直接水や洗剤をかけないこと
金属が腐食したり、劣化または破損し、
けがの原因になります。

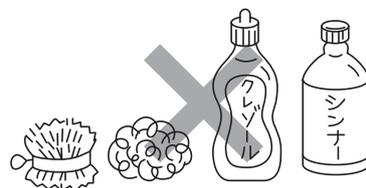

保証とアフターサービス よくお読みください

■保証書

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

保証期間：お買い上げ日から1年間

■修理を依頼される時

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店へご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書（取扱説明書）を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店へご相談ください。

部品供給、また修理対応期間はメーカー製品廃番後3年となります。

ただし、期間内でも破損箇所によっては、部品供給、または修理できないケースがございますのでご了承ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

保証とアフターサービス よくお読みください

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

1. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
2. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様相談室にご相談ください。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
 - 1) 保証書のご提示がない場合。
 - 2) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 3) 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
 - 4) お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。
 - 5) 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷。
 - 6) グリップや脚ゴムなど消耗品の損傷及び汚れ。
 - 7) 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈個人情報の取扱いについて〉

- 1) 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。
なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 2) 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	ご住所 〒
	ご芳名 TEL
★販売店	住所 〒
	店名 TEL

★ 印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見
・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元

 TOAGOSEI グループ

 アロン化成

アロン化成株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索

ライフサポート事業部

21.10 919197-2