

立ち上がり補助マット取扱説明書

このたびは立ち上がり補助マットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



警告



使用前にマットの破損や表裏面に汚れが付いてすべりやすくなっていないか確認すること
転倒し、けがの原因になります。

使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店かケアマネージャーなど専門家に相談すること



足や靴下・スリッパ・靴などが濡れた状態で使用しないこと
転倒し、けがの原因になります。

ほこりや砂・水・油などがある場所では使用しないこと
転倒し、けがの原因になります。



注意



マットを使用する前に、必ず床面の砂やほこり、水などを取り除くこと
マットの裏面に砂やほこり・水などが付着すると、すべる原因になります。

マット表裏面に汚れた水などが付着し、すべりやすくなった場合は、速やかに使用を中止し、表裏面の汚れを洗い流し、乾燥させ使用すること
転倒し、けがの原因になります。

マットの端などがめくれて、引っかかりつまずいたりする恐れがあるので、十分注意すること



濡れたタイルや金属面、浴室の洗い場・浴槽の底では使用しないこと
転倒し、けがの原因になります。

子供・幼児を遊ばせるなど他の用途では使用しないこと

マットに飛び乗らないこと
転倒し、けがの原因になります。



高温多湿の場所に長時間放置しないこと
変形やカビが発生する原因になります。

ストーブなど、火の近くに置かないこと
変形や劣化、火災の原因になります。

直射日光の当たる場所に設置したり、乾かしたりしないこと
変色や変形、劣化の原因になります。

丸めたり、折り曲げたりしたまま長時間放置しないこと
変形の原因になります。

洗濯機で洗ったり、乾燥機は使用しないこと
変形や劣化、破損の原因になります。

お手入れのときは中性洗剤を使用し、塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
変形や劣化、破損の原因になります。

使いかた

携帯用 介助補助などで一時的に使用したい場合や外出先などで使用したいとき

据置用 一定の場所（ベッドやトイレ）に常時設置して使用したいとき

●使用可能な場所

- ・病院・介護施設内の床（塩ビフロアー）やフローリング、畳、じゅうたんなど
- ・上記床面で、ほこりや砂・水・油などの無い場所

●使用できない場所

- ・濡れたタイル・金属面、浴室の洗い場、浴槽の底、屋外の床面など
- ・ほこりや砂・水・油などがある場所
- ・直射日光の当たる場所

●使いかた

- ①ベッド・トイレ・椅子・車いすなどで、立ち座り動作を行う目的・場所で使用します。
- ②設置したい床面のほこりや砂・水などをきれいに取り除きます。
- ③黒色の面が床面に接するように設置します。
- ④表裏面が汚れたり、水が付いてすべりやすくなった場合は、お手入れの方法に従って汚れを洗い流し、乾燥させてから使用してください。（表裏面が堅くなってすべりやすくなった場合は速やかに使用を中止し、新しいものを購入してください。）

注意

※使用者の身体状況や動作状況によっては、マットのグリップ力が強く、つまづく恐れがあるので、十分注意すること

お手入れの方法


マットの表裏面が汚れたときは、中性洗剤を使用してやわらかいスポンジで水洗いしてください。

※乾燥は、マットが折れ曲がらないように平らな面に置き、日陰干しをしてください。




注意

- ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- ※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
- ※洗濯機で洗ったり、乾燥機は使用しないこと
変形や劣化、破損の原因になります。

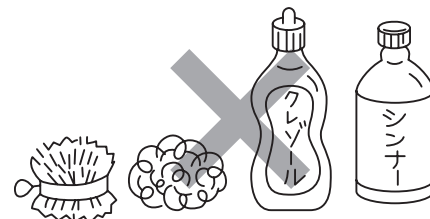


製品仕様


携帯用

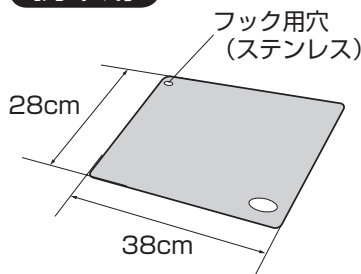

据置用

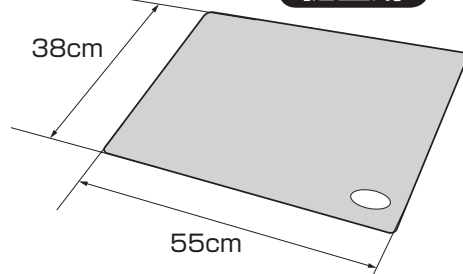

断面図

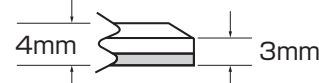

材質	表裏面：オレフィン系エラストマー 芯材：合成ゴム
サイズ	携帯用 幅 38 × 奥行 28 × 厚み 0.4cm 据置用 幅 55 × 奥行 38 × 厚み 0.4cm
重量	携帯用 0.6kg 据置用 1.1kg

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索