

誤

❗ 使いましょう

① 確認しましょう

バケツ蓋を便座の上にのせてフタをすることができます

- 座面の開閉動作が難しい場合は、座面を開けたままでバケツ蓋を便座の上にのせてフタをすることができます。

※ バケツ蓋が汚れている場合は、洗ってからご使用ください。



座面の開閉が難しい場合におすすめです



- 便座の上にバケツ蓋をのせた状態で、座ったり、座面を閉じないこと
製品や、バケツ蓋が破損する原因になります。



- 座面を閉じるときは、バケツ蓋でバケツを閉じること
座面劣化の原因になります。

② ご使用の前に

③ 使いましょう

④ お手入れしましょう


⑤ 各種機能

⑥ 困ったときには

座面を後方に倒すことができます（後方介助）


- ① 座面を開けた状態から座面後部を持ち上げてください。座面のロックが解除されます。

①

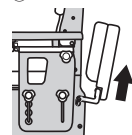

- ② そのままトイレの後側へ座面を倒せば、後方からの介助をおこなうことができます。

②

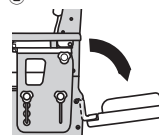

座面を後ろに倒して使用する場合は、

- 座面を持ってゆっくりと倒すこと
座面と本体に指や手をはさみ、けがの原因になります。
- 必ず介助者が付き添い、使用者の身体を支えて使うこと
背もたれと座面（便座）の間に身体がはさまったり、転倒したり、けがの原因になります。
- 後方に倒した状態で座面に力をかけないこと
本体が転倒したり、座面が破損し、けがの原因になります。



正

❗ 使いましょう

① 確認しましょう

バケツ蓋を便座の上にのせてフタをすることができます

- 座面の開閉動作が難しい場合は、座面を開けたままでバケツ蓋を便座の上にのせてフタをすることができます。

※ バケツ蓋が汚れている場合は、洗ってからご使用ください。



座面の開閉が難しい場合におすすめです



- 便座の上にバケツ蓋をのせた状態で、座ったり、座面を閉じないこと
製品や、バケツ蓋が破損する原因になります。



- 座面を閉じるときは、バケツ蓋でバケツを閉じること
座面劣化の原因になります。

② ご使用の前に

③ 使いましょう

④ お手入れしましょう

⑤ 各種機能

⑥ 困ったときには

本製品は座面を後方に倒すことができません。