

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

自動計測タイプ

スマホ/タブレットで「日々の排せつの記録」と 「排せつ状態の通知」を受け取れる ポータブルトイレ



無線LANで
データを送信し、
専用アプリで
確認できます。



動画で
チェック



記録

日々の健康状態を記録する


自動的に計測し記録することで、**排せつリズム**・頻尿・便秘・脱水
症状などの**健康状態を把握**できます。

■自動で計測できる情報

- 1 排泄重量
- 2 着座時刻
- 3 着座時間



■計測データのグラフ化

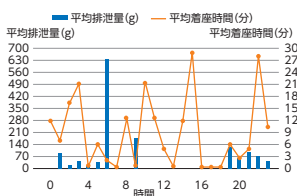

■計測データの一覧表示

日付	着座時刻	着座時間	排泄重量
10月22日	12:13	5分	400g
	10:14	15分	500g
	9:00	30分	300g
10月22日合計	-	40分	1200g
10月21日	15:30	14分	460g
	12:51	6分	40g
	9:30	20分	510g
10月21日合計	-	40分	1010g

通知

見守りや排せつ介助の負担軽減

■通知される情報

- 1 着座通知
- 2 離座通知
- 3 長時間着座通知
- 4 バケツ交換通知



■実際の通知内容

通知は右図のようなプッシュ通知が届きます。



安寿花子さんが
着座しました

安寿花子さんが
離座しました

安寿花子さんが
10分以上
着座しています

バケツ内の
重量が500gを
超えました

活用方法



排せつリズムを分析し
トイレ誘導時間の検討に

活用方法



排せつ情報から排せつ日誌や
支援加算等の資料作成に

活用方法



着座/離座通知から
離れた場所でも
利用状況を確認できる

活用方法



長時間の着座時間通知
から失神/寝落ちなどの
気づき

活用方法





排泄重量の通知から
排せつ物処理の
タイミングを知る



計測アプリ紹介

この製品/アプリの最新情報やダウンロードに関しては、二次元バーコードを読み取った先のWEBサイトに公開します。→

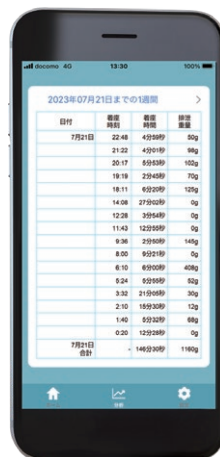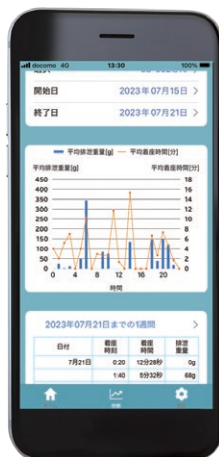

利用者様の見守り

スマートフォンやタブレットを通じてどこからでも利用者様の状況を確認できます。

通知

- ①トイレに着座や離座をした時
 - ②トイレに長時間着座している時
 - ③バケツを交換したい重量以上に、排せつ物が溜まった時
- ※それぞれ通知OFFの設定も可能です。

レポート

利用者様の排せつ状況を指定した期間から、
①各時間帯で排せつ重量の平均を表す棒グラフ
②各時間帯で着座時間の平均を表す折れ線グラフ
③トイレ利用毎のデータ一覧
が作成されます。

例えば、①のグラフから「朝に排せつが多い」と傾向がわかれば、トイレ誘導につなげることができます。また、③のデータ一覧からは着座時間と排せつ重量を確認でき、健康状態の把握につなげることができます。

※アプリ画面はイメージです。デザインや機能等は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

購入前の注意点の確認

- 本製品は医療機器ではありません。
- 施設や居宅の無線LANを使って通信しますので、事前に無線LANの設備をご用意をお願いします。
- アプリのダウンロード及びサービスはインターネットへの常時接続が必要です。
- 全てのスマートフォンやタブレットで動作を保証するものではありません。
- 通信環境により通知が遅れたり、通知されない場合があります。



アースブラウン



ミストブルー

バケツ容量	約9L
材質	(本体・バケツ・ひじ掛け) PP (前脚) ABS (背もたれクッション) PE
梱包入数	1
付属品	防臭消耗品(試供品)、KN吸着便座シート
※組立て式	

介護ロボット

ポータブルトイレFX-30 自動計測タイプ

商品名タイプ	カラー	商品コード	JANコード	TAISコード	価格	重量	サイズ
標準便座	アースブラウン	532-990	251607	000739	120,000円 (税込132,000円)	約13.5kg	幅53×奥行63×高さ76～90cm
	ミストブルー	532-991	251614	000739		約13.5kg	

※ JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…