

バスボード H-S / H-L
はねあげくん

入浴スタイルの大変革！


この一台で自立入浴から介助入浴まで
幅広い対象者の入浴をサポートします。



プラネット福祉用具アワード 2017
二ツ星 獲得



はねあげ座面で浴槽への出入りを、
より安心して行えます。

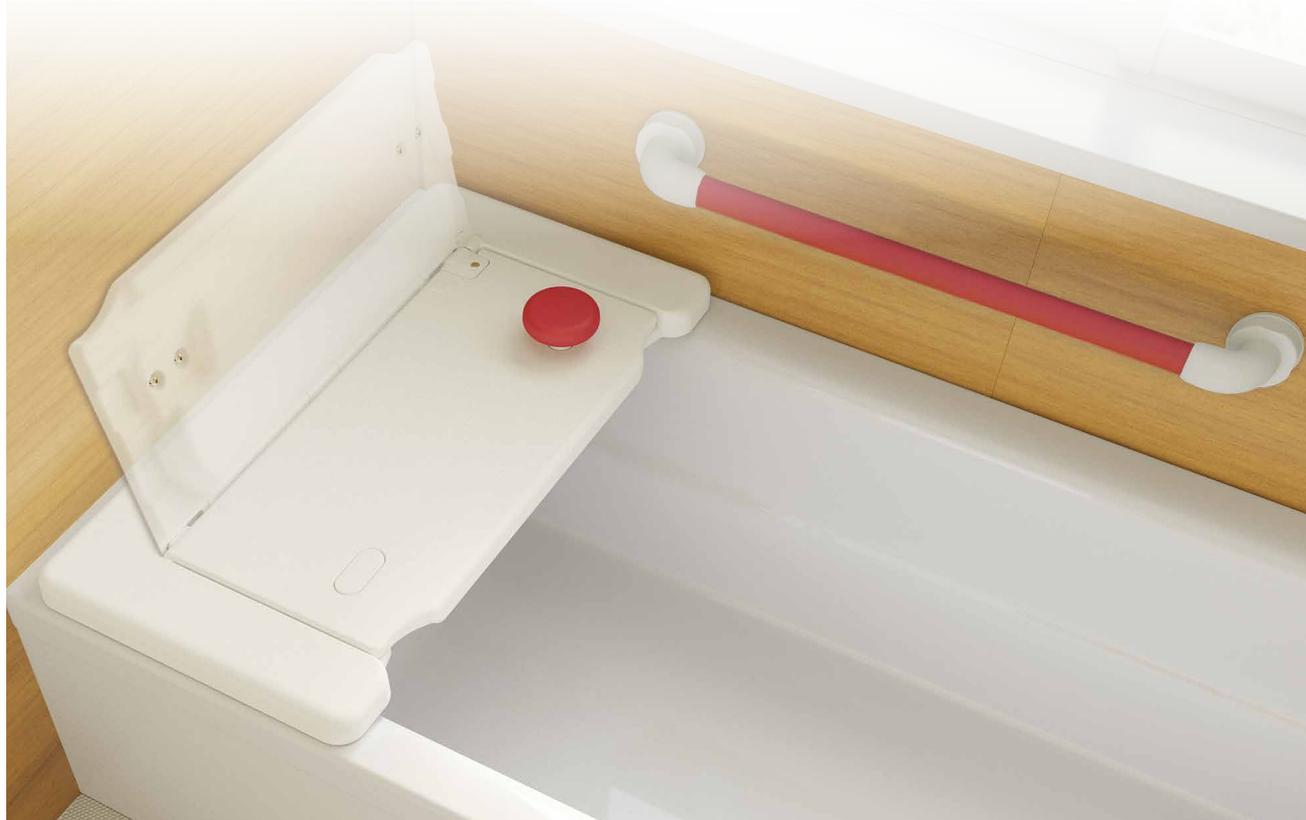

自立で入浴できる！

またぎ入浴



両手でしっかり身体を支えられる。

座位入浴



身体を引き寄せやすい。

介助負担を軽減！



片手で簡単に座面はねあげ。

より安心な入浴



ゆっくり閉まる
座面



オイルダンパーを採用している
ので、座面からうっかり手を放し
てもゆっくり閉まります。

壁付け手すり
併設可能



座面端部と壁の間に距離を設け
ているので、座面が壁付け手す
りに引っかかりません。

枕形状の
座面裏



はねあげた座面の裏側が枕形状
になっており、リラックスした姿
勢で入浴できます。

アロン独自の
「キノコ型グリップ」



グリップを握るのが難しい方でも、グリ
ップに掌を乗せてプッシュアップするこ
とで、身体を移動させることができます。

〈介助入浴〉

入浴時の介助負担を軽減できます。

>> Before

これまでのバスボードは、介助者が利用者を抱えながらボードを取り外さなければならず、介助負担が大きかった。

利用対象者：立ち上がりや歩行などが自力では困難な方。
(要介護2程度)




>> After

はねあげくんなら

座面をはねあげられるので、入浴介助の負担を軽減できます。

介助入浴時の
グリップ取り付け例

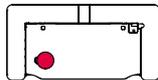

浴槽の奥側のみグリップを取り付けます。



斜め45°に深く座らせませす。



浴槽側の足を浴槽に入れます。



洗い場側の足を浴槽に入れます。



グリップを握らせて、中央に移動させます。



抱えて立ち上げらせ、バスボードをはねあげます。



静かにお湯に浸からせませす。



グリップを握らせると、より身体を安定させることができます。



グリップを握るのが難しい方は、グリップに掌を乗せて身体を支えることができます。

Point!

事例

脳血管疾患による片マヒで、歩行や立ち座りに軽介助が必要な方。本人や家族は自宅での入浴を希望しているが、介助者である妻が利用者の身体を支えたままボードの取り外しができず、浴槽に浸かることを諦めていた。



はねあげくんを利用することで、妻の介助で自宅の浴槽に浸かれるようになった。そのため、血行促進効果により、深い睡眠がとれるようになってADL向上につながった。



〈座位入浴〉

一人でも安全に座位入浴が行えます。

>> Before

これまでのバスボードでは、一度取り外さないで浴槽に浸かれないので、介助してくれる人がいないと使えず、一人で入浴できなかった。


利用対象者：立ち上がりや歩行などが不安定な方。
自分でバスボードを外すのは無理でも、はねあげ動作ならできる方。(要介護1程度)



>> After

はねあげくんなら 座面をはねあげられるので、一人でも安全に入浴ができます。

座位入浴時の
グリップ取り付け例

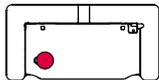

浴槽の奥側のみグリップを取り付けます。



斜め45°に深く座ります。



グリップを握り、身体を安定させます。



浴槽側の足を浴槽に入れます。



洗い場側の足を浴槽に入れます。

Point!



グリップを握って身体を引き寄せるのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップできます。



グリップを握って中央に移動します。



手すりにつかまって立ち上がり、バスボードをはねあげます。



静かにお湯に浸かります。(縦手すりを使えば、より浴槽から出やすくなります。)

事例

軽度な膝関節症の虚弱高齢者で、自立歩行はできるが、浴槽に入るときに膝が上手く曲がらず、ヘルパーの介助を受けて入浴している。本人は、一人で入浴したいと望んでいる。



はねあげくんを選定し、座位での入浴方法に変えたところ、自立入浴が可能になった。




〈またぎ入浴〉

これまでのバスボードの使い方に加え、安全にまたぎ動作が行えます。

>> Before

自宅の浴槽に浴槽手すりが取り付けられず、またぎ動作が不安定なので、浴槽に浸れることを諦めていた。
(転倒を予防するために、シャワー浴しかできなかった。)

利用対象者：自立で立ち上がりや歩行はできるが、浴槽への出入りに不安がある方。(要支援2程度)
浴槽手すりが取り付けできない浴槽をお使いの方。

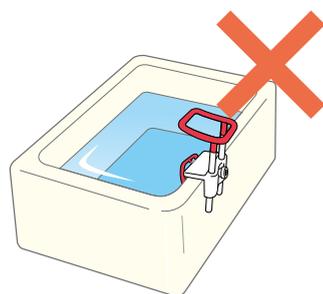


>> After

はねあげくんなら

様々な浴槽に対応でき、安全にまたぎ動作ができます。

またぎ入浴時の
グリップ取り付け例

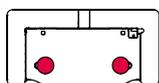

両側にグリップを取り付けます。



グリップをつかみます。



浴槽側の足を浴槽に入れます。



洗い場側の足を浴槽に入れます。



手すりを握って身体を安定させながら、バスボードをはねあげます。

Point!



体格に合わせて、ボードに手を乗せて身体を安定させることもできます。



手すりを握りながら、方向転換します。



手すりと浴槽の縁につかまって、ゆっくりと腰を下ろします。



静かにお湯に浸かります。(縦手すりを使えば、より浴槽から出やすくなります。)

事例


要支援の高齢者で入浴も自立して行えているが、浴槽縁を持ってまたいでいる際に、手が滑って転倒しそうになることが頻繁にあった。転倒リスク低減のため、浴槽手すりを設置しようとしたが、設置適合する浴槽ではなく、また賃貸住宅のため住宅改修も不可であり、入浴動作を補助する福祉用具の導入ができなかった。



はねあげくんを選定し、浴槽またぎ動作を一人で安全にできるようになった。



様々な浴槽に対応

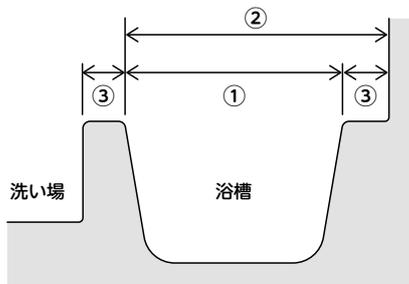

浴槽の大きさに合わせてH-S/H-Lの2サイズを用意。様々な浴槽に対応できます。

項目	バスボード H-S	バスボード H-L
①浴槽内幅	56~69cm	62~75cm
②浴槽縁幅(奥側) +浴槽内幅	66cm以上	72cm以上
③浴槽縁幅 (浴室側、奥側 共に)	3.5cm以上	

- 縁が平らな浴槽に使用すること
 - 浴槽の縁が傾斜しているものには使用しないこと
- 取り付けが不安定になり、体重をかけたときにバスボードが動き転倒し、けがの原因になります。



バスボード H-S



バスボード H-L



- 使い方に合わせてグリップは付け外しが可能です。
- 体格や動作に合わせて、グリップの位置調節が可能です。

仕様


バスボード H-S / H-L はねあげくん

商品コード	[H-S] 535-102 [H-L] 535-105
商品サイズ	[H-S] 幅76×奥行40×高さ15cm(ボード厚さ:3.5cm) [H-L] 幅82×奥行40×高さ15cm(ボード厚さ:3.5cm)
商品重量	[H-S] 約5.8kg [H-L] 約5.9kg
材質	(座面) 表面: ポリプロピレン/ポリエチレン 芯材: アルミニウム ポリスチレン/ポリエチレン (本体) 表面: ポリプロピレン 補強材: ステンレス (幅調節受け、幅調節ネジ、固定ストッパー本体) ABS樹脂 (ストッパーゴム、脚ゴム) エラストマー樹脂 (グリップ) 被覆材: エラストマー樹脂 芯材: ポリプロピレン
梱包入数	2
JAN	[H-S] 49-70210-858141 [H-L] 49-70210-858158

39,800円(税抜)

商品寸法図

単位: cm

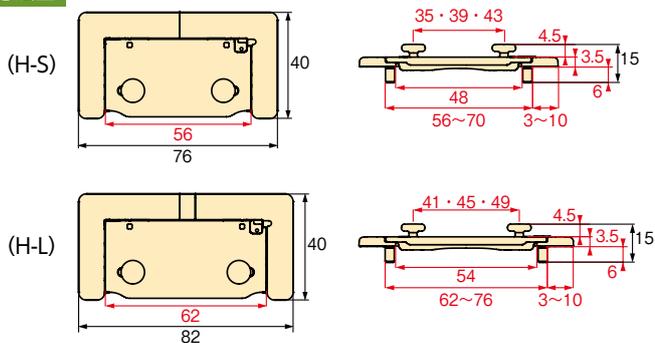

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00 (12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…