

「やりたい」を  
「できる」に変えよう。

置くだけ、楽ちん

滑り止め性能が長持ち!

エラストマー素材になって耐久性がアップしました!※1



※1:複合的な劣化要素(紫外線、温度変化、薬品など)による耐久性が従来品に比べ70%向上しました。

浴槽タイプに合わせて選べる  
3サイズ

小:和風タイプの浴槽




レッド




中:和洋折衷タイプの浴槽




グリーン

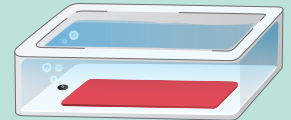

大:洋風タイプの浴槽

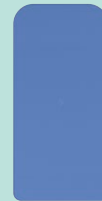

ブルー

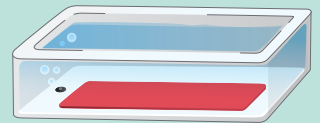

しっかりすべり止め! (劣化耐性 従来比70%アップ)


足元、お尻のすべり止めをします。



新たに材質をエラストマー素材に変え、劣化耐性が70%UP(アロン調べ)したので、より安心して使用いただけます。



浴槽底に設置して、身体を安定させることができます。

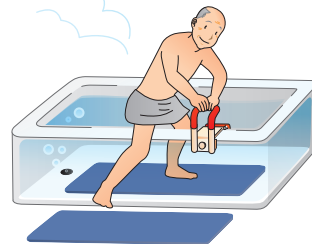


浴槽への出入りで足をつく場所等、すべりの気になる場所に設置できます。

敷く向きを変えて隅までぴったり


カーブの大きさを使い分けられるので、多くの浴槽にぴったりフィット。

カーブの大きい浴槽の隅まで寄せられる

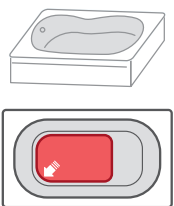

カーブの大きさを  
使い分け!


昔ながらのカーブの小さい浴槽にも

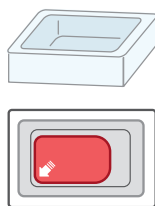

カットして使用可能

底面幅や浴槽のカーブに合わせて敷けるので安心です。

浴槽台との併用時に  
おすすめ。

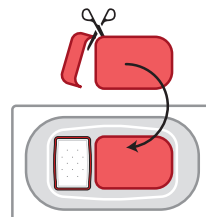

幅方向は32~38cmの間で調節できます。



底面が狭い浴槽のときにカットして使えます。

製品裏面にカットする目安(カットライン)が入っています。

## おく楽シリーズ共通特長

**1 おくだけ簡単設置**

自重で沈むのでお湯をはった後でも設置可能です。

洗い場にも設置できます。

**2 裏面はクローバー形状で強力すべり止め**

あらゆる方向にグリップ力を発揮します。

**3 外周スロープ形状でつまずき、めくれを防止**


すり足歩行の人でも安心。

※カット前

**4 長さをカットできます**

浴槽台との併用時に おすすめ。

### 商品寸法図(単位: cm)

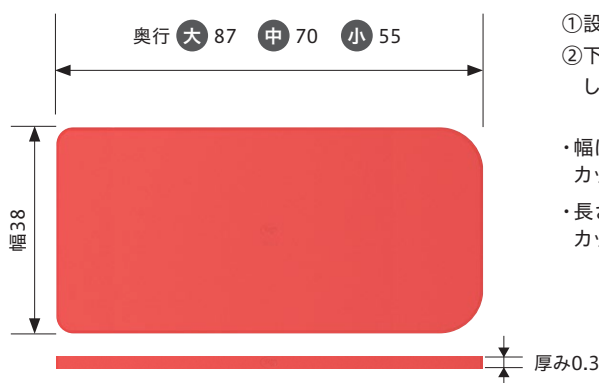


### マットをカットする場合

マットをカットして使用する場合は、下図の条件に従って裏面のカットラインに沿ってカットしてください。

- ① 設置する浴槽のカーブ形状に合わせて、マットのカーブの形状を決めます。
- ② 下図のように基準となるカーブの方向からサイズを決め、カットラインに沿ってカットします。

- ・幅は3cmピッチでカットできます。
- ・長さは5cmピッチでカットできます。

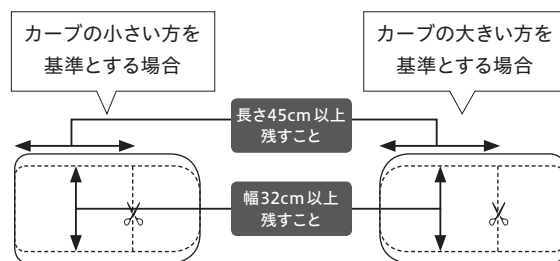

### おく楽 すべり止めマット AR

サイズ	カラー	商品コード	商品サイズ	商品重量	材質	梱包入数	JAN	価格		
小	レッド	535-285	幅 38 × 奥行 55 × 厚み 0.3cm	約 0.9kg	エラストマー (防カビ剤配合)	6	034439 034446 034453	5,000 円 (税込 5,500 円)		
	ブルー	535-286								
	グリーン	535-287								
中	レッド	535-288	幅 38 × 奥行 70 × 厚み 0.3cm	約 1.2kg			エラストマー (防カビ剤配合)	6	034408 034415 034422	5,200 円 (税込 5,720 円)
	ブルー	535-289								
	グリーン	535-290								
大	レッド	535-291	幅 38 × 奥行 87 × 厚み 0.3cm	約 1.5kg			エラストマー (防カビ剤配合)	6	034378 034385 034392	6,000 円 (税込 6,600 円)
	ブルー	535-292								
	グリーン	535-293								

JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。

浴槽内・洗い場兼用



## アロン化成株式会社

### ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475  
 大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7101  
 名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)796-8040  
 福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

**お客様相談室** フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

■お問い合わせは…