

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

温浴シャワーイスHP
解説ビデオ公開中!



入浴スタイルの大変革。

シャワーイスに座ったまま温浴ができる。
入浴介護の負担を軽減。



幅広く
座面が高い
タイプが
登場!!

・様々な体格の方が
使用する介護施設で!
・立ち座りの困難な方に!
オススメです。



大柄な方にも
ご利用いただけます

ひじ掛け内寸40cm
(従来品+3cm)*

関節疾患などの方も
立ち座りしやすくなります

座面高さ35~50cm
(従来品+7cm)*

*従来品:温浴シャワーベンチHPフィット

浴槽浴の困りごと

転倒リスク、
介助負担...

身体への
負担...

溺水リスク...



ハンドシャワー浴の困りごと

身体が
温まらない...

介助負担が
大きい...



温浴効果で介助負担軽減、
転倒・溺水防止にも

水圧による負担が少ない温浴シャワーで身体の芯までポカポカ温まり、自然な眠りが期待できる。また、シャワーヘッドを常に動かしながら身体にお湯を当てる介助、移動介助も不要。



ポイント 1 身体が芯まで温まる

ポカポカ



ご利用者の体格にあわせたシャワーアームは、
身体の近くから広範囲にお湯を当てられるので、全身が温まります。

効果的に身体を温めます





上半身に沿うように設計されたシャワーアーム。身体を包み込むようなシャワーが効果的に温めます。

温浴シャワーシリーズ

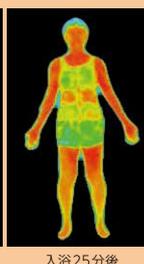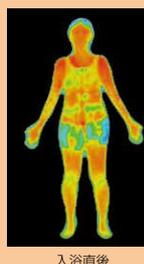

ハンドシャワー

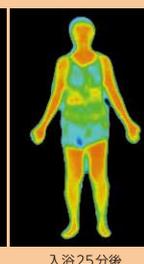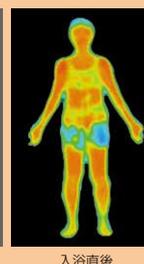

5分入浴し、直後と25分後の温度を温浴シャワーとハンドシャワーと比較。ハンドシャワーよりも温もりが持続します。

※種水ホームテクノ(株)調べ

ポイント 2 工事不要で誰でも簡単に設置できる

ラクラク




浴室の水栓シャワーホースにジョイント部品を取り付けるだけで温浴ユニットに接続できます。

※初めて設置される場合は、ホースからシャワーヘッドを外して部品を取り付けてください。

※必ずシャワーを適温にしてからご使用ください。

〔商品寸法図〕

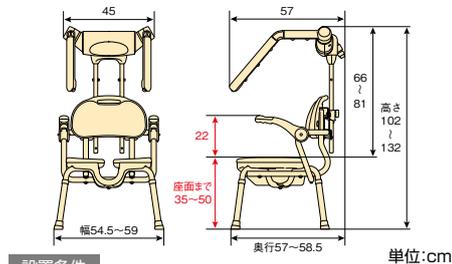

設置条件

- ・シャワー付き水栓金具かどうか確認してください。
- ・給湯器および水栓金具は、42°Cのお湯が毎分10リットル出るか確認してください。
- ・対応水栓メーカー:TOTO、LIXIL(INAX)、カクダイ、SANEI ※一部除く

最大使用者体重 100kg



特定福祉用具/特定介護予防福祉用具

※介護保険適用の有無は申請する市区町村にご確認ください。

温浴シャワーイスHP

価格	98,000円(税抜)
商品コード	536-315
商品サイズ	幅54.5~59×奥行57~58.5×高さ102~132cm (座面までの高さ:35~50cm)
商品重量	約7kg
材質	(温浴ユニット・ひじ掛け)ポリプロピレン (座面・背もたれ)ポリエチレン (グリップ)エラストマー (脚ゴム)合成ゴム (ソフトパッド)EVA樹脂 (パイプ)アルミニウム
梱包入数	1
色調	ベージュ
JAN	49-70210-025352
T A I S	00221-000570

小柄な方、狭い浴室にはこちら!!

温浴シャワーベンチHPフィット



折りたためるコンパクトタイプ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

- 東京支店 ☎(03)3502-1422
- 仙台支店 ☎(022)291-5475
- 大阪支店 ☎(06)6448-5127
- 広島支店 ☎(082)245-7101
- 名古屋支店 ☎(052)203-0396
- 札幌営業所 ☎(011)796-8040
- 福岡支店 ☎(092)741-1411
- 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00(12:00~13:00はのぞく)

・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
・個人情報適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみご利用いたします。

■お問い合わせは…