

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

NEW

E1600

NEW


E1850

NEW

E2100

距離の長いポーチや玄関に

3枚のベースプレートと2本の手すりの
幅広い組み合わせで様々なシーンに

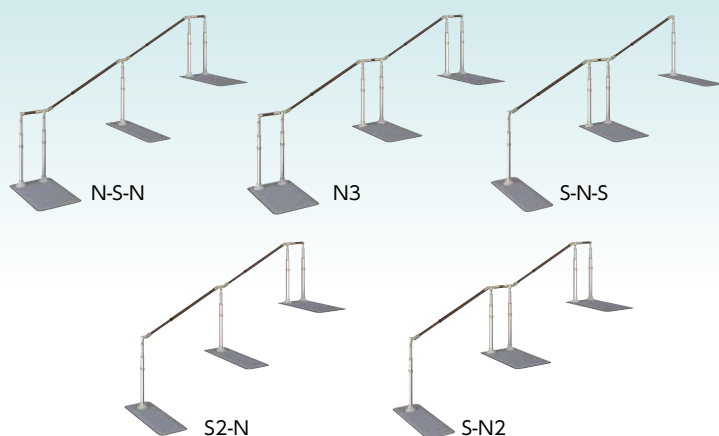

E800

E800-S

E1050

E1050-S

ポーチ部や玄関への設置に

手すり伸縮や踏面における
階段で細かな現場調整に対応



630

930

ポーチ部や玄関への設置に


段差昇降や歩行の補助に



240

ベランダや縁側への設置に

立ち座りの補助や姿勢保持に

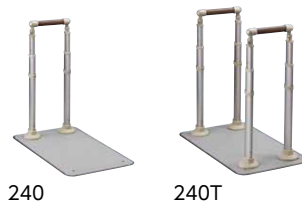

工事不要であつという間に手すりが設置できるから、 住宅改修できなかった方の声に応えることができます。

住宅改修でよくあるお困りごと

時間がかかる。

骨折をしてしまった…。すぐにでも手すりがほしいけど、住宅改修では設置までに時間がかかる。



お金がかかる。

以前に住宅改修を行ったので、追加の工事は介護保険の限度額を超えてしまう。



賃貸だからあきらめてた。

賃貸住宅なので工事申請ができないが、手すりがないと移動がづらい。



手すりを外せない。

住宅改修する前に本当に使えるか試してみたい。でも、一度取り付けたら外せないからなあ…。



家が傷つく。

代々受け継いだ家なので住宅改修して家が傷つくのは困る。



こんな悩みを
解決!




障害物がある動線に対応

設置したい場所が真っ直ぐとは限りません。そんなときに、左右にも首振り機能があるので、利用者が使いやすい場所に設置できます。




ロングタイプは片側90°まで首振りできるため、直角に曲がる階段ポーチにも対応。

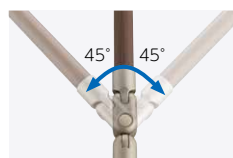

左右に45°ずつまで首振りできます。

伸縮機能 (65～80cm／80～105cm)

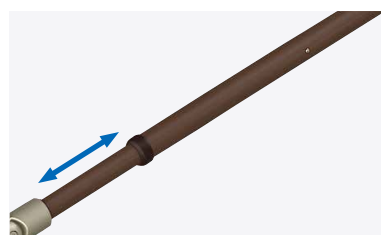

手すりは無段階で伸縮可能。



調整後、六角レンチで締め付けるだけ(2か所)で調節完了。

使う人や環境によって片側／両側タイプ、階段／ロング(3枚プレート)タイプが選べます。

スタンダードな片側タイプ




より安心して歩行したい方には両側タイプ



踏面に置ける階段タイプ




距離の長いポーチなどにロングタイプ

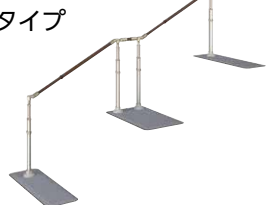

簡単に行える手すりの高さ調節

手すりの高さは、差し込み固定ピン方式で簡単調節でき、身体の状態変化に対応できます。

75、80、85cmの3段階。

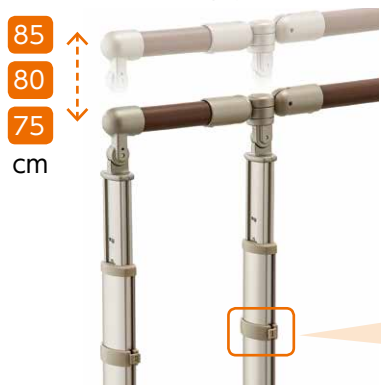

固定ピン



Case 1

ベランダで洗濯物を干す際の
体勢が不安。

設置商品：AT-C-240

Point

築約8年のマンション。
ベランダに洗濯物を干す際の姿
勢保持用として設置。



Case 2

ベランダに出るまでに段差が
あるので手すりがほしい。

設置商品：AT-C-630

Point

築約14年のマンション。
ベランダと室内に5cmの段差が
あり、出入り補助として設置。



Case 3

外に出るまでに段差があるので
手すりがほしい。

設置商品：AT-C-E1050

Point

リフォーム約5年の戸建。
段差高さ42cm。
階段の移動補助として。



Case 4

外に出るまでに段差があるので
手すりがほしい。

設置商品：AT-C-930T

Point

建替後40年超の戸建。
玄関前の移動補助として使用。




Case 5

外に出るまでに段差があるので
手すりがほしい。

設置商品：AT-C-E2100-S-N2

Point

玄関前の移動補助として使用。

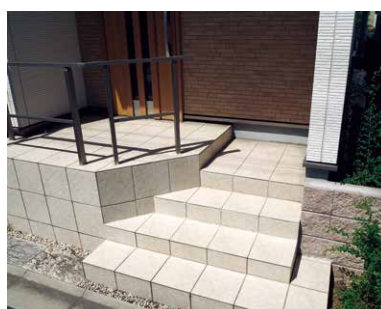

部品の組み合わせで様々なサイズが展開できるため、資産の有効活用が可能です。

構成部品

部品名称	1 AT-C共通ベースプレート	2 AT-C用ベースプレートW940	3 AT-C共通支柱セット
商品コード	592-220	592-388	592-395
JAN(4970210)	857052	025253	027011
希望小売価格	60,000円(税込66,000円)	60,000円(税込66,000円)	42,500円(税込46,750円)
イメージ			
部品名称	4 AT-C用S支柱セット	5 AT-C-240〈支柱セット〉	6 AT-C用接続支柱セット
商品コード	592-390	592-360	592-352
JAN(4970210)	025284	001233	032961
希望小売価格	27,500円(税込30,250円)	50,000円(税込55,000円)	27,500円(税込30,250円)
イメージ			
部品名称	7 AT-C-630手すりセット(キャップ付)	8 AT-C-930手すりセット(キャップ付)	9 AT-C-E1050-S手すりセット(キャップ付)
商品コード	592-363	592-222	592-389
JAN(4970210)	001264	857076	025277
希望小売価格	15,000円(税込16,500円)	15,000円(税込16,500円)	40,000円(税込44,000円)
イメージ			
部品名称	10 AT-C-E800-S手すりセット(キャップ付)	11 AT-C用接続240手すりセット	12 AT-C-E800-S接続手すりセット(CAP)
商品コード	592-397	592-355	592-353
JAN(4970210)	027059	032992	032978
希望小売価格	40,000円(税込44,000円)	9,500円(税込10,450円)	40,000円(税込44,000円)
イメージ			
部品名称	13 AT-C-E1050-S接続手すりセットR(CAP)		
商品コード	592-354		
JAN(4970210)	032985		
希望小売価格	40,000円(税込44,000円)		
イメージ			

他にも補修用の部品を多数ご用意しています。

部品構成一覧表

					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
セット製品名称	商品コード	JAN	TAIS	希望小売価格	商品コード	592-220	592-388	592-395	592-390	592-360	592-352	592-363	592-222	592-389	592-397	592-355	592-353	592-354
					AT-C共通ベースプレート	AT-C用ベースプレートW940	AT-C共通支柱セット	AT-C用S支柱セット	AT-C240(支柱セット)	AT-C用接続支柱セット	AT-C630手すりセット(キャップ付)	AT-C930手すりセット(キャップ付)	AT-C-E1050手すりセット(キャップ付)	AT-C-E800手すりセット(キャップ付)	AT-C用接続240手すりセット	AT-C-E800接続手すりセット(CAP)	AT-C-E1050接続手すりセット(CAP)	
AT-C-240	870-140	001196	000542	110,000円(税込121,000円)		1				1								
AT-C-240T	870-141	001202	000543	160,000円(税込176,000円)		1				2								
AT-C-630	870-142	001219	000544	220,000円(税込242,000円)		2		2				1						
AT-C-630T	870-143	001226	000545	320,000円(税込352,000円)		2		4				2						
AT-C-930	870-130	854457	000500	220,000円(税込242,000円)		2		2					1					
AT-C-930T	870-131	854464	000501	320,000円(税込352,000円)		2		4					2					
AT-C-E1050	870-150	007563	000553	245,000円(税込269,500円)		2		2						1				
AT-C-E1050T	870-151	007570	000554	370,000円(税込407,000円)		2		4						2				
AT-C-E1050-S	870-160	025222	000568	230,000円(税込253,000円)		1	1	1	1					1				
AT-C-E1050T-S	870-161	025239	000569	340,000円(税込374,000円)		1	1	2	2					2				
AT-C-E800	870-162	026946	000573	245,000円(税込269,500円)		2		2							1			
AT-C-E800T	870-163	026960	000574	370,000円(税込407,000円)		2		4							2			
AT-C-E800-S	870-164	026977	000575	230,000円(税込253,000円)		1	1	1	1						1			
AT-C-E800T-S	870-165	026984	000576	340,000円(税込374,000円)		1	1	2	2						2			
AT-C-E1600-N-S-N	870-170	032664	000583	372,500円(税込409,750円)		2	1	2			1				1		1	
AT-C-E1600T-N-S-N	870-171	032671	000584	565,000円(税込621,500円)		2	1	4			2				2		2	
AT-C-E1600-S-N2	870-172	032688	000585	382,000円(税込420,200円)		2	1	2	1						2	1		
AT-C-E1600T-S-N2	870-173	032695	000586	584,000円(税込642,400円)		2	1	4	2						4	2		
AT-C-E1600-S2-N	870-174	032701	000587	357,500円(税込393,250円)		1	2	1	1		1				1		1	
AT-C-E1600T-S2-N	870-175	032718	000588	535,000円(税込588,500円)		1	2	2	2		2				2		2	
AT-C-E1600-S-N-S	870-176	032725	000589	367,000円(税込403,700円)		1	2	1	2						2	1		
AT-C-E1600T-S-N-S	870-177	032732	000590	554,000円(税込609,400円)		1	2	2	4						4	2		
AT-C-E1600-N3	870-178	032749	000591	397,000円(税込436,700円)		3		3							2	1		
AT-C-E1600T-N3	870-179	032756	000592	614,000円(税込675,400円)		3		6							4	2		
AT-C-E1850-N-S-N	870-180	032763	000593	372,500円(税込409,750円)		2	1	2			1			1			1	
AT-C-E1850T-N-S-N	870-181	032770	000594	565,000円(税込621,500円)		2	1	4			2			2			2	
AT-C-E1850-S-N2	870-182	032787	000595	382,000円(税込420,200円)		2	1	2	1					1	1	1		
AT-C-E1850T-S-N2	870-183	032794	000596	584,000円(税込642,400円)		2	1	4	2					2	2	2		
AT-C-E1850-S2-N	870-184	032800	000597	357,500円(税込393,250円)		1	2	1	1		1			1			1	
AT-C-E1850T-S2-N	870-185	032817	000598	535,000円(税込588,500円)		1	2	2	2		2			2			2	
AT-C-E1850-S-N-S	870-186	032824	000599	367,000円(税込403,700円)		1	2	1	2					1	1	1		
AT-C-E1850T-S-N-S	870-187	032831	000600	554,000円(税込609,400円)		1	2	2	4					2	2	2		
AT-C-E1850-N3	870-188	032848	000601	397,000円(税込436,700円)		3		3						1	1	1		
AT-C-E1850T-N3	870-189	032855	000602	614,000円(税込675,400円)		3		6						2	2	2		
AT-C-E2100-N-S-N	870-190	032862	000603	372,500円(税込409,750円)		2	1	2			1			1				1
AT-C-E2100T-N-S-N	870-191	032879	000604	565,000円(税込621,500円)		2	1	4			2			2				2
AT-C-E2100-S-N2	870-192	032886	000605	382,000円(税込420,200円)		2	1	2	1					2		1		
AT-C-E2100T-S-N2	870-193	032893	000606	584,000円(税込642,400円)		2	1	4	2					4		2		
AT-C-E2100-S2-N	870-194	032909	000607	357,500円(税込393,250円)		1	2	1	1		1			1				1
AT-C-E2100T-S2-N	870-195	032916	000608	535,000円(税込588,500円)		1	2	2	2		2			2				2
AT-C-E2100-S-N-S	870-196	032923	000609	367,000円(税込403,700円)		1	2	1	2					2		1		
AT-C-E2100T-S-N-S	870-197	032930	000610	554,000円(税込609,400円)		1	2	2	4					4		2		
AT-C-E2100-N3	870-198	032947	000611	397,000円(税込436,700円)		3		3						2		1		
AT-C-E2100T-N3	870-199	032954	000612	614,000円(税込675,400円)		3		6						4		2		

※ JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。


設置条件

630/930シリーズ

E800シリーズ


E1050シリーズ

●通路などに設置する場合

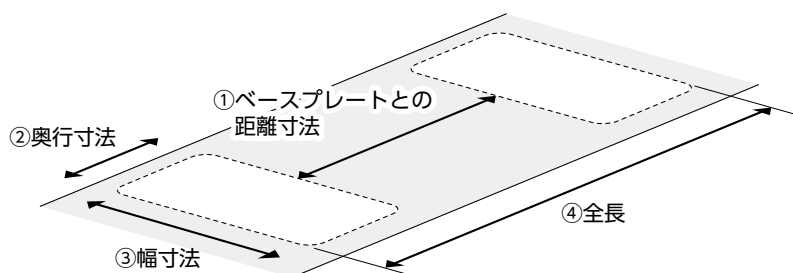


●段差に設置する場合

(630/630T/930/930T/E800/E800T/E1050/E1050T) の場合

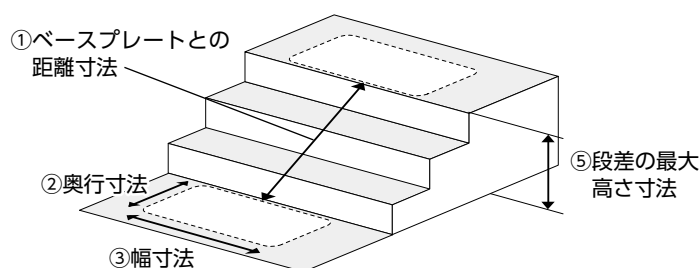


(E800-S/E800T-S/E1050-S/E1050T-S) の場合

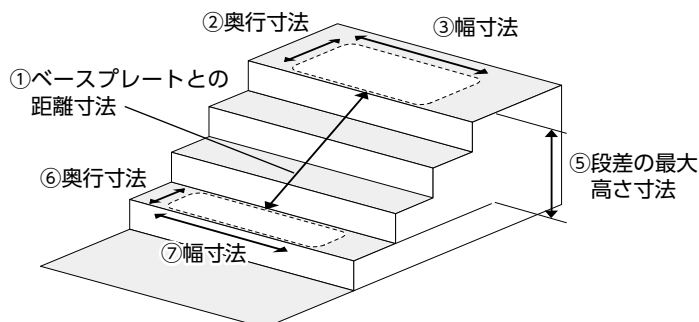




①	(630/630T) 42cm 目安 (930/930T) 72cm 目安 (E800/E800T) 45～60cm 目安 (E1050/E1050T) 60～85cm 目安 (E800-S/E800T-S) 40～55cm 目安 (E1050-S/E1050T-S) 55～80cm 目安
②	45cm 以上
③	80cm 以上
④	(630/630T) 132cm 以上 (930/930T) 162cm 以上 (E800/E800T) 135～150cm 以上 (E1050/E1050T) 150～175cm 以上 (E800-S/E800T-S) 115～130cm 以上 (E1050-S/E1050T-S) 130～155cm 以上
⑤	(630/630T) 30cm 以下 (930/930T) 45cm 以下 (E800/E800T) 30cm 以下 (E1050/E1050T) 45cm 以下 (E800-S/E800T-S) 30cm 以下 (E1050-S/E1050T-S) 45cm 以下
⑥	30cm 以上
⑦	94cm 以上

●共通

- ・手すりの上下角度は45°以内に納まるように設置してください。
- ・手すり角度を調節した後、上下角度固定ボルトを2ヶ所固定してから使用してください。

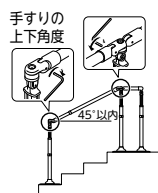


ベースプレートよりも小さい縁石や凹凸が大きい床面、芝生、滑りやすい床面の上には設置できません。

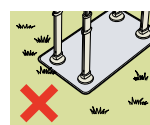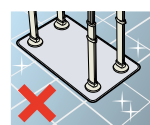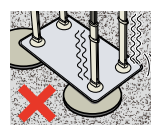


●ベースプレート2枚の場合

- ・手すりの左右角度は45°以内に納まるように設置してください。
- ・各ベースプレートは平行になるように設置してください。

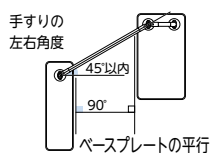


●ベースプレート3枚の場合


- ・手すりの左右角度は270°以内に納まるように設置してください。

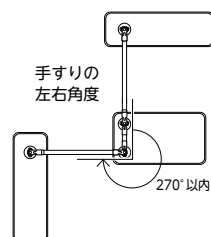


各ベースプレートの上にE800-S (E1050-S) 手すりや接続手すりを重ねて設置しないこと。ベースプレートがズレ動き、転倒やけがの原因になります。

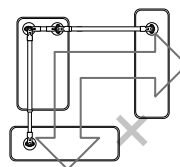


端部にベースプレートW940を使用するときは、E800-S (E1050-S) 手すりや接続手すりとはベースプレートW940が45°を超えて設置しないこと。ベースプレートがズレ動き、転倒やけがの原因になります。

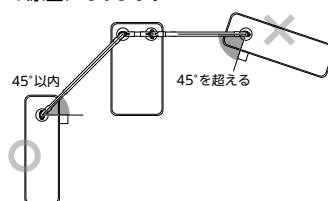

●通路などに設置する場合

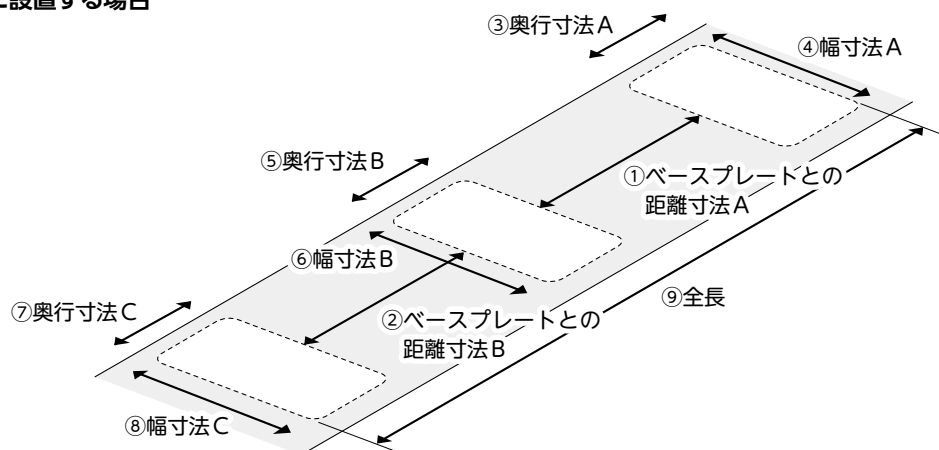

●段差に設置する場合

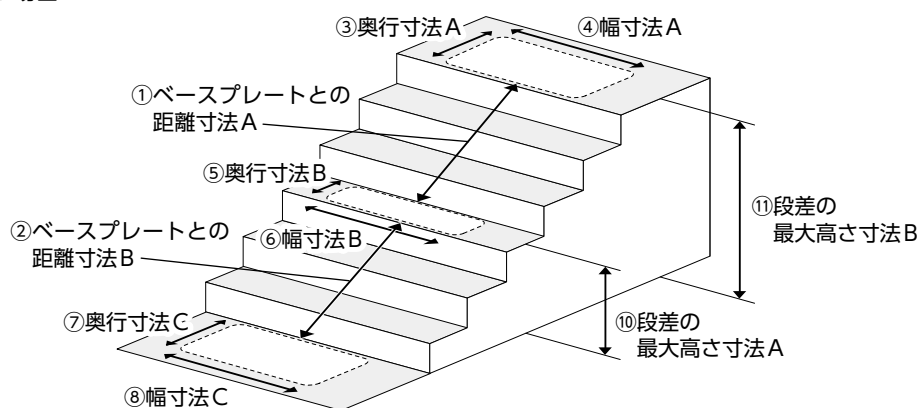


	N-S-Nタイプ	S-N2タイプ	S2-Nタイプ	S-N-Sタイプ	N3タイプ
①	(E1600/E1600T) 40～55cm目安 (E1850/E1850T) 55～80cm目安 (E2100/E2100T) 55～80cm目安	(E1600/E1600T) 44～59cm目安 (E1850/E1850T) 59～84cm目安 (E2100/E2100T) 59～84cm目安	(E1600/E1600T) 40～55cm目安 (E1850/E1850T) 55～80cm目安 (E2100/E2100T) 55～80cm目安		(E1600/E1600T) 44～59cm目安 (E1850/E1850T) 59～84cm目安 (E2100/E2100T) 59～84cm目安
②	(E1600/E1600T) 40～55cm目安 (E1850/E1850T) 40～55cm目安 (E2100/E2100T) 55～80cm目安		(E1600/E1600T) 35～50cm目安 (E1850/E1850T) 35～50cm目安 (E2100/E2100T) 50～75cm目安	(E1600/E1600T) 40～55cm目安 (E1850/E1850T) 40～55cm目安 (E2100/E2100T) 55～80cm目安	(E1600/E1600T) 44～59cm目安 (E1850/E1850T) 44～59cm目安 (E2100/E2100T) 59～84cm目安
③	45cm以上			30cm以上	45cm以上
④	80cm以上			94cm以上	80cm以上
⑤	30cm以上	45cm以上	30cm以上	45cm以上	
⑥	94cm以上	80cm以上	94cm以上	80cm以上	
⑦	45cm以上	30cm以上			45cm以上
⑧	80cm以上	94cm以上			80cm以上
⑨	(E1600/E1600T) 200～230cm以上 (E1850/E1850T) 215～255cm以上 (E2100/E2100T) 230～280cm以上	(E1600/E1600T) 204～234cm以上 (E1850/E1850T) 219～259cm以上 (E2100/E2100T) 234～284cm以上	(E1600/E1600T) 180～210cm以上 (E1850/E1850T) 195～235cm以上 (E2100/E2100T) 210～260cm以上	(E1600/E1600T) 184～214cm以上 (E1850/E1850T) 199～239cm以上 (E2100/E2100T) 214～264cm以上	(E1600/E1600T) 224～254cm以上 (E1850/E1850T) 239～279cm以上 (E2100/E2100T) 254～304cm以上
⑩	(下方にE800-S手すりや接続手すりを使用する場合) 30cm以下 (下方にE1050-S手すりや接続手すりを使用する場合) 45cm以下				
⑪	(E1600/E1600T) 60cm以下 (E1850/E1850T) 75cm以下 (E2100/E2100T) 90cm以下				

商品寸法図


※伸縮手すりの細手すりはφ3、伸縮手すりの太手すりはφ3.6
※ベースプレート高さ:1.4

単位: cm


240

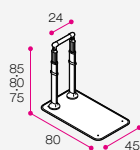


630/930/E800/E1050

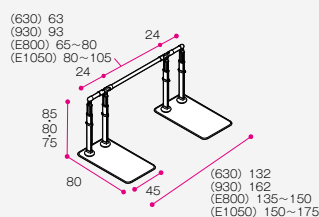


E800-S/E1050-S

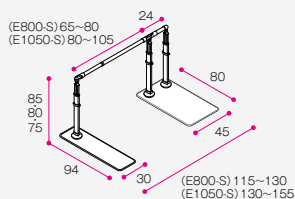


E1600-N-S-N /
E1850-N-S-N /
E2100-N-S-N

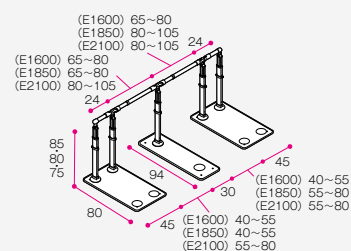


240T

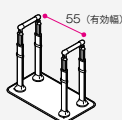


630T/930T/E800T/E1050T

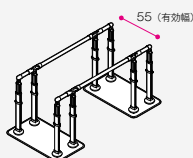


E800T-S/E1050T-S

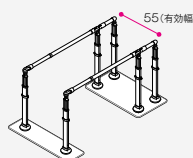


E1600T-N-S-N /
E1850T-N-S-N /
E2100T-N-S-N

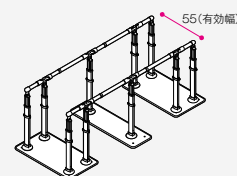


E1600-S-N2 /
E1850-S-N2 /
E2100-S-N2

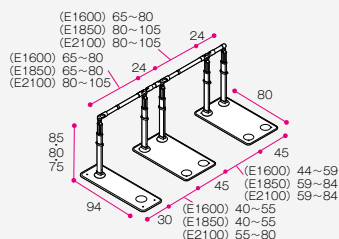


E1600-S2-N /
E1850-S2-N /
E2100-S2-N

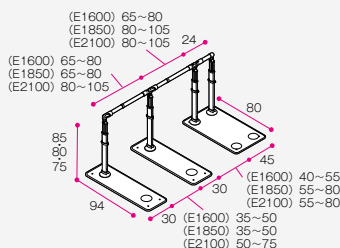


E1600-S-N-S /
E1850-S-N-S /
E2100-S-N-S

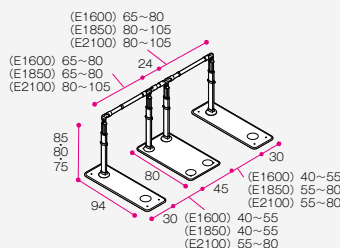


E1600-N3 /
E1850-N3 /
E2100-N3

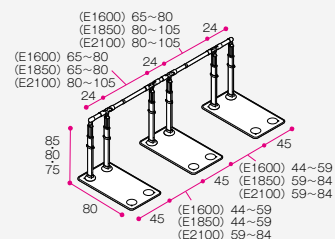


E1600T-S-N2 /
E1850T-S-N2 /
E2100T-S-N2

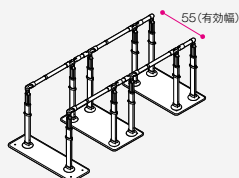


E1600T-S2-N /
E1850T-S2-N /
E2100T-S2-N

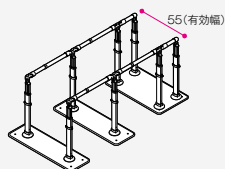

E1600T-S-N-S /
E1850T-S-N-S /
E2100T-S-N-S

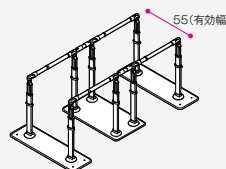

E1600T-N3 /
E1850T-N3 /
E2100T-N3

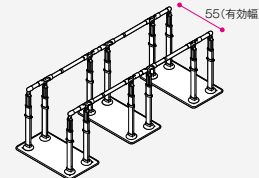

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7101
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)796-8040
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00(12:00~13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

■お問い合わせは…