


連続する手すりで安全な歩行を支援！ 2つの動線をサポートする品目を追加！




New より自由な動線が増えます

従来は動線が1つだったので、移動の方向が制限されていました。3方支柱セットを使うと、2つの動線を安心して移動できます。

玄関から車に1方向のみのサポート

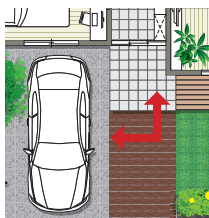


玄関から外へ、また玄関から車への2方向の動線を確保

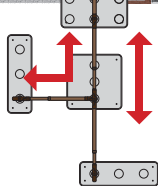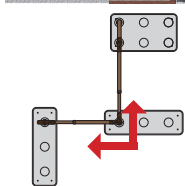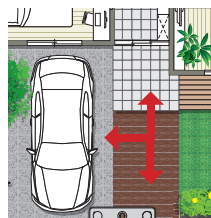

AT-CRシリーズに2品目を追加するだけ

AT-CRシリーズに3方支柱セットとベースプレートMを組み合わせることで、追加で81パターン of 組合せを実現できます。

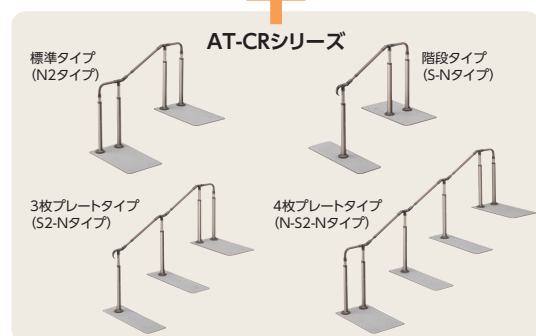


効率的な組合せ

2つの動線を確保する場合、従来までは連続性がなく、スムーズに移動しにくい設置となっていました。3方支柱セットを使うと、最小限の組合せで手すりが繋がります。

従来まで

E1600-S2-N

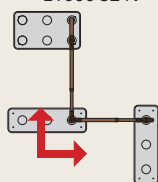


課題

1方向しか動線が無い
価格:363,000円(税抜)


新規提案

3方支柱セットを使うと連続して手すりにつながり、2台使用するよりも効率的に設置が可能。

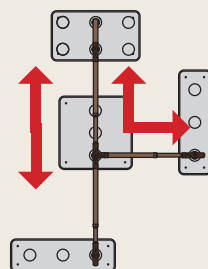

組合せ価格:
504,000円(税抜)

E1600-S2-N + E800-S-N

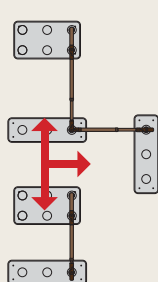

連続性がなく、2台分設置すると価格が高くなる

組合せ価格:
363,000円(税抜)
+ 239,000円(税抜)
= 602,000円(税抜)

■ラインナップ

商品名	AT-CR ベースプレートM	AT-CR 3方支柱セット
		
価格(税抜)	70,000円	38,000円
商品コード	530009	530010
サイズ	幅60×奥行60×高さ(厚み)1.3cm	幅12×奥行14×高さ75～90cm
重量	約15.6kg	約2.0kg
TAISコード	000720	000721
JANコード	106525	106532

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。


■TAISコード (組合せユニット)

ユニット名	曲げ/3方支柱E800ユニット 曲げ/3方支柱E1050ユニット 曲げ/3方支柱E1400ユニット	曲げ支柱E800ユニット 曲げ支柱E1050ユニット 曲げ支柱E1400ユニット	先端支柱E800ユニット 先端支柱E1050ユニット 先端支柱E1400ユニット	中間支柱E800ユニット 中間支柱E1050ユニット 中間支柱E1400ユニット
				
ユニット明細	3方支柱 + ベースプレートM + 曲げ支柱 + ベースプレートN + 手すり	曲げ支柱 + ベースプレートN + 手すり	先端支柱 + ベースプレートS + 手すり	中間支柱 + ベースプレートS + 手すり
価格(税抜)	①E800手すりタイプ : 252,000円 ②E1050手すりタイプ : 254,000円 ③E1400手すりタイプ : 256,000円	①E800手すりタイプ : 144,000円 ②E1050手すりタイプ : 146,000円 ③E1400手すりタイプ : 148,000円	①E800手すりタイプ : 126,000円 ②E1050手すりタイプ : 128,000円 ③E1400手すりタイプ : 130,000円	①E800手すりタイプ : 124,000円 ②E1050手すりタイプ : 126,000円 ③E1400手すりタイプ : 128,000円
TAISコード	①E800手すりタイプ : 000722 ②E1050手すりタイプ : 000723 ③E1400手すりタイプ : 000724	①E800手すりタイプ : 000725 ②E1050手すりタイプ : 000726 ③E1400手すりタイプ : 000727	①E800手すりタイプ : 000728 ②E1050手すりタイプ : 000729 ③E1400手すりタイプ : 000730	①E800手すりタイプ : 000731 ②E1050手すりタイプ : 000732 ③E1400手すりタイプ : 000733

※TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。


■注意点

1 動線上にプレートをお願いしてください

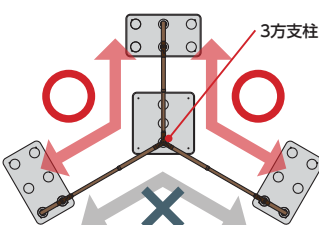


ベースプレートは動線上にあることが前提であるため、この設置では歩行不可

2 3方支柱セットのブラケットは左右旋回できません

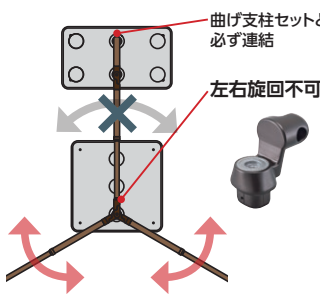


曲げ支柱セットと必ず連結
左右旋回不可
他2本は、今まで通りに左右に旋回は可能

3 ベースプレートMは3方支柱セット専用です

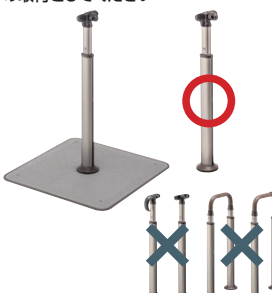

ベースプレートMは、3方支柱セットのみの取付としてください

4 設置可能なプレート枚数はAT-CRシリーズに準拠してください

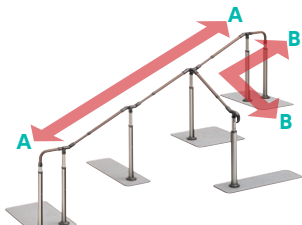

Aルート
動線上に4枚のプレートとなるため、両端部は“ベースプレートN”を使用し、2本支柱となる

Bルート
動線上に3枚のプレートとなるため、端部に“ベースプレートS”を使用し、1本支柱を使用できる

※この3方支柱セットを使用するとプレート6枚が最大です。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

【安寿】HP

YouTube

Twitter

Instagram



安寿 WEB サイト



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu


製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

■AT-CRシリーズとの組合せ例

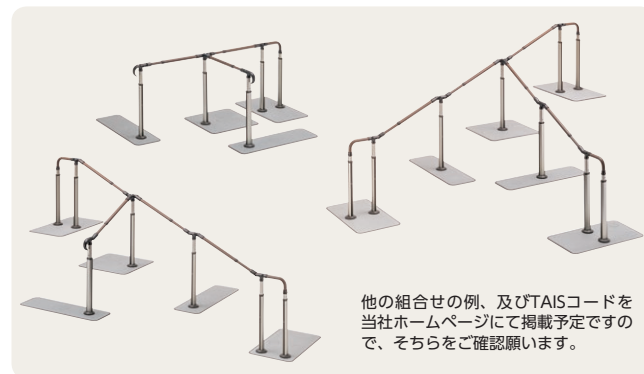

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…