

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

新しいアットグリップは従来よりも少ない部材で
設置可能な環境が増えました!



4枚プレート
設置可能

最大
140cm
手すり



2枚の
プレートでも
L字設置可能



高級感溢れるエクステリアデザイン

ご利用者の貸与負担、設置労力の軽減に

住宅改修にはないレンタル品のメリット

工事不要


導入まで時間が
かからない

取り外し簡単

手すり(ATTOGRIP)

最大140cmの伸縮手すりで 構成部材の削減

140cm手すりを使用することで支柱が3本から2本に！

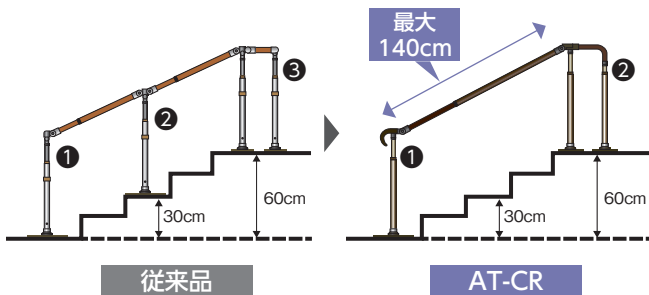


部材が削減されることで…

- 利用者の貸与負担の軽減
- 組み立て工数の削減、設置時間の短縮


につながります！

手にしっかりフィット 握りやすい楕円形状の手すり

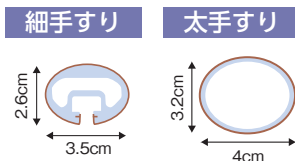

組み合わせ部材が増えて 設置可能な場所も増えました

最大4枚まで
プレートを設置できる
ようになりました。

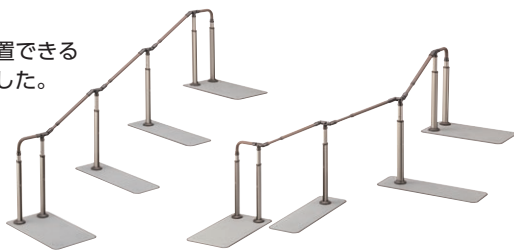

2枚プレートでも
L字に設置が可能に
なりました。



プレートの中央にも
支柱を取り付けることが
できるようになりました。



付着したウイルスを減少させる 抗ウイルス加工の手すり

軒先や玄関周りのレンタル手すりでも初採用！
SIAA抗ウイルス加工準拠、軒先や玄関周りで少量の
雨や太陽光が当たっても効果を発揮します。
表面を掃除しても効果は持続します。



製品上の特定ウイルスの
数を減少させます

有機合成系・練込
手すり持ち手部分
JP0612240A0001R

SIAAマークは ISO 21702 法により評価された
結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドライン
で品質管理・情報公開された製品に表示されて
います。


⚠ 注意事項

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的
とするものではありません
- SIAA の安全性基準に適合しています

手すり高さは75～90cm 7段階調節ができるようになりました



7段階調節で利用者の体格に
合った高さを選べます。

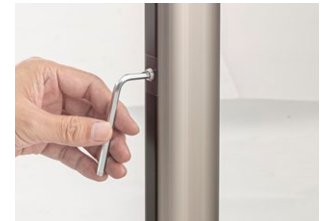

調節はボルトで締めるだけ。

雨の日でも滑りにくい ベースプレート



滑りにくく、汚れも落ちやすい表
面になっています。

プレートのガタツキを防止する ゴム付きアジャスター



ゴム付きアジャスターでよりガ
タツキを防止できるようになり
ました。



アジャスターの調節はプレート
の上から行えます。

設置事例

Case 1

入浴の着替えの際に姿勢が不安定なので、支える手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-240

Point

築20年のマンション。
浴室前の立位補助として設置。



Case 2

ベランダに出るまでに段差があるので手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-E800-N2

Point

築10年の戸建。
段差が10cmあり、
出入り動作補助として設置。



Case 3

外に出るまでに段差があるので手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-E2800-N-S-N

Point

築35年の戸建。
2段かまちで玄関幅3m
ほどの玄関土間に設置。



Case 4

外に出るまでに段差があるので手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-E3600-N-S2-N

Point

築20年の戸建。
階段8段の歩行補助
として設置。




Case 5

外に出るまでに段差があるので手すりがほしい。

設置商品：AT-CR-E3000-N-S2-N

Point

築18年の戸建。
駐車場までの歩行補助
として設置。

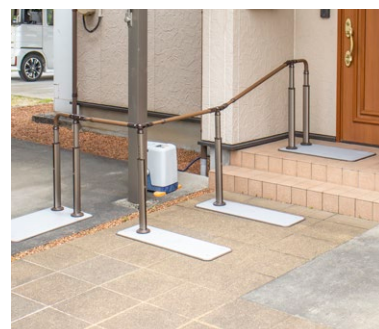

ラインナップ



単体タイプ



標準タイプ
(N2)



階段タイプ
(S-N)



3枚プレートタイプ
(N-S-N)



3枚プレートタイプ
(S2-N)



4枚プレートタイプ
(N-S2-N)

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与対象品

最大使用者体重 100kg

構成部品

部品名称	AT-CR ベースプレート N	AT-CR ベースプレート S	AT-CR 曲げ支柱セット
商品コード	530-000	530-001	530-002
JAN(4970210)	035108	035115	035122
希望小売価格	66,000 円 (税込 72,600 円)	63,000 円 (税込 69,300 円)	47,000 円 (税込 51,700 円)
重量	15.7kg	10.8kg	3.7kg
イメージ			
部品名称	AT-CR 先端支柱セット	AT-CR 中間支柱セット	AT-CR-240 支柱セット
商品コード	530-003	530-004	530-005
JAN(4970210)	035139	035146	035153
希望小売価格	32,000 円 (税込 35,200 円)	30,000 円 (税込 33,000 円)	50,000 円 (税込 55,000 円)
重量	2.2kg	2.0kg	3.4kg
イメージ			
部品名称	AT-CR-E800 手すりセット	AT-CR-E1050 手すりセット	AT-CR-E1400 手すりセット
商品コード	530-006	530-007	530-008
JAN(4970210)	035160	035177	035184
希望小売価格	31,000 円 (税込 34,100 円)	33,000 円 (税込 36,300 円)	35,000 円 (税込 38,500 円)
重量	0.9kg	1.2kg	1.6kg
イメージ			

構成一覧表


						商品コード								
						530-000	530-001	530-002	530-003	530-004	530-005	530-006	530-007	530-008
						A・T・C・R ベースプレートN	A・T・C・R ベースプレートS	A・T・C・R 曲げ支柱セット	A・T・C・R 先端支柱セット	A・T・C・R 中間支柱セット	A・T・C・R 支柱セット 240	A・T・C・R・E800 手すりセット	A・T・C・R・E1050 手すりセット	A・T・C・R・E1400 手すりセット
セットタイプ	セット製品名称	商品コード	JANコード	TAISコード	価格									
N2	AT-CR-240	870-200	035191	000631	116,000円(税込127,600円)	1					1			
	AT-CR-240T	870-201	035207	000632	166,000円(税込182,600円)	1					2			
	AT-CR-E800-N2	870-202	035221	000633	257,000円(税込282,700円)	2		2				1		
	AT-CR-E800T-N2	870-203	035238	000634	382,000円(税込420,200円)	2		4				2		
	AT-CR-E1050-N2	870-204	035252	000635	259,000円(税込284,900円)	2		2					1	
	AT-CR-E1050T-N2	870-205	035269	000636	386,000円(税込424,600円)	2		4					2	
S-N	AT-CR-E1400-N2	870-206	035412	000637	261,000円(税込287,100円)	2		2						1
	AT-CR-E1400T-N2	870-207	035429	000638	390,000円(税込429,000円)	2		4						2
	AT-CR-E800-S-N	870-208	035887	000639	239,000円(税込262,900円)	1	1	1	1			1		
	AT-CR-E800T-S-N	870-209	035894	000640	349,000円(税込383,900円)	1	1	2	2			2		
	AT-CR-E1050-S-N	870-210	035900	000641	241,000円(税込265,100円)	1	1	1	1				1	
	AT-CR-E1050T-S-N	870-211	035917	000642	353,000円(税込388,300円)	1	1	2	2				2	
N-S-N	AT-CR-E1400-S-N	870-212	035924	000643	243,000円(税込267,300円)	1	1	1	1					1
	AT-CR-E1400T-S-N	870-213	035931	000644	357,000円(税込392,700円)	1	1	2	2					2
	AT-CR-E1600-N-S-N	870-214	035948	000645	381,000円(税込419,100円)	2	1	2		1		2		
	AT-CR-E1600T-N-S-N	870-215	035955	000646	567,000円(税込623,700円)	2	1	4		2		4		
	AT-CR-E1850-N-S-N	870-216	036150	000647	383,000円(税込421,300円)	2	1	2		1		1	1	
	AT-CR-E1850T-N-S-N	870-217	036167	000648	571,000円(税込628,100円)	2	1	4		2		2	2	
	AT-CR-E2200-N-S-N	870-218	036174	000649	385,000円(税込423,500円)	2	1	2		1		1		1
	AT-CR-E2200T-N-S-N	870-219	036181	000650	575,000円(税込632,500円)	2	1	4		2		2		2
	AT-CR-E2100-N-S-N	870-220	036198	000651	385,000円(税込423,500円)	2	1	2		1			2	
	AT-CR-E2100T-N-S-N	870-221	036310	000652	575,000円(税込632,500円)	2	1	4		2			4	
	AT-CR-E2450-N-S-N	870-222	036327	000653	387,000円(税込425,700円)	2	1	2		1			1	1
	AT-CR-E2450T-N-S-N	870-223	036334	000654	579,000円(税込636,900円)	2	1	4		2			2	2
S2-N	AT-CR-E2800-N-S-N	870-224	036426	000655	389,000円(税込427,900円)	2	1	2		1				2
	AT-CR-E2800T-N-S-N	870-225	036464	000656	583,000円(税込641,300円)	2	1	4		2				4
	AT-CR-E1600-S2-N	870-226	036570	000657	363,000円(税込399,300円)	1	2	1	1	1		2		
	AT-CR-E1600T-S2-N	870-227	036587	000658	534,000円(税込587,400円)	1	2	2	2	2		4		
	AT-CR-E1850-S2-N	870-228	036594	000659	365,000円(税込401,500円)	1	2	1	1	1		1	1	
	AT-CR-E1850T-S2-N	870-229	036600	000660	538,000円(税込591,800円)	1	2	2	2	2		2	2	
	AT-CR-E2200-S2-N	870-230	036617	000661	367,000円(税込403,700円)	1	2	1	1	1		1		1
	AT-CR-E2200T-S2-N	870-231	037423	000662	542,000円(税込596,200円)	1	2	2	2	2		2		2
	AT-CR-E2100-S2-N	870-232	038710	000663	367,000円(税込403,700円)	1	2	1	1	1			2	
	AT-CR-E2100T-S2-N	870-233	038727	000664	542,000円(税込596,200円)	1	2	2	2	2			4	
	AT-CR-E2450-S2-N	870-234	038734	000665	369,000円(税込405,900円)	1	2	1	1	1			1	1
	AT-CR-E2450T-S2-N	870-235	038741	000666	546,000円(税込600,600円)	1	2	2	2	2			2	2
N-S2-N	AT-CR-E2800-S2-N	870-236	038758	000667	371,000円(税込408,100円)	1	2	1	1	1				2
	AT-CR-E2800T-S2-N	870-237	038765	000668	550,000円(税込605,000円)	1	2	2	2	2				4
	AT-CR-E2400-N-S2-N	870-238	038772	000669	505,000円(税込555,500円)	2	2	2		2		3		
	AT-CR-E2400T-N-S2-N	870-239	038901	000670	752,000円(税込827,200円)	2	2	4		4		6		
	AT-CR-E2650-N-S2-N	870-240	038994	000671	507,000円(税込557,700円)	2	2	2		2		2	1	
	AT-CR-E2650T-N-S2-N	870-241	039007	000672	756,000円(税込831,600円)	2	2	4		4		4	2	
	AT-CR-E3000-N-S2-N	870-242	039014	000673	509,000円(税込559,900円)	2	2	2		2		2		1
	AT-CR-E3000T-N-S2-N	870-243	039021	000674	760,000円(税込836,000円)	2	2	4		4		4		2
	AT-CR-E2900-N-S2-N	870-244	039038	000675	509,000円(税込559,900円)	2	2	2		2		1	2	
	AT-CR-E2900T-N-S2-N	870-245	039045	000676	760,000円(税込836,000円)	2	2	4		4		2	4	
	AT-CR-E3250-N-S2-N	870-246	039052	000677	511,000円(税込562,100円)	2	2	2		2		1	1	1
	AT-CR-E3250T-N-S2-N	870-247	039069	000678	764,000円(税込840,400円)	2	2	4		4		2	2	2
	AT-CR-E3600-N-S2-N	870-248	039076	000679	513,000円(税込564,300円)	2	2	2		2		1		2
	AT-CR-E3600T-N-S2-N	870-249	039083	000680	768,000円(税込844,800円)	2	2	4		4		2		4
	AT-CR-E3150-N-S2-N	870-250	039335	000681	511,000円(税込562,100円)	2	2	2		2			3	
	AT-CR-E3150T-N-S2-N	870-251	039342	000682	764,000円(税込840,400円)	2	2	4		4			6	
	AT-CR-E3500-N-S2-N	870-252	039359	000683	513,000円(税込564,300円)	2	2	2		2			2	1
	AT-CR-E3500T-N-S2-N	870-253	039366	000684	768,000円(税込844,800円)	2	2	4		4			4	2
AT-CR-E3850-N-S2-N	870-254	039373	000685	515,000円(税込566,500円)	2	2	2		2			1	2	
AT-CR-E3850T-N-S2-N	870-255	039427	000686	772,000円(税込849,200円)	2	2	4		4			2	4	
AT-CR-E4200-N-S2-N	870-256	039434	000687	517,000円(税込568,700円)	2	2	2		2				3	
AT-CR-E4200T-N-S2-N	870-257	039441	000688	776,000円(税込853,600円)	2	2	4		4				6	

設置条件

N2タイプ


S-Nタイプ

●通路などに設置する場合

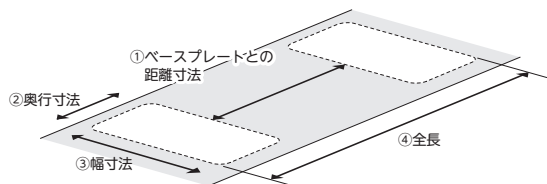


●段差に設置する場合

※ N2タイプ

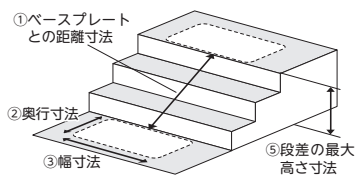

※ S-Nタイプ

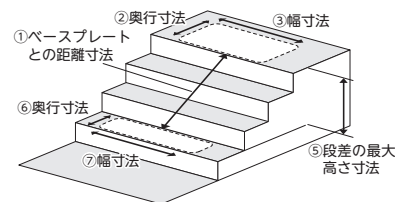

	N2タイプ	S-Nタイプ
①ベースプレートとの距離寸法	(E800) 44～59cm目安 (E1050) 59～84cm目安 (E1400) 84～119cm目安	(E800) 40～55cm目安 (E1050) 55～80cm目安 (E1400) 80～115cm目安
②奥行寸法	45cm以上	
③幅寸法	80cm以上	
④全長	(E800) 135～150cm以上 (E1050) 150～175cm以上 (E1400) 175～210cm以上	(E800) 115～130cm以上 (E1050) 130～155cm以上 (E1400) 155～190cm以上
⑤段差の最大高さ寸法	(E800) 30cm以下 (E1050) 45cm以下 (E1400) 60cm以下	
⑥奥行寸法		30cm以上
⑦幅寸法		94cm以上


※両側手すり(E000T)の場合も同様

※S-Nタイプは、②、③と⑥、⑦の位置が逆でも可


N-S-Nタイプ

S2-Nタイプ

●通路などに設置する場合

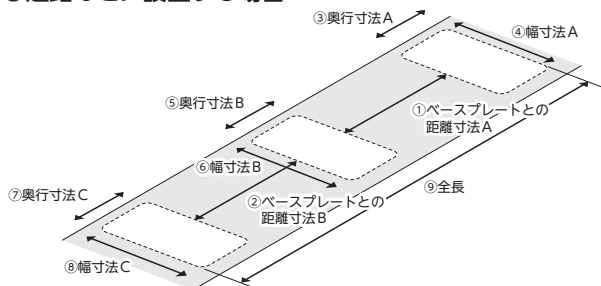

●段差に設置する場合

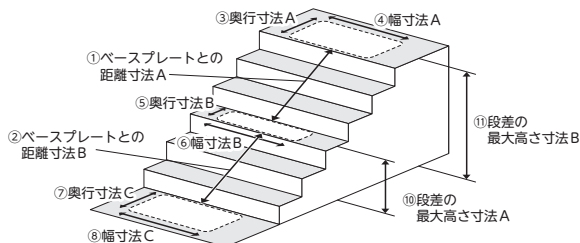


	N-S-Nタイプ	S2-Nタイプ
①ベースプレートとの距離寸法 A	(E1600) 40～55cm目安 (E1850/E2100) 55～80cm目安 (E2200/E2450/E2800) 80～115cm目安	(E1600) 40～55cm目安 (E1850/E2100) 55～80cm目安 (E2200/E2450/E2800) 80～115cm目安
②ベースプレートとの距離寸法 B	(E1600/E1850/E2200) 40～55cm目安 (E2100/E2450) 55～80cm目安 (E2800) 80～115cm目安	(E1600/E1850/E2200) 35～50cm目安 (E2100/E2450) 50～75cm目安 (E2800) 75～110cm目安
③奥行寸法 A	45cm以上	
④幅寸法 A	80cm以上	
⑤奥行寸法 B	30cm以上	
⑥幅寸法 B	94cm以上	
⑦奥行寸法 C	45cm以上	30cm以上
⑧幅寸法 C	80cm以上	94cm以上
⑨全長	(E1600) 200～230cm以上 (E1850) 215～255cm以上 (E2200) 240～290cm以上 (E2100) 230～280cm以上 (E2450) 255～315cm以上 (E2800) 280～350cm以上	(E1600) 180～210cm以上 (E1850) 195～235cm以上 (E2200) 220～270cm以上 (E2100) 210～260cm以上 (E2450) 235～295cm以上 (E2800) 260～330cm以上
⑩段差の最大高さ寸法 A	(下方にE800手すりを使用する場合) (下方にE1050手すりを使用する場合) (下方にE1400手すりを使用する場合)	30cm以下 45cm以下 60cm以下
⑪段差の最大高さ寸法 B	(E1600) 60cm以下 (E1850) 75cm以下 (E2200/E2100) 90cm以下 (E2450) 105cm以下 (E2800) 120cm以下	

※両側手すり(E000T)の場合も同様


※S2-Nタイプは、③、④と⑦、⑧の位置が逆でも可

N-S2-Nタイプ

●通路などに設置する場合

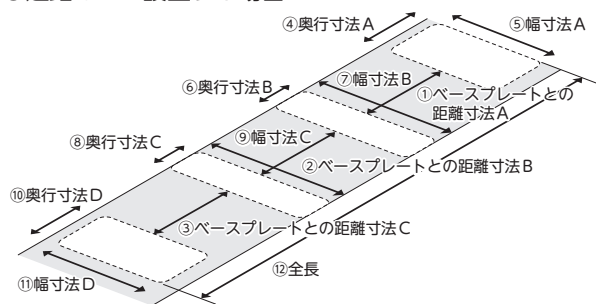


●段差に設置する場合

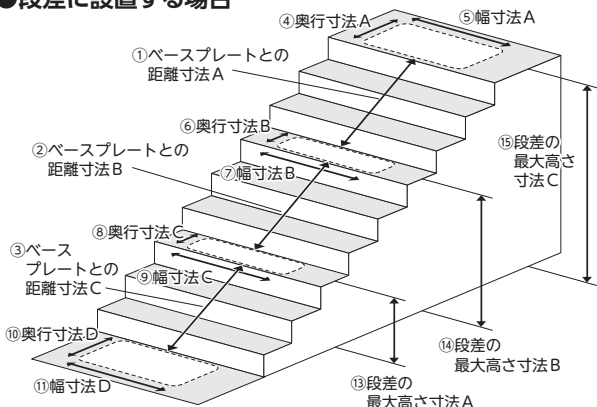


	N-S2-Nタイプ	
①ベースプレートとの距離寸法A	(E2400) (E2650/E2900/E3150) (E3000/E3250/E3600/E3500/E3850/E4200)	40～55cm目安 55～80cm目安 80～115cm目安
②ベースプレートとの距離寸法B	(E2400/E2650/E3000) (E2900/E3250/E3150/E3500) (E3600/E3850/E4200)	35～50cm目安 50～75cm目安 75～110cm目安
③ベースプレートとの距離寸法C	(E2400/E2650/E3000/E2900/E3250/E3600) (E3150/E3500/E3850) (E4200)	40～55cm目安 55～80cm目安 80～115cm目安
④⑩奥行寸法A、D		45cm以上
⑤⑪幅寸法A、D		80cm以上
⑥⑧奥行寸法B、C		30cm以上
⑦⑨幅寸法B、C		94cm以上
⑫全長		(E2400) 265～310cm以上 (E2650) 280～335cm以上 (E3000) 305～370cm以上 (E2900) 295～360cm以上 (E3250) 320～395cm以上 (E3600) 345～430cm以上 (E3150) 310～385cm以上 (E3500) 335～420cm以上 (E3850) 360～455cm以上 (E4200) 385～490cm以上
⑬段差の最大高さ寸法A	(下方にE800手すりを使用する場合) (下方にE1050手すりを使用する場合) (下方にE1400手すりを使用する場合)	30cm以下 45cm以下 60cm以下
⑭段差の最大高さ寸法B	(下方にE800手すりを2本使用する場合) (下方にE800手すりとE1050手すりを各1本使用する場合) (下方にE800手すりとE1400手すりを各1本使用する場合) (下方にE1050手すりを2本使用する場合) (下方にE1050手すりとE1400手すりを各1本使用する場合)	60cm以下 75cm以下 90cm以下 90cm以下 105cm以下 120cm以下
⑮段差の最大高さ寸法C	(E2400) (E2650) (E3000/E2900) (E3250/E3150) (E3600/E3500) (E3850) (E4200)	90cm以下 105cm以下 120cm以下 135cm以下 150cm以下 165cm以下 180cm以下

※両側手すり(E000T)の場合も同様

・手すりの左右角度は270°以内に納まるように設置してください。

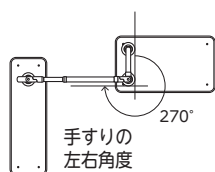


・手すりの上下角度は45°以内に納まるように設置してください。

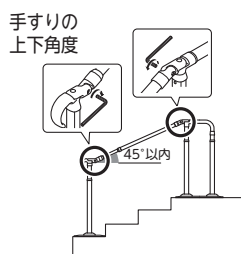


・手すりは、手すり角度を調節した後、上下回転固定ボルトを固定してから使用してください。

・上下に角度をつける際は、手すり(内) (細い方) が下側になるように設置してください。

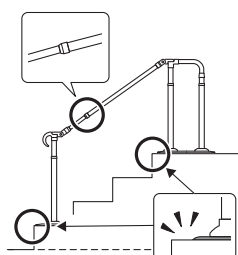


・段差のある箇所に設置するときは、ベースプレート端部が段鼻よりも内側になるように設置してください。


ベースプレートよりも小さい縁石や凹凸が大きい床面、芝生、滑りやすい床面の上には設置できません

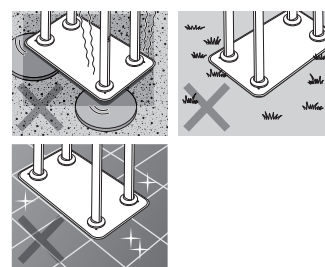


各ベースプレートの端に支柱を固定するときは、各ベースプレートの上に手すりを沿わせて設置しないこと

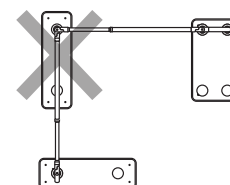


端部にベースプレートSを使用するときは、手すりから45°を超える角度で設置しないこと

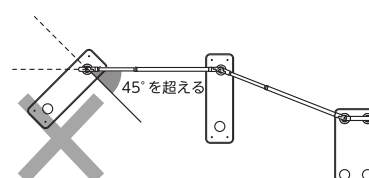


240

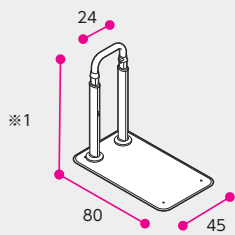


N2タイプ

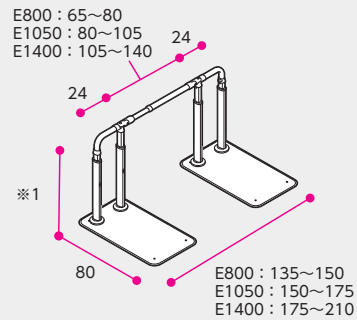


S-Nタイプ

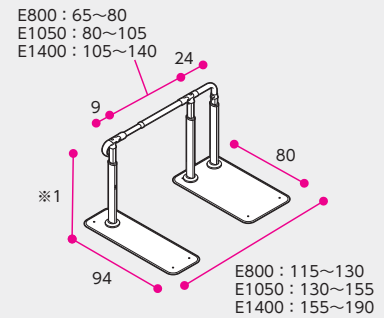


N-S-Nタイプ

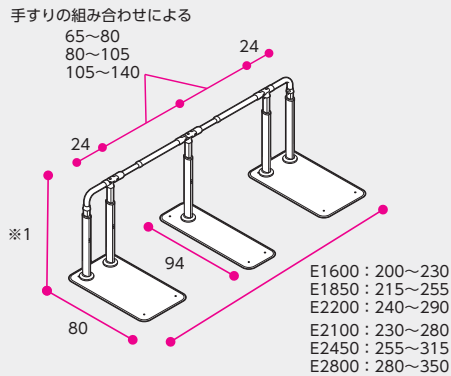

S2-Nタイプ

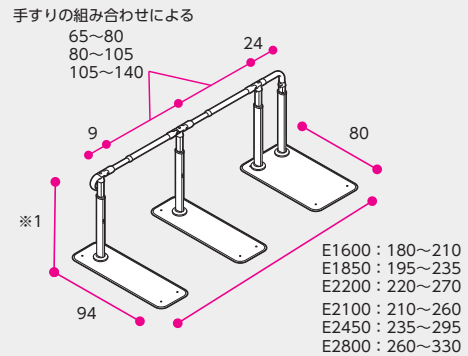


N-S2-Nタイプ

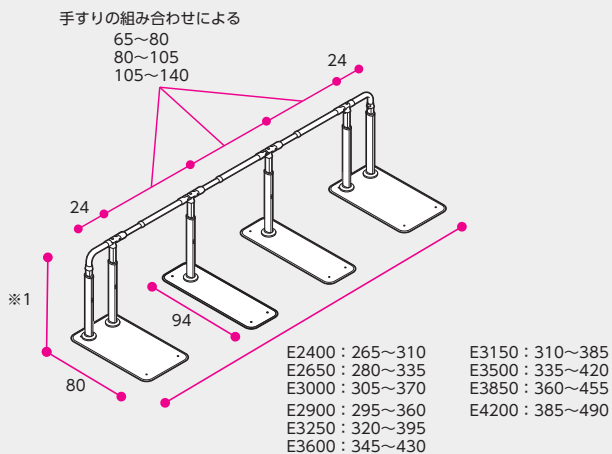

共通

※1 手すり高さ75・77.5・80・82.5・85・87.5・90
(7段階 2.5cm間隔)

※2 両側手すりの有効幅:55

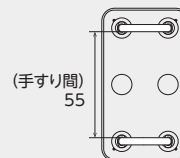

※3 ベースプレートの厚み:1.3

※4 伸縮手すり部 細手すり:3.5×2.6/太手すり:4×3.2

※上記とは異なる組み合わせでのご利用は禁止しております。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階



YouTube



Twitter



Instagram



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…