

安^{あんじゅ}寿

エプロン付骨盤サポートベルト

コシマッキー

KOSHI-MACKY

腰の不安を
おしやれに軽減

衣服の上から
カンタン装着

おしゃれな
カフェエプロン風

ARONKASEI CO., LTD.



家事作業

荷物の持ち運び

腰の負担を軽くするためにコルセットを装着したい。でも、従来のコルセットは衣服の中に装着するので蒸れやすいし、着脱も面倒…見た目もおしゃれじゃないのよね～





スムーズ

そんな方に朗報!

エプロン付骨盤サポートベルト
コシマツキー

骨盤周りをピンポイントで締め込むため、様々な動作を妨げることなく骨盤をサポート!

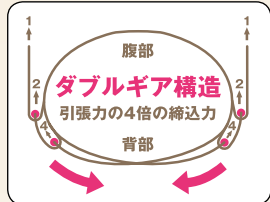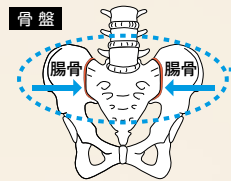

独自のダブルギア構造を採用し、軽い力で高い固定力を実現。



ガーデニング
作業

介護作業

スマート

カンタン

スタイリッシュな エプロンタイプ。

背面はメッシュ構造で
高い通気性を確保。
軽量構造(重さ約200g)で、
作業も快適。



衣服の上から簡単装着。

ベルトがズレても衣服の上から
簡単に補正できます。

エプロン部は ポリエステル製の ツイル素材を採用。

小まめに洗濯したいエプロン部
はシワになりにくく洗濯耐久性も
高いので、お手入れも簡単!

使いやすいポケット。

携帯電話、ペン、手袋や
ハンドタオルなどを収納可能。



清潔に使えるエプロン形状。

エプロン端部がカットされているの
で、しゃがんだときにエプロン部が
床や地面に触れず汚れません。



● モニターボイス ●

毎日朝起きてすぐに着用し、就寝前までつけています。つけていると姿勢が良くなり、腰をひねる動作を行った際に腰が楽に感じました。今では使用しないと物足りないように感じる程です。

62歳女性



実習等で着用しています。元々腰に不安がありましたが、重いものを持つ時に腰の負担が楽になるのを感じます。ベルトをつける時に「グッ」と強く締め付けられるところが気に入っています！

18歳女性
介護専門学校生



介護の仕事をしており、利用者の移乗をお手伝いする際に使っています。仕事場で使っている腰痛対策の全身スーツは使い勝手が悪かったのですがコシマッキーは動きやすく、腰への負担が軽減されるため使いやすいです。エプロン付なので、外から骨盤ベルトと分からない点が気に入っています。

37歳女性
介護士



※個人の感想です。

お手入れのしかた

ベルト部からエプロン部を取り外し、以下の方法で洗ってください。

ベルト部



洗濯機
使用不可



- 液温は40℃を限度とし、中性洗剤を使用し手洗いをしてください。
- 漂白剤・柔軟剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後の乾燥は陰干ししてください。

エプロン部


洗濯機
使用可

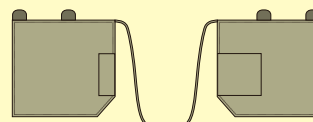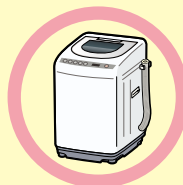

- 液温は40℃を限度とし、洗濯ネットを使用し、洗濯機で弱い洗濯をしてください。
- 手絞りの場合は弱く、洗濯機の場合は短時間で絞ってください。
- 漂白剤・柔軟剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後の乾燥は陰干ししてください。

※濡れた状態で放置すると、他のものに色移りする場合がありますのでご注意ください。

エプロン付骨盤サポートベルト コシマッキー

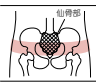カラー	■ ブラック	
サイズ	M 75~95cm(仙骨部周囲)	
	L 95~115cm(仙骨部周囲)	
材質	(エプロン部)ポリエステル (ベルト部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアセタール	
価格	11,000円(税抜)	
商品コード	M: 543-700	L: 543-701
JANコード	M: 4970210-862278	L: 4970210-862261
商品重量	約0.2kg	
梱包入数	10	

この商品は、アロン化成株式会社とダイヤ工業株式会社の共同開発商品です。

アロン化成

ダイヤ工業

安寿 あんじゅ



TOAGOSEI グループ

Aron
アロン化成

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00(12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…